




Usuario manual

A045-1

Mesa ginecológica de acero inoxidable

Código de registro: SKF-A

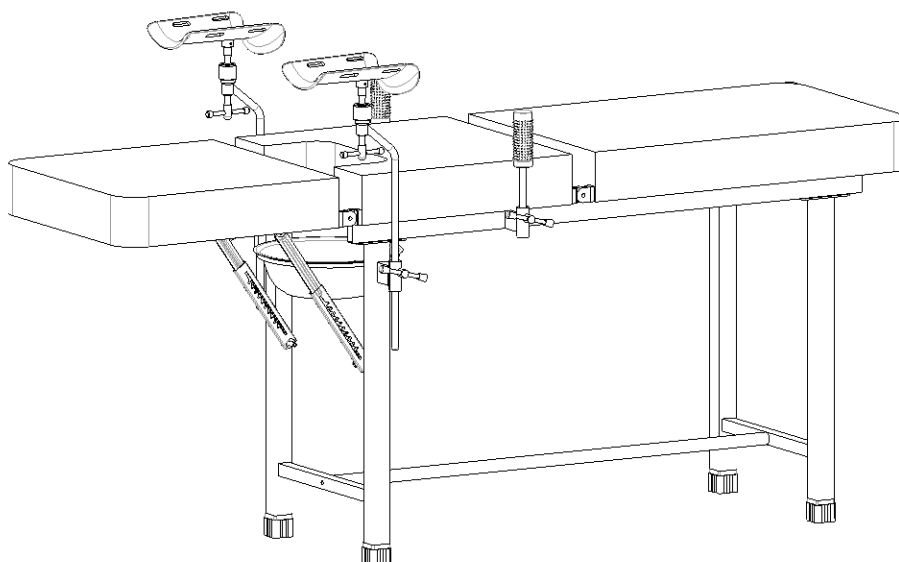

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Equipo Médico Co, Ltd.

CÓDIGO DE STOCK: 870098

Contenido

Introducción al manual	2
1. 1. Guía de instalación.....	3
1.1 Lista de accesorios estándar.....	3
1.2 Instalación del pie de cama	6
1.3 Instalación del tubo de conexión.....	7
1.4 Instalación del nivel mecánico	8
1.5 Instalación del pedal.....	9
1.6 Instalación de la barra de mano.....	10
2. Método de uso.....	11
2.1 Ajuste de la sección trasera.....	12
2.2 Ajuste de la sección de las piernas.....	13
3. Mesa ginecológica de acero inoxidable-mantenimiento	13
4. Embalaje, transporte, almacenamiento	14
5. Servicio postventa	14

Manual de introducción

Nota:

Por favor, lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalar y utilizar. Requerimos que todos los usuarios tengan el conocimiento del manual del usuario y todas las precauciones.





- ▶ Este manual es aplicable a la mesa ginecológica de acero inoxidable A045-1. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de comprobación de mantenimiento.
- ▶ Los gráficos de este manual son sólo para referencia del usuario. En el uso real, por favor refiérase al objeto real.
- ▶ Este manual de usuario incluye la descripción, instrucciones, mantenimiento y parámetros técnicos del producto.
- ▶ Para cualquier consulta, póngase en contacto con el centro de servicio postventa o con el distribuidor.
- ▶ Anyone using or operating this product should read and comply with it.
- ▶ A excepción de algunas situaciones inesperadas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

1. 1. Guía de instalación

1.1 Lista de accesorios estándar

Después de abrir la caja de embalaje, compruebe si las siguientes piezas están completas en la caja de embalaje:

Tabla a:

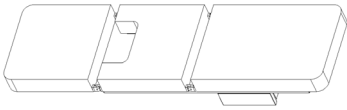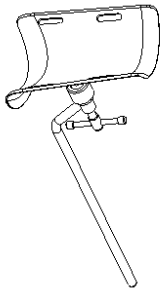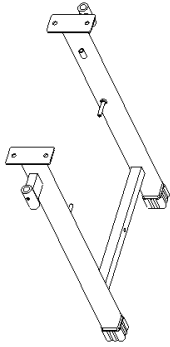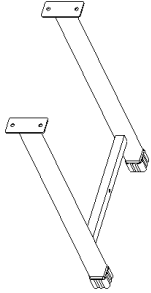NO.	Nombre	Imagen	Especificación	CANT	Unidad
1	Bancada		/	1	pc
2	Estribo		/	2	ud
2	Detrás del pie de cama		L427*A653mm	1	ud.
3	Pie de cama delantero		L427*A653mm	1	pc










4	Lavabo		ϕ 300*85mm	1	pc
5	Aro de lavabo		ϕ 285-L80mm	1	ud.
7	Tubo de conexión		Φ 25*993-M8mm	1	ud.
8	Tornillo	/	Consulte la tabla a.1	1	set

Tabla a.1



NO.	Nombre	Imagen	Especificación	CANT	Unidad
1	Tornillo hexagonal		M10*25mm	8	piezas
2	Almohadilla plana		$\Phi 10^* \Phi 21^* H1.8mm$	8	piezas
3	Arandela elástica		$\Phi 10^* \Phi 17^* H3mm$	8	piezas
4	Tuerca		M10mm	8	piezas
5	Tornillo hexagonal		M8*40mm	2	piezas
6	Almohadilla plana		$\Phi 8^* \Phi 16^* H1.2mm$	2	piezas
7	Arandela elástica		$\Phi 8^* \Phi 14^* H2.5mm$	2	piezas
8	Contratuerca		M8mm	2	piezas
9	Juego completo de cama ginecológica		Siete piezas un juego	2	piezas
10	Estructura de la mano		$\Phi 32mm$	2	piezas
11	Manguito de plástico para el mango		$\Phi 32mm$	2	piezas

1.2 Instalación del pie de cama



Coloque una almohadilla protectora y ponga el cuerpo del carro de instrumental boca abajo;

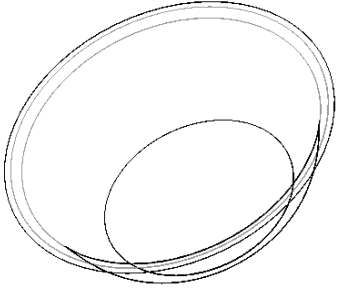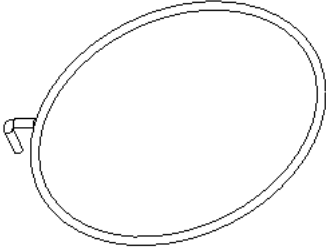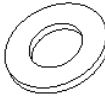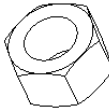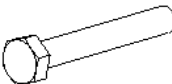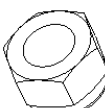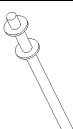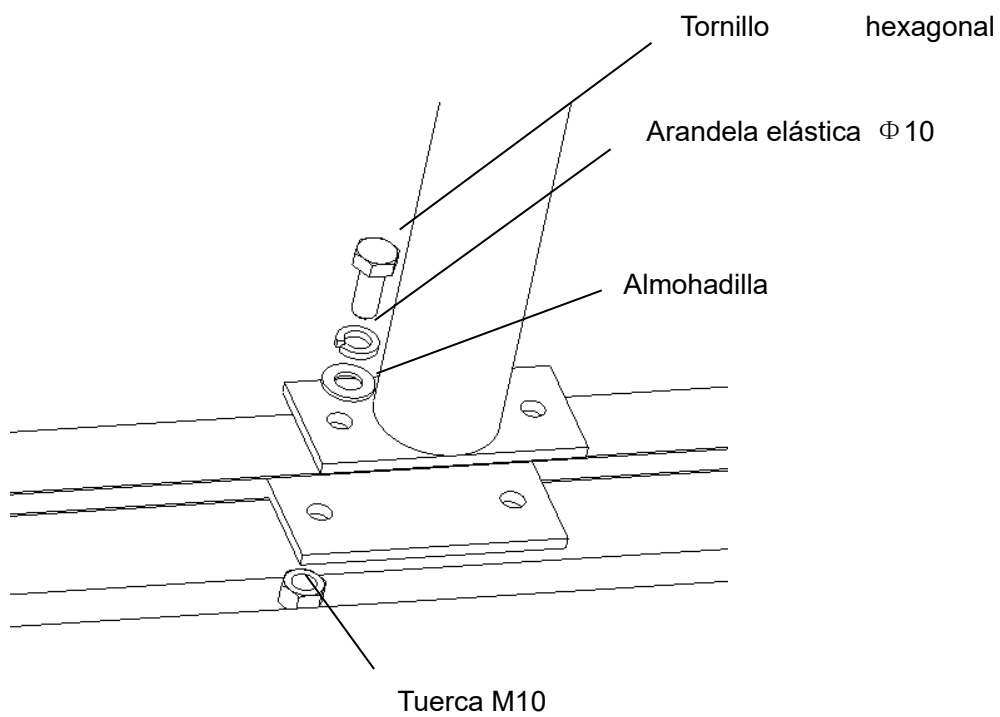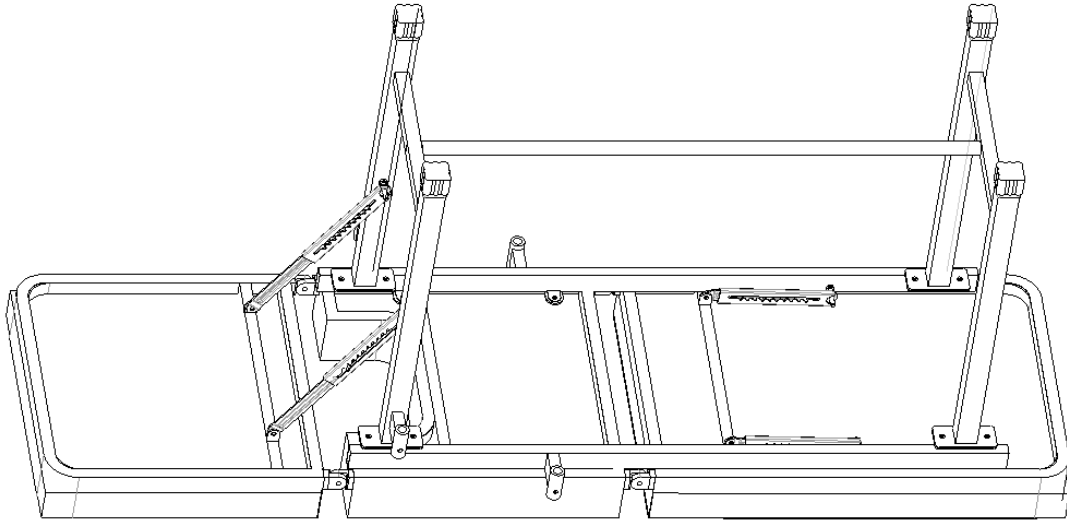

1.3 Instalación del tubo de conexión

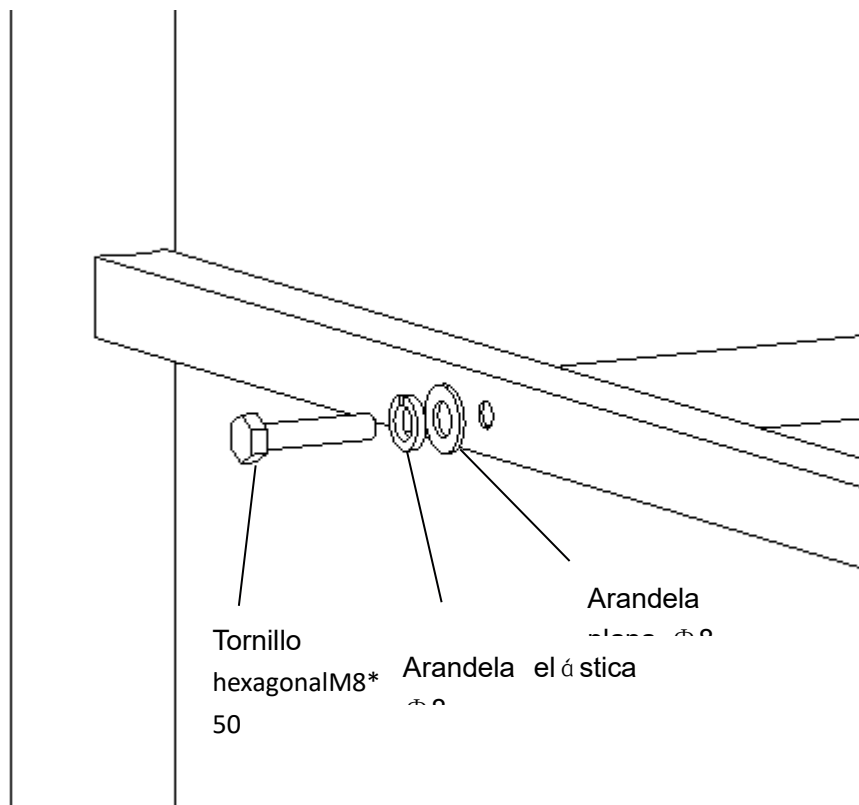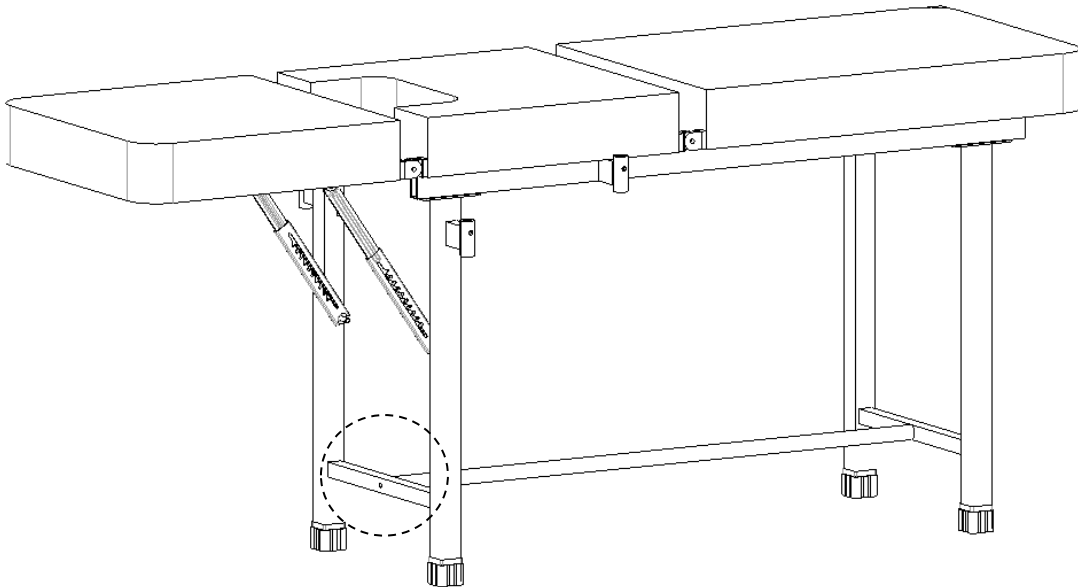



1.4 Instalación del nivel mecánico

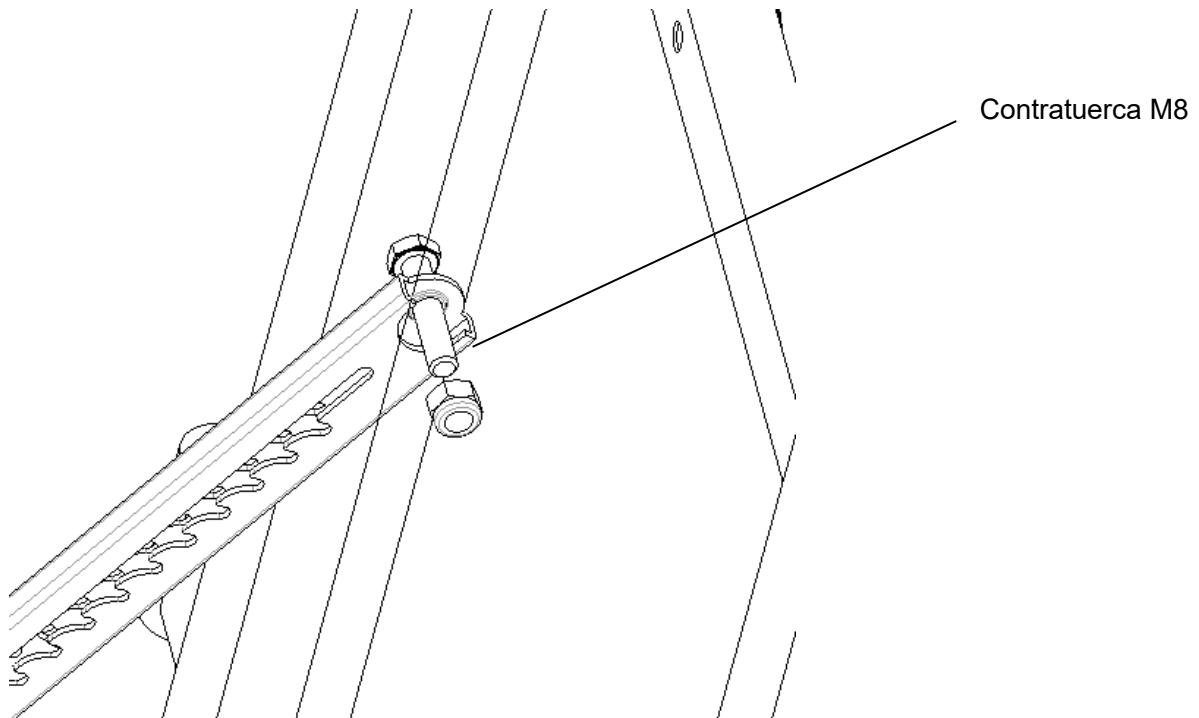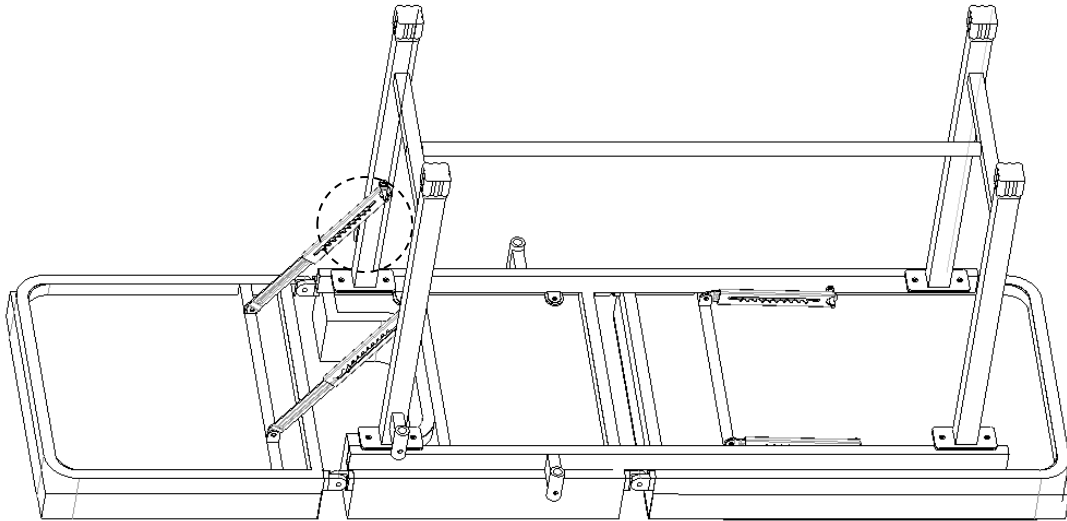


1.5 Instalación del pedal


Inserte el pedal en el casquillo del tornillo, gire la llave 1 para ajustar la altura del pedal y gire la llave 2 para ajustar el ángulo del pedal en 360° .

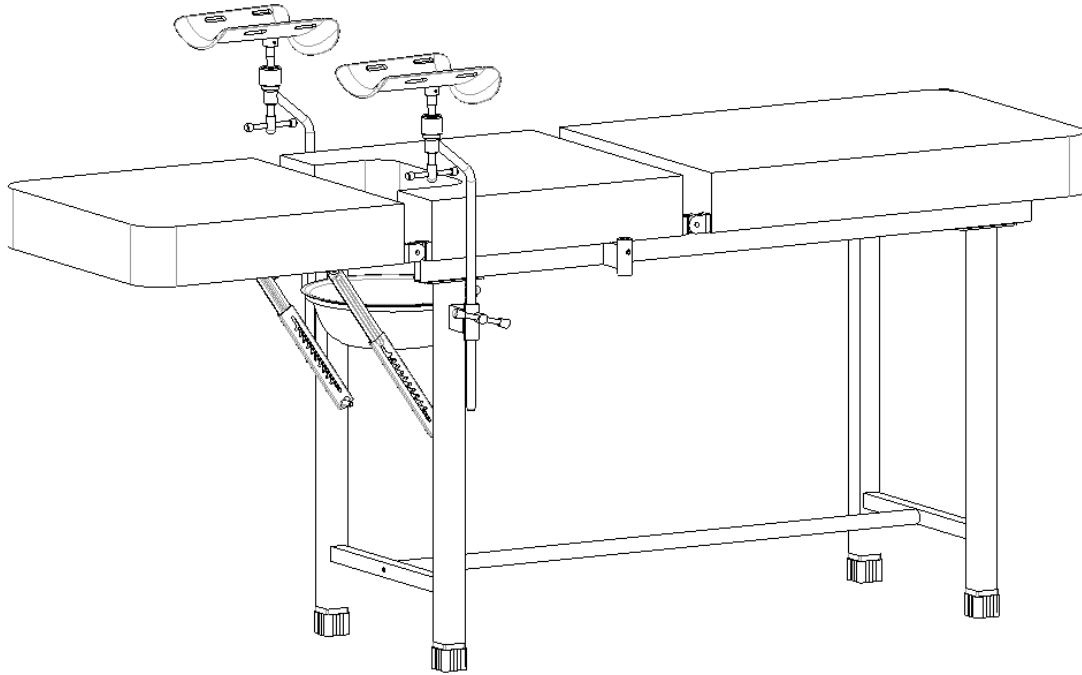

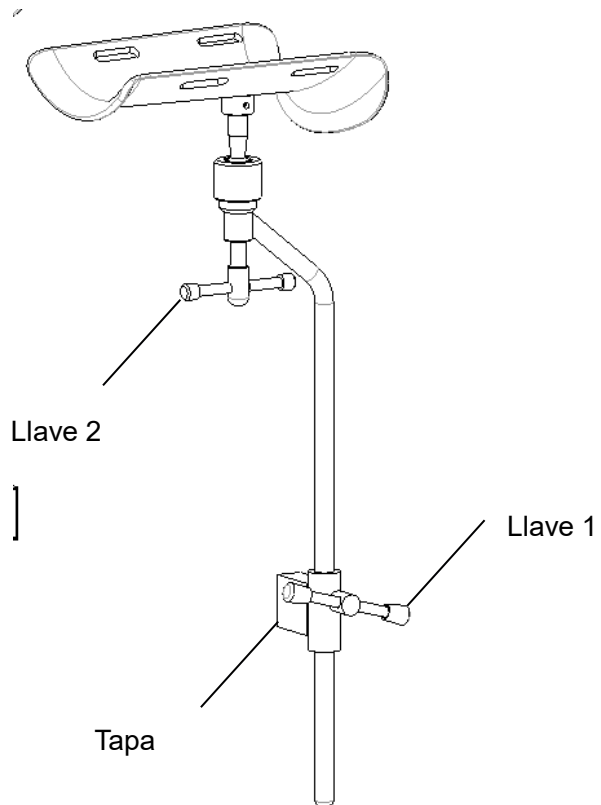


1.6 Instalación de la barra de mano

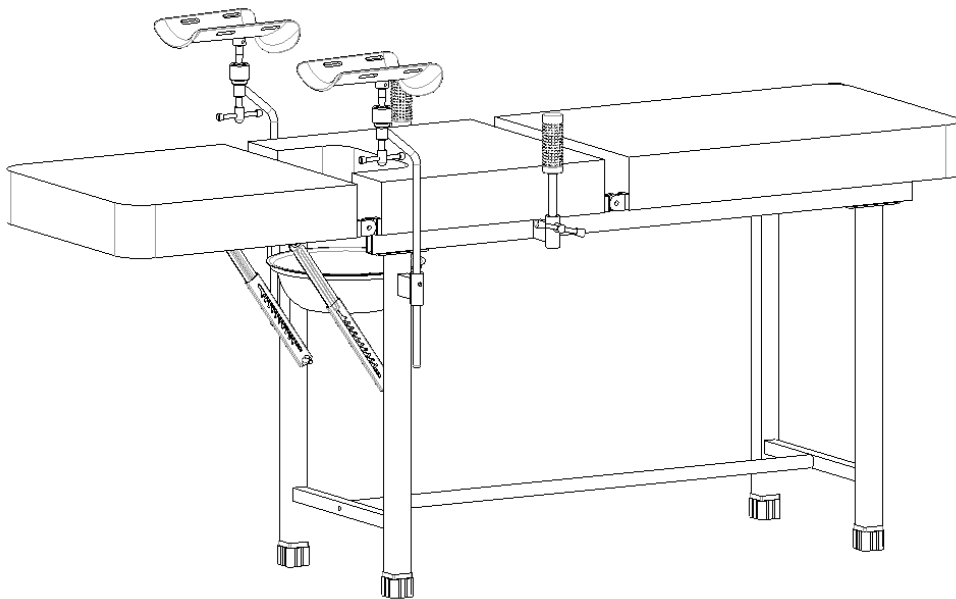

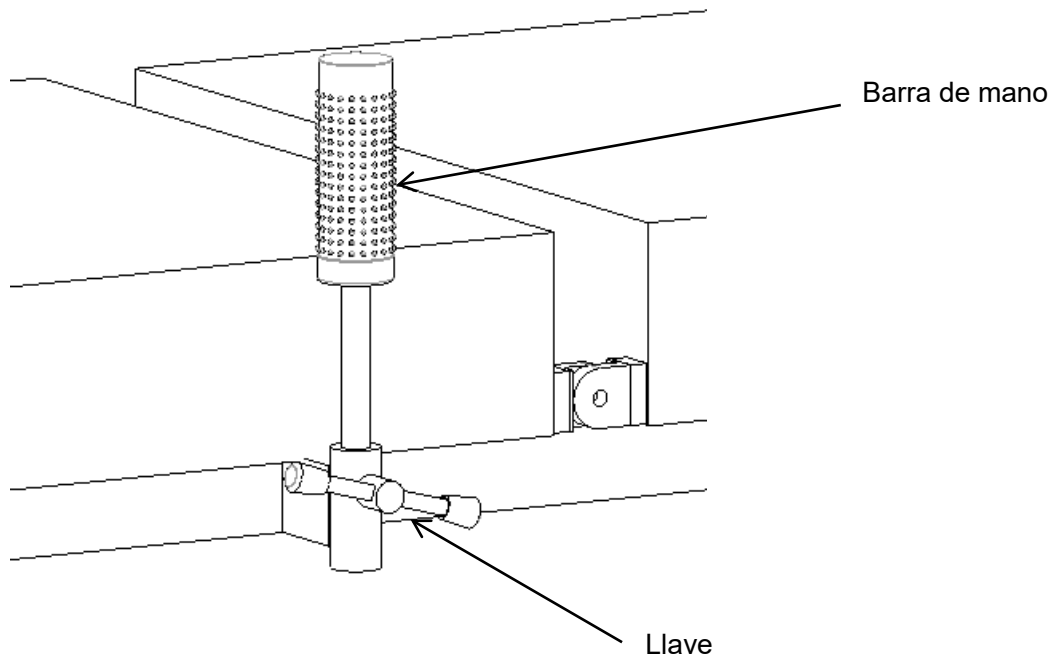

Girando la llave se puede ajustar la altura de la barra de mano


2.Método de uso

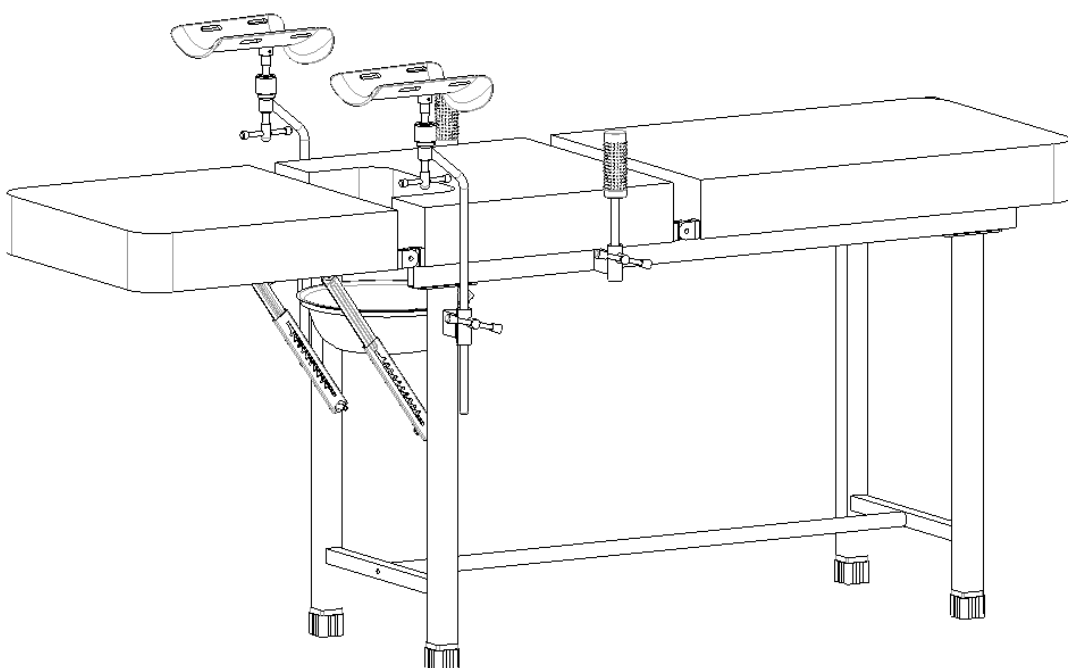

Dimensión	Longitud	mm	1820±10
	Anchura		590±10
	Altura		800±10
Peso	Carga segura	Kg	170


2.1 Ajuste de la sección posterior

Levante la placa posterior directamente hasta el ángulo deseado para completar la elevación de la placa posterior. Eleve la placa posterior hasta el ángulo máximo y, a continuación, bájela para completar el descenso de la placa posterior.

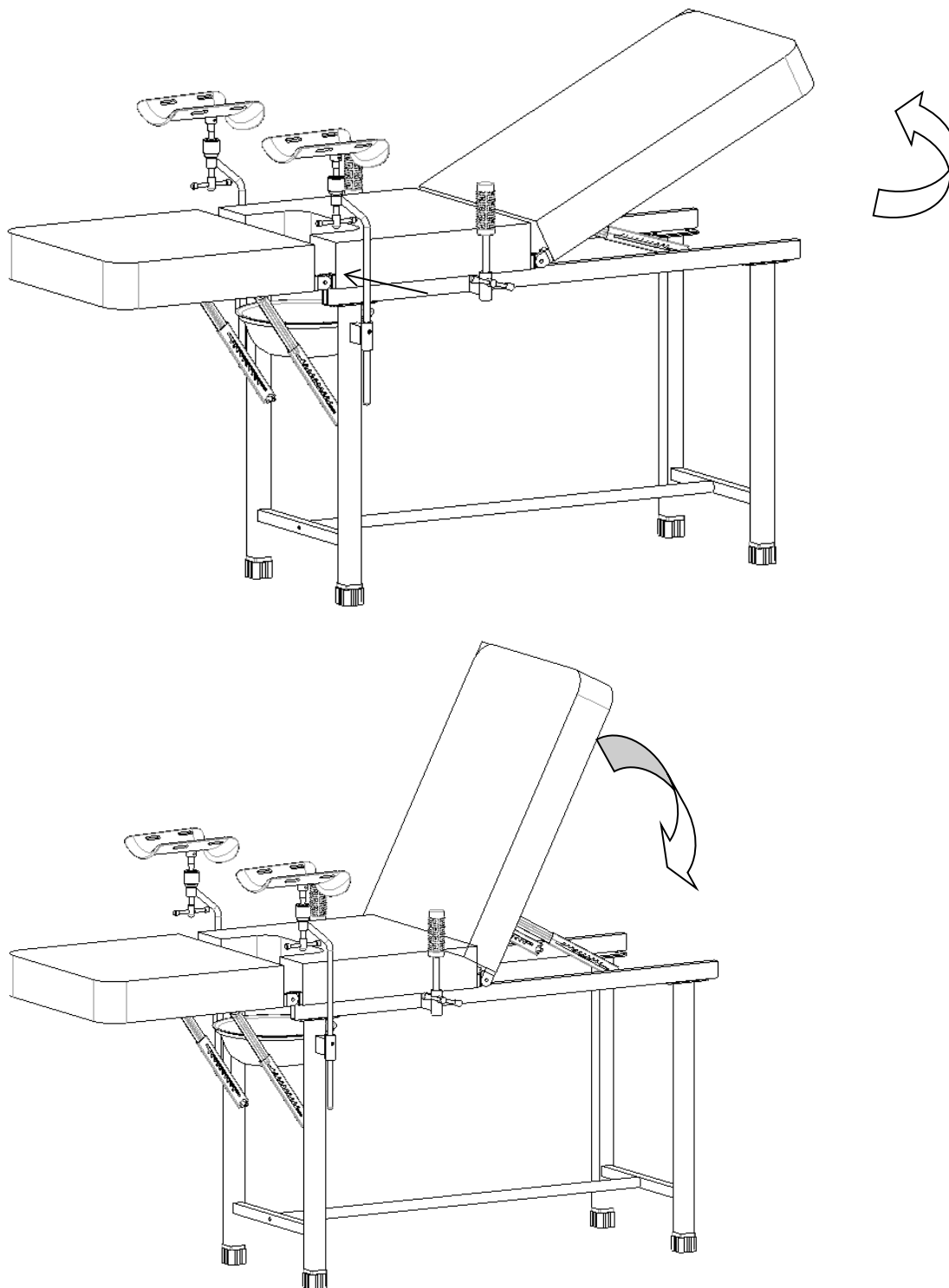

2.2 Ajuste de la sección de las patas

Levante la placa de piernas directamente hasta el ángulo máximo y, a continuación, baje lentamente la placa posterior para completar el descenso de las piernas.

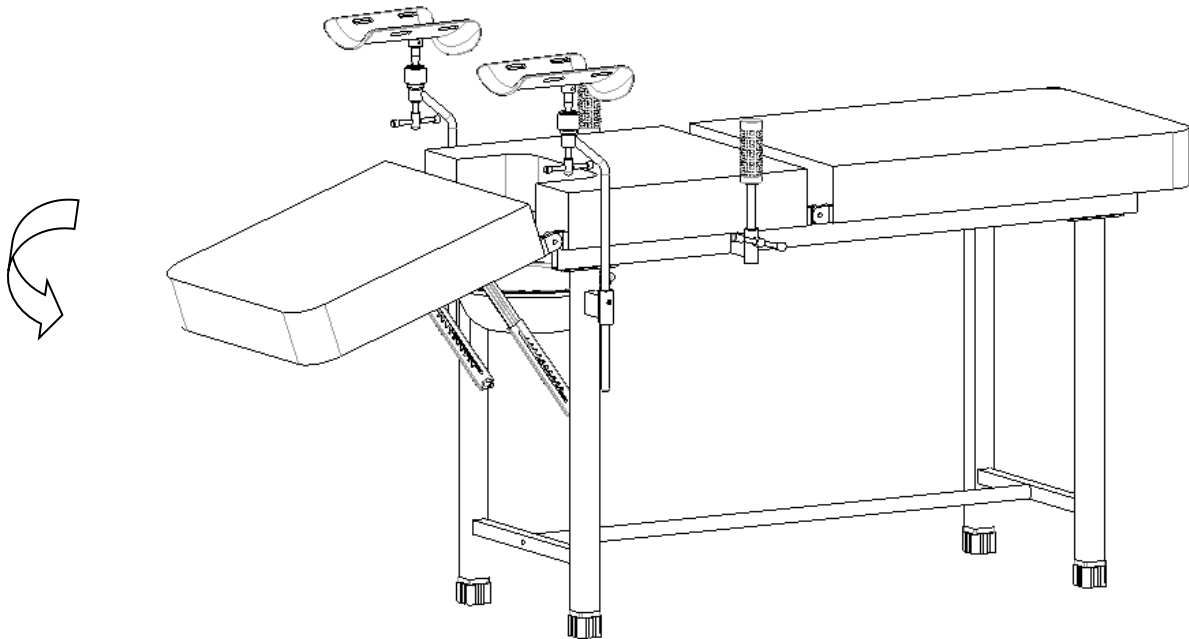

3. Mesa ginecológica de acero inoxidable-mantenimiento

1. Para utilizar la camilla ginecológica de acero inoxidable de forma segura, deben realizarse inspecciones de seguridad con regularidad. Se recomienda revisarla cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no estén sueltas y todas las operaciones son normales.
2. Cuando la mesa ginecológica de acero inoxidable envejece y alcanza un cierto tiempo de servicio, que la parte metálica del carro de tratamiento y las piezas de plástico del marco de la cuenca de acero inoxidable pueden ser reciclados.
3. Evite rayar el panel con aparatos de ángulo agudo o cuchillos durante el uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
4. Si el panel se mancha accidentalmente, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar el carro de tratamiento, ya que provocarían la oxidación de la superficie de acero inoxidable.

4. Embalaje, transporte, almacenamiento

1. El embalaje de la camilla ginecológica de acero inoxidable se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Durante el transporte de la camilla ginecológica de acero inoxidable, evite las prisas, las vibraciones violentas y protéjala de la luz solar y la lluvia.
3. La mesa ginecológica de acero inoxidable debe almacenarse:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humedad relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Presión atmosférica: $500\text{hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

5. Servicio postventa

1. Por favor, guarde bien los archivos que vienen con la máquina y las facturas de este producto, y necesita presentar estos archivos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si hay algún problema en el proceso de uso, por favor póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo, para que nuestra empresa pueda proporcionarle un soporte técnico preciso y rápido y servicios de mantenimiento de manera oportuna.
3. 3. No desmonte usted mismo el dispositivo interno de este producto para evitar daños innecesarios. Si observa que el uso se ve afectado debido a problemas de calidad, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa o con nuestro distribuidor autorizado.
4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio de por vida de m fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO:A045-1 | REF.: 319-A045-1

MESA GINECOLÓGICA



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
Valencia(Spain)

LOT:HW25xxx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com