




Manual de usuario

SK-B1

Mesa de exploración de acero inoxidable

Código de registro: SK-B1

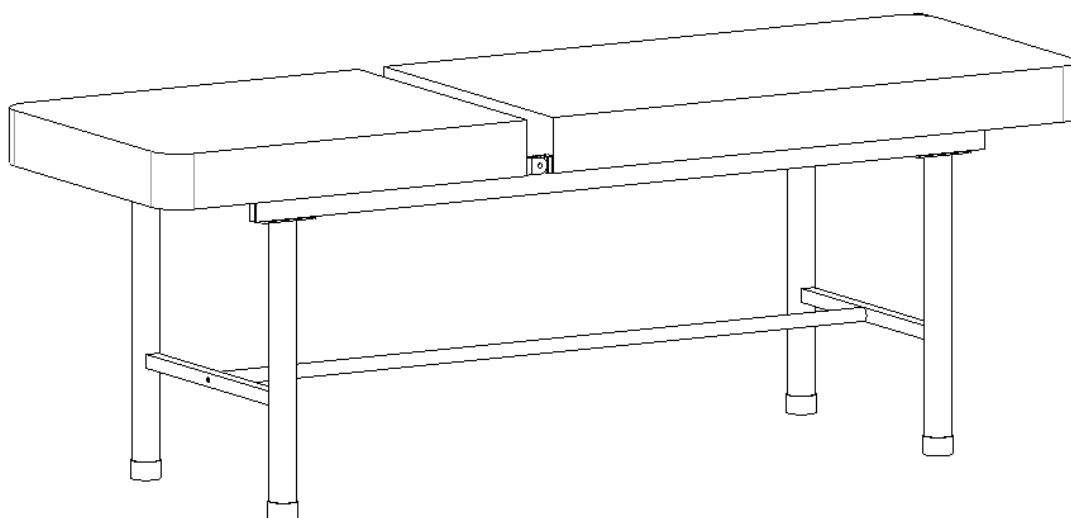

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE STOCK: 870098

Contenido

Introducción manual	2
1. Guía de instalación.....	3
1.1 Lista de accesorios estándar	3
1.2 Instalación de la estructura del pie.....	5
1.3 Instalación de la tubería de conexión	6
2. Método	7
2.1 Función de elevación del respaldo.....	7
3. Mantenimiento de la mesa de exploración de acero inoxidable-	8
4. Embalaje, transporte, almacenamiento	9
5. Servicio posventa	9

Introducción manual

Nota:

Lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalar y utilizar el producto. Requerimos que todos los usuarios conozcan el manual del usuario y todas las precauciones.

- ▶ Este manual es aplicable a la mesa de exploración de acero inoxidable SK-B1. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de verificación de mantenimiento.
- ▶ Los gráficos de este manual son solo para referencia de los usuarios. En el uso real, consulte el objeto real.
- ▶ Este manual de usuario incluye la descripción, las instrucciones, el mantenimiento y los parámetros técnicos del producto.
- ▶ Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el centro de servicio posventa o con el distribuidor.
- ▶ Cualquier persona que utilice u opere este producto debe leerlo y cumplirlo.
- ▶ Salvo en situaciones imprevistas, los usuarios deben familiarizarse con el uso y las precauciones.

1. Guía de instalación

1.1 Lista de accesorios estándar

Después de abrir la caja de embalaje, compruebe que todas las piezas siguientes se encuentran en su interior.

Tabla a:










N.º	Nombre	Imagen	Especificaciones	Cantidad	Unidad
1	Placa de sofá		/	1	pc
2	Estructura del pie		539*543 mm	2	pcs
3	Tubo de conexión		Φ25*1,2*1253-M8 mm	1	pcs
4	Tornillo	/	Consulte la tabla a.1	1	juego

Tabla a.1:



N.º	Nombre	Imagen	Especificación	Cantidad	Unidad
1	Tornillo hexagonal exterior		M10*25 mm	8	pcs
2	Arandela plana		$\Phi 10^* \Phi 21^* H1,8$ mm	8	pcs
3	Arandela elástica		$\Phi 10^* \Phi 17^* H3$ mm	8	unidades
4	Tuerca de seguridad		M10 mm	8	pcs
5	Tornillo hexagonal exterior		M8*40 mm	2	pcs
6	Arandela plana		$\Phi 8^* \Phi 16^* H1,2$ mm	2	pcs
7	Arandela elástica		$\Phi 8^* \Phi 14^* H2,5$ mm	2	pcs

1,2 Instalación de la estructura del pie


Coloque una almohadilla protectora y ponga la estructura principal boca abajo;

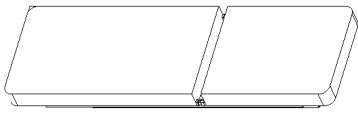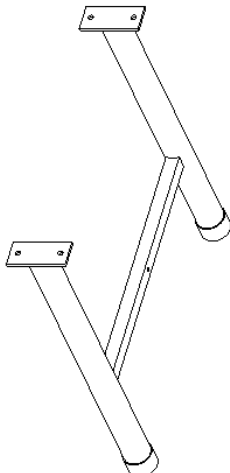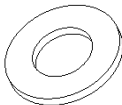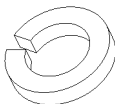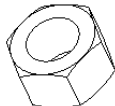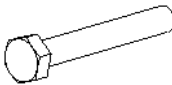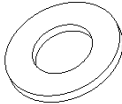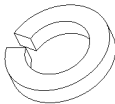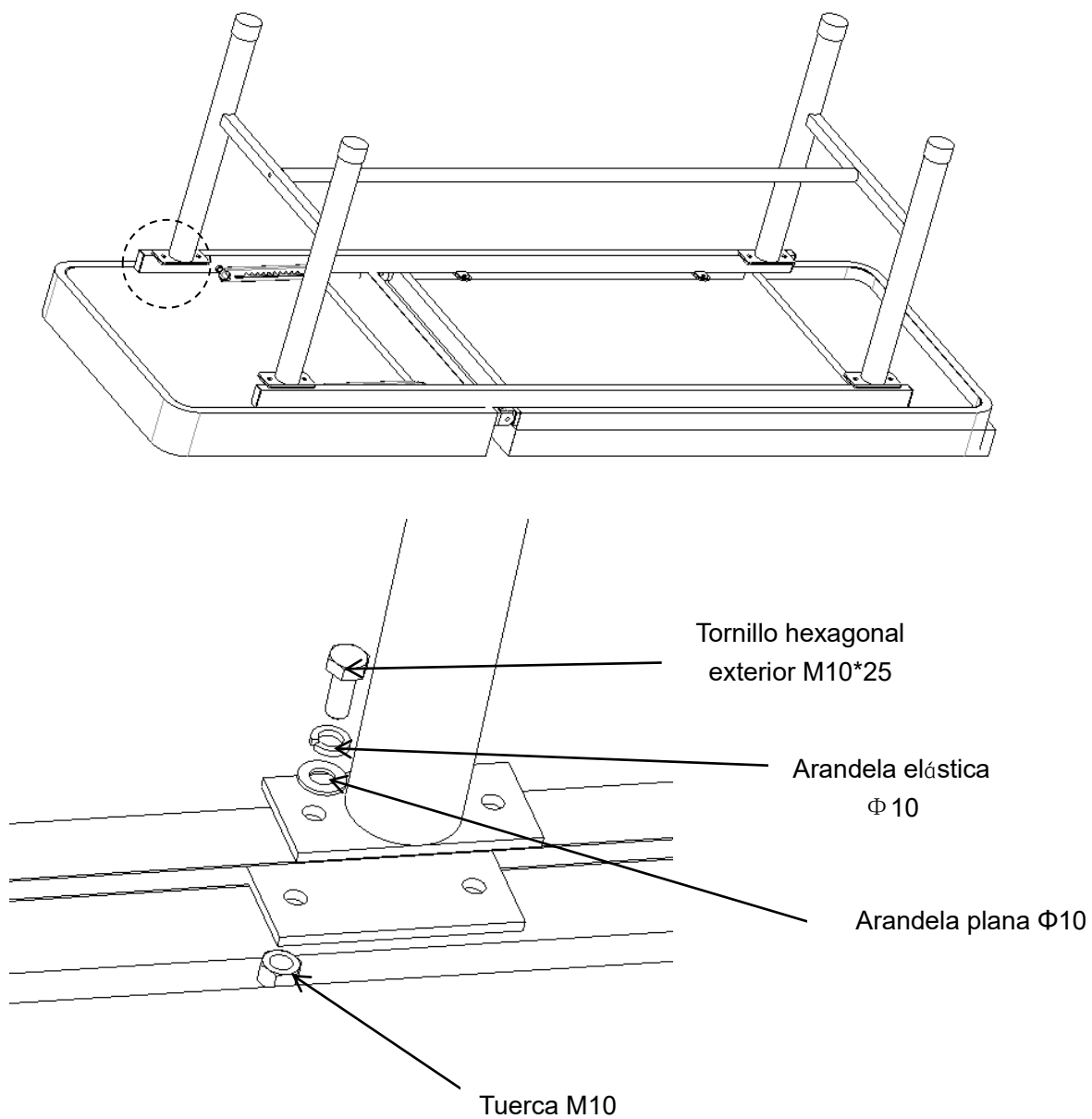

1.3 Instalación del tubo de conexión

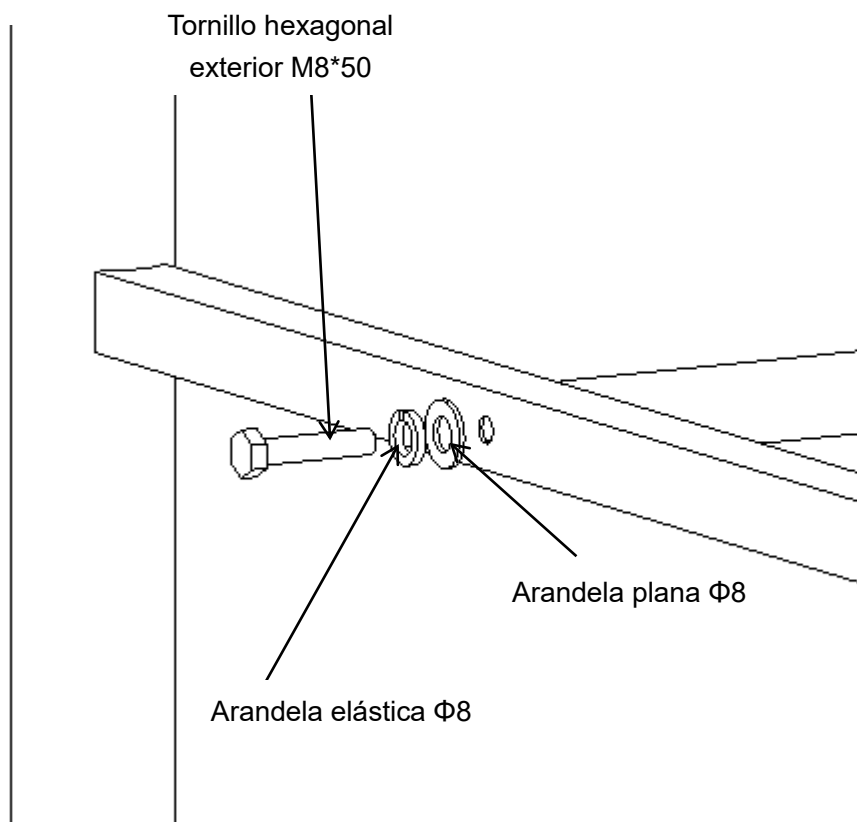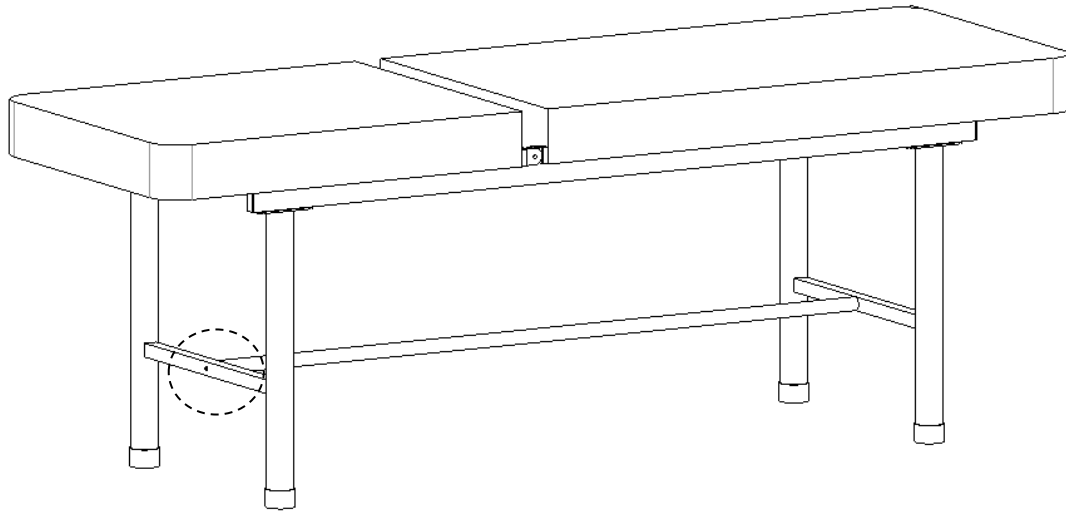


2. Método de uso

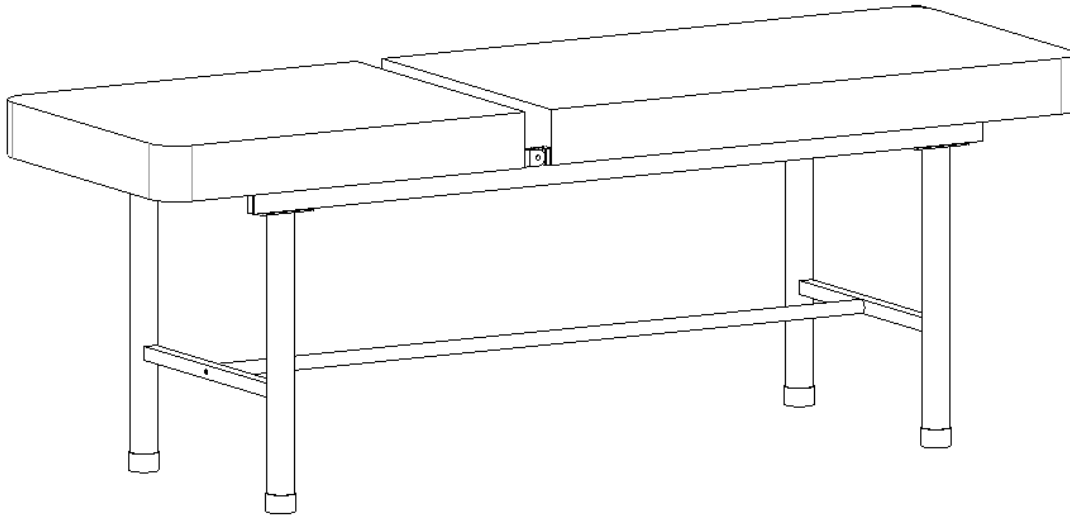


Dimensiones	Longitud	mm	1900±10
	Ancho		600±10
	Altura		680 ± 10
Peso	Carga de trabajo segura	Kg	170

2.1 Función de elevación del respaldo

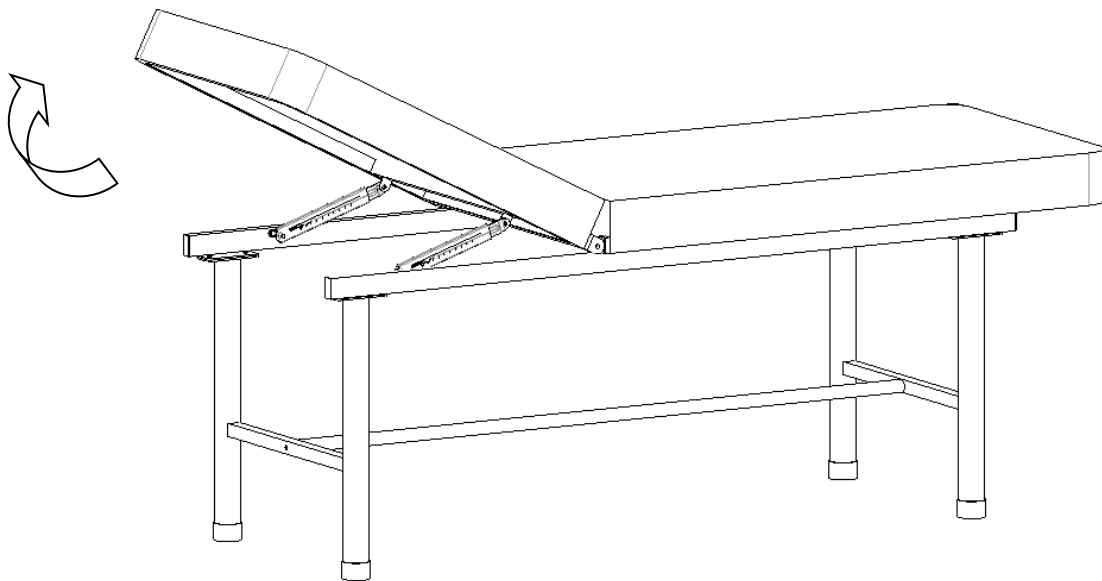

Levante la placa trasera para activar la función de elevación del respaldo. Levante la placa hasta

la posición más alta y, a continuación, bájela.

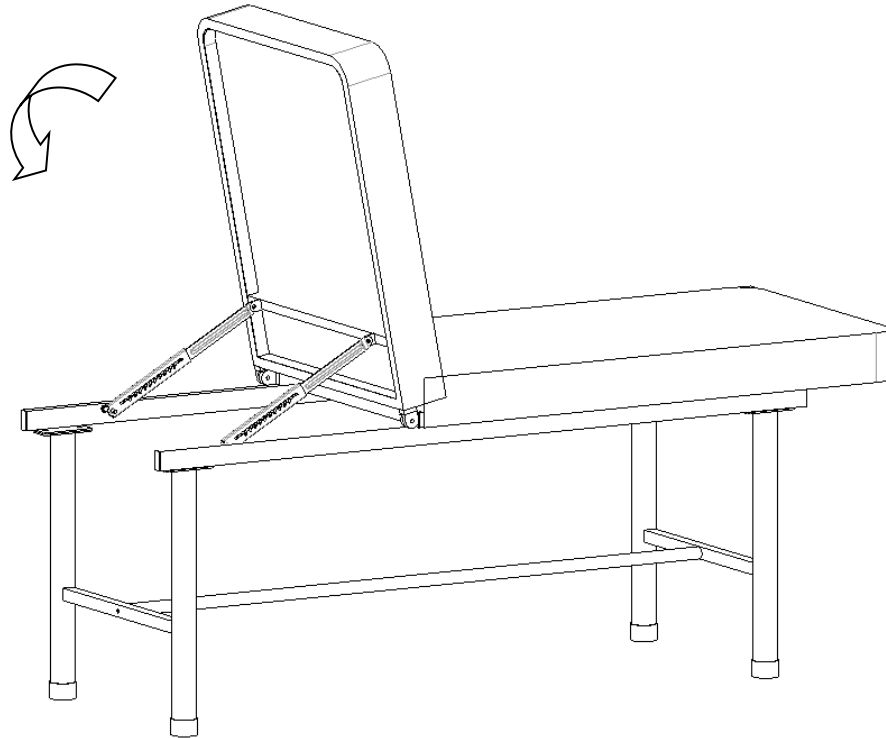

3. Mantenimiento de la mesa de exploración de acero inoxidable

1. Para utilizar la mesa de exploración de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas en la mesa de exploración. Se recomienda revisarla cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no estén sueltas y que todas las operaciones sean normales.
2. Cuando el armazón de la mesa de exploración envejece y alcanza un determinado tiempo de servicio, las piezas metálicas y plásticas de la mesa de exploración pueden reciclarse.
3. Evite rayar el panel con aparatos de ángulos afilados o cuchillos durante su uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
4. Si el panel se mancha accidentalmente, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar la mesa de exploración, ya que provocarán la oxidación de la superficie de acero inoxidable.

4. Embalaje, transporte y almacenamiento

1. El embalaje de la mesa de exploración se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite las prisas, las vibraciones violentas y proteja la mesa de exploración de la luz solar y la lluvia durante el transporte.
3. La mesa de exploración debe almacenarse:
 - a) Temperatura ambiente: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humedad relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Presión atmosférica: $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

5. Servicio posventa

1. Conserve adecuadamente los archivos que acompañan a la máquina y las facturas de este producto, ya que deberá presentarlos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si surge algún problema durante el uso, póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo para que podamos proporcionarle un servicio de asistencia técnica y mantenimiento preciso y rápido de manera oportuna.
3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o se daña debido a una instalación y un uso correctos según las especificaciones, el producto disfrutará de un año de garantía gratuita y un servicio de mantenimiento de por vida con el «certificado» o la factura.
4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SK-B1 | REF.: 319-SK-B1

MESA DE EXAMEN / EXAMINATION TABLE / TABLE D'EXAMEN / TAVOLO DA VISITA / MESA DE EXAME / Untersuchungstisch



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT: HW26xxx



2026-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ACCIONES: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com