




Manuel d'utilisation

SK-B1 Table d'examen en acier inoxydable

Code d'enregistrement : SK-B1

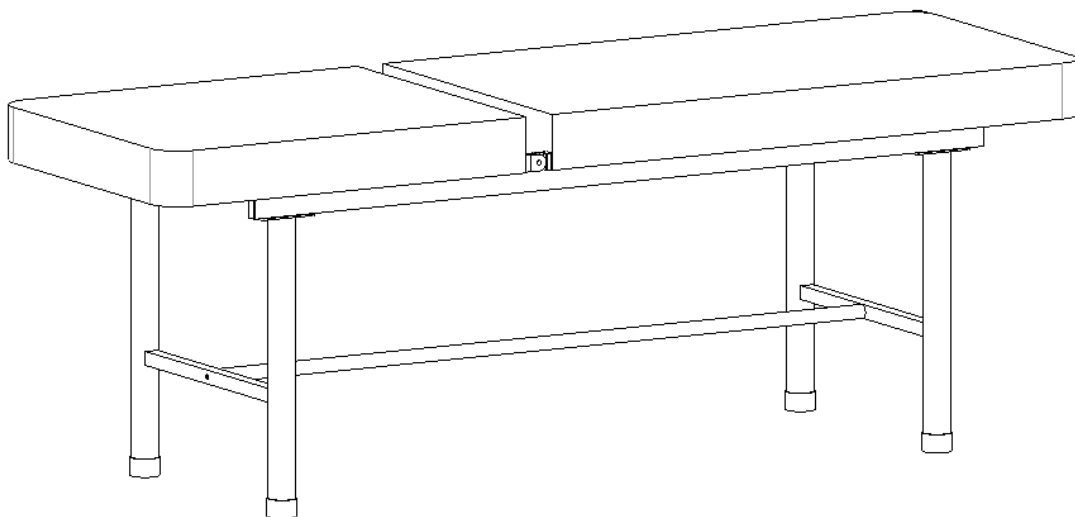

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE DE STOCK : 870098

Contenu

Introduction manuelle	2
1. Guide d'installation	3
1.1 Liste des accessoires standard.....	3
1.2 Installation de la structure du pied	5
1.3 Installation du tuyau de raccordement	6
2. Mode	7
2.1 Fonction de levage du dossier.....	7
3. Entretien de la table d'examen en acier inoxydable-	8
4. Emballage, transport, stockage	9
5. Service après-vente	9

Présentation du manuel

Remarque :

Veillez lire attentivement ce manuel et suivre strictement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de prendre connaissance du manuel d'utilisation et de toutes les mises en garde.

- ▶ Ce manuel s'applique à la table d'examen en acier inoxydable SK-B1. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle d'entretien.
- ▶ Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Lors de l'utilisation, veuillez vous référer à l'objet réel.
- ▶ Ce manuel d'utilisation comprend la description, les instructions, la maintenance et les paramètres techniques du produit.
- ▶ Pour toute question, veuillez contacter le centre de service après-vente ou le distributeur.
- ▶ Toute personne utilisant ou exploitant ce produit doit le lire et s'y conformer.
- ▶ Sauf en cas de situations imprévues, les utilisateurs doivent se familiariser avec l'utilisation et les précautions d'emploi.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard

Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes sont présentes dans le carton.

Tableau a :




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






N°	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Plaque de canapé		/	1	pièce
2	Structure du pied		539*543 mm	2	pièces
3	Tuyau de raccordement		Φ25*1,2*1253-M8 mm	1	pc
4	Vis	/	Se reporter au tableau a.1	1	jeu

Tableau a.1 :



N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Vis hexagonale extérieure		M10*25 mm	8	pièces
2	Rondelle plate		$\Phi 10^* \Phi 21^* H1,8$ mm	8	pièces
3	Rondelle élastique		$\Phi 10^* \Phi 17^* H3$ mm	8	pièces
4	Contre-écrou		M10 mm	8	pièces
5	Vis à tête hexagonale extérieure		M8*40 mm	2	pièces
6	Rondelle plate		$\Phi 8^* \Phi 16^* H1,2$ mm	2	pièces
7	Rondelle élastique		$\Phi 8^* \Phi 14^* H2,5$ mm	2	pièces

1,2 Installation de la structure du pied


Posez un tapis de protection et placez la structure principale à l'envers ;

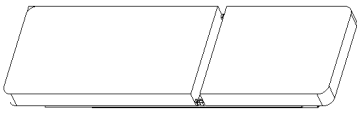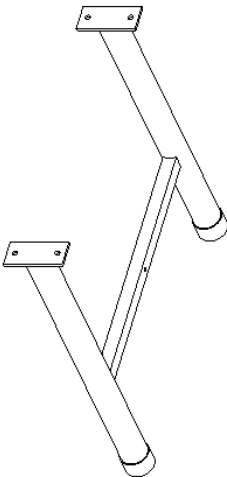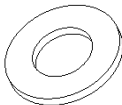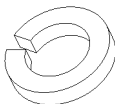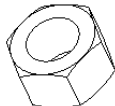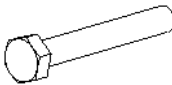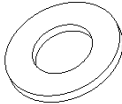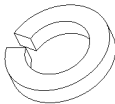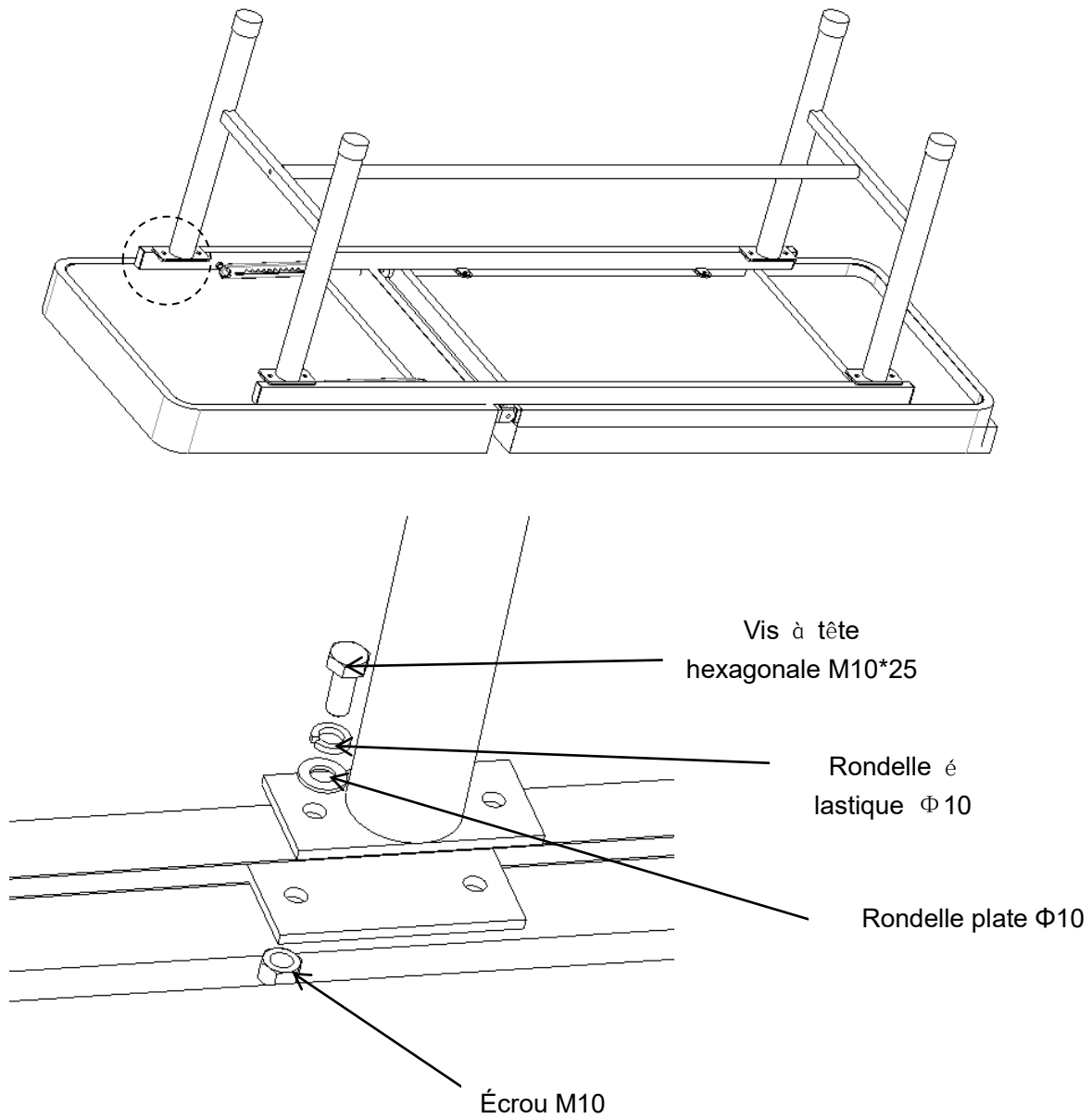

1.3 Installation du tuyau de raccordement

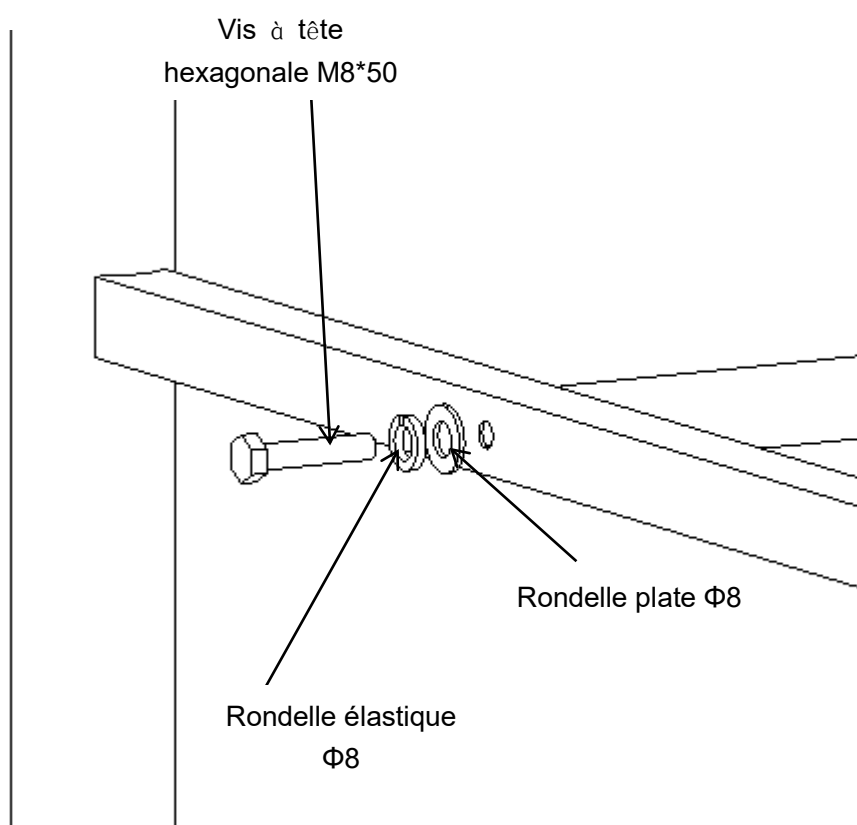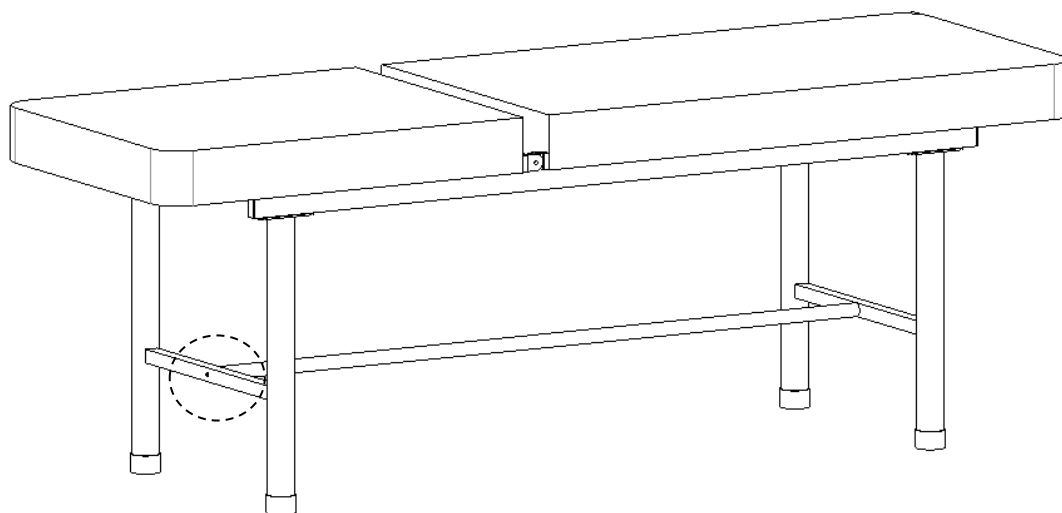


2. Mode d'emploi

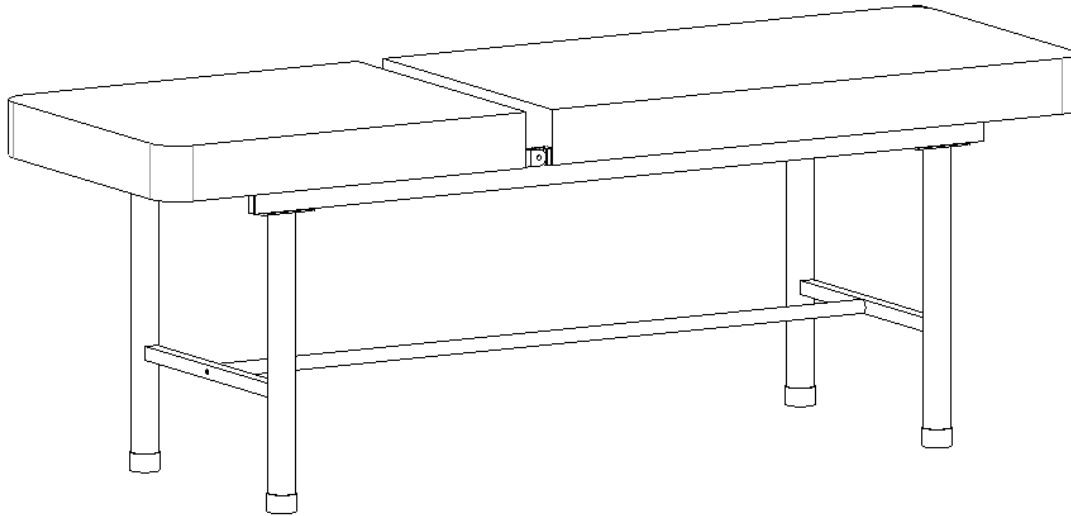


Dimensions	Longueur	mm	1900±10
	Largeur		600 ± 10
	Hauteur		680 ± 10
Poids	Charge de travail sécuritaire	kg	170

2.1 Fonction de levage du dossier

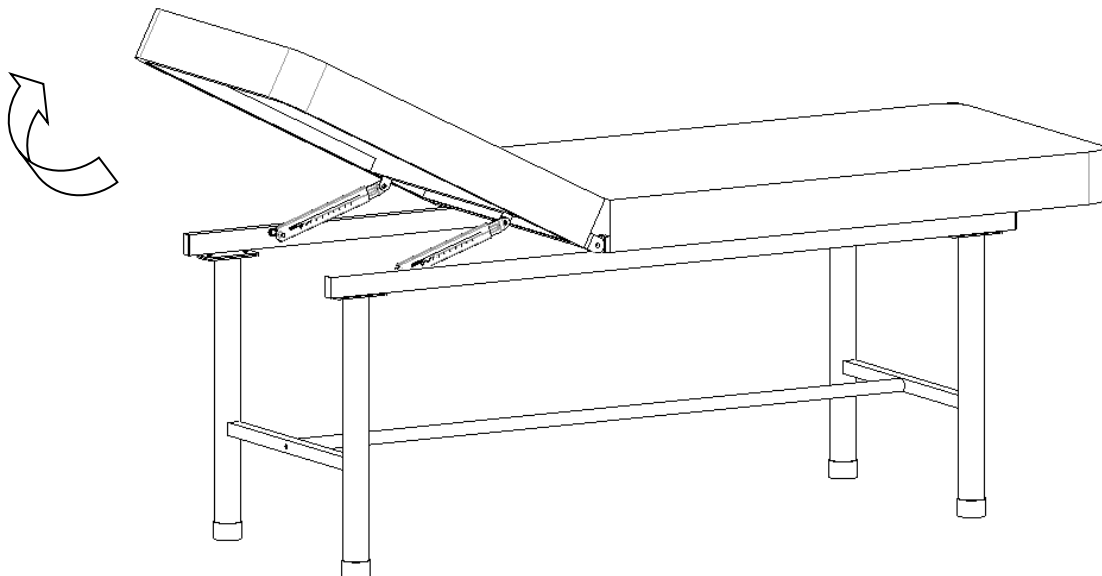

Soulevez la plaque arrière pour activer la fonction de levage du dossier, puis soulevez la plaque

jusqu'à sa position la plus haute avant de la rabattre.

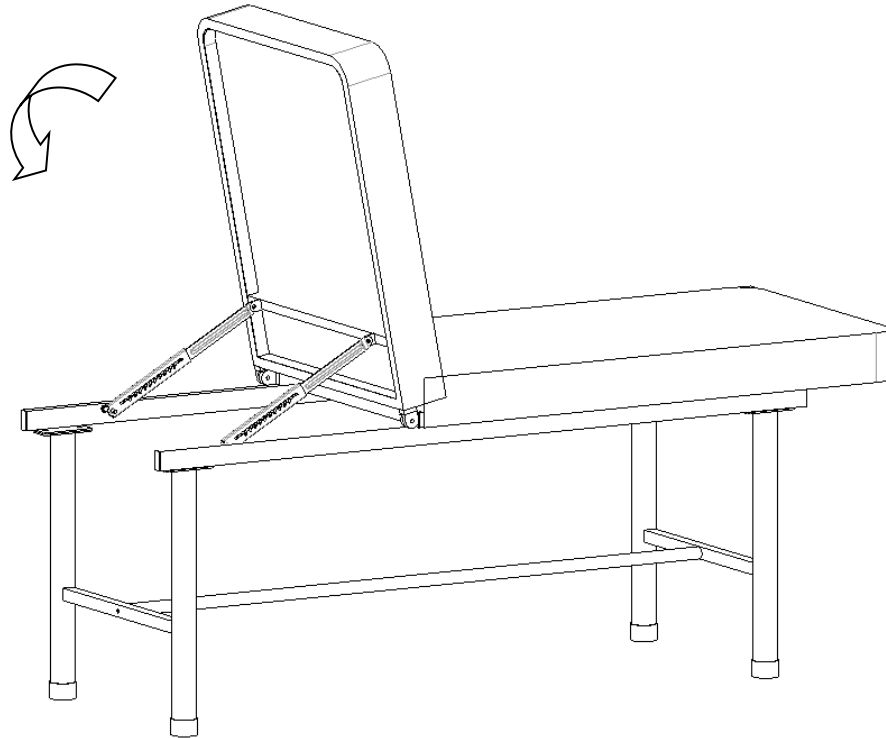

3. Table d'examen en acier inoxydable - entretien

1. Afin d'utiliser la table d'examen en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer régulièrement des contrôles de sécurité sur la table d'examen. Il est recommandé de la vérifier tous les six mois afin de s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations sont normales.
2. Lorsque le cadre de la table d'examen vieillit et atteint une certaine durée de service, les pièces métalliques et plastiques de la table d'examen peuvent être recyclées.
3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angles vifs ou des couteaux pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour le garder propre et sec.
4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer la table d'examen, car cela provoquerait la rouille de la surface en acier inoxydable.

4. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage de la table d'examen est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez la table d'examen de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. La table d'examen doit être stockée :
 - a) Température ambiante : -40 °C à +70 °C.
 - b) Humidité relative : $\leq 95 \%$.
 - c) Pression atmosphérique : 500 hPa ~ 1060 hPa.

5. Service après-vente

1. Veuillez conserver soigneusement les documents fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez présenter ces documents lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les meilleurs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et des services de maintenance précis et rapides en temps opportun.
3. À compter de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé en raison d'une installation et d'une utilisation correctes conformément aux spécifications, il bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service de maintenance à vie avec le « certificat » ou la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SK-B1 | REF.: 319-SK-B1

MESA DE EXAMEN / EXAMINATION TABLE / TABLE D'EXAMEN / TAVOLO DA VISITA / MESA DE EXAME / Untersuchungstisch



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT: HW26xxx



2026-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSIER : 870098



N° 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com