


SAIKANG MEDICAL / MANUEL
D'UTILISATION



Manuel d'utilisation

A2k5s Lit d'hôpital manuel

Code d'enregistrement : SK-CD1

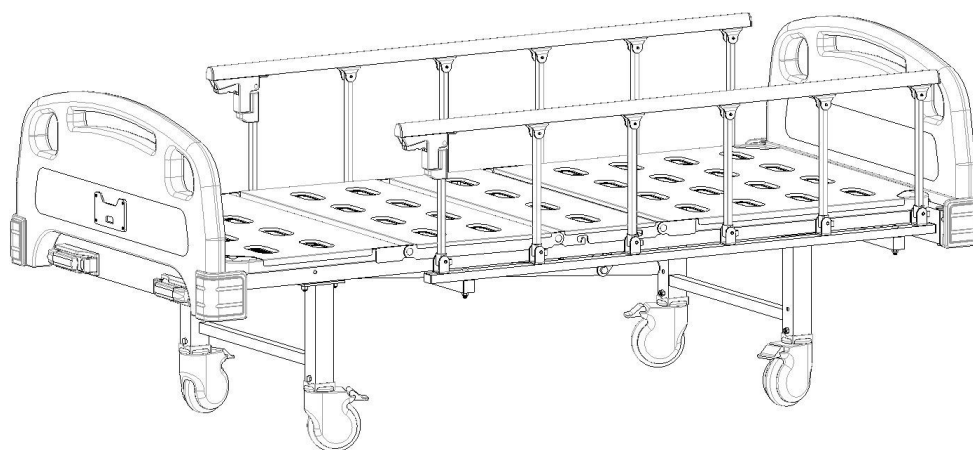

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSIER : 870098

Contenu

Introduction manuelle	2
1. Guide d'installation	3
1.1 Liste des accessoires standard	3
1.2 Installation des roulettes	5
1.3 Installation des barrières latérales	6
1.4 Installation du support de matelas en PP	7
1.5 Méthode d'assemblage de la tête et du pied de lit	8
1.6 Installation du pied à perfusion	9
2. Mode d'emploi	10
2.1 Mode d'emploi des roulettes	11
2.2 Méthode d'utilisation des garde-corps	12
2.3 Utilisation des crochets de drainage	13
2.4 Méthode d'utilisation du pied à perfusion	14
2.5 Utilisation des manivelles	15
3. Remplacement des pièces de rechange et maintenance	16
4. Élimination des défauts	17
5. Entretien du lit	17
6. Nettoyage du lit	18
7. Nettoyage et entretien des matelas	18
8. Détection et entretien des roulettes	19
9. Entretien des garde-corps	20
10. Liste des pièces de rechange	20
11. Emballage, transport, stockage	21
12. Service après-vente	22

Introduction manuelle

Les lits d'hôpital sont des équipements essentiels au bien-être, au traitement et au rétablissement des patients alités. Ils permettent aux patients de rester dans des positions plus confortables, ainsi que dans des positions parfois recommandées par les médecins, ce qui serait très difficile dans un lit normal, où il faudrait sans cesse installer ou retirer des supports. Les lits d'hôpital peuvent être manuels ou automatiques. Les fonctions du lit d'hôpital automatique sont contrôlées à l'aide de boutons situés sur les panneaux latéraux du lit ou à l'aide d'une télécommande. Le lit d'hôpital manuel dispose de deux mouvements déclenchés par des manivelles, à savoir le relevage de la tête de lit, qui facilite le moment de l'alimentation, évite les reflux et facilite la respiration, et le relevage de la partie des pieds, qui améliore la circulation sanguine des membres inférieurs, compte tenu de la longue période que le patient passera allongé. D'autre part, la sécurité du patient est très importante pendant cette période de convalescence. C'est pourquoi tous nos lits sont équipés de barrières latérales de protection, qui empêchent le patient de se lever la nuit et de courir le risque de tomber.

Remarque :

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre strictement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de prendre connaissance du manuel d'utilisation et de toutes les précautions.

- ▶ Ce manuel s'applique au lit d'hôpital manuel A2k5s. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle d'entretien.
- ▶ Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Lors de l'utilisation, veuillez vous référer à l'objet réel.
- ▶ Ce manuel d'utilisation comprend la description, les instructions, les consignes d'entretien et les paramètres techniques du produit.
- ▶ Pour toute question, veuillez contacter le centre de service après-vente ou le distributeur.
- ▶ Toute personne utilisant ou exploitant ce produit doit le lire et s'y conformer.
- ▶ Sauf en cas de situations imprévues, les utilisateurs doivent se familiariser avec son utilisation et les précautions à prendre.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard

Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier que les pièces suivantes sont bien présentes dans le carton :

Tableau a :

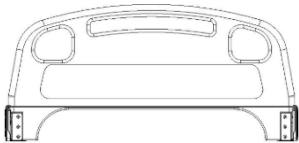
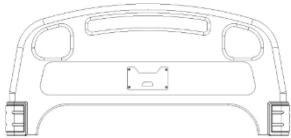
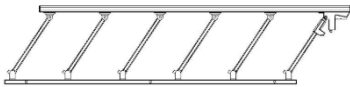
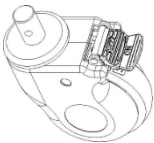
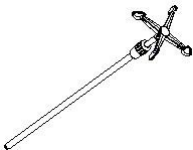
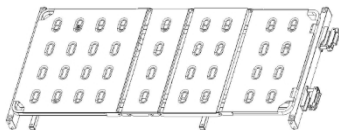
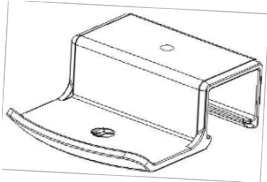
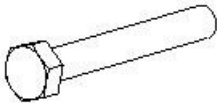
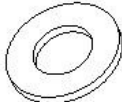
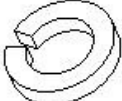
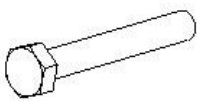
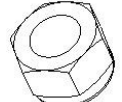
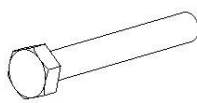
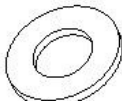
N°	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Tête de lit		Distance entre les crochets : L910*H55 mm	1	pièce
2	Pied de lit		Distance entre les crochets : L910*H55 mm	1	pc
3	Rail latéral		Rail latéral en alliage d'aluminium 6	2	pièces
4	Roulettes		Roulettes couvertes de 5 pouces	4	pièces
5	Poteau à perfusion		Crochet blanc cassé Φ 16-19 mm	1	pc
6	Pied de lit		L587*H245 mm	2	pièces
7	Plateforme de lit		L1925*l820 mm	1	pc
8	Vis	/	Se reporter au tableau a.1	1	jeu

Tableau a.1 :

N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Support de matelas en PP		PP	2	pièces
2	Vis hexagonale		M8*70 mm	4	pièces
3	Rondelle plate		Φ8*Φ16*H1,2 mm	4	pièces
4	Rondelle élastique		Φ8*Φ14*H2,5 mm	4	pièces
5	Écrou		M8 mm	4	pièces
6	Vis hexagonale		M8*60 mm	4	pièces
7	Contre-écrou		M8 mm	4	pièces
8	Vis hexagonale		M10*70 mm	8	pièces
9	Rondelle plate		Φ10*Φ21*H1,8 mm	8	pièces
10	Rondelle élastique		Φ10*Φ17*H3 mm	8	pièces
11	Écrou		M10 mm	8	pièces



1.2 Installation des roulettes

Placez un coussin de protection et retournez le lit ;

Retirez la vis comme indiqué ci-dessous à l'aide d'une clé hexagonale de 14 po





Installez d'abord les roulettes sur les pieds du lit, puis utilisez une clé hexagonale de 17 pouces pour fixer les pieds du lit sur le lit.

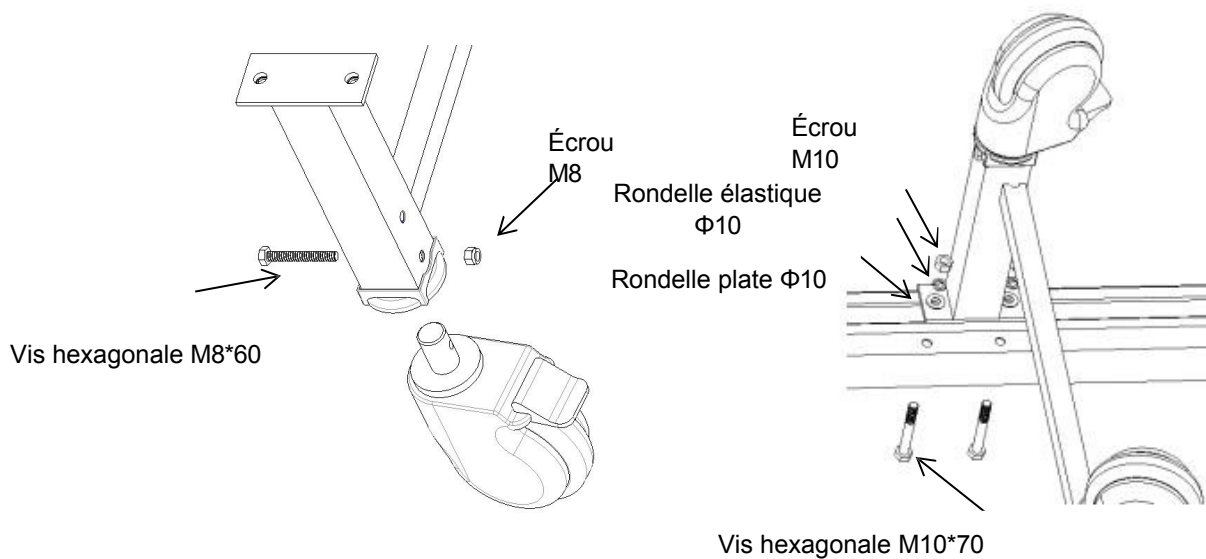
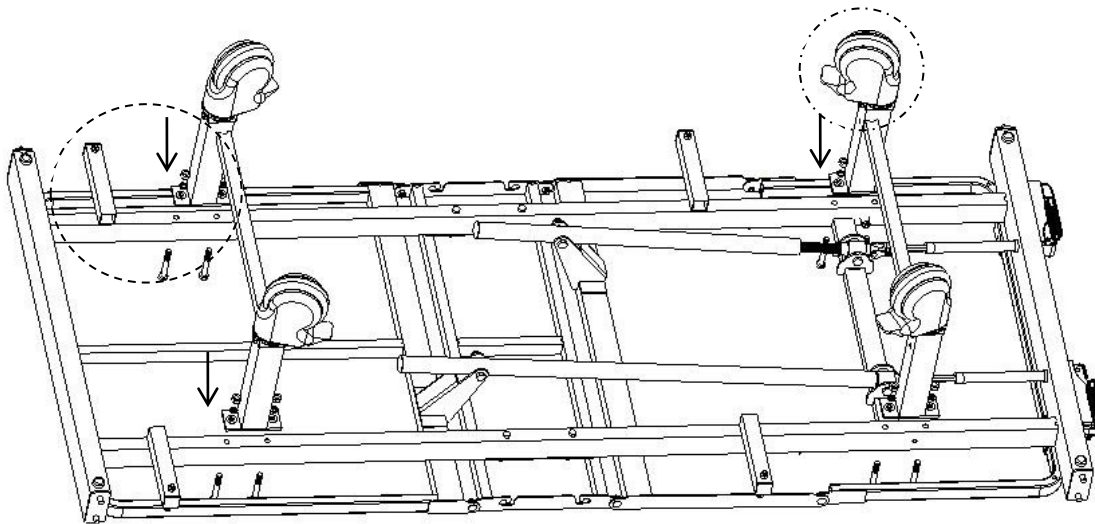


1.3 Installation des barrières latérales


Placez le lit à la verticale et installez la barrière de sécurité ; (l'image peut ne pas correspondre exactement au produit réel, elle sert uniquement à illustrer les instructions d'installation)
Retirez la vis comme indiqué ci-dessous et utilisez une clé hexagonale de 14 pouces.

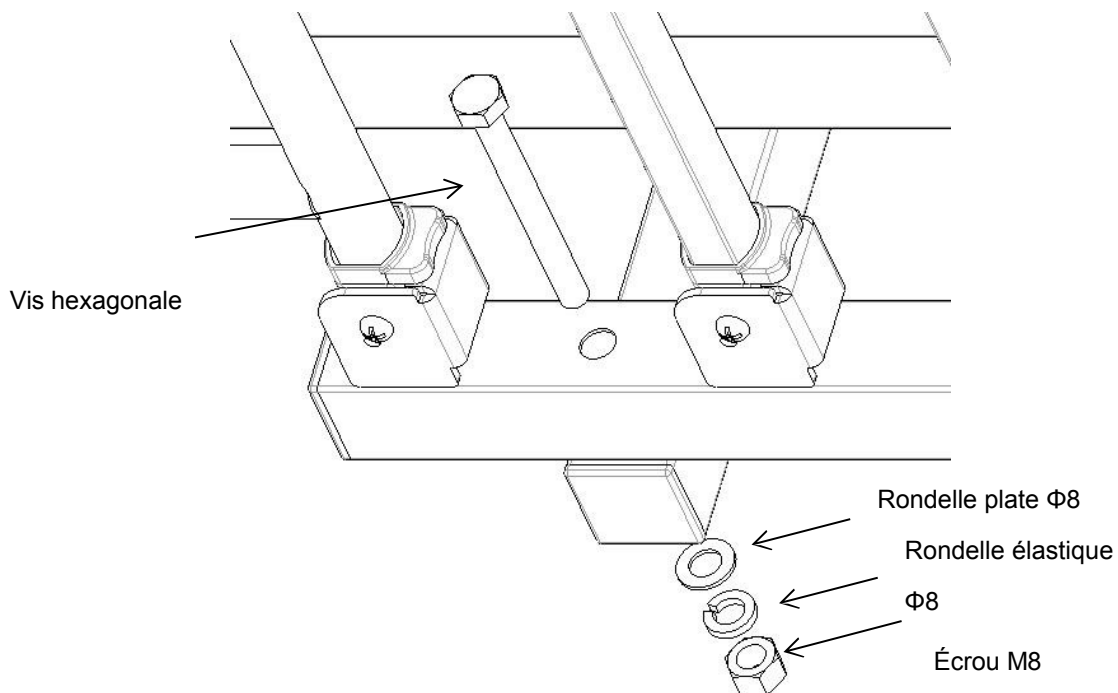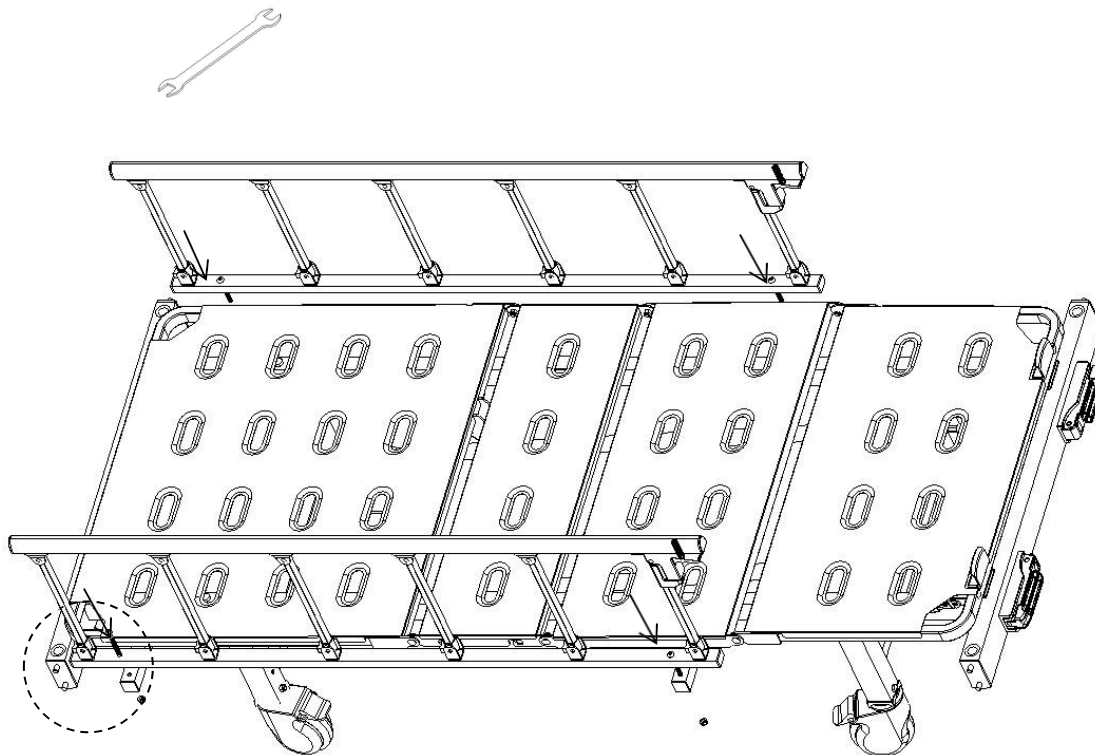


1.4 Installation du support de matelas en PP

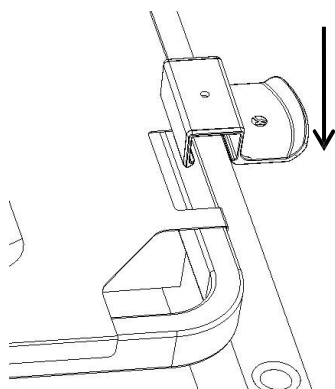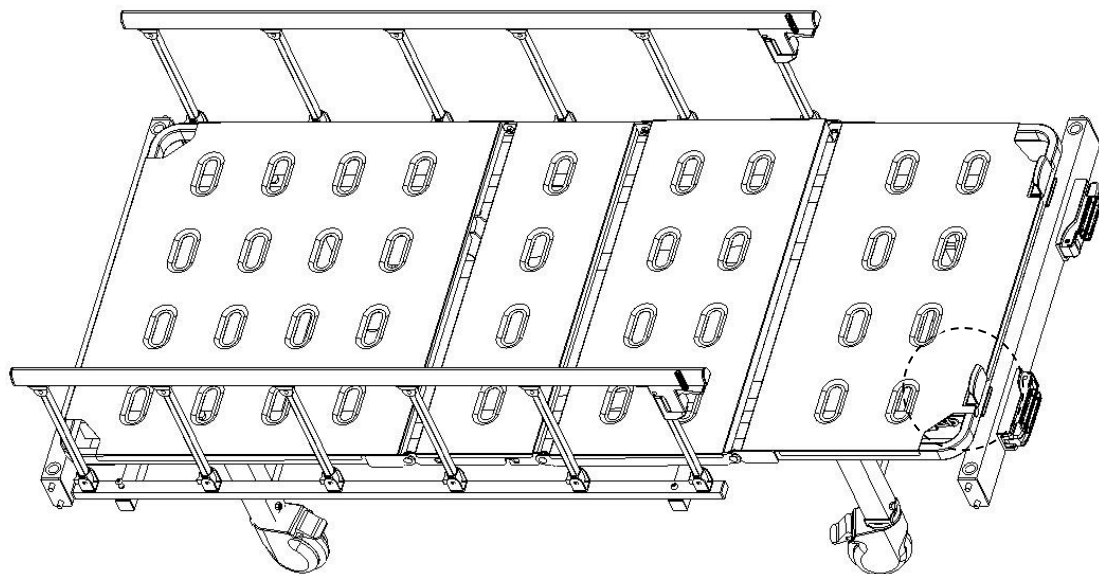


1

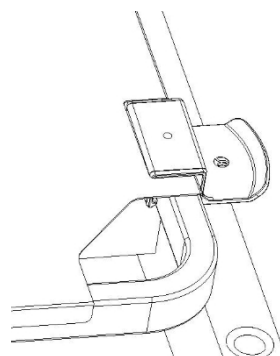

2

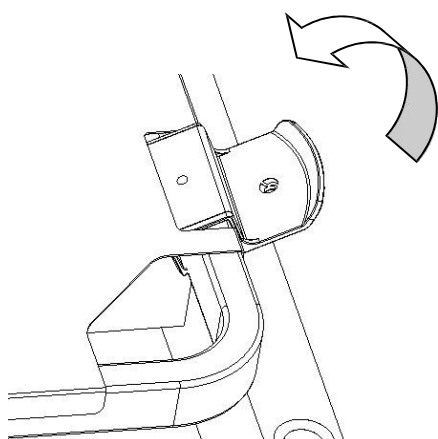




3

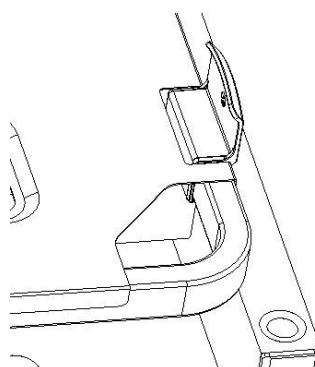

4

1.5 Méthode d'assemblage de la tête et du pied de lit

(La photo ne correspond pas exactement au produit réel, elle sert uniquement à illustrer les instructions d'installation)

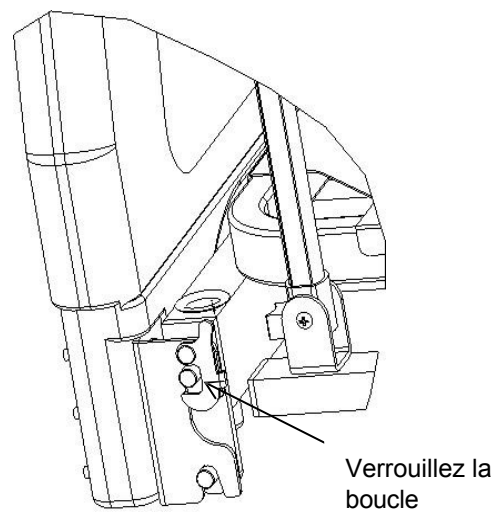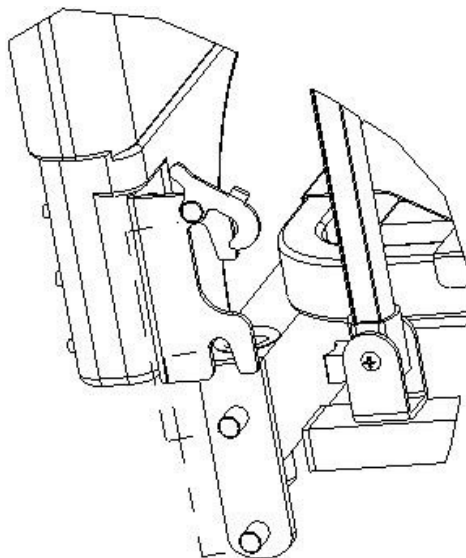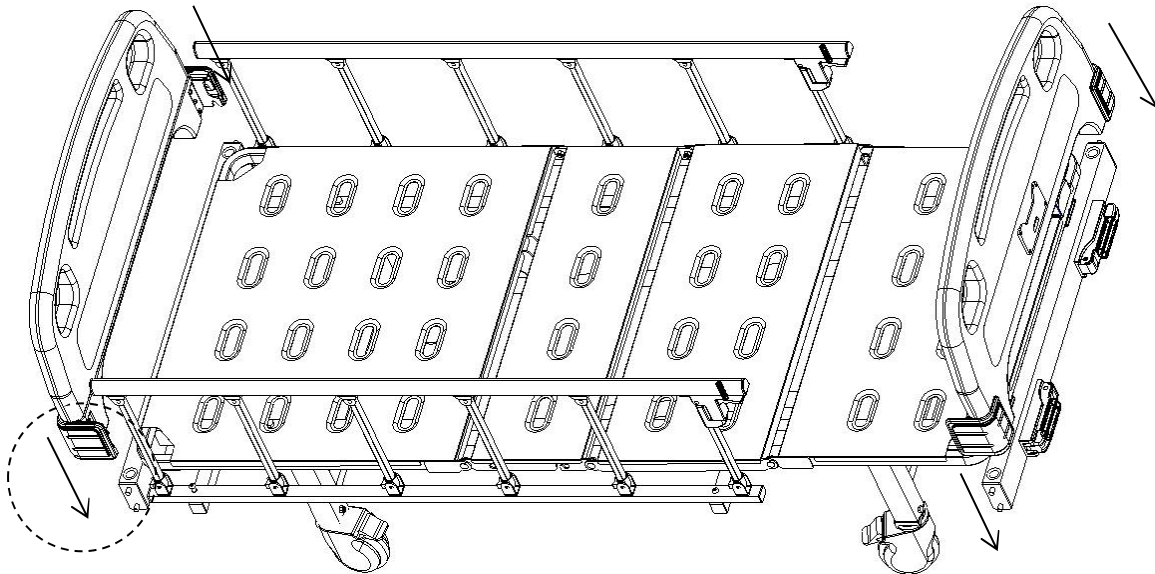


1.6 Installation du pied à perfusion


Installation de la partie femelle : appuyez sur le crochet en plastique (partie femelle) sur le tube en acier inoxydable de $\Phi 16$ mm.

Installation de la partie mâle : placez le crochet en plastique (partie mâle) directement au-dessus de la partie femelle en forme de croix, puis alignez les boucles de la partie mâle avec les fentes de la partie femelle et appuyez vers le bas. Après avoir entendu un « clic », vérifiez si l'extrémité de la boucle est bien serrée. Si c'est le cas, l'installation est terminée. Sinon, continuez à appuyer vers le bas jusqu'à ce que la boucle soit bien serrée.

Insérez le pied à perfusion installé verticalement dans le support prévu à cet effet. (La flèche sur l'image indique le support prévu pour le pied à perfusion)

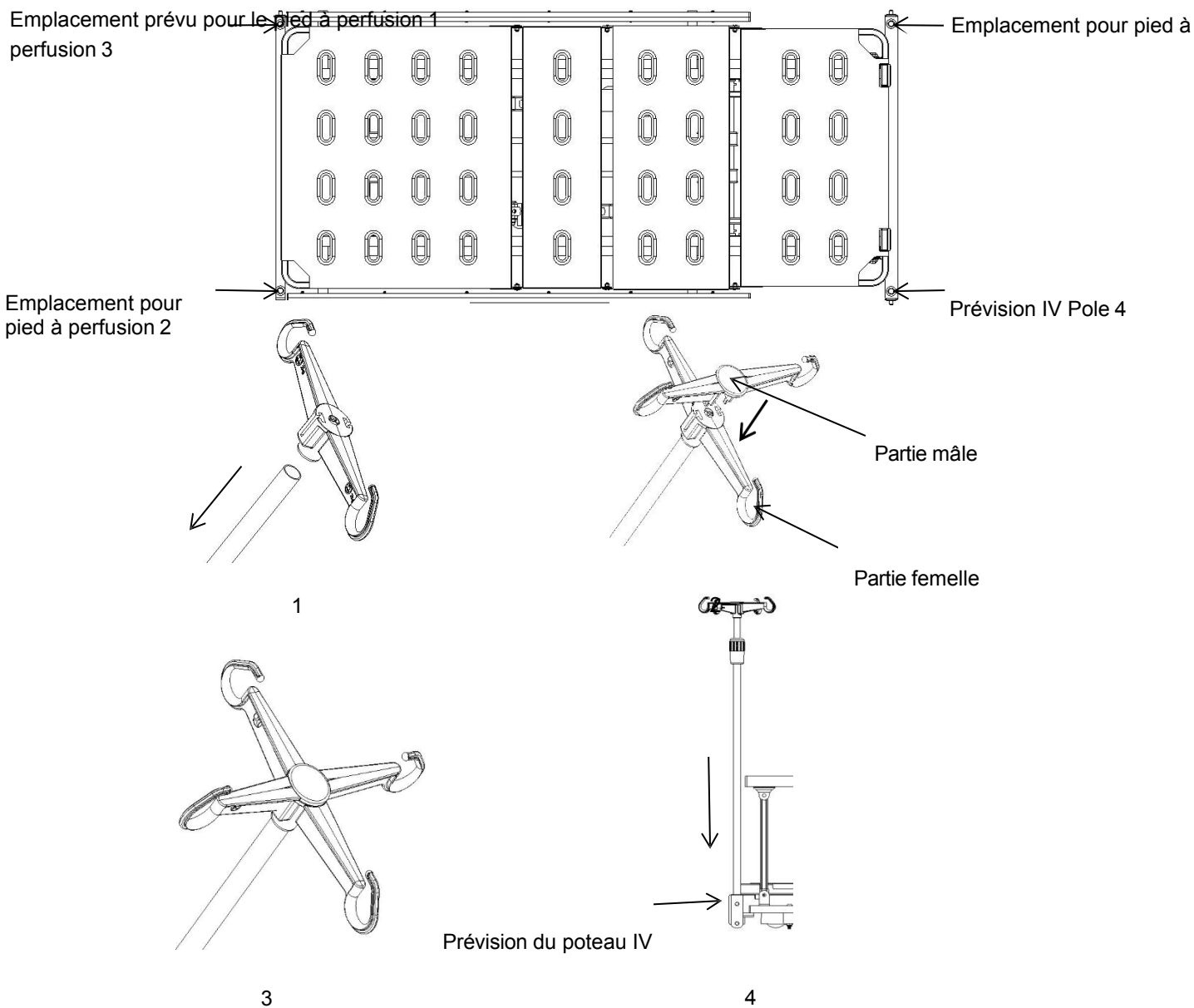

2. Mode d'emploi

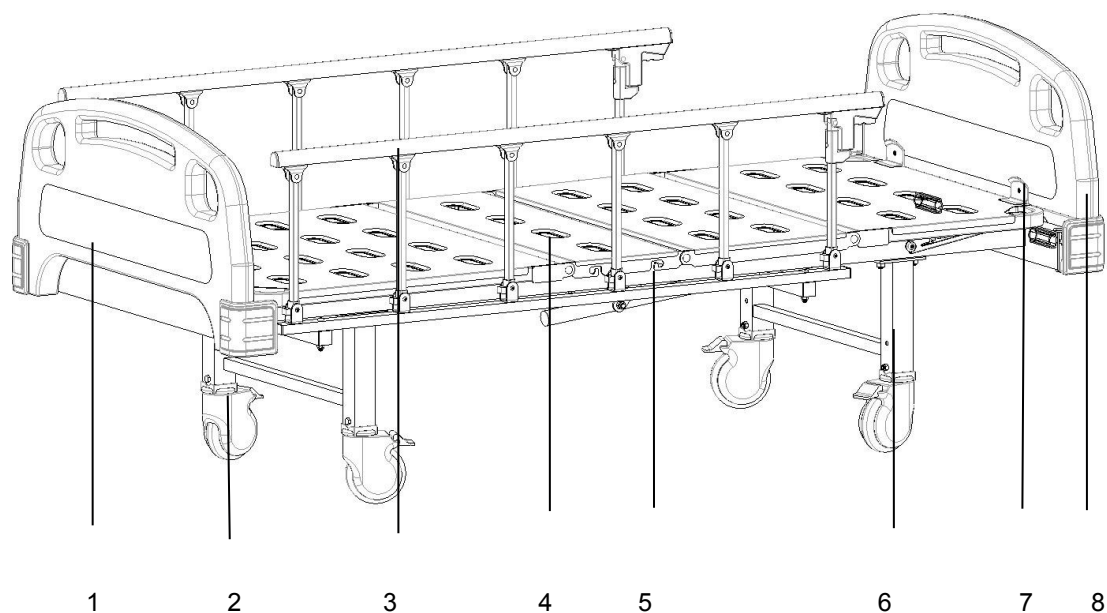

- 1-Tête de lit 2 roulettes 3-Barrière de sécurité 4-Planche de
surface du lit 5-Crochet de drainage 6-Pieds de lit
7-Support de matelas 8-Pied de lit


Dimensions du sommier	Longueur	mm	1925±10
	Largeur		820 ± 10
	Hauteur du lit au-dessus du sol		460 ± 10
Dimensions	Longueur	mm	2110±10
	Largeur		960 ± 10
	Hauteur		460 ± 10
Plage d'inclinaison	Panneau arrière	/	0-75 ± 10
	Planche pour les jambes		0-35±10°
Poids	Charge de travail sécurisée	KG	200

2.1 Mode d'emploi des roulettes


 Lorsqu'un patient est allongé sur le lit, il convient de relever la barrière de sécurité avant de déplacer le lit.

 Sauf lorsque le lit doit être déplacé, le frein des roulettes doit être enclenché pendant le reste du temps. Il faut enclencher les quatre freins des roulettes.

2.1.1 Verrouillez les roulettes : après avoir poussé le lit à la position souhaitée, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez les roulettes lorsque vous entendez un « clic », comme indiqué sur la figure ci-dessous.

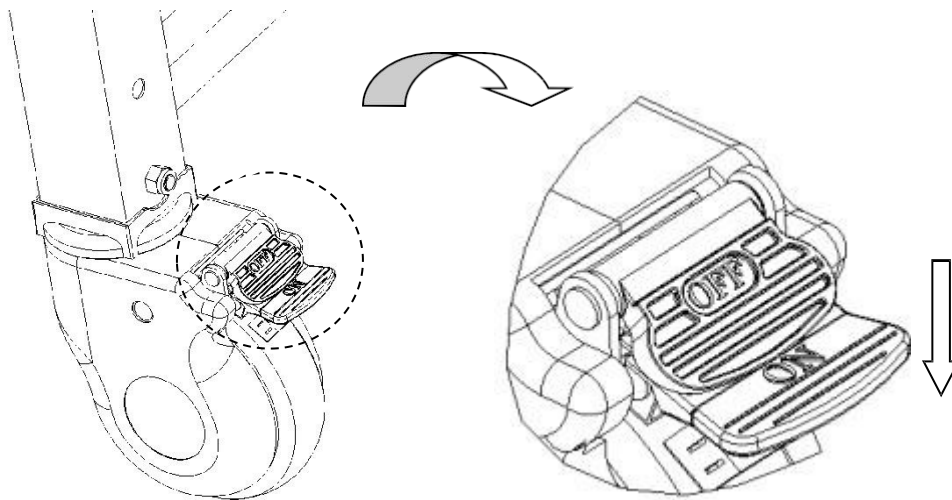

2.1.2 Déverrouillez les roulettes : appuyez sur le bouton OFF avec votre pied et déverrouillez les roulettes lorsque vous entendez un « clic ».


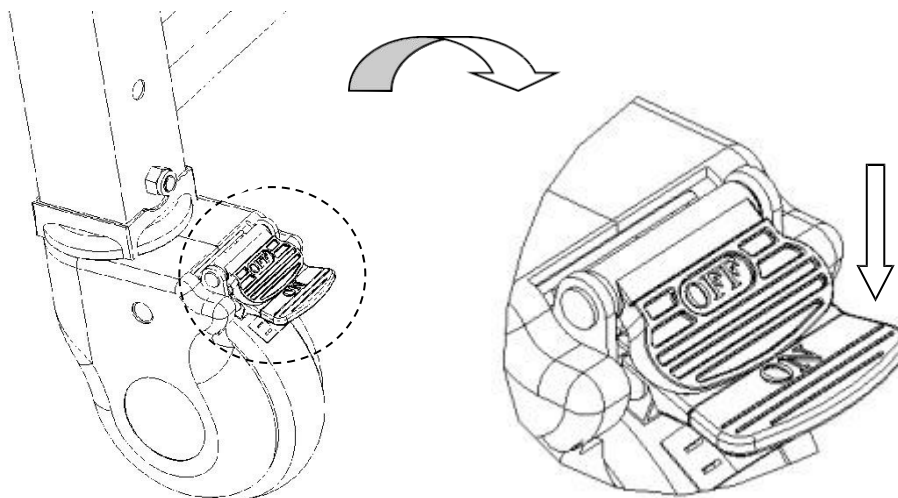


2.2 Méthode d'utilisation des barrières de sécurité



2.2.1 Relever et abaisser la barrière de sécurité

Relever la barrière de sécurité : tenez la poignée rouge de la barrière de sécurité et soulevez-la.

Lorsque vous entendez un « clic », cela signifie que la barrière de sécurité est verrouillée.

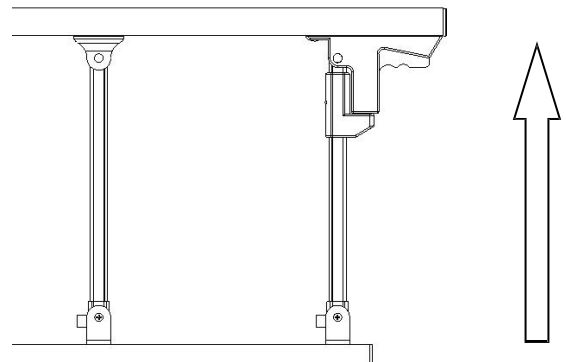
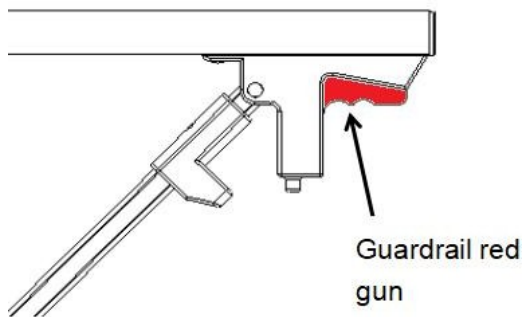


Pour abaisser la barrière de sécurité : tenez la poignée rouge de la barrière de sécurité et abaissez-la lentement.

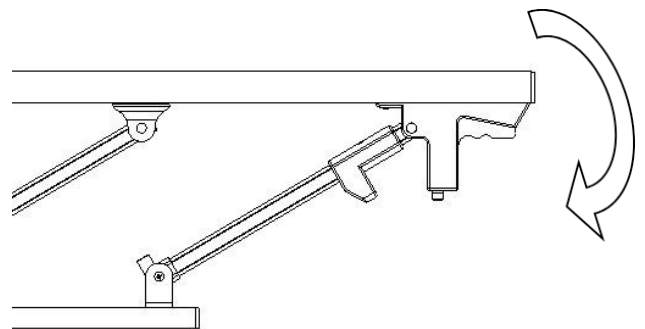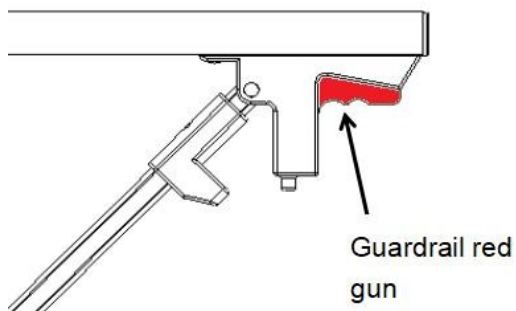

2.3 Utilisation des crochets de drainage

Les crochets de drainage tels qu'illustrés sur la figure.

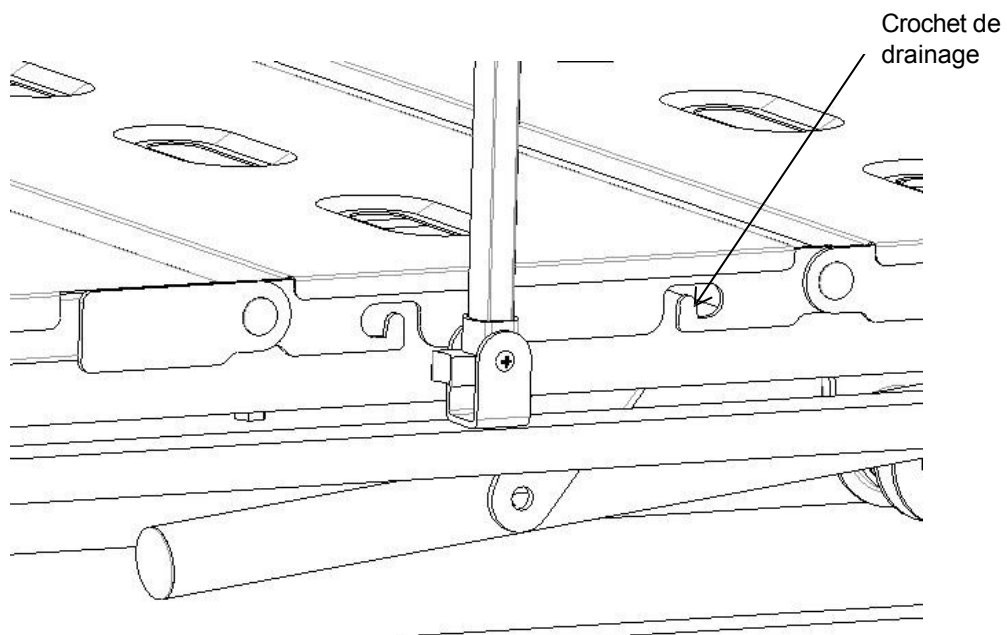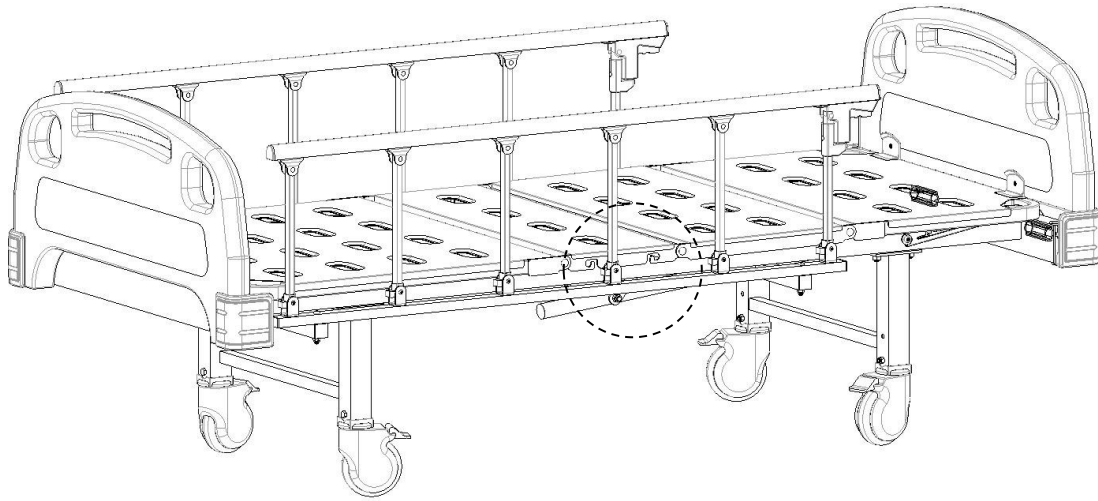


2.4 Mode d'emploi du pied à perfusion

Réglage de la hauteur du pied à perfusion :


1. Desserrez délicatement le manchon extérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, insérez le tube intérieur du pied à perfusion dans le manchon extérieur, puis réglez la longueur de la tige d'extension vers le haut ou vers le bas.

2. Réglez la longueur souhaitée, puis serrez délicatement le manchon extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. La charge maximale de chaque crochet est de 2 kg, pour un total de 8 kg.


(Réglage de la hauteur : 890 à 1540 mm)

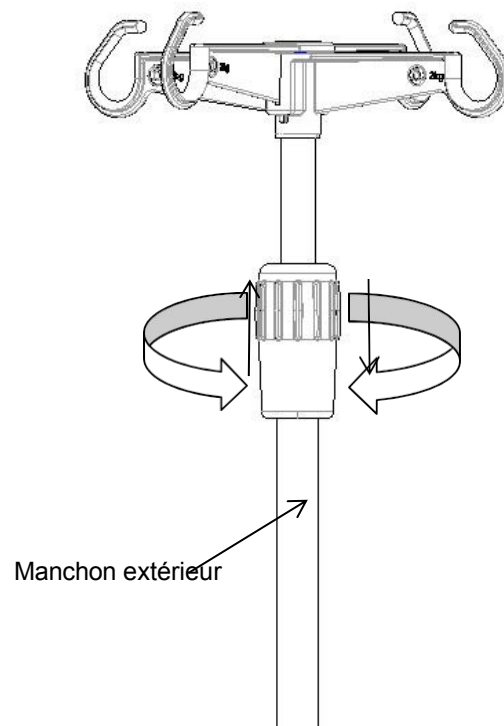

2.5 Mode d'emploi des manivelles

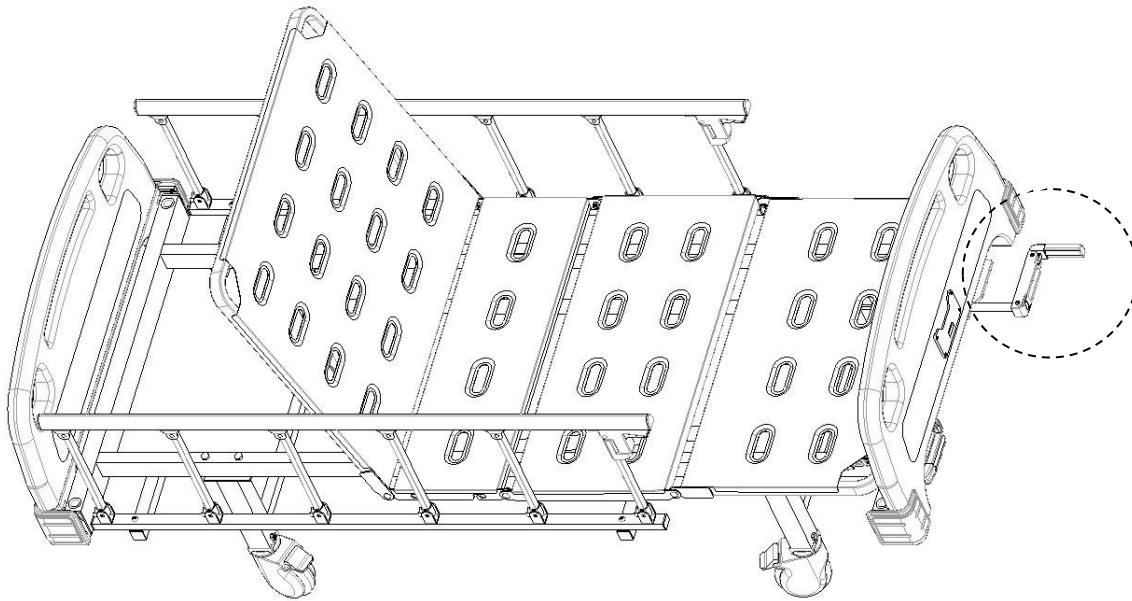





Montée et descente du dossier : tirez sur la manivelle manuelle et tournez-la dans le sens horaire pour relever le dossier, puis dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

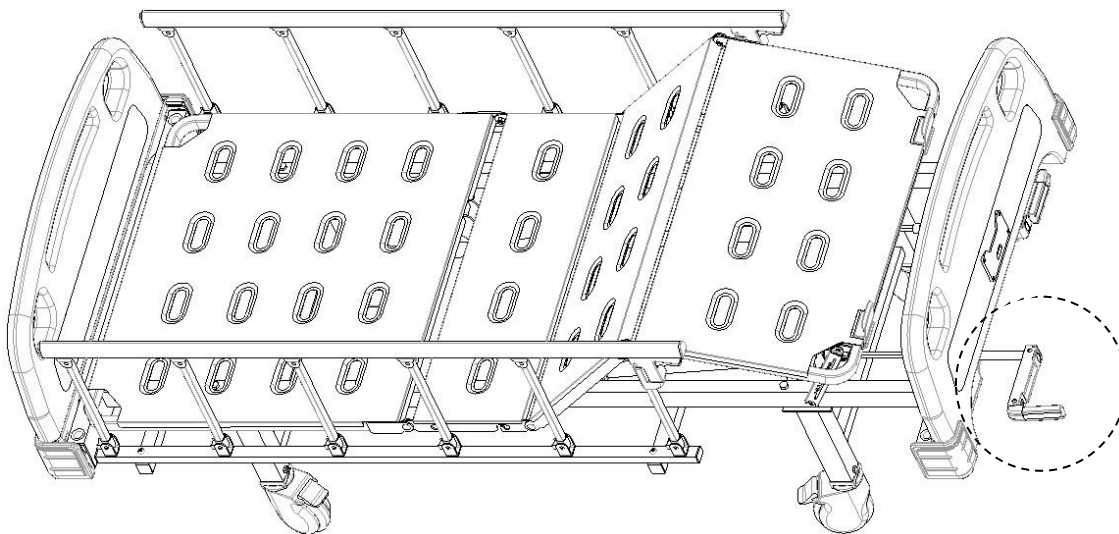

Montée et descente des jambes : tirez sur la manivelle manuelle et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relever les jambes, puis dans le sens des aiguilles d'une montre pour les abaisser.

3. Remplacement des pièces de rechange et entretien

Utilisez deux clés Allen de 17 pouces  pour dévisser le nœud télescopique du balancier, retirez le boulon et remplacez le balancier. Une fois le remplacement terminé, installez les boulons dans l'ordre indiqué sur la figure et utilisez la clé pour serrer le nœud.

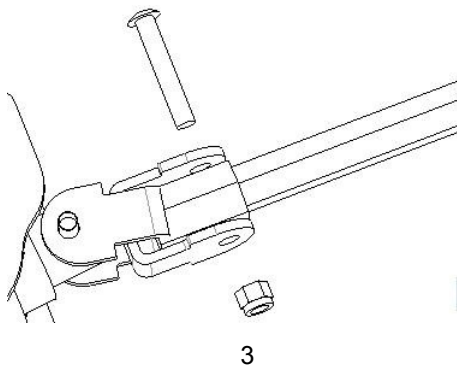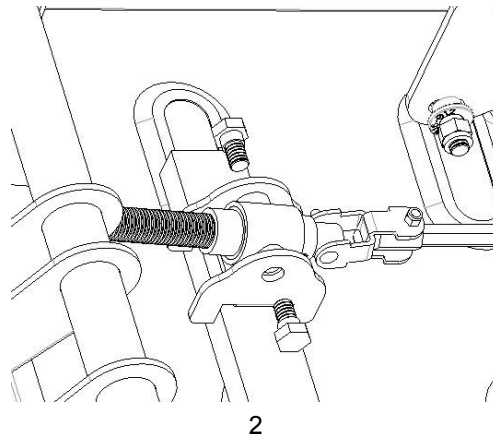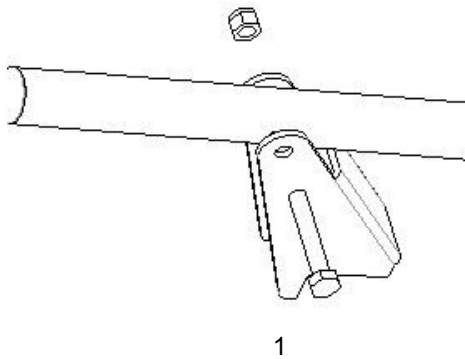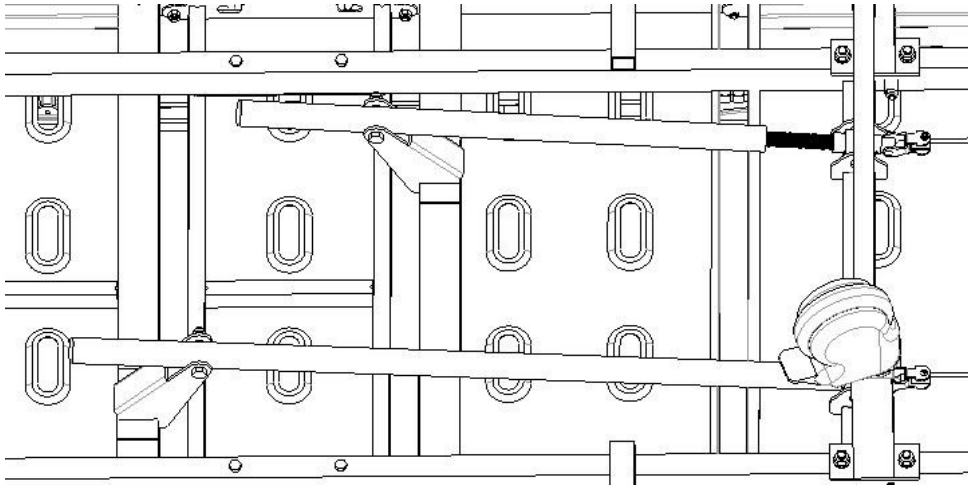


4. Exclusion des défauts

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes d'exclusion
Difficulté à déplacer l'ensemble du lit	1. La roulette est bloquée sans que le frein soit desserré 2. La roulette est endommagée	1. Débloquer le frein 2. Remplacer la roulette
La barrière de sécurité se desserre facilement	La rampe de sécurité n'est pas bloquée en place	Relevez à nouveau la rampe de sécurité et relâchez la main après avoir entendu un « clic »
Bruit fort lorsque le lit fonctionne	Les pièces mobiles sont rouillées et la lubrification est insuffisante	Ajoutez la quantité appropriée d'huile lubrifiante au niveau des articulations des pièces mobiles
Une partie du lit ne fonctionne pas	Défaillance du balancier télescopique	Remplacer le balancier télescopique

5. Entretien du lit

1. Afin d'utiliser le lit en toute sécurité, des inspections de sécurité doivent être effectuées régulièrement. Effectuez une inspection complète tous les six mois afin de vous assurer qu'il n'y a pas de jeu dans les pièces de connexion et que la fonction de montée/descente du lit fonctionne normalement.

2. Au niveau des articulations des pièces fréquemment mobiles du lit, une quantité appropriée d'huile lubrifiante doit être ajoutée lors de l'inspection quotidienne ; si une usure importante est constatée, il convient de la remplacer immédiatement pour garantir la sécurité, ajouter des pièces lubrifiées comme indiqué.

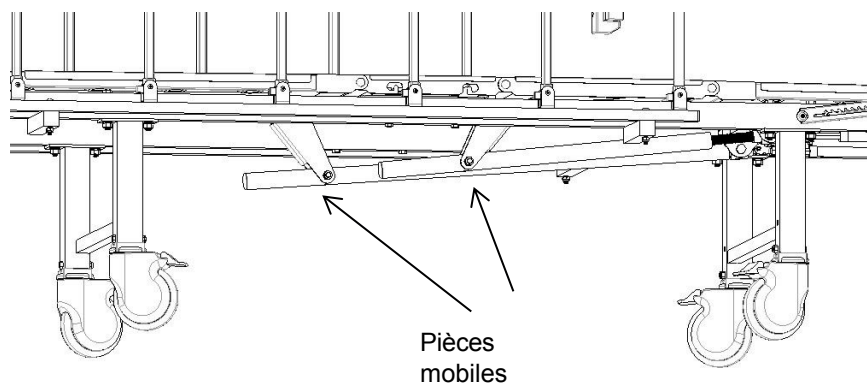

3. Évitez de heurter le lit et de rayer son revêtement avec des objets pointus.
4. Évitez que de l'humidité ne pénètre dans le lit et le matelas, ce qui pourrait provoquer de la rouille, des bruits anormaux et la prolifération de bactéries. Si de l'eau adhère au lit, essuyez-la immédiatement.
5. Lorsque le cadre du lit vieillit et atteint une certaine durée de vie, les parties métalliques du lit et les parties en plastique de la tête ou du pied de lit, ainsi que les barrières de sécurité, peuvent être recyclées.

6. Nettoyage du lit

1. Pour le nettoyage, essorez le chiffon imbibé de détergent neutre dilué dans de l'eau et essuyez, puis essorez le chiffon imbibé d'eau pour éliminer les résidus de détergent, et enfin séchez avec un chiffon sec.
2. N'utilisez pas de substances volatiles (diluants, agents volatils, essence, etc.), qui pourraient provoquer des réactions chimiques et endommager le lit.
3. Lorsque vous utilisez un désinfectant pour nettoyer, veillez à le diluer selon la concentration spécifiée avant utilisation. Selon la composition du désinfectant, il peut corroder les pièces métalliques, les pièces en résine, etc., provoquant des phénomènes indésirables tels que la décoloration et la déformation. Par conséquent, la teneur en désinfectant est recommandée comme suit :

0,05 à 0,2 % de désinfectant à base de chlorure d'ammonium
Désinfectant à base de phényle chloré à 0,05-
0,2 % Solution d'éthane à 0,05 % de diclofénac
Désinfectant à base d'hypochlorite de sodium à
0,05-0,2 %

N'utilisez pas de stérilisateurs à fumée, d'autoclaves, ni de méthyle (phénol) pour nettoyer la tête et le pied du lit. Cela pourrait causer de la corrosion, une décoloration et une détérioration.

Remarque : lors du nettoyage du lit ou du changement des draps, veillez à ne pas rayer les coins, les bords et les vis du cadre.

7. Nettoyage et entretien du matelas

1. Lors de son utilisation, évitez de rayer le tissu avec des outils ou des couteaux à angles vifs, couvrez-le avec des draps ou des tampons de nettoyage, et nettoyez-le fréquemment pour le protéger du dessèchement.
2. Nettoyez régulièrement le matelas à l'aide d'un aspirateur. La housse du matelas peut être lavée à 100 ° C.
3. Exposez souvent le matelas pour que le sommeil reste frais et confortable, mais veillez à ne pas l'exposer trop longtemps.
4. Si le tissu est accidentellement taché, veuillez vous référer aux méthodes de nettoyage recommandées dans les instructions, n'utilisez pas de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le tissu.

5. Si du chewing-gum ou d'autres substances collantes se retrouvent accidentellement sur le tissu, ne les essuyez pas de force. Utilisez un sac de glace pour les durcir et les décoller délicatement.

6. Si le fil est desserré en raison de l'usure, ne le retirez pas à la main, mais utilisez des ciseaux pour le couper.

* Si votre commande ne comprend pas de matelas, veuillez vous référer à la configuration du contrat.

8. Détection et entretien des roulettes

1. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter tout choc ou surcharge, qui pourraient endommager les roulettes de manière irréversible.

2. Graissez régulièrement les roulettes ou les roues, et déterminez la fréquence d'ajout en fonction des conditions d'utilisation réelles. En général, la graisse lubrifiante est ajoutée tous les six mois.

3. Après avoir nettoyé l'équipement des roulettes, veillez à ajouter de la graisse. Le choix de la graisse lubrifiante doit être basé sur l'environnement d'utilisation réel, les environnements à haute température et à basse température particuliers, et la graisse lubrifiante correspondante doit être sélectionnée.

4. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, car cela endommagerait le système de freinage.

5. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par inspection visuelle. Des fils de filature et d'autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue. Retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et utilisées.

6. Pour déterminer si la roulette doit être remplacée en fonction du temps d'utilisation et de l'usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des contre-écrous pour vous aider dans ce processus.




7. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement si les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un lit d'hôpital équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être verrouillée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le lit et de vérifier si le freinage de chaque roulette est efficace. Si le frein ne fonctionne pas correctement en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.


8. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

9. Entretien des barrières de sécurité

1. Veuillez vérifier que les rails latéraux sont correctement installés afin d'empêcher le patient allongé de se déplacer et de rouler vers le bas.
2. Vérifiez toujours les vis de la position totale de la barrière de sécurité et du fil métallique afin d'éviter qu'ils ne se desserrent et ne tombent.
3. Veuillez utiliser correctement les pièces en plastique rouge de l'interrupteur de la barrière de sécurité et ne pas forcer afin de ne pas endommager la barrière.

10. Liste des pièces de rechange

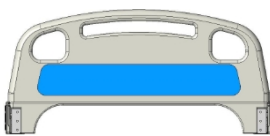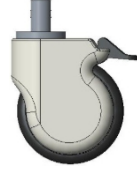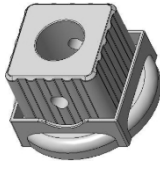N	Nom	N° de modèle	Image	Spécifications
1	A900/PP/Panneau de tête et de pied	S0FJBT010019		Distance entre les crochets : 910*55 mm
2	Rail latéral en alliage d'aluminium	BKLLGH105931		Côté gauche
3	Rail latéral en alliage d'aluminium	BKLLGH105932		Côté droit
4	Poteau à perfusion	S0FJSY010003		Φ16-19/blanc cassé
5	Roulette de 5 pouces	LGPLU101TS014		φ24
6	Jeu de roulettes carrées	GPSL101TS297		50*50 mm
7	Manivelle télescopique arrière	LGPSG10101002		950-150 mm

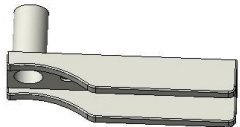8	Manivelle télescopique pour pied	LGPSG10101001		650-95 mm
9	Manivelle télescopique	GPSL1012524S		Blanc cassé/250*220 mm
10	Base de manivelle	GPSL1012525S		Blanc cassé/p2142c
11	Carte nominative	GPSL101TS184		/

Remarque : en raison des mises à jour du produit, certaines pièces du produit d'origine peuvent ne plus être disponibles à vie.

(La société garantit que les produits vendus peuvent fournir les pièces qui doivent être remplacées dans les 6 ans suivant la fin de leur production)

11. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du lit manuel est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les chocs, les vibrations violentes et protégez le lit manuel de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le lit mobile manuel doit être stocké :
 - a) Température ambiante : $+5^{\circ}\text{C}$ à $+40^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidité relative : $\leq 85\%$.
 - c) Pression atmosphérique : $70\text{ kPa} \sim 106\text{ kPa}$.

Explication des symboles :



Remarque ! Vérifiez le dossier fourni avec le lit.



La charge de travail sécurisée est de 2000 N

12. Service après-vente et d'

1. Veuillez conserver soigneusement les fichiers fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez présenter ces documents lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les meilleurs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et des services de maintenance précis et rapides en temps opportun.
3. Ne démontez pas vous-même les composants internes de ce produit afin d'éviter tout dommage inutile. Si vous constatez que l'utilisation est affectée par des problèmes de qualité, veuillez contacter notre service après-vente ou notre revendeur agréé.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODÈLE : A2k / RÉF. : 319-SK031

LIT D'HÔPITAL MANUEL / LIT D'HÔPITAL MANUEL / LIT D'HÔPITAL /

LETTO OSPEDALIERO / CAMA DE HOSPITAL / KRANKENHAUSBETT



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd No. 35
Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City,
Province du Jiangsu, Chine



SUNGO Europe B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Unité 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, Pays-
Bas



QuirumedS.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valence (Espagne)



15/11/2025



LOT : HW25050