

Cama hospitalar manual

Modelo: SK033-1

Manual do utilizador



Imagem apenas para referência



Índice

1. Introdução ao manual.....	2
2. Âmbito de aplicação	2
3. Características.....	2
4. Parâmetros técnicos	2
5. Guia de instalação	2
6. Método de utilização	7
7. Notas.....	10
8. Avisos e precauções	10
9. Manutenção.....	11
10. Armazenamento.....	11
11. Transporte.....	11
12. Lista de produtos	11

Nota: A aparência dos produtos descritos neste manual pode diferir ligeiramente dos produtos acabados. Isso não afetará o desempenho dos produtos. Agradecemos a sua compreensão caso isso lhe cause algum inconveniente.

1. Manual Introdução

Este manual faz parte do artigo ao qual se refere. Leia atentamente as instruções, pois elas fornecem informações importantes sobre SEGURANÇA DURANTE O USO E PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO. As descrições e imagens contidas na publicação não são vinculativas; temos o direito de modificar qualquer informação para fins de aprimoramento, sem qualquer obrigação de atualizar este manual. Os gráficos e imagens neste manual são apenas exemplos mostrados a você. Qualquer melhoria nos produtos está disponível.

2. Âmbito de aplicação do

É usado principalmente em hospitais, lares de idosos e cuidados domiciliares.

3. Características

1. A superfície da cama é revestida a pó, com orifícios perfurados.
2. A cabeceira e os pés da cama em ABS podem ser facilmente montados e desmontados.
3. A grade de proteção pode ser levantada e abaixada.
4. O ângulo das costas e da parte dos joelhos pode ser ajustado por meio de alavancas manuais, o que proporciona conforto ao paciente.
5. Caracteriza-se por ser seguro de usar, fácil de desinfetar e limpar.

4. Parâmetros técnicos do

N.º do modelo	A100s
Dimensões	0°-75°(±5°)
Carga máxima	250 kg
Ângulo de elevação do encosto	2100 mm*970 mm*500 mm

5. Instalar guia

Para economizar espaço na embalagem e garantir um transporte seguro, a cama hospitalar que recebeu não vem montada. Poderá ser necessário instalar a cabeceira e os pés da cama, os rodízios e a mesa giratória (se tiver optado por ela).

O Guia de Instalação acompanha o Manual do Utilizador. Leia atentamente este guia e siga rigorosamente as etapas.

Nota: Certifique-se de que a cama está completamente instalada antes de a utilizar. Peças que devem ser preparadas antes da instalação:

As principais ferramentas e parafusos			
 1	 2	1. Drenagem do gancho 2. Porca	*2 unidades
 1		1. Parafuso	*10 unidades

	1. Parafuso 2. Espaçador 3. Calço espaçador 4. Porca 5. Arruela de pressão	*4 unidades *4 unidades
	1. Pé da cama	*2 unidades
	1. Parafuso curto 2. Arruela de pressão 3. Calço espaçador 4. Porca	*8 unidades
	1. Parafusos e porcas 2. Cunha espaçadora	*2 unidades
	1. Calço espaçador 2. Porca 3. Arruela de pressão	*2 unidades
		1. Chave inglesa maior: Parafuso de 8 mm: 14 Parafuso de 10 mm: 17 2. Chave inglesa pequena: 8 mm Porca de fixação: 13 Porca de fixação de 10 mm: 17 *1 peça
	Chave de fendas	*1 unidade


Coloque todos os parafusos e porcas no lugar certo e aperte-os!

Passo 1: A base plana. A Figura 1 mostra (1):





Passo 2: Instale o gancho de drenagem. A Figura 2 mostra:

Instale o gancho de drenagem torcendo-o na cama. São montados em ambos os lados das vigas da cama.

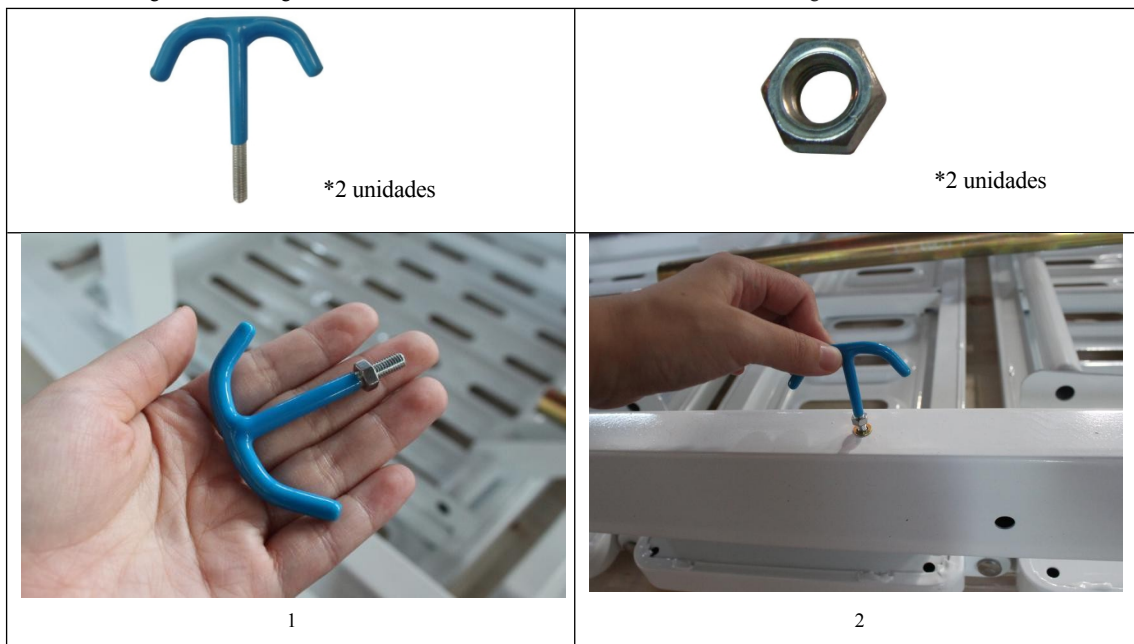

Passo 3: Instale os parafusos das pernas da cama. A Figura 3 mostra (1-3):

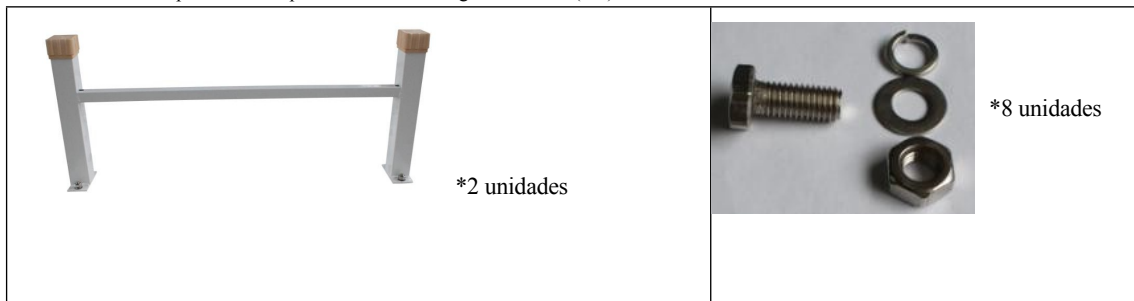

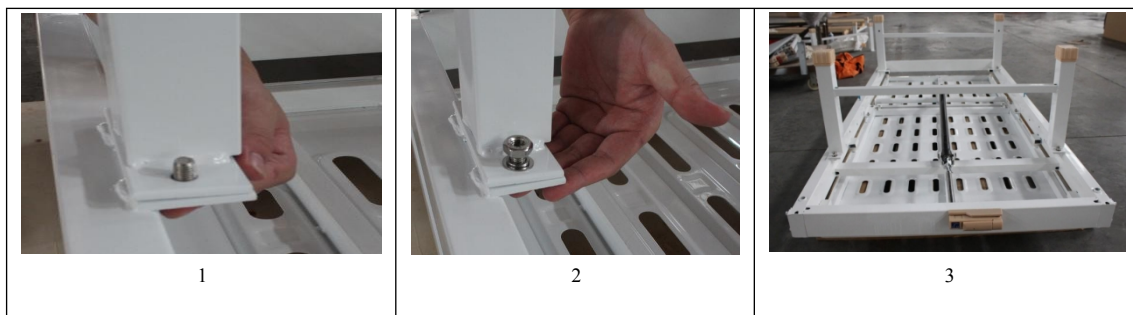

Passo 4: Instale a extremidade da cabeceira da cama. A Figura 6 mostra (1-3):

Dois ganchos em ambos os lados. Segure a cabeceira para prendê-la nas duas colunas de aço.
Cubra a pequena placa de aço para travar a cabeceira.

Importante:



6. Use o método

	(A aparência da cabeceira e do estribo pode ser diferente daquela que você recebeu)
	
Figura 1 Figura 1 A manivela que receber poderá ter uma forma diferente, mas terá a mesma função.	

6.1 Função

6.1.1 Ângulo do encosto ajustável:



Gire a manivela da alavanca do «Encosto» no sentido horário para elevar a secção traseira.

Gire a manivela do «Encosto» no sentido anti-horário para baixar a parte traseira (Figura 2).

6.1.2 Ângulo do apoio para os pés ajustável



Gire a manivela do "Apoio para os pés" no sentido horário para elevar a parte dos joelhos

6.2 Utilizando o método do suporte para soro:

Erga o suporte para soro quando for utilizá-lo. Quando o suporte para soro estiver na posição vertical, a altura pode ser ajustada. Quando a altura não for suficiente, gire o ponto C e puxe o suporte B para cima, depois gire o ponto C no sentido horário para travar e coloque a bolsa de infusão no ponto A. (Figura 3)

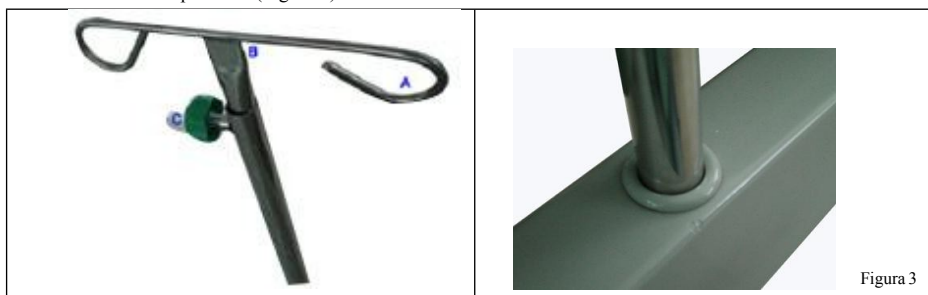


Figura 3

6.3 Método de utilização dos rodízios:

Se a sua cama estiver equipada com rodízios, pode movê-la com ou sem o paciente na cama.

Nota: Trave os rodízios quando parar ou posicionar a cama.

Pedais de travão nos rodízios. (Figura 4)

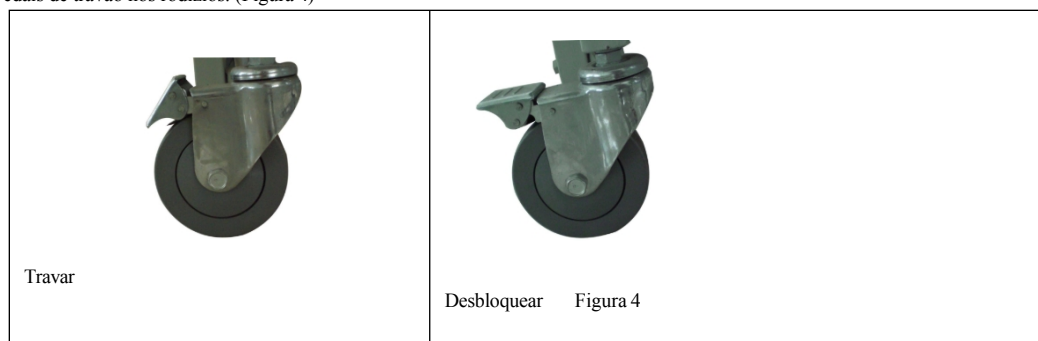


Figura 4

6.4 Gancho de drenagem

O gancho de drenagem é aplicado à cama. É utilizado para pendurar o saco de urina. Instale o gancho de drenagem torcendo-o na cama. (Figura 5) Se não precisar dele, pode desinstalá-lo.



Figura 5

7. Notas

- 7.1 Os operadores devem ler este manual com atenção, seguir as instruções e familiarizar-se com os procedimentos corretos de operação e manutenção da cama hospitalar.
- 7.2 Ao transferir os pacientes, certifique-se de travar a grade de proteção. A empresa não se responsabiliza por quaisquer consequências resultantes da operação incorreta.
- 7.3 Ações ilegais e bárbaras e a operação com sobrecarga são proibidas, para evitar o uso indevido que danifique a cama hospitalar.

8. Aviso e Cuidado

-  NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS SE APROXIMEM OU FICAM NA CAMA DURANTE A OPERAÇÃO. 
NÃO PERMITA QUE ESTE DISPOSITIVO SEJA OPERADO POR CRIANÇAS.
-  AO OPERAR AS FUNÇÕES DE ELEVAÇÃO, JOELHOS E COSTAS DA CAMA, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A PESSOA CONFINADA À CAMA ESTÁ POSICIONADA CORRETAMENTE DENTRO DOS LIMITES DA CAMA. NÃO DEIXE QUE NENHUMA EXTREMIDADE SOBREPASSE A LATERAL OU FICASSE ENTRE AS BARREIRAS DA CAMA AO EXERCER QUALQUER FUNÇÃO.
-  NÃO UTILIZE BARRAS LATERAIS NÃO AUTORIZADAS.
-  AS ETIQUETAS DE AVISO/CUIDADO APLICADAS À CAMA DESCREVEM PERIGOS OU PRÁTICAS INSEGURAS QUE PODEM RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.
-  AO UTILIZAR EQUIPAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIPO NASAL OU MÁSCARA, A TUBAGEM DE OXIGÊNIO OU AR DEVE SER ENCAMINHADA E FIXADA ADEQUADAMENTE PARA GARANTIR QUE A TUBAGEM NÃO FIQUE ENREDADA E EVENTUALMENTE SEJA CORTADA DURANTE O FUNCIONAMENTO NORMAL DA CAMA.
-  ANTES DE OPERAR, CERTIFIQUE-SE DE QUE OS RIVETES DA ESTRUTURA DA CAMA ESTÃO APOSICIONADOS CORRETAMENTE NOS GANCHOS DA EXTREMIDADE DA CAMA: CASO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER LESÕES OU DANOS.
-  MANTENHA TODAS AS PARTES MÓVEIS LIVRES DE OBSTRUÇÕES (OU SEJA, COBERTORES/Lençóis, COBERTORES/ALMOFADAS AQUECEDORAS, TUBAGENS, CABOS E OUTROS TIPOS DE PRODUTOS)

9. Manutenção

- 9.1 Mantenha limpo como rotina (incluindo desinfetar).
- 9.2 Verifique se há peças soltas ou fora do normal.

10. Armazenamento


- 10.1 Armazene em local à prova de humidade e em ambiente não corrosivo

11. Transporte

11.1 Será transportado por meios de transporte comuns: navio, avião, comboio, camião.

11.2 A cama hospitalar pode ser manuseada manualmente.

11.3 Não atirar nem deixar cair durante o transbordo.

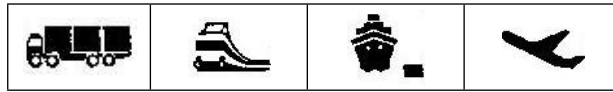

12. Lista de produtos

N.	Nome	Quantidade
1	Estrutura da cama	1 conjunto
2	Cabeceira e pés da cama	1 conjunto
3	Rodízios	4
4	Suporte para soro	1
5	Barra lateral	1 conjunto
6	Ganchos de drenagem	2
7	Suporte para colchão	1
8	Parafusos e porcas para instalação	Alguns (consulte o guia de instalação)
9	Manual do utilizador	1
10	Placa de identificação	1
11	Pólo de elevação	1
12	Pega do bastão de elevação	1