

Cama de hospital manual con manivela

SK057-1

**Manual de
instrucciones**



Imagen solo como referencia

1. Introducción

Este manual forma parte del producto al que hace referencia. Lea detenidamente las instrucciones, ya que proporcionan información importante sobre SEGURIDAD DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE USO Y MANTENIMIENTO. Las descripciones y las imágenes que contiene este documento no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a modificarlo para fines de mejora sin ninguna obligación de actualizar este manual. Los gráficos e imágenes que figuran en este manual son meros ejemplos y pueden no coincidir con la realidad.

2. Aplicaciones

Este producto se utiliza principalmente para hospitales, residencias de ancianos y espacios públicos.

3. Características

- Cabecero y pie de cama de acero inoxidable, tablero de densidad azul
- Superficie de la cama de malla
- Estructura de tubos rectangulares de acero templado SPR
- Dimensiones: 2050 x 910 x 500 mm
- Ganchos para bolsa de drenaje
- Portasueros de acero inoxidable y soportes
- Ajuste del respaldo: 0-75 ° (± 10 °)

4. Advertencias y precauciones

- ⚠ MANTENGA A LOS NIÑOS PEQUEÑOS ALEJADOS DE LA CAMA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO.
- ⚠ NO PERMITA QUE ESTE DISPOSITIVO SEA UTILIZADO POR NIÑOS PEQUEÑOS.
- ⚠ CUANDO SUBA O BAJE LA CAMA, EL REPOSAPIERNAS, AJUSTE LA POSICIÓN TRENDLENBURG O ANTITRENDLENBERG O REGULE EL RESPALDO, ASEGÚRESE SIEMPRE QUE EL PACIENTE ESTÉ POSICIONADO CORRECTAMENTE EN LA CAMA. CUANDO MUEVA LA CAMA, LAS EXTREMIDADES DEL PACIENTE NO DEBEN ASOMAR POR LOS LADOS O ENTRE LAS BARANDILLAS.
- ⚠ NO UTILICE BARANDILLAS LATERALES NO AUTORIZADAS.
- ⚠ LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN ALERTAN DE PELIGROS O PRÁCTICAS NO SEGURAS QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES.