

**Letto
manuale**

SK057-1

Manuale d'uso



Immagine di riferimento

Contenuti

1. Introduzione al manuale	2
2. Caratteristiche	2
3. Parametri tecnici	2
4. Avvertimento	5
5. Manutenzione	6
5. Conservazione	6
6. Trasporto	6

Nota: L'aspetto dei prodotti descritti in questo manuale è un po' diverso, ma questo non influisce sulle prestazioni del prodotto. Si prega di capire se si prende qualche inconveniente sul funzionamento.

1. Manuale Introduzione

Si prega di leggere attentamente le istruzioni perché forniscono importanti informazioni sulla SICUREZZA DURANTE L'USO E LE PROCEDURE DI MANUTENZIONE. Le descrizioni e le immagini contenute nella pubblicazione non sono vincolanti; ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi informazione a scopo di miglioramento senza alcun obbligo di aggiornare il presente manuale. La grafica e le immagini contenute in questo manuale sono solo esempi e possono migliorare i prodotti.

2. Caratteristiche

Questo prodotto è utilizzato principalmente per ospedali, case di cura e spazi pubblici.

3. Parametri tecnici

- **Testiera e pediera in acciaio inox, pannello di densità blu**
- **Superficie del letto a rete**
- **Struttura del tubo rettangolare in acciaio temprato SPR**
- **Dimensioni: 2050 x 910 x 500 mm**
- **Ganci per sacchi di drenaggio**
- **Pali e supporti per flebo in acciaio inox**
- **Regolazione dello schienale: 0-75° ($\pm 10^\circ$)**

4. Avvertenze

-  NON PERMETTERE AI BAMBINI PICCOLI DI SALIRE O AVVICINARSI AL LETTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO. NON PERMETTERE CHE QUESTO DISPOSITIVO VENGA UTILIZZATO DA BAMBINI PICCOLI.
-  QUANDO SI AZIONA LA FUNZIONE DEL LETTO, ASSICURARSI SEMPRE CHE LA PERSONA CONFINATA NEL LETTO SIA POSIZIONATA CORRETTAMENTE ALL'INTERNO DEI CONFINI DEL LETTO. NON LASCIARE CHE LE ESTREMITÀ SPORGANO OLTRE IL LATO O TRA LE SPONDE DEL LETTO DURANTE L'ESECUZIONE DI QUALSIASI FUNZIONE.
-  LE ETICHETTE DI AVVERTENZA/PRECAUZIONE APPLICATE AL LETTO DESCRIVONO I PERICOLI O LE PRATICHE NON SICURE CHE POTREBBERO CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI.
-  QUANDO SI UTILIZZA UN'APPARECCHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE NASALE O IN MASCHERA, I TUBI DELL'OSSIGENO O DELL'ARIA DEVONO ESSERE INSTRADATI E FISSATI IN MODO APPROPRIATO PER GARANTIRE CHE I TUBI NON SI IMPIGLINO E NON SI SPEZZINO DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL LETTO.
-  MANTENERE TUTTE LE PARTI MOBILI LIBERE DA OSTRUZIONI (AD ES. COPERTE/LENZUOLA, COPERTE/PADELLE RISCALDANTI, TUBI, CABLAGGI E ALTRI TIPI DI PRODOTTI)

5. Lista di controllo della manutenzione

5.1 Pulire periodicamente questo letto (compresa la disinfezione).

5.2 Controllare frequentemente che non vi siano parti allentate o danneggiate.