




Utilizador manual

SKB037(B)

Cadeira de rodas para pacientes em estado crí tico

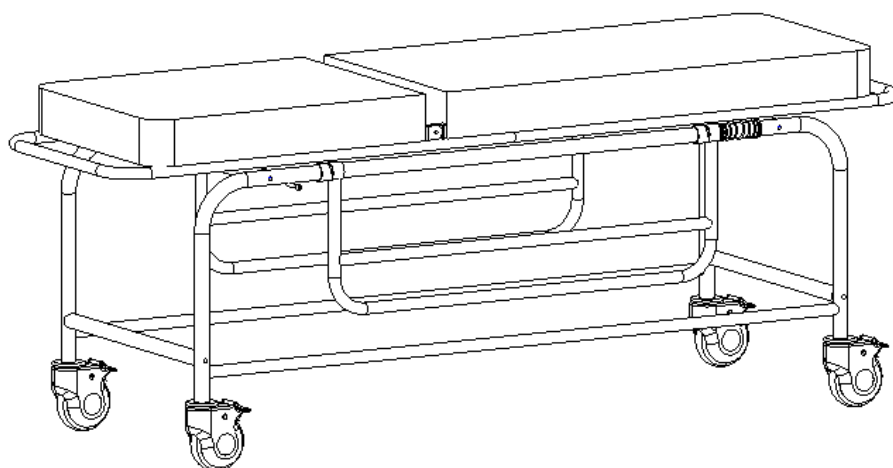

SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ESTOQUE: 870098

Conteúdo

Introdução manual	2
1. Guia de instalação.....	3
1.1 Lista de acessórios padrão.....	3
1.2 Instalar rodízios	5
1.3 Instalar os pés.....	6
1.4 Instalar a placa da cama	7
2. Instruções do produto.....	9
2.1 Método de utilização dos rodízios	10
2.2 Método de utilização das grades de proteção	11
2.3 Instruções do painel traseiro.....	12
2.4 Instalação do suporte para soro	13
2.4.2 Utilização do suporte para soro	14
3. Exclusão de falhas	14
4. Manutenção do carrinho de paciente em aço inoxidável	14
5. Embalagem, transporte, armazenamento.....	16
6. Serviço pós-venda.....	16

Introdução ao manual

Nota:

Leia atentamente este manual e siga rigorosamente as etapas antes de instalar e utilizar. Exigimos que todos os utilizadores tenham conhecimento do manual do utilizador e de todas as precauções.

► Este manual é aplicável ao carrinho de paciente em aço inoxidável SKB037(B). Ele contém o método de instalação, instruções de operação e pontos de verificação de manutenção.

► Os gráficos neste manual são apenas para referência dos utilizadores. Na utilização real, consulte o objeto real.

► Este manual do utilizador inclui a descrição, instruções, manutenção e parâmetros técnicos do produto.

► Em caso de dúvidas, contacte o centro de assistência pós-venda ou o distribuidor.

► Qualquer pessoa que utilize ou opere este produto deve ler e cumprir estas instruções.

► Exceto em algumas situações inesperadas, os utilizadores devem estar familiarizados com a utilização e as precauções.

1. Guia de instalação

1.1 Lista de acessórios padrão

Após abrir a embalagem, verifique se as seguintes peças estão completas na embalagem:

Tabela a:

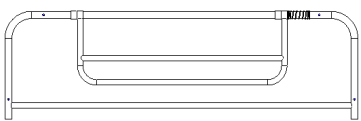
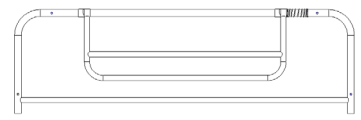
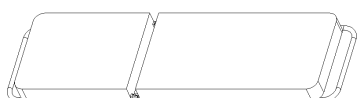
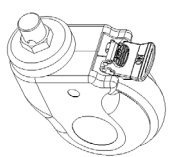
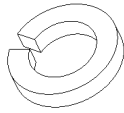
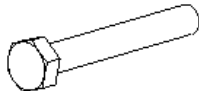
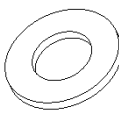
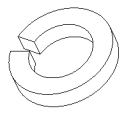
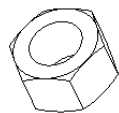
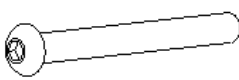
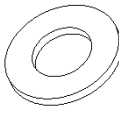
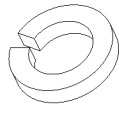
N.	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Pé direito		L1600*W485 mm	1	pc
2	Pé esquerdo		L1600*W485mm	1	pc
3	Tubo de ligação do pé		Φ32*551-M8 mm	2	pcs
4	O tubo de conexão do pé tem orifícios		Φ32*551-M8 mm	2	pcs
5	Estrutura da cama		L1960*W520 mm	1	pcs
6	Rodízios		Roda com cobertura de 5 polegadas com parafuso e travão	4	pcs
7	Polo IV		Φ 16-19 mm/branco sujo	1	pcs
8	Parafuso	/	Consulte a Tabela a.1	1	conjunto



Tabela a.1:

N.	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Arruela de pressão		$\Phi 16 * \Phi 23,8 * H3,5 \text{ mm}$	4	pcs
2	Parafuso sextavado		M8*70 mm	4	unidades
3	Arruela plana		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2 \text{ mm}$	4	pcs
4	Arruela de pressão		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5 \text{ mm}$	4	pcs
5	Porca de bloqueio		M8 mm	4	pcs
6	Parafuso com encaixe		M8*45 mm	8	pcs
7	Arruela plana		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2 \text{ mm}$	8	pcs
8	Arruela de pressão		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5 \text{ mm}$	8	pcs

1.2 Instalar rodízios



Coloque uma almofada protetora e vire o corpo da cama de cabeça para baixo;

Retire a arruela de pressão $\Phi 16$ do pacote de parafusos, retire a roda de cobertura, insira a roda de cobertura no tubo e aperte no sentido horário, e depois aperte com uma chave hexagonal.

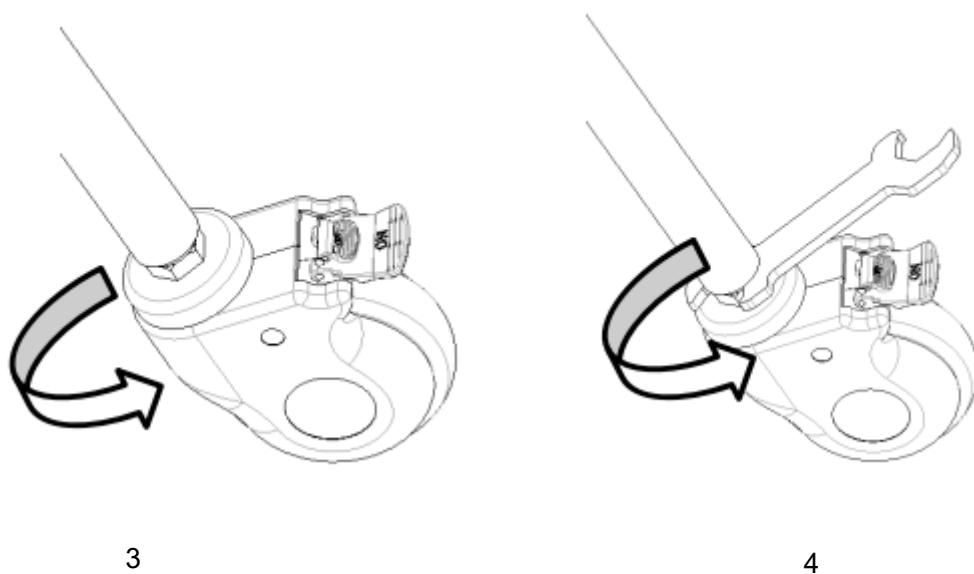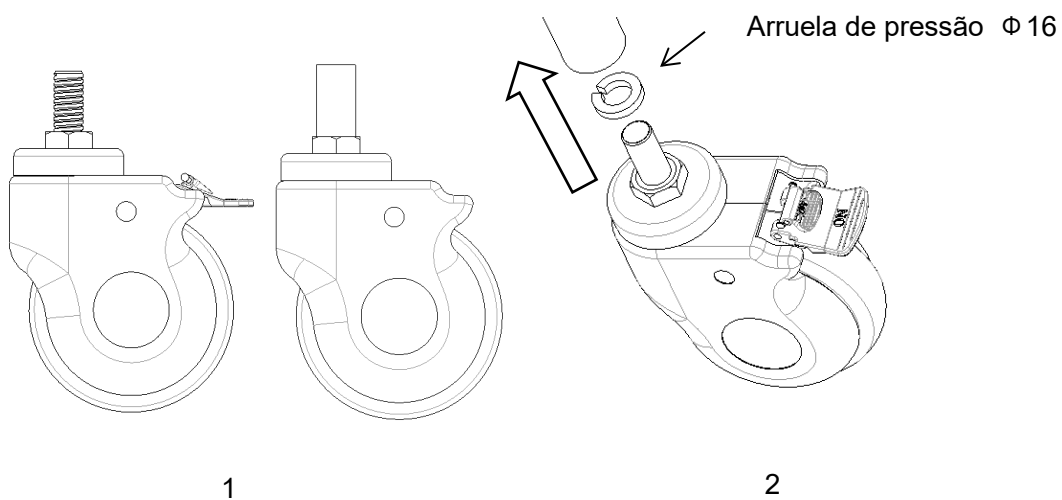



1.3 Instalar os pés

Fixe o pé com uma chave Allen, conforme mostrado na figura.

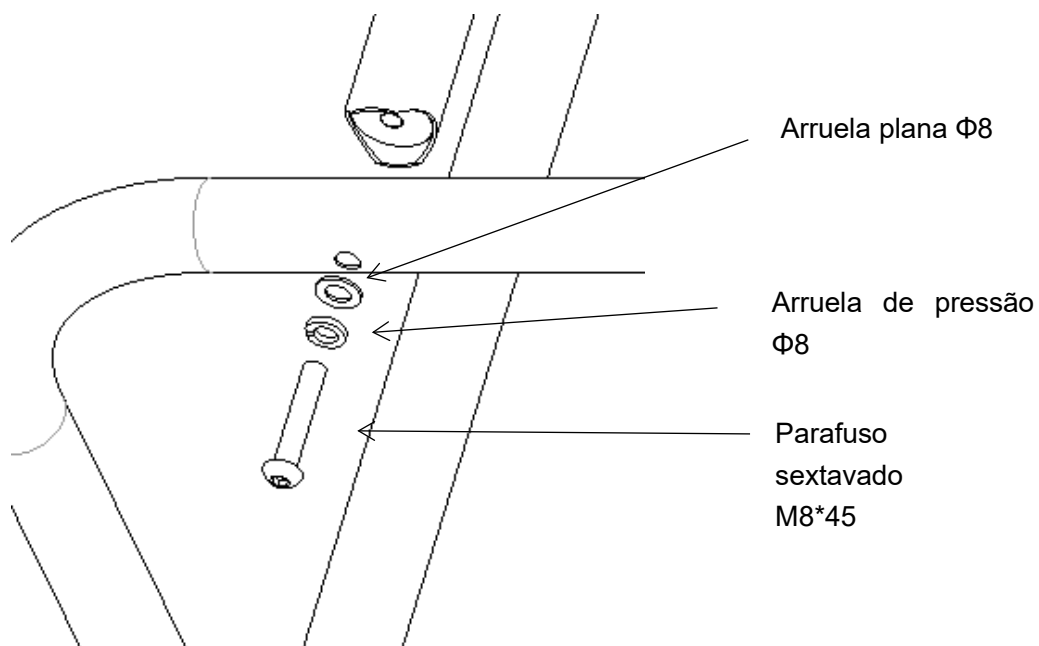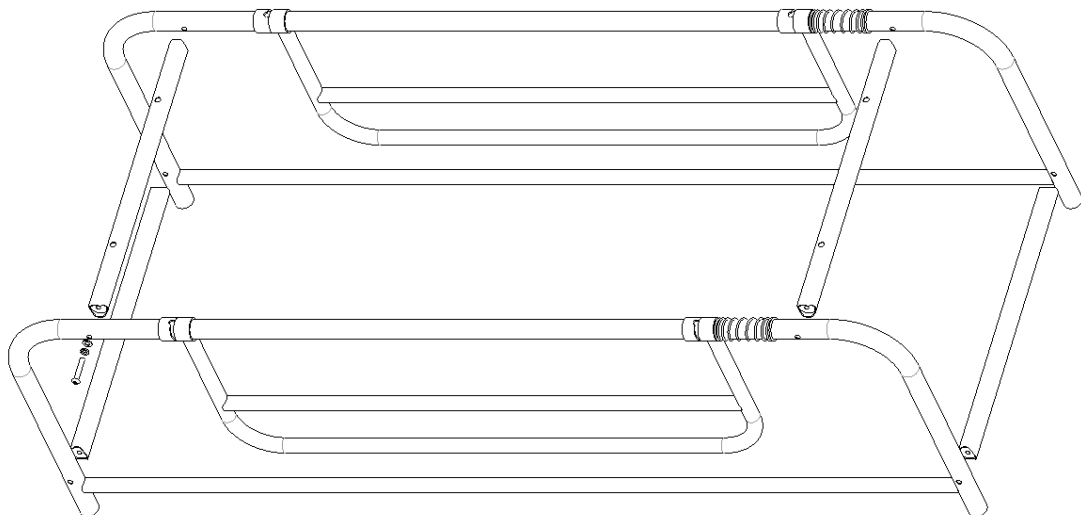



1.4 Instalar a placa da cama

Coloque a cama na posição vertical, levante a placa traseira, retire os parafusos e instale conforme mostrado.

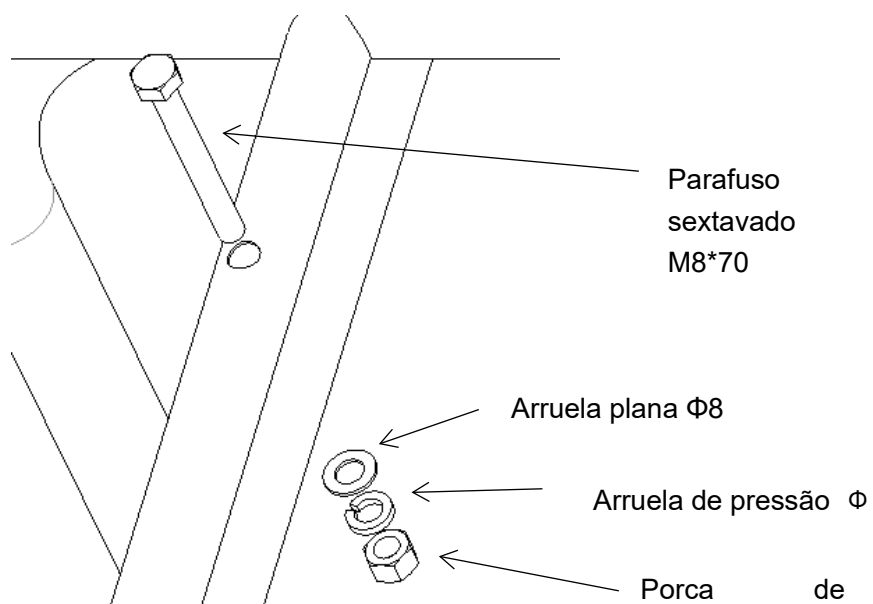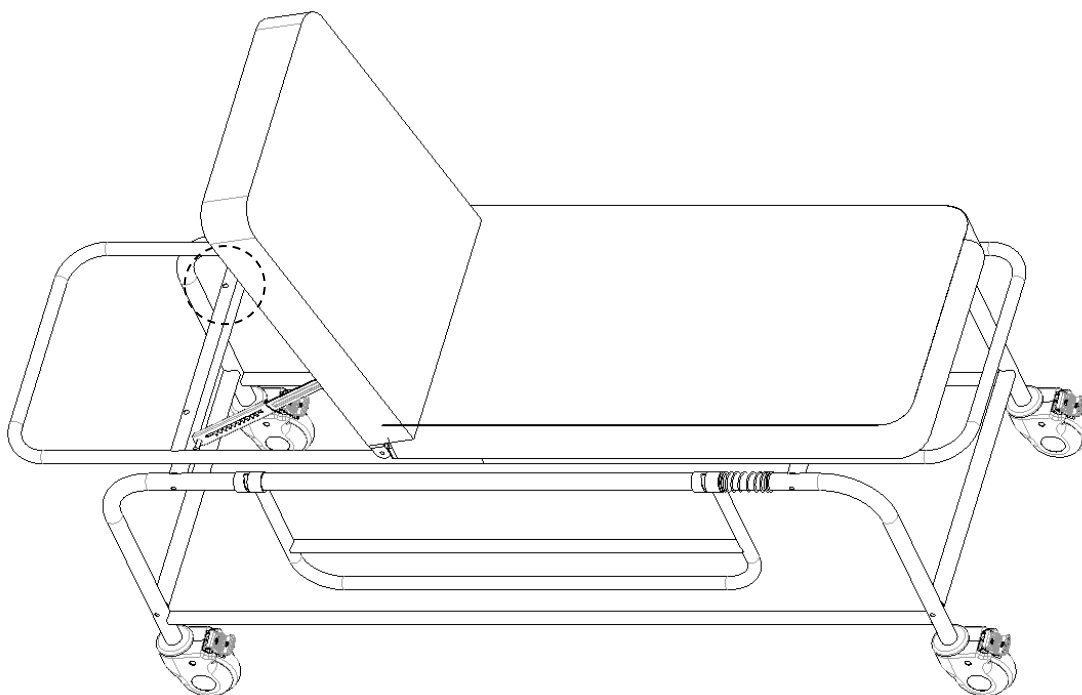


Coloque uma camada de almofadas protetoras e vire o corpo principal da cama de cabeça para baixo; remova os parafusos e instale conforme mostrado.

(Para facilitar a observação, esconda temporariamente a placa da cama.)

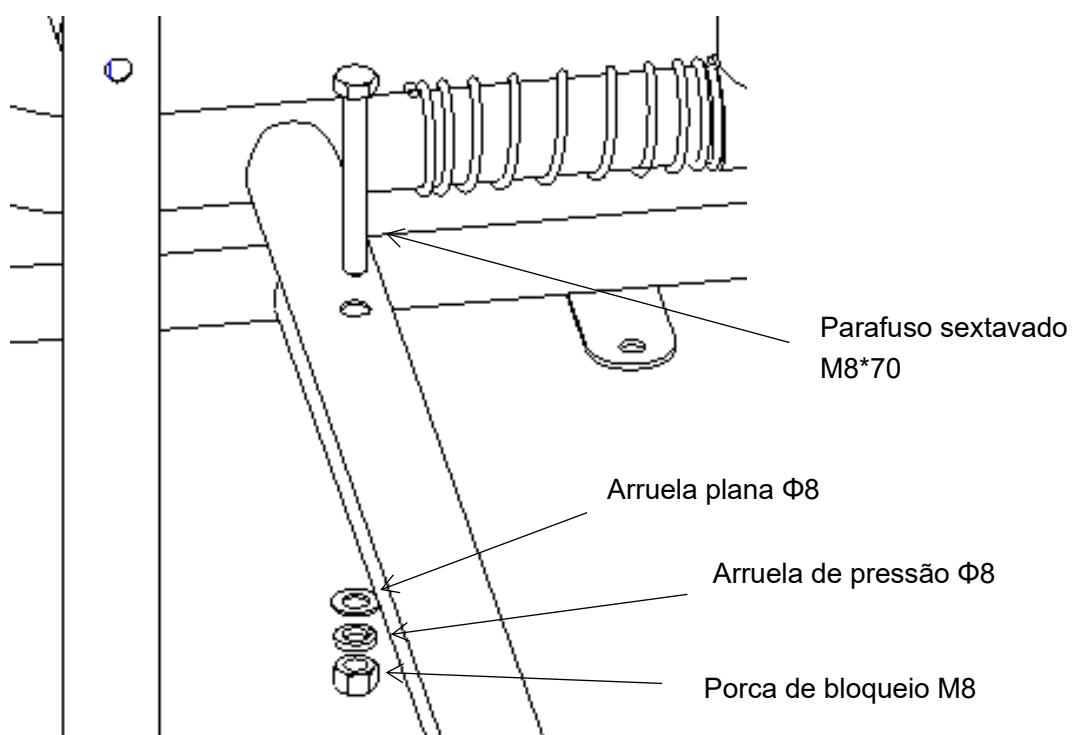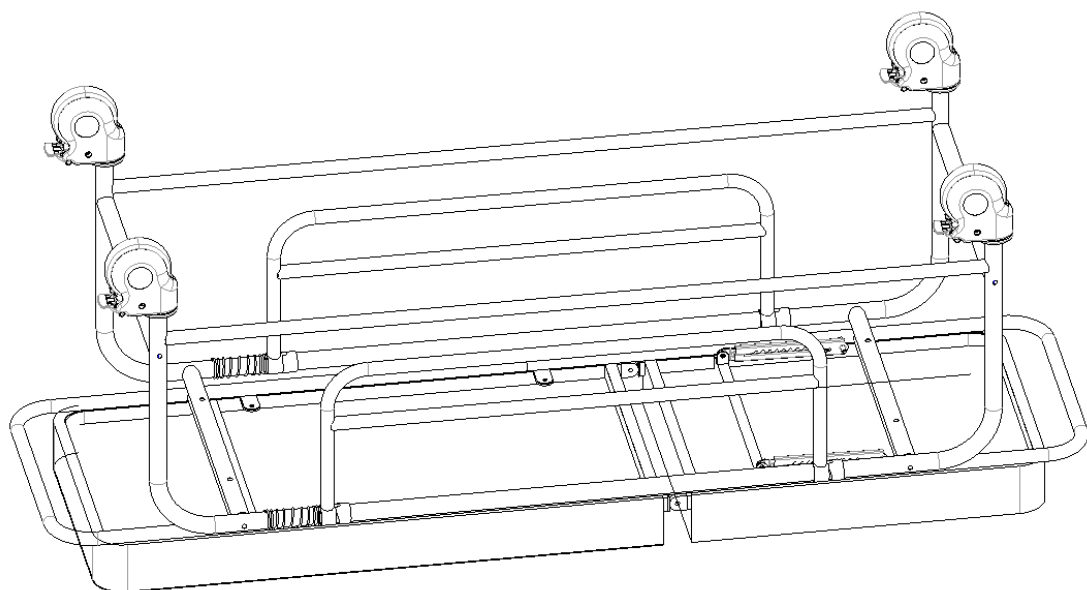


2. Instruções do produto

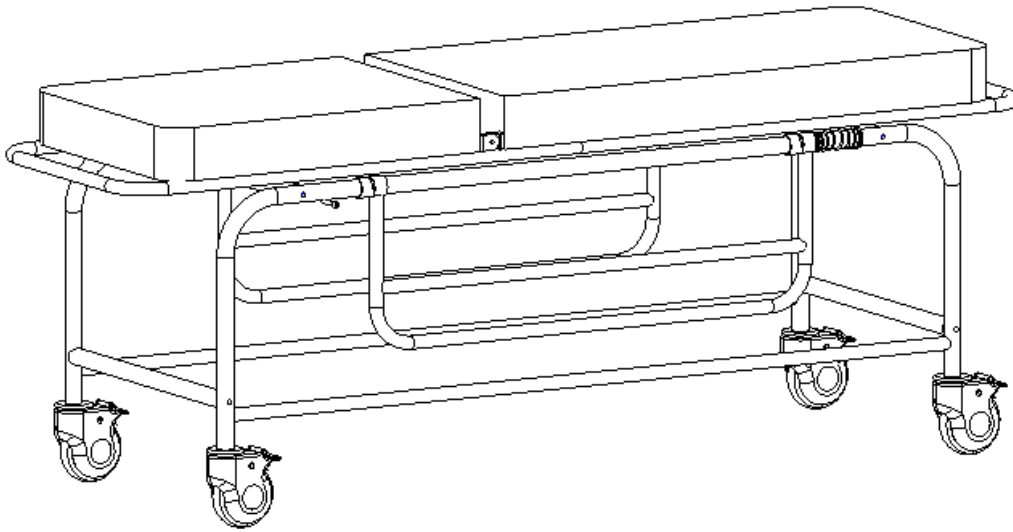


Dimensões	Comprimento	mm	196
	Largura		520
	Altura a partir do solo		770
Peso	Carga de trabalho segura	KG	17

2.1 Método de utilização dos rodízios

Travar o rodízio: Após empurrar a cama para a posição desejada, pressione o botão ON com o pé e trave o rodízio quando ouvir um "clique", conforme mostrado na figura abaixo.

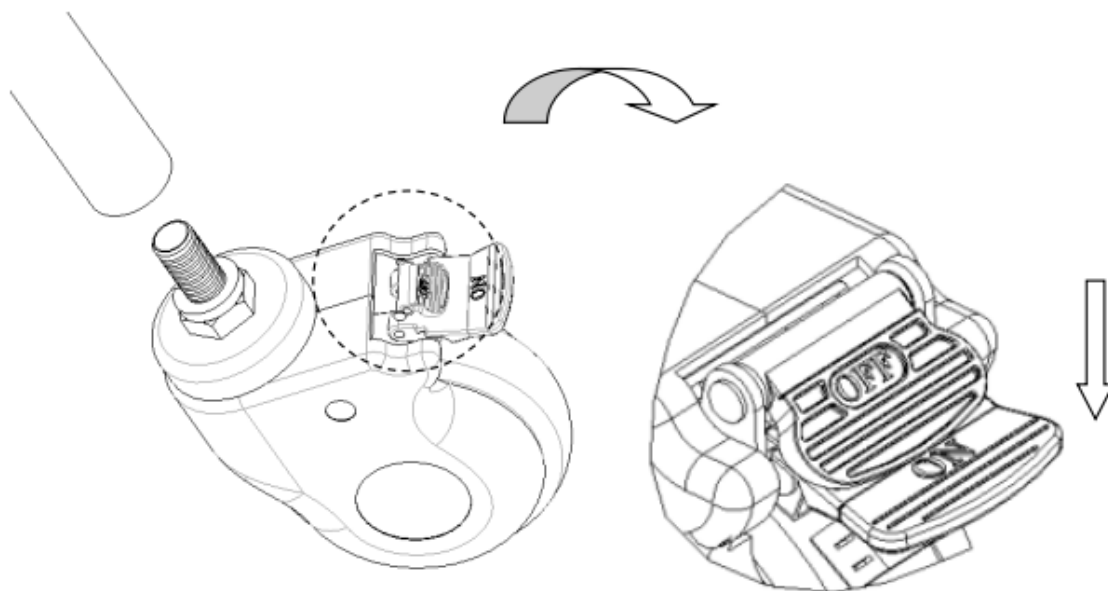


Desbloquear o rodízio: Pressione o botão OFF com o pé e desbloqueie o rodízio quando ouvir um "clique".

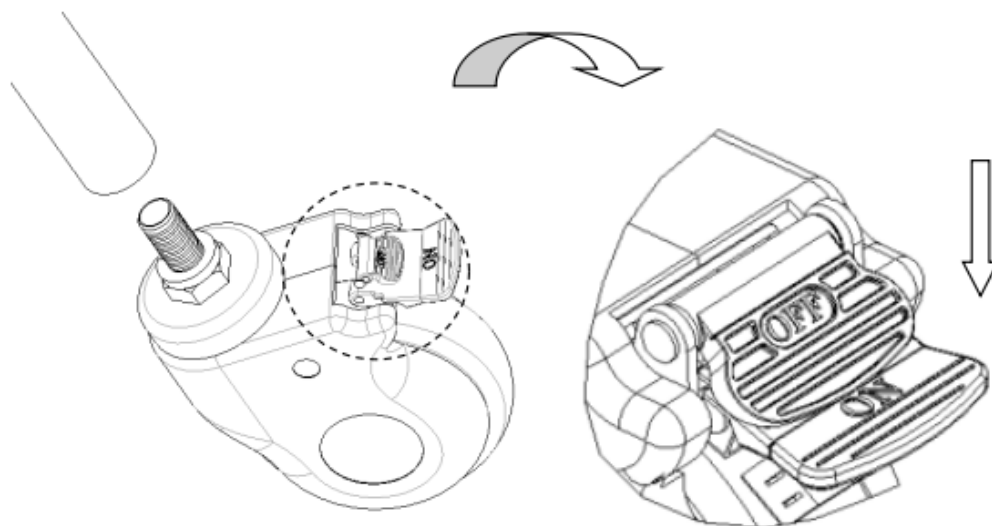


2.2 Método de utilização das grades de proteção

Levante a guarda, quando ouvir o som de «clique», significa que a guarda está bloqueada.

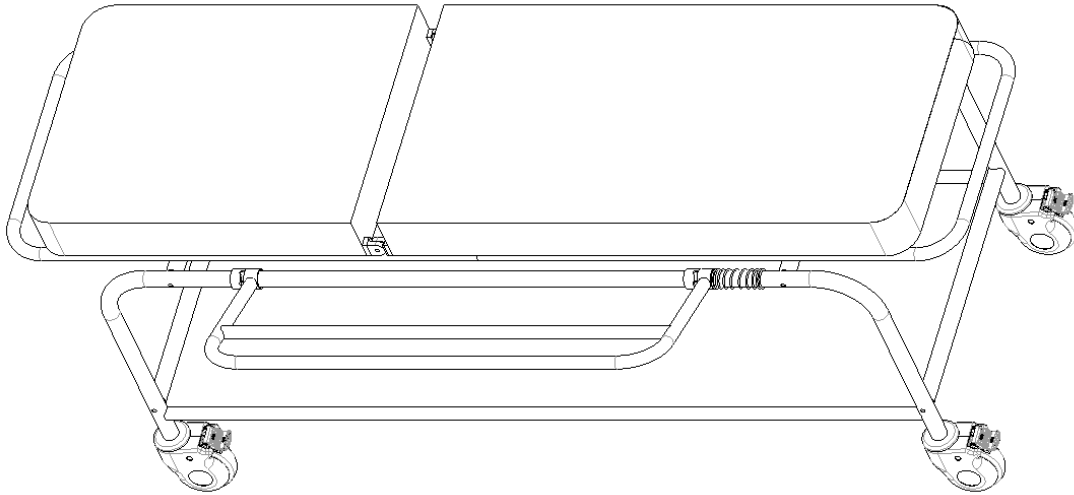


Abaixe a guarda, puxe-a para trás na direção da mola, conforme mostrado na figura, e depois abaixe-a.

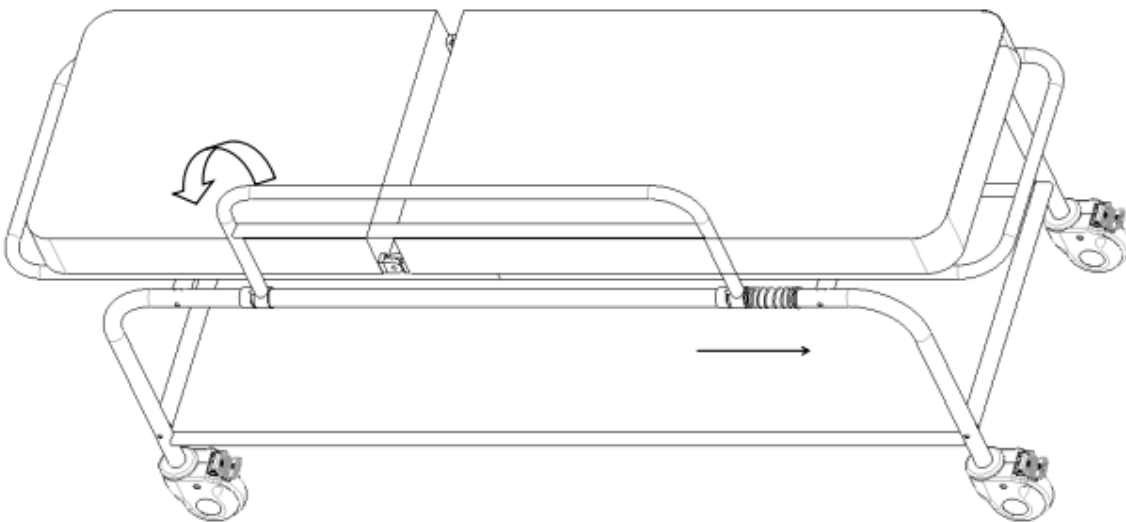



2.3 Instruções do painel traseiro

Levante o painel traseiro e solte-o na posição designada para fixar automaticamente a posição.

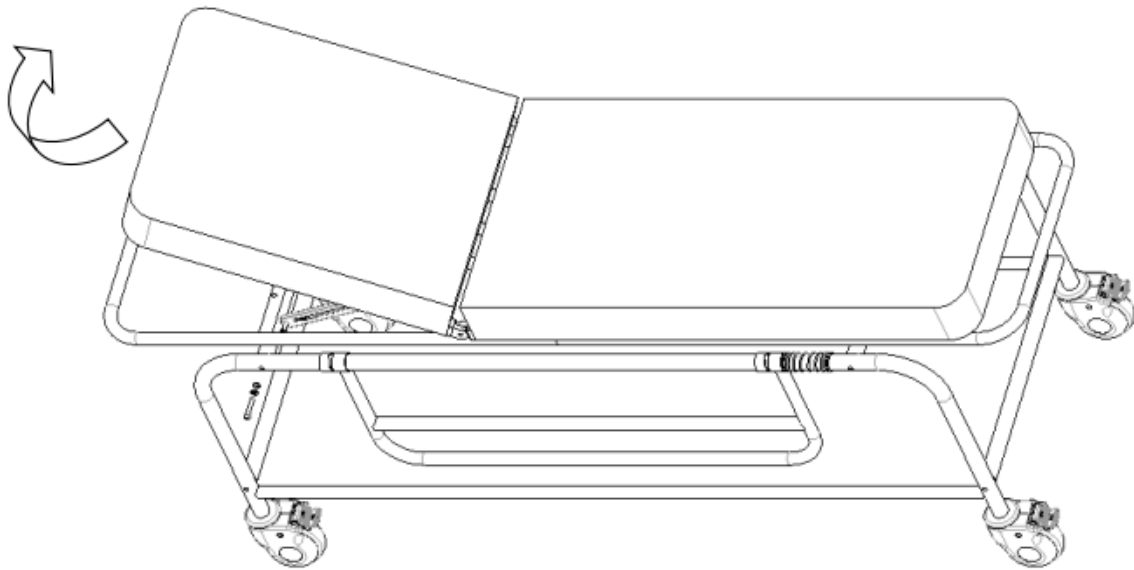

Levante o painel traseiro até à altura máxima e, em seguida, abaixe-o para baixar a parte traseira.

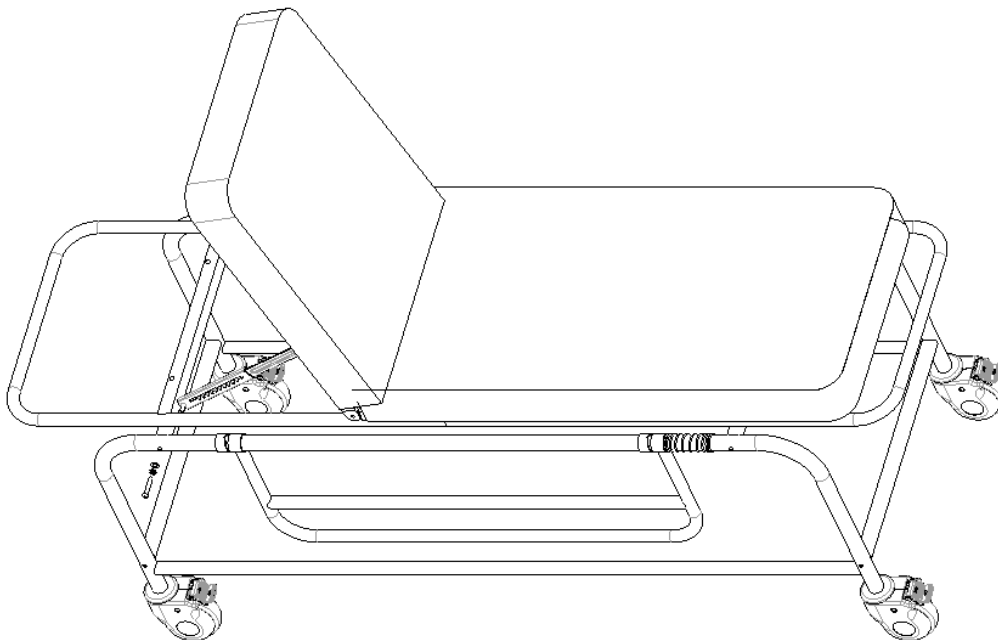

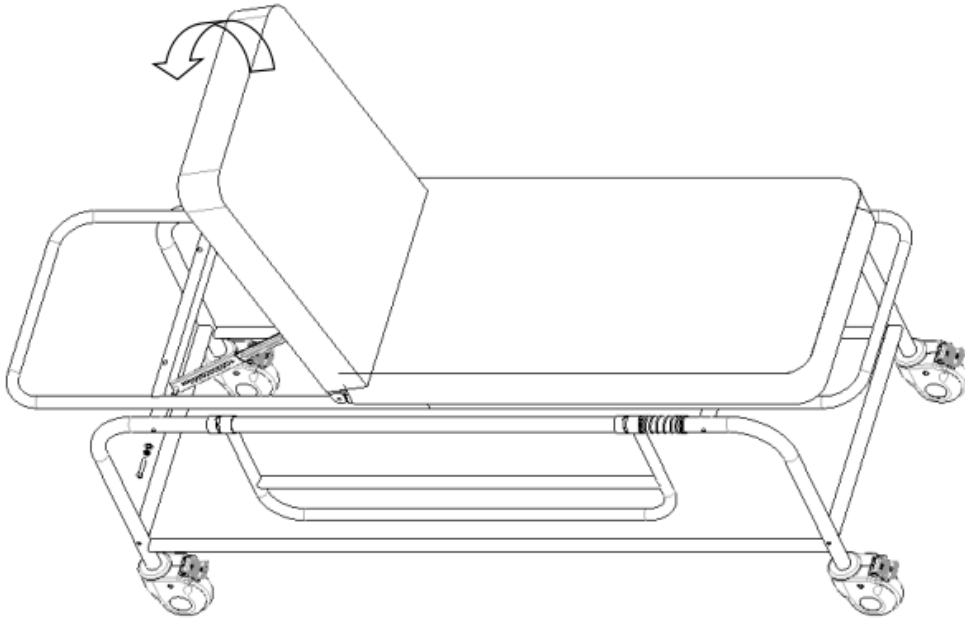


2.4 Instalação do suporte para soro

Instalação da parte fêmea: Pressione o gancho de plástico (parte fêmea) para baixo no tubo de aço inoxidável de $\Phi 16$ mm.

Instalação da parte macho: Coloque o gancho de plástico (parte macho) diretamente acima da parte fêmea em forma de cruz e, em seguida, alinhe as fivelas na parte macho com as ranhuras na parte fêmea e pressione para baixo. Depois de ouvir um "clique", verifique se a extremidade da fivela está bem apertada. Se estiver, conclua a instalação; caso contrário, continue a pressionar para baixo até que a fivela esteja bem apertada.

Insira o suporte para soro instalado verticalmente na previsão do suporte para soro. (A seta na imagem mostra a previsão do suporte para soro)

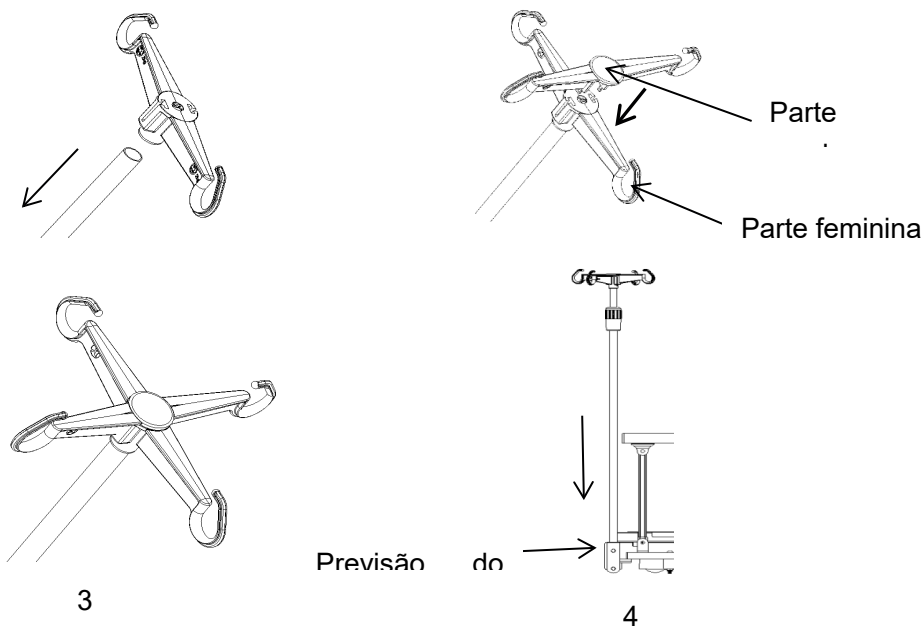


2.4. 2 Método de utilização do suporte para soro

Ajustar a altura do suporte para soro:

1. Desaperte cuidadosamente a manga exterior no sentido anti-horário, insira o tubo interior do suporte para soro na manga exterior e, em seguida, ajuste o comprimento da haste de extensão para cima e para baixo;
2. Ajuste o comprimento necessário e, em seguida, aperte cuidadosamente a manga exterior no sentido horário. A carga máxima de cada gancho é de 2 kg, num total de 8 kg.

(Ajuste de altura: 890-1540 mm)

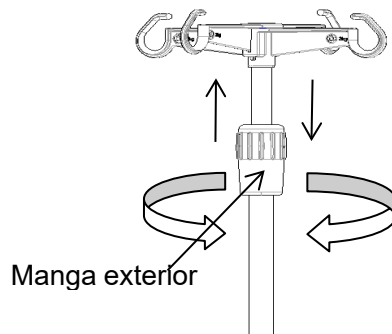

3. Exclusão de falhas

Falhas comuns	Razões prováveis	Métodos de exclusão
Dificuldade em mover todo o carrinho do paciente	1. O rodízio está bloqueado sem libertar a alavanca 2. O rodízio está danificado	1. Solte o travão, verifique 2.1 2. Substitua o rodízio, verifique 1.2

4. Manutenção do carrinho de paciente em aço inoxidável

1. Para utilizar o carrinho de paciente com segurança, é necessário realizar inspeções de

segurança regulares no carrinho. Recomenda-se verificar a cada seis meses para garantir que as conexões não estejam soltas e que todas as operações estejam normais.

2. Quando a estrutura do carrinho de paciente envelhece e atinge um determinado tempo de manutenção, as peças metálicas e plásticas da estrutura do carrinho de paciente podem ser recicladas.

3. Evite riscar o painel com aparelhos de ângulo agudo ou facas durante o uso e limpe-o frequentemente para mantê-lo limpo e seco.

4. Se o painel for acidentalmente manchado, recomenda-se limpá-lo. Não use produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar o carrinho do paciente, pois isso fará com que a superfície de aço inoxidável enferruje.

5. Verifique regularmente os rodízios para evitar batidas ou sobrecargas, o que causará danos aos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a frenagem, pois isso causará danos ao sistema de freio.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detectado por inspeção visual. Alguns fios de tecido e outros acúmulos podem estar enrolados na roda, remova os parafusos e porcas da roda, limpe os detritos e verifique se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser remontadas e utilizadas.

8. Para determinar se o rodírio deve ser substituído de acordo com o tempo de uso e o desgaste, pode substituir as rodas e certificar-se de que os parafusos e porcas dos eixos estão bem montados e conectados. Se possível, use arruelas de pressão ou contraporcas para ajudar neste processo.

9. Para os rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização. Para um carrinho de paciente equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez, o que lhe permitirá tentar empurrar o carrinho de paciente e verificar se o desempenho de um dos travões de cada rodízio está bom. Se a função do travão falhar devido ao desgaste ou danos nas rodas, substitua imediatamente as rodas e teste novamente o sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travagem do rodízio estiver danificado e o travão precisar de ser reparado ou substituído, contacte o nosso departamento de assistência pós-venda ou um revendedor autorizado pela nossa empresa. Sempre que os travões forem substituídos, o desempenho dos rodízios deve ser testado novamente.

5. Embalagem, transporte, armazenamento

1. A embalagem do carrinho de paciente em aço inoxidável é feita de acordo com o contrato ou a norma do produto.
2. Evite sair com pressa, vibrações violentas e proteja da luz solar e da chuva durante o transporte do carrinho de paciente em aço inoxidável.
3. O carrinho de paciente em aço inoxidável deve ser armazenado:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidade relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressão atmosférica: $500 \text{ hPa} \sim 1060 \text{ hPa}$.

6. Serviço pós-venda

1. Guarde os ficheiros que acompanham a máquina e as faturas deste produto de forma adequada, pois terá de os apresentar quando a empresa realizar a garantia e a manutenção do produto.
2. Se houver algum problema durante o uso, entre em contacto com a nossa empresa em tempo hábil, para que possamos fornecer suporte técnico e serviços de manutenção precisos e rápidos.
3. A partir da data de venda, se o produto estiver quebrado ou danificado devido à instalação e uso corretos de acordo com as especificações, o produto terá garantia gratuita de um ano e serviço de manutenção vitalícia com o "certificado" ou fatura.
4. A partir da data de compra, se estiver realmente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade dentro de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores uma reparação gratuita do produto.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO: SKB037(B) | REF.: 319-SKB037(B)

CAMILLA / STRETCHER / Civière / BARELLA / MACA / TRAGEBRETT



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

N.º 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parque de Demonstração, Cidade de Zhangjiagang,

Província de Jiangsu, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unidade 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Países Baixos



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

46980, València (Espanha)

LOTE:
HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ESTOQUE: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com