

# CAMILLA DE TRANSPORTE AVANZADO DE PACIENTE

Model SKB041-1

**Manual de Usuario**



## Contenido

|     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 1.  | Introducción del manual..... | 3 |
| 2.  | Alcance aplicable.....       | 3 |
| 3.  | Características.....         | 3 |
| 4.  | Parámetros Técnicos.....     | 3 |
| 5.  | Lista de partes.....         | 4 |
| 6.  | Método de Uso.....           | 4 |
| 7.  | Cuidados.....                | 7 |
| 8.  | Advertencias.....            | 7 |
| 9.  | Mantenimiento.....           | 8 |
| 10. | Almacenaje.....              | 9 |
| 11. | Transporte.....              | 9 |

Nota: El aspecto de los productos que se describen en este manual es un poco diferente, esto no afecta el rendimiento de los productos. Por favor, comprenda si le genera algún inconveniente en la operación

## 1. Introducción del manual

Por favor, lea atentamente las instrucciones ya que proporcionan información importante sobre SEGURIDAD DURANTE EL USO Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO, las descripciones e imágenes contenidas en la publicación no son restrictivas; tenemos el derecho de modificar cualquier información con fines de mejora sin ninguna obligación de actualizar este manual. Los gráficos y las imágenes contenidas en este manual son sólo ejemplos y pueden mejorar respecto a los productos.

## 2. Alcance aplicable

Se usa principalmente como mueble hospitalario, para el transporte y establecimiento y tratamiento de pacientes. No es estéril.

## 3. Características

El sistema de frenos avanzado controlado centralmente y las ruedas a prueba de polvo aplicadas a la camilla hacen que esta se mueva de forma constante, fiable y ligera. La camilla se puede subir y bajar, inclinar hacia adelante y atrás lo cual es controlado por pedales en dos lados de la misma. La cubierta inferior está hecha de material de polipropileno y moldeada por inyección que se puede limpiar fácilmente. La superficie de la camilla está separada de la estructura y la parte superior se apoya en la gran base hidráulica importada para hacer que la camilla nunca se balancee. Se completa con una base de infusión, gancho de drenaje y barandillas laterales plegables de aleación de aluminio. Es la mejor opción para la sala de urgencias, UCI, camilla de UCI y camilla de emergencia para la transferencia del paciente. La camilla está hecha de tubos de acero galvanizado y con superficie revestida por pulverización electrostática. La placa posterior se hace de tablero American electrotyped.

## 4. Parámetros Técnicos

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Modelo                              | SKK-B               |
| Tamaño global (Largo*Ancho* Alto)   | 1900*640*550-850 mm |
| Rango de ángulo de descanso espalda | 0°-75°(±5°)         |
| Capacidad de carga                  | 220 kg              |
| Espesor del colchón                 | 30 mm               |

## 5. Lista de partes

**Nota: Por favor verifique las partes antes de usar la cama.**

|                         |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camilla                 |   | Por favor pruebe la camilla de acuerdo al manual antes del uso.                                                                  |
| Atril I.V.              |   | El atril I.V. es guardado en la base del carro. Colóquelo en el agujero (en las esquinas)                                        |
| Ruedas de amortiguación |  | Las ruedas de amortiguación están en el empaque, no están fijadas. Por favor fijelas con los tornillos adjuntos antes de su uso. |

## 6. Método de Uso

6.1 Fije las partes arriba mostradas en las posiciones correctas antes de usar la camilla.



Coloque el colchón y asegúrese que su posición se limita al interior de la barra de soporte de colchón.

## 6.2 Opere manualmente la posición de descanso de espalda

Sujete la barra amarilla en la placa de cabeza y levante la placa de cabeza hacia arriba. El ángulo se puede ajustar entre 0-75 ° (Figura 2 y 3)



Figura 2



Figura 3

## 6.3 Ajuste manual de altura por manivela

Gire la manivela para ajustar la altura. (Figuras 4 y 5)



Figura 4

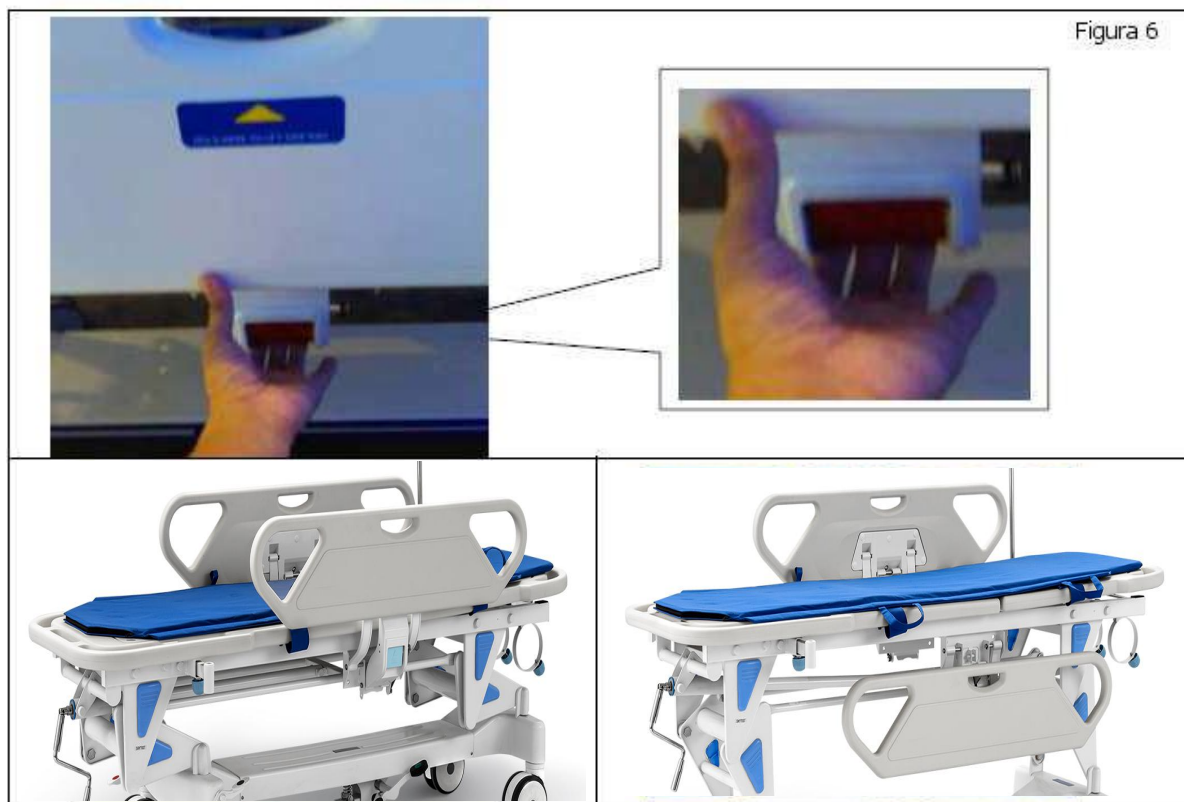


Figura 5

## 6.4 Uso de la barandilla lateral

La barandilla es de tipo colapso. Tire de la perilla y baje la barandilla. Se puede plegar hacia abajo. (Figura 6)

**NOTA: Siempre fije la barandilla cuando el paciente está en la camilla.**



## 6.7 Moviendo y deteniendo la camilla

### 6.7.1 Freno

Pise el pedal de freno de color rojo para frenar la camilla. Pise el pedal de color verde para moverla. (Figura 7)

### 6.7.2 Rueda de dirección

Hay una quinta rueda de dirección debajo del carro. Pise el pedal rojo hacia abajo, para una sola dirección, la rueda llevará a la camilla a moverse en una sola dirección. Pise el pedal verde hacia abajo, para multi-dirección, las ruedas se pueden ocultar hacia arriba, de modo que el carro se pueda mover en cualquier dirección. (Figura 7)



Figura 7



Figura 8

## 6.8 Almacenaje del cilindro de oxígeno

Hay un lugar para el almacenaje del cilindro de oxígeno. Es en la base inferior.



## 7. Cuidados

7.1 Los operadores deben leer atentamente este manual, seguir las instrucciones y familiarizarse con los procedimientos de operación y mantenimiento correctos de la camilla, de otro modo la compañía no será responsable de los daños ocurridos.

7.2 Verifique que las partes estén bien instaladas y en la posición correcta antes de operar.

7.3 Están prohibidas las acciones ilegales o arriesgadas y la sobrecarga, para evitar el uso indebido provocando daños en la cama de hospital.

7.4 Cuando levante el descanso de espalda, no debe haber obstrucciones en camino del ascenso.

7.5 Después de cada uso, la camilla debe ponerse en su posición más baja para mantener el mecanismo de elevación en uso mínimo, las unidades auxiliares deben colocarse en su lugar original.

## 8. Advertencias



NO PERMITA A LOS NIÑOS PEQUEÑOS ESTAR ENCIMA O CERCA DE LA CAMA DURANTE LA OPERACIÓN.



NO PERMITA QUE EL DISPOSITIVO SEA OPERADO POR NIÑOS PEQUEÑOS.



CUANDO OPERA LAS FUNCIONES DE LA CAMILLA, SIEMPRE ASEGÚRESE QUE EL INDIVIDUO CONFINADO A LA CAMA ESTÁ POSICIONADO DE FORMA CORRECTA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA CAMA. NO DEJE QUE NINGUNA EXTREMIDAD SOBRESALGA POR LOS LADOS O ENTRE LAS BARANDILLAS DE LA CAMA CUANDO REALICE ALGUNA FUNCIÓN.



LAS ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA APLICADAS A LA CAMA DEMARCAN LAS PRACTICAS NO SEGURAS O AMENAZAS QUE PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS PERSONALES O AL EQUIPO.



CUANDO USE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN TIPO MÁSCARA O NASAL, LOS TUBOS DE OXÍGENO O AIRE DEBEN SER ASEGURADOS Y POSICIONADOS DE FORMA CORRECTA PARA GARANTIZAR QUE NO HAYA ENREDOS DE LOS MISMOS Y EVENTUALMENTE ARRANCADOS DURANTE LA OPERACIÓN NORMAL DE LA CAMA.



MANTENGA TODAS LAS PARTES MÓVILES LIBRES DE OBSTRUCCIONES (POR EJEMPLO SABANAS/MANTAS, MANTAS/ALMOHADILLAS DE CALEFACCIÓN, TUBOS, Y OTROS PRODUCTOS)

## **9. Mantenimiento**

### **LISTA DE CHEQUEOS**

- 9.1 Los accesorios se mueven y conectan correctamente.
- 9.2 Descanso de espalda operando y conectado correctamente.
- 9.3 Estado auxiliar operando apropiadamente.
- 9.4 Trendelenburg/Trendelenburg invertido operando apropiadamente.
- 9.5 No hay roturas ni grietas en la funda del colchón.
- 9.6 Cadena de tierra intacta.
- 9.7 Accesorios y hardware de montaje en buen estado y funcionando correctamente.

### **NOTA**

El mantenimiento preventivo debe ser realizado como mínimo de forma anual. El mantenimiento preventivo puede necesitar realizarse más frecuentemente de acuerdo con el nivel de uso del producto.

## 10. Almacenaje


10.1 Guarde esta cama de hospital en un lugar de ambiente a prueba de humedad y no corrosivo.

## 11. Transporte

11.1 Se transporta por medios de transporte comunes: Barco, avión, tren, camión.

11.2 La cama de hospital puede manejarse manualmente.

11.3 No debe arrojarse ni dejarse caer durante el transporte.

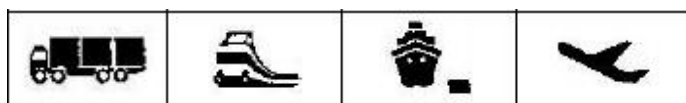

MODEL:SKB041-1 | REF.: 319-SKB041-1

**CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES/TRANSPORT BED WITH HANDRAILS  
FOR PATIENTS / BRANCARD TRANSPORT DES PATIENTS / LETTO PER TRASPORTO  
PAZIENTI / TRANSPORTE DE MACA CORRIMAO/ PATIENTEN TRANSPORT LIEGE**



**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture  
Demonstration Park, Zhangjiagang City,  
Jiangsu Province, China |



**SUNGO Europe B.V.**

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands



Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405  
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica.Paterna,  
Valencia(Spain)

**LOT:HW25034**