

Fauteuil
roulant

Manuel d'utilisation
--monte-escalier électrique



SOMMAIRE

I. Présentation du fauteuil roulant électrique monte-escalier	3
II. Structure du fauteuil roulant.....	3
III. Paramètres de performance	4
IV. Fonctionnement en montée	4
V. Fonctionnement en descente.....	5
VI. Fonctionnement de chaque pièce.....	6
a. Poignée.....	6
b. Poignée de levage avant.....	6
c. Cadre de chenille en caoutchouc.....	6
d. Tige de traction	7
e. Fauteuil roulant pliable	7
f. Mains courantes	7
g. Pédale.....	7
h. Ceinture de sécurité, appuie-tête et sangles	8
i. Batterie.....	8
j. Réglage des rails	8
k. Freins	9
VII. Instructions du panneau de commande	9
VIII. Entretien quotidien.....	10
IX. Précautions relatives à la batterie au lithium.....	10
X. Précautions relatives à la recharge	10
XI. Liste de colisage.....	10
XII. Période de garantie.....	11

Merci d'utiliser nos produits !

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et vous familiariser avec le fonctionnement de ce produit !

I. Présentation du fauteuil roulant électrique pour monter les escaliers

SKB1C10 Fauteuil monte-escalier en alliage d'aluminium, léger, facile à plier, facile à utiliser, etc. Le moteur est sans balais et divisé en trois vitesses, de la plus rapide à la plus lente. La batterie au lithium est légère et facile à démonter. Une fois plié, le fauteuil prend peu de place et peut être transporté dans une voiture particulière.


II. Structure du fauteuil roulant




III. Paramètres de performance

Nom	Paramètres techniques
Moteur	Sans balais, 24 V CC, 200 W
Batterie	29,4 V 13,2 Ah
Charge	29,4 V 2 A
Vitesse à l'étage	Élevée ; Moyenne ; Faible ;
Vitesse en descente	Élevée ; Moyenne ; Faible ;

IV. Fonctionnement à l'étage

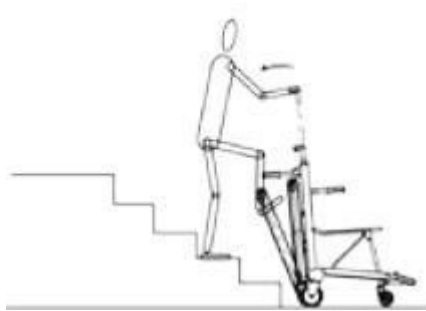

1. Ouvrez le châssis, puis ajustez la position de la tige. Tirez le levier à deux mains, placez le pied droit sur le châssis au-dessus du tube transversal, puis descendez le fauteuil.

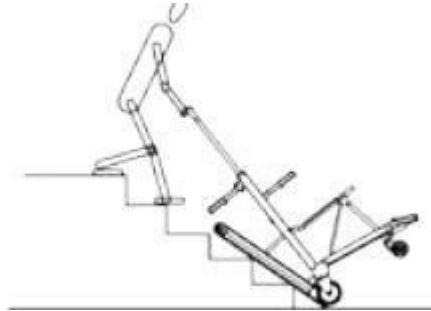

2. Placez le fauteuil sur les escaliers, appuyez sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande et mettez l'appareil sous tension. Maintenez le bouton « haut » enfoncé et le fauteuil se déplacera vers le haut.



3. Si vous devez vous arrêter à mi-chemin, relâchez le bouton « haut ». Pendant la montée, les mains n'ont pas besoin de tirer le fauteuil vers le haut. Il doit rester à angle droit par rapport à l'escalier. Il suffit de tenir le fauteuil et d'exercer une légère pression.



4. Lorsque vous atteignez la dernière marche, tirez la barre de liaison à deux mains et soulevez lentement le fauteuil pour le poser au sol. Il n'est pas nécessaire de monter les marches, l'opération ne demande donc pas beaucoup d'efforts.



5. Lorsque la roue avant entre dans l'escalier, abaissez lentement le fauteuil avec le pied droit jusqu'à ce qu'il touche le sol.



6. Saisissez la poignée, soulevez le fauteuil et passez à l'autre volée d'escaliers.

V. Opération en descente




1. Poussez le fauteuil monte-escalier sur le sol jusqu'à ce que les roues avant soient placées sur le bord de l'escalier.



2. Posez le pied droit sur le tube transversal inférieur, tirez la tige de liaison vers l'arrière à deux mains pour incliner le fauteuil vers le bas. Appuyez ensuite sur la touche de l'escalier.



3. Abaissez lentement le fauteuil sur le premier rebord et inclinez-le vers les marches.

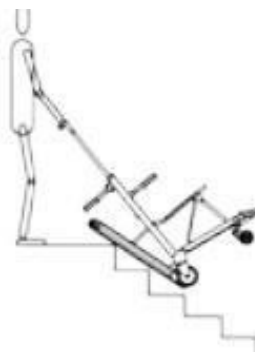

4. Penchez-vous légèrement dans l'angle formé par la sangle et les marches.



5. Pendant la descente, placez les mains légèrement vers le bas de la tige pour éviter les chocs. Lorsque vous vous arrêtez à mi-chemin, relâchez la touche.



6. Lorsque le rail atteint le palier, relâchez le bouton et soulevez lentement le siège.

VI. Fonctionnement de chaque partie

a. Poignée



Ouverture : appuyez sur le bouton. Tout en appuyant, soulevez légèrement la poignée, puis relâchez le bouton pour la fixer.

Verrouillage : appuyez sur le bouton, soulevez la poignée et relâchez le bouton. Le verrouillage est alors activé.

b. Poignée de levage avant



Appuyez sur le bouton rouge pour déverrouiller le trou et sortir la poignée. Relâchez le bouton pour fixer la poignée.

c. Cadre en caoutchouc



Ouverture : appuyez sur la pédale ; le châssis à chenilles s'ouvre alors automatiquement grâce à son système de levage à gaz.

Verrouillage : soulevez le fauteuil d'évacuation à deux mains et maintenez-le en position basse, appuyez sur la barre de support de la chenille

vers le bas jusqu'à ce que la pédale la verrouille à nouveau.

d. Tirette



Poussez la barre vers l'intérieur pour déverrouiller le système de verrouillage. Une fois déverrouillé, tirez la barre de réglage vers le haut ou vers le bas pour l'ajuster à la hauteur souhaitée.

e. Fauteuil roulant pliable



Saisissez la tige de support et tirez-la vers le bas. Lorsque le verrou sort de la fente incurvée, tournez le tube de la surface du siège pour plier la surface du siège.

f. Barres d'appui



g. Pédale



h. Ceinture de sécurité, appui-tête et sangles



i. Batterie



Démontage : ouvrez la clé, maintenez la batterie et tirez-la latéralement. Vérifiez l'alimentation : maintenez enfoncé le symbole d'alimentation de la batterie.

Chargement : la fiche du chargeur est insérée dans le port de chargement de la batterie et l'autre extrémité est connectée à une source de courant alternatif.

j. Réglage des roues



k. Freins



VII. Instructions du panneau de commande



Alimentation : une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, les autres touches peuvent déjà fonctionner. Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, le voyant s'allume ainsi que l'écran LCD.

Éclairage : le bouton d'éclairage contrôle les lumières. Si vous appuyez une fois, les lumières s'allument ; si vous appuyez deux fois, les lumières s'éteignent. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'éclairage, les lumières des boutons « haut » et « bas » s'allument.

VIII. Entretien quotidien

Lorsque le dispositif de rétraction des chenilles et le dispositif de pliage du siège ne fonctionnent pas correctement, il est nécessaire de les lubrifier. Nettoyez les sièges régulièrement pour un entretien adéquat.

IX. Précautions relatives aux batteries au lithium

Les batteries au lithium sont des consommables. Après une période d'utilisation (cycle de charge-décharge de la batterie), leur capacité diminue progressivement. Avec le temps, la durée de vie de la batterie diminue progressivement en raison de l'usure normale. Cependant, pendant la période de garantie, après avoir testé la capacité de la batterie et constaté qu'elle est tombée à la valeur standard de 50 % ou moins, la batterie n'est plus valide et est couverte par la garantie de la société. Dans ce cas, veuillez contacter votre fournisseur en temps utile.

Évitez les décharges profondes, lorsque la batterie est insuffisante ou tout autre moyen entraînant une sous-tension : pensez à recharger la batterie à temps et à ne pas démarrer l'appareil de manière répétée.

X. Précautions de charge

Après la charge, débranchez d'abord la fiche 220 V CA du chargeur, puis débranchez la fiche de sortie. Vos mains doivent être sèches lorsque vous branchez l'appareil. Si la température anormale est trop élevée ou inhabituelle, veuillez arrêter immédiatement la charge et contacter le fournisseur pour la réparation.

XI. Liste de colisage

Nom	Q
Fauteuil roulant monte-escalier	
Batterie au lithium	1
Appuie-tête	1
Chargeur	1
Clé Allen	1
Instructions	1

XII. Période de garantie

Nom	Durée
Fauteuil roulant monte-escalier	Deux ans
Batterie au lithium	Un an
Moteur	Deux ans
Chargeur	Six mois
Piste	Un an
Carte de circuit imprimé	Un an



MODEL:SKB1C10 | REF.: 319-SKB1C10

SILLA DE EVACUACION Y RESCATE ELECTRICA/ELECTRIC EVAC CHAIR / FAUTEUIL D' EVACUATION ET DE SECOURS ELECTRIQUE/ SEDIA PORTANTINA ELETTRICA PER EVACUAZIONE DEMERGENZA / EVACUACAO ELETRICA E CADEIRA DE RESGATE/ ELEKTRISCHER EVAKUIERUNGS-UND RETTUNGSSTUHL



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)



LOT:

