




Manuel d'utilisation

A3k Lit d'hôpital manuel

Code d'enregistrement : SK-CD1

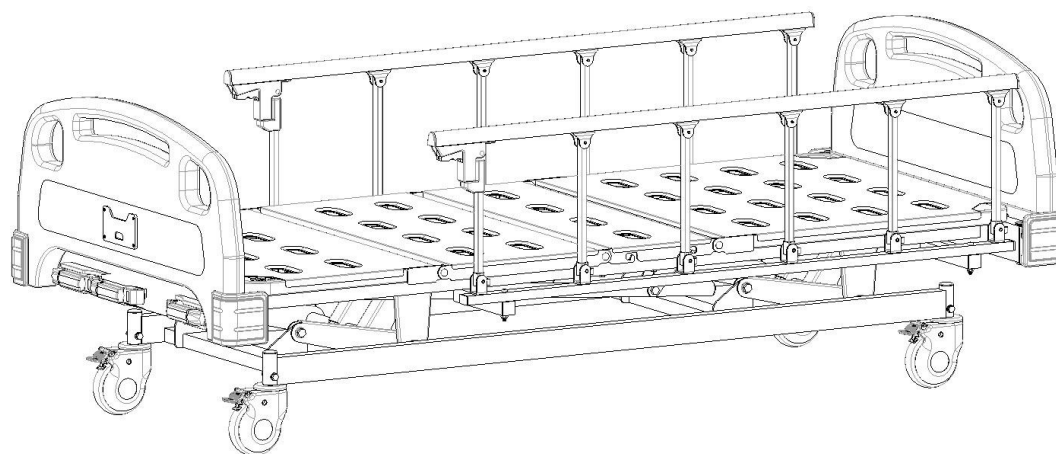

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSAIRE : 870098

Contenu

Introduction au manuel	2
1. Guide d'installation	2
1.1 Liste des accessoires standard	5
1.2 Installation des roulettes	5
1.3 Installation des garde-corps latéraux	6
1.4 Installation du support de matelas en PP	7
1.5 Méthode d'assemblage de la tête et du pied de lit	8
1.6 Installation du pied à perfusion	9
2. Mode d'emploi	10
2.1 Mode d'emploi des roulettes	11
2.2 Méthode d'utilisation des garde-corps	12
2.3 Utilisation des crochets de drainage	12
2.4 Utilisation du pied à perfusion	14
2.5 Utilisation de la manivelle	15
3. Remplacement des pièces de rechange et entretien	16
4. Dépannage	16
5. Entretien du lit	17
6. Nettoyage du lit	18
7. Nettoyage et entretien du matelas	18
8. Détection et entretien des roulettes	19
9. Entretien des garde-corps	20
10. Liste des pièces détachées	20
11. Emballage, transport, stockage	22
12. Service après-vente	22

Manuel d' t roduction

Les lits d'hôpital sont des équipements essentiels au bien-être, au traitement et au rétablissement des patients alités. Ils permettent aux patients de rester dans des positions plus confortables, ainsi que dans des positions parfois recommandées par les médecins, ce qui serait très difficile dans un lit normal, où il faudrait constamment placer ou retirer des supports. Les lits d'hôpital peuvent être manuels ou automatiques. Le lit d'hôpital automatique est commandé par des boutons situés sur les panneaux latéraux du lit ou par une télécommande. Le lit d'hôpital manuel dispose de deux mouvements actionnés par des manivelles, permettant de relever la tête, ce qui facilite le moment de l'alimentation, évite les reflux et facilite la respiration. Il permet également de relever la partie des pieds, ce qui améliore la circulation sanguine des membres inférieurs, compte tenu de la longue période que le patient passera allongé. D'autre part, la sécurité du patient est très importante pendant cette période de convalescence. C'est pourquoi tous nos lits sont équipés de barrières latérales qui empêchent le patient de se lever pendant la nuit et de risquer de tomber.

Remarque :

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre strictement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de prendre connaissance du manuel d'utilisation et de toutes les précautions.

- ▶ Ce manuel s'applique au lit d'hôpital manuel A3k. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle d'entretien.
- ▶ Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Lors de l'utilisation, veuillez vous référer à l'objet réel.
- ▶ Ce manuel d'utilisation comprend la description, les instructions, l'entretien et les paramètres techniques du produit.
- ▶ Pour toute question, veuillez contacter le service après-vente ou le distributeur.
- ▶ Toute personne utilisant ou exploitant ce produit doit le lire et le respecter.
- ▶ Sauf dans certaines situations imprévues, les utilisateurs doivent se familiariser avec l'utilisation et les précautions à prendre.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard

Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier que les pièces suivantes sont bien présentes dans le carton :

Tableau a :

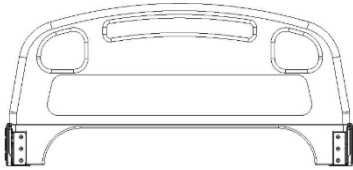
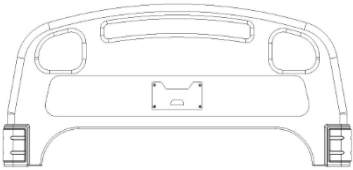
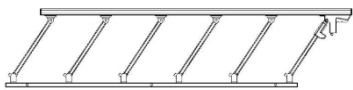
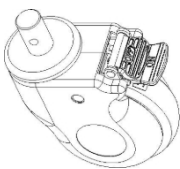
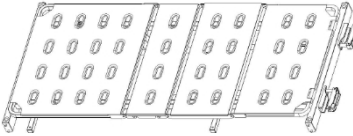
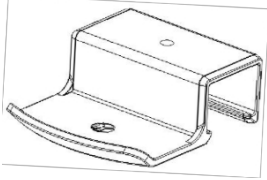
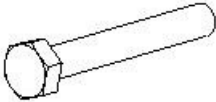
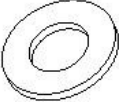
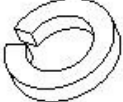
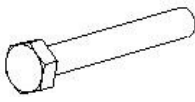
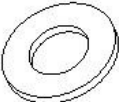
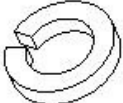
N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Tête de lit		Distance entre les crochets : L910*H55 mm	1	pc
2	Pied de lit		Distance entre les crochets : L910*H55 mm	1	pc
3	Rail latéral		Rail latéral en alliage d'aluminium 6	2	pcs
4	Roulettes		Roulettes couvertes de 5 pouces	4	pièces
5	Poteau IV		Crochet blanc cassé Φ 16-19 mm	1	pc
6	Plateforme de lit		L1925*1820 mm	1	pc
7	Vis	/	Voir tableau a.1	1	ensemble



Tableau a.1 :

N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Support pour matelas PP		PP	2	pièces
2	Vis hexagonale		M8*70 mm	4	pièces
3	Rondelle plate		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2$ mm	4	pièces
4	Rondelle élastique		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5$ mm	4	pièces
5	Écrou		M8 mm	4	pièces
6	Vis hexagonale		M8*16 mm	8	pièces
7	Rondelle plate		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2$ mm	8	pièces
8	Rondelle élastique		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5$ mm	8	pcs

1.2 Installation des roulettes

Placez un coussin de protection et retournez le corps du lit ;



Retirez la vis comme indiqué ci-dessous à l'aide d'une clé hexagonale de 14 pouces.

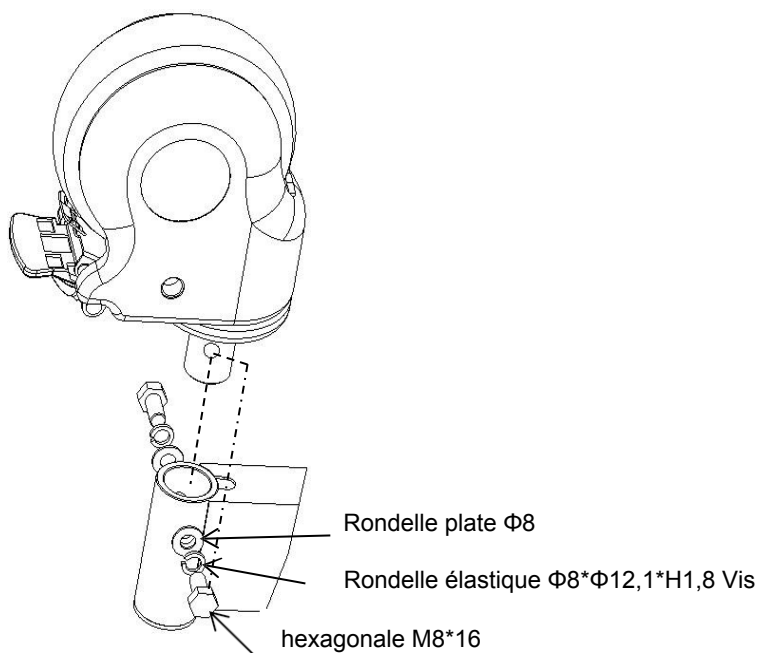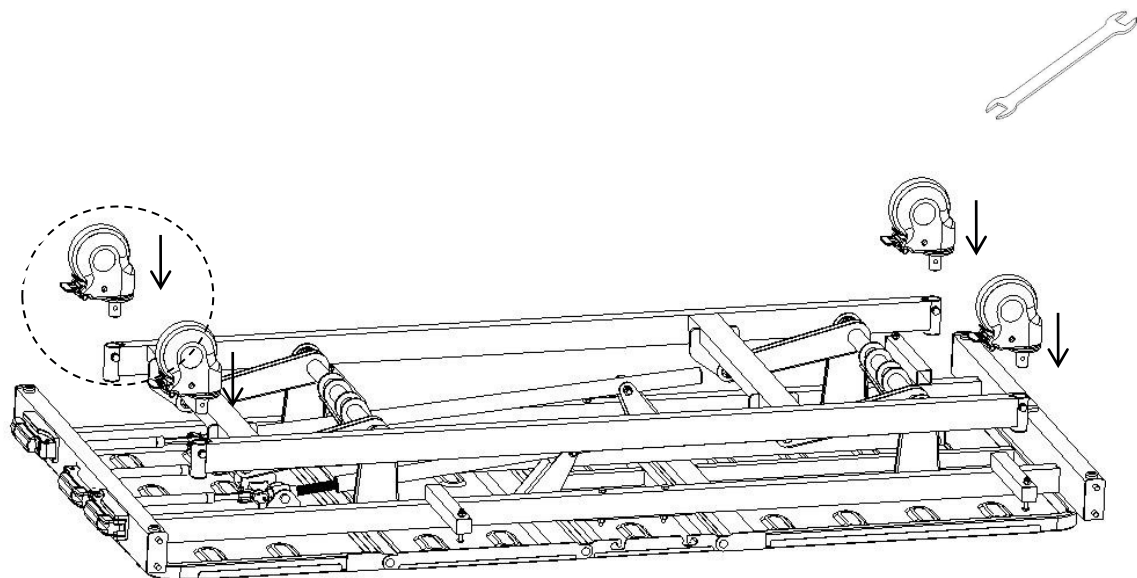



1.3 Installation des barrières latérales

Placez le lit à la verticale et installez la barrière de protection ; (l'image peut ne pas correspondre exactement au produit réel, elle sert uniquement à illustrer les instructions d'installation)


Retirez la vis comme indiqué ci-dessous à l'aide d'une clé hexagonale de 14 pouces.

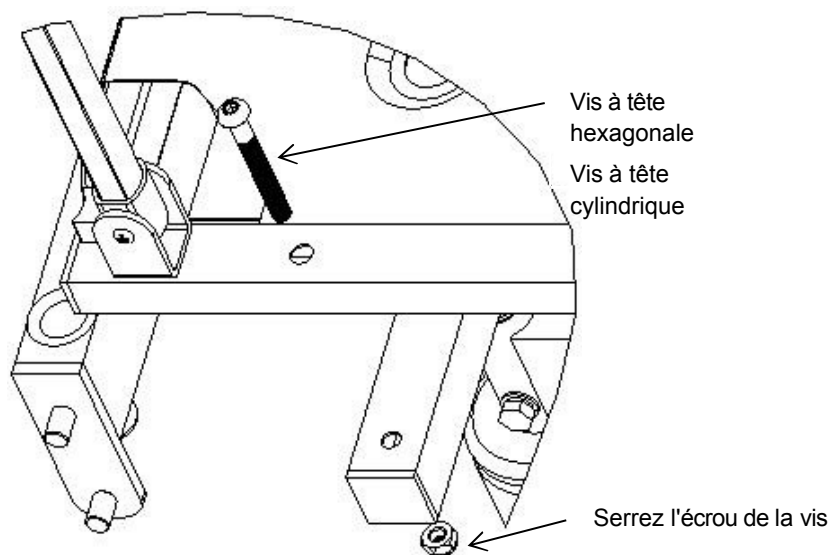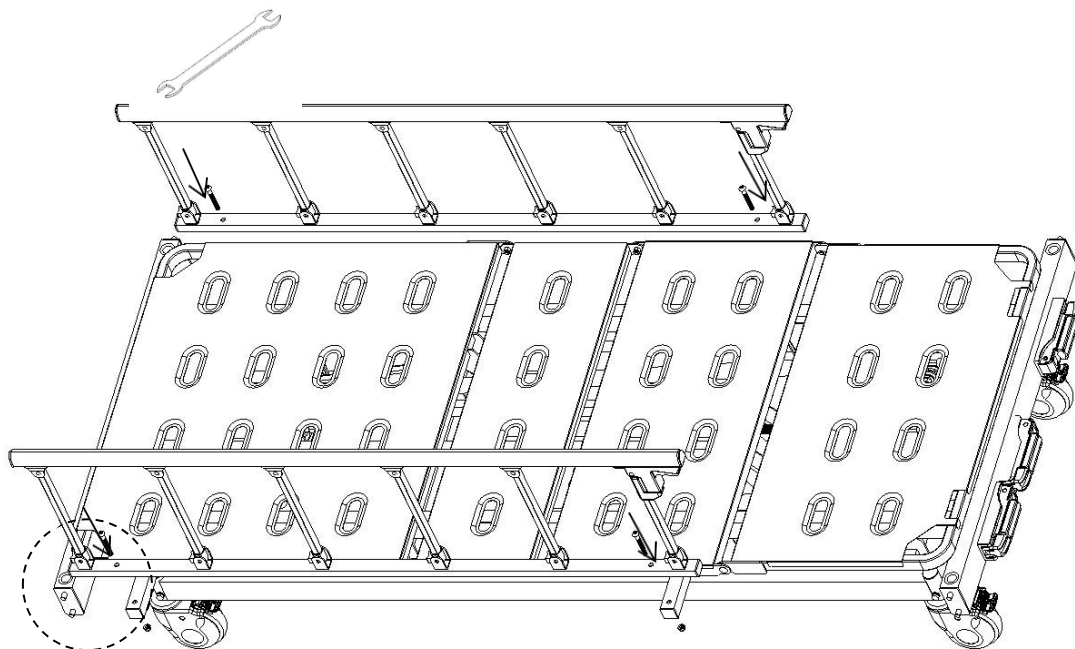


1.4 Installation du support de matelas en PP

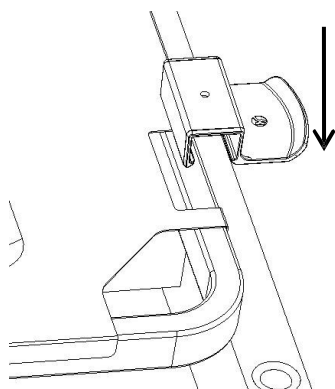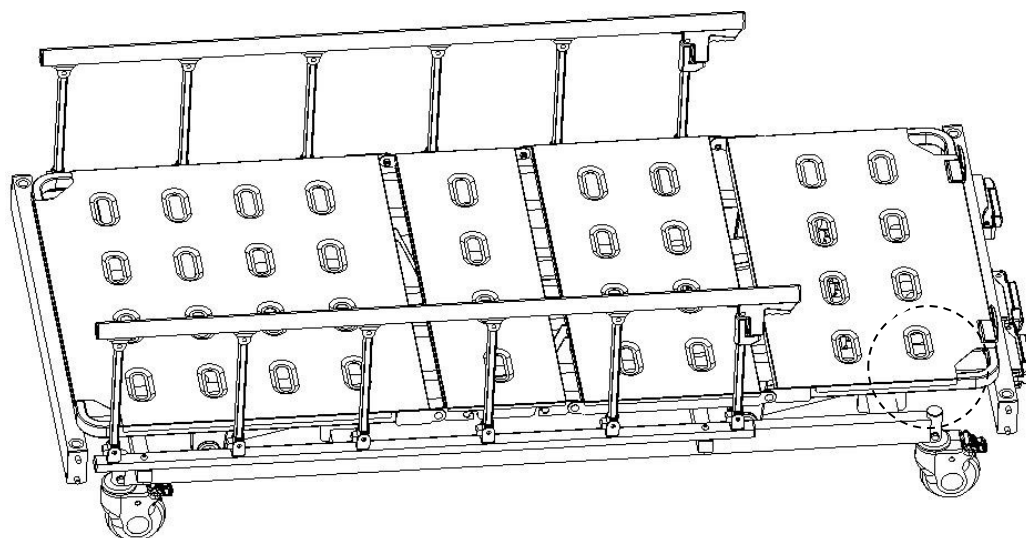


1

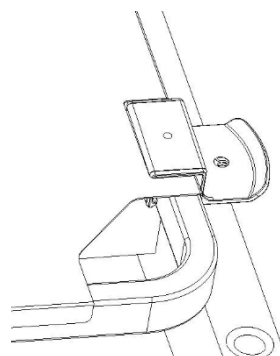

2

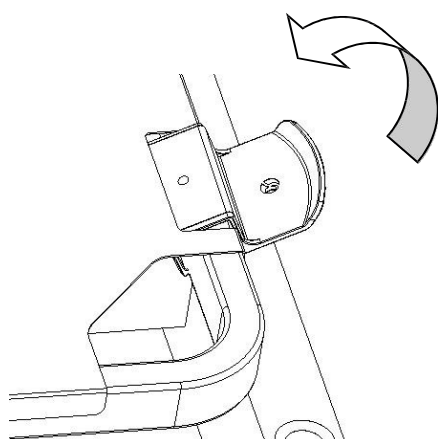




3

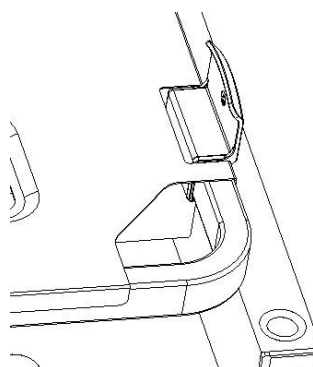

4

1.5 Méthode d'assemblage de la tête et du pied de lit

(L'image ne correspond pas exactement au produit réel, elle sert uniquement à illustrer les instructions d'installation)

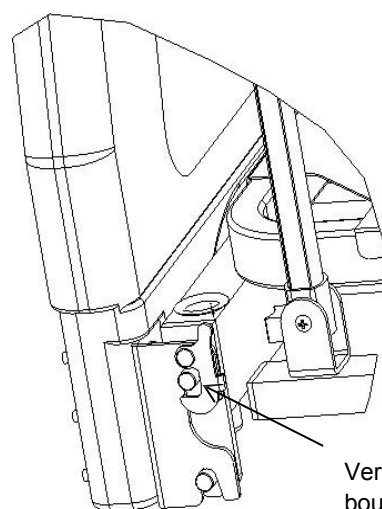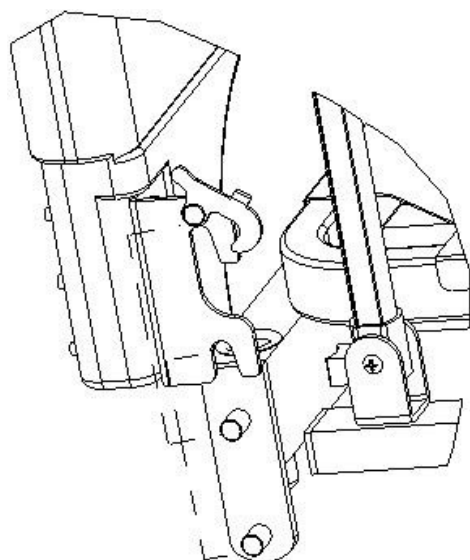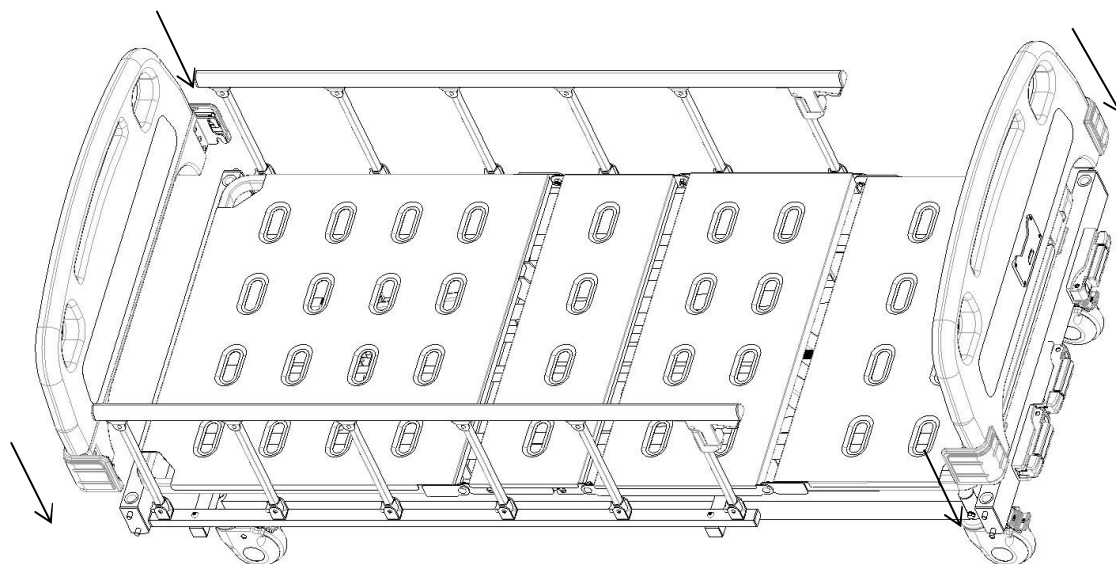


Verrouillez la
boucle

1.6 Installation du pied à perfusion


Installation de la partie femelle : Appuyez sur le crochet en plastique (partie femelle) vers le bas sur le tube en acier inoxydable de Φ 16 mm.

Installation de la partie mâle : placez le crochet en plastique (partie mâle) directement au-dessus de la partie femelle en forme de croix, puis alignez les boucles de la partie mâle avec les fentes de la partie femelle et appuyez vers le bas. Après avoir entendu un « clic », vérifiez si l'extrémité de la boucle est bien serrée. Si c'est le cas, l'installation est terminée. Sinon, continuez à appuyer vers le bas jusqu'à ce que la boucle soit bien serrée.

Insérez le pied à perfusion installé verticalement dans le logement prévu à cet effet. (La flèche sur l'image indique l'emplacement du pied à perfusion).

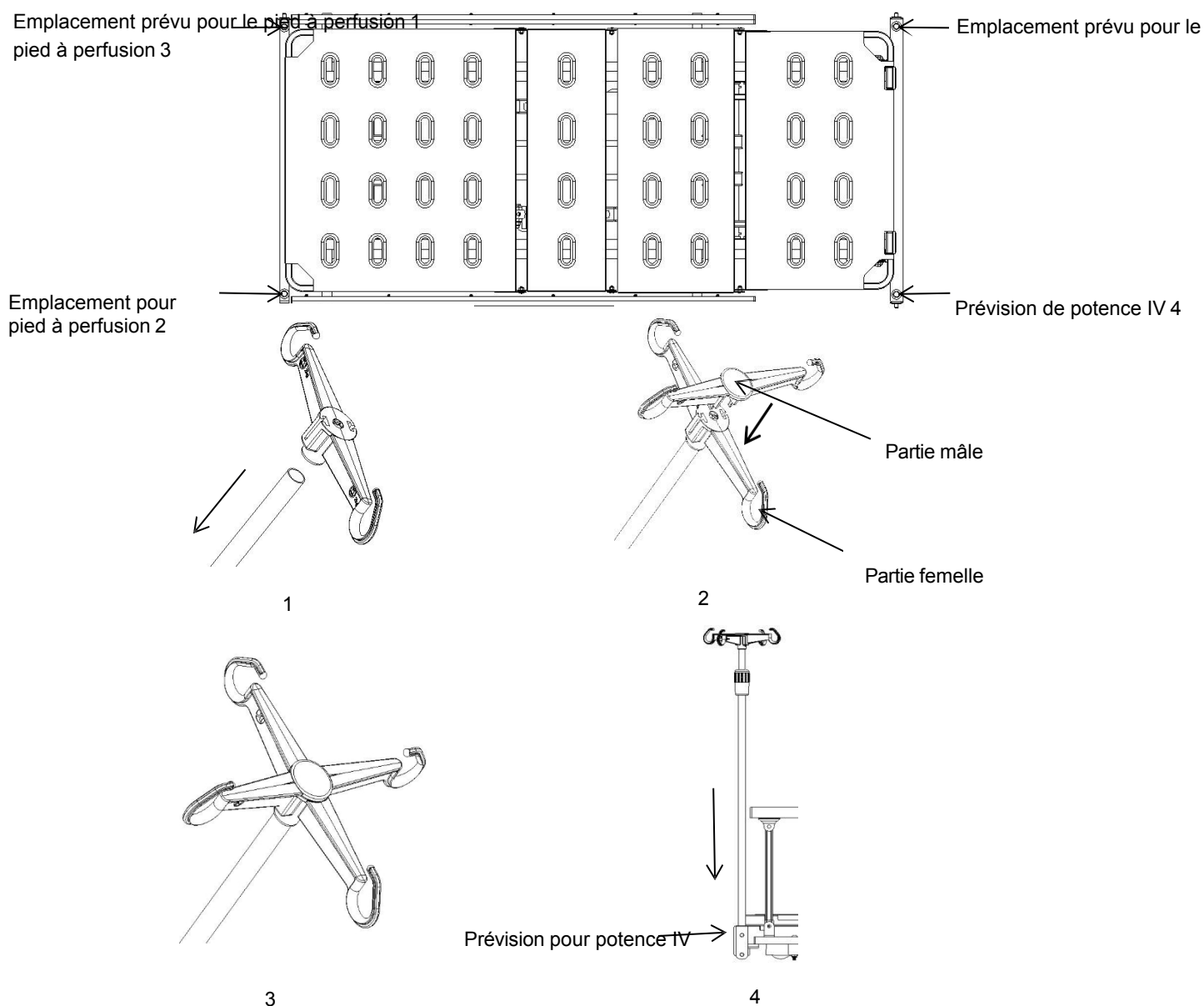

2. Mode d'emploi

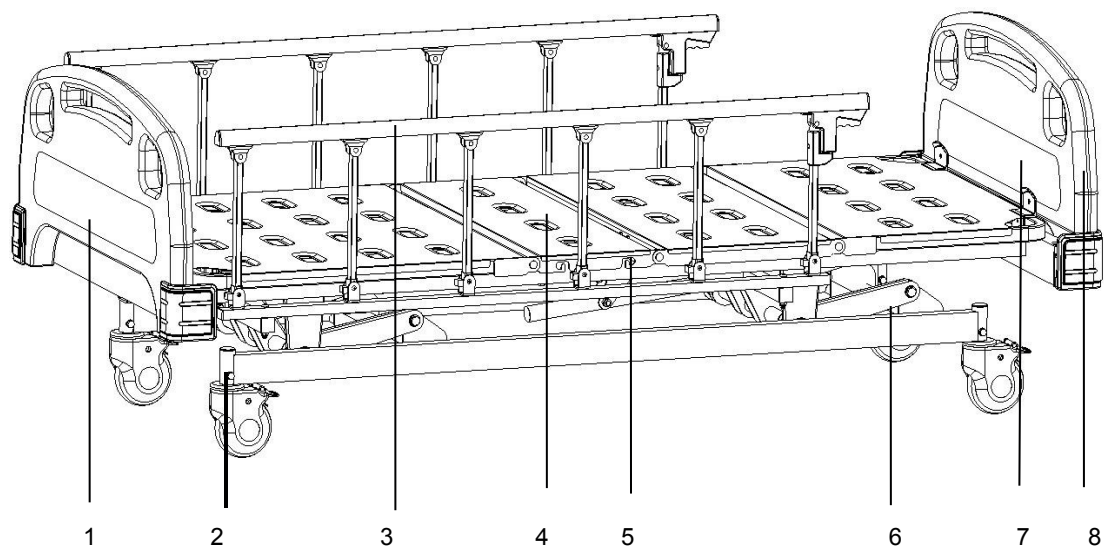

1-Panneau avant 2 roulettes 3-Barrière de sécurité 4-Planche de surface du lit
 5-Crochet de drainage 6-Cadre de lit 7-Support de matelas 8-Pied de lit


Dimensions de la surface du lit	Longueur	mm	1925±10
	Largeur		820 ± 10
	Hauteur du lit au-dessus du sol		400 ± 10
Dimensions	Longueur		2110 ± 10
	Largeur		960 ± 10
	Hauteur		400-710 ± 10
Plage d'inclinaison	Panneau arrière	/	0-75 ± 10
	Repose-jambes		0-35 ± 10°
Poids	Charge maximale admissible	KG	22

2.1 Mode d'utilisation des roulettes


 Lorsqu'un patient est allongé sur le lit, relevez les barrières de sécurité avant de déplacer le lit.

 Sauf lorsque le lit doit être déplacé, le frein à roulette doit être actionné pendant le reste du temps. Il est nécessaire d'actionner les quatre freins à roulette.

2.1.1 Verrouiller la roulette : après avoir poussé le lit dans la position souhaitée, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic », comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

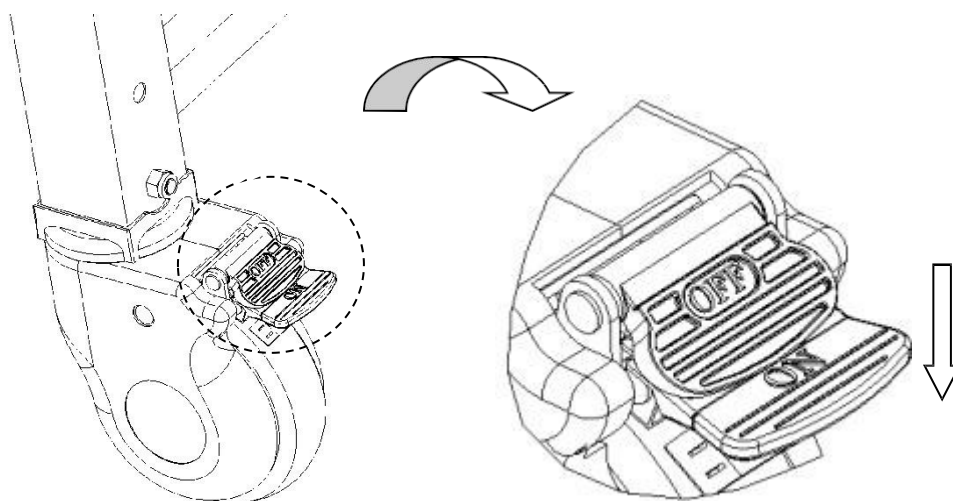

2.1.2 Déverrouillez la roulette : appuyez sur le bouton OFF avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic ».


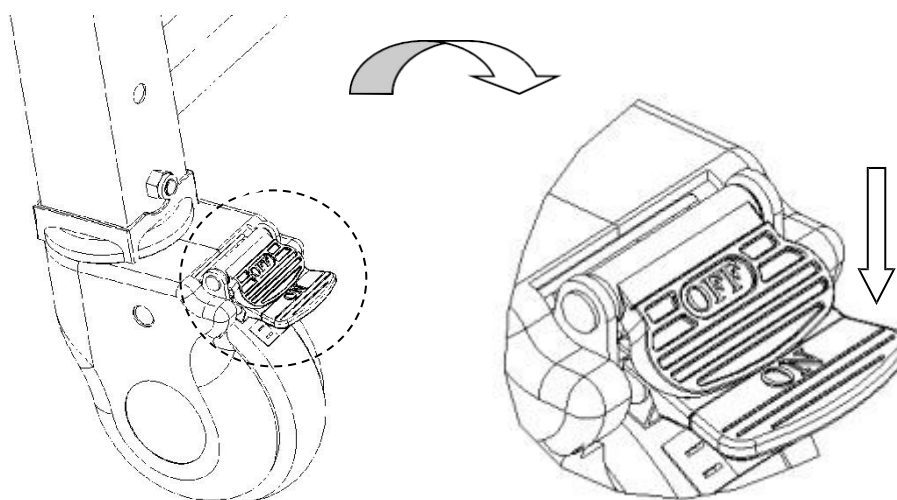


2.2 Utilisation des barrières de sécurité



2.2.1 Relever et abaisser la barrière de sécurité

Relever la barrière de sécurité : Tenez la poignée rouge de la barrière de sécurité et soulevez-la.

Lorsque vous entendez un « clic », cela signifie que la barrière de sécurité est verrouillée.

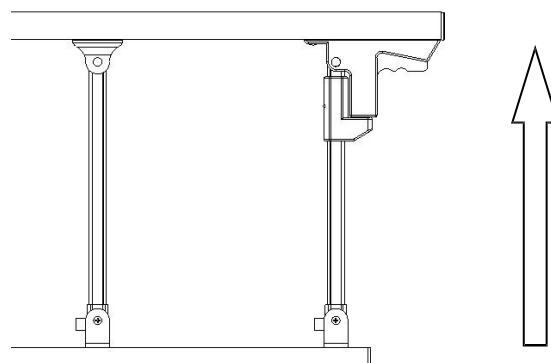
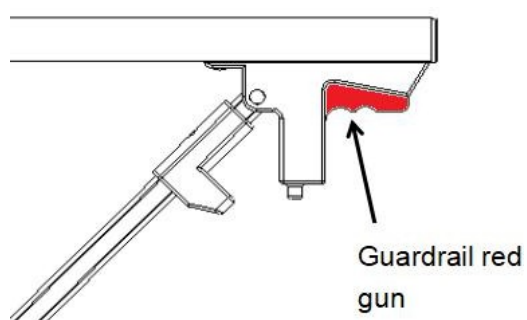


Pour abaisser la rampe de protection : tenez la poignée rouge de la rampe de protection et abaissez-la lentement.

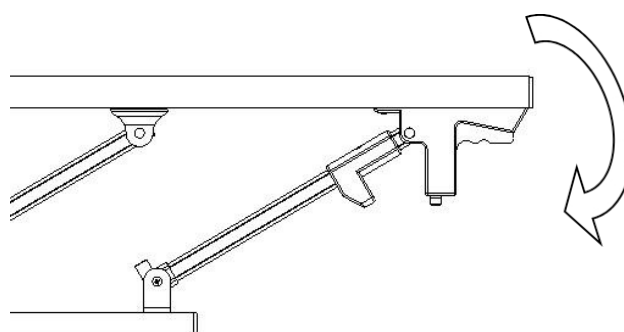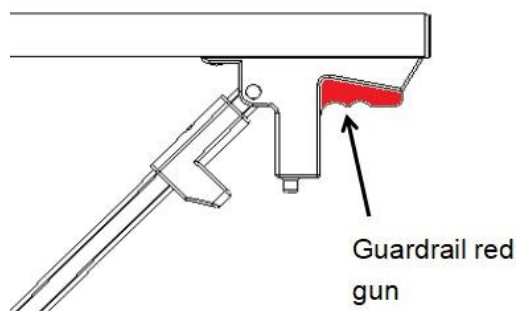

2.3 Utilisation des crochets de drainage

Les crochets de drainage sont illustrés sur la figure.

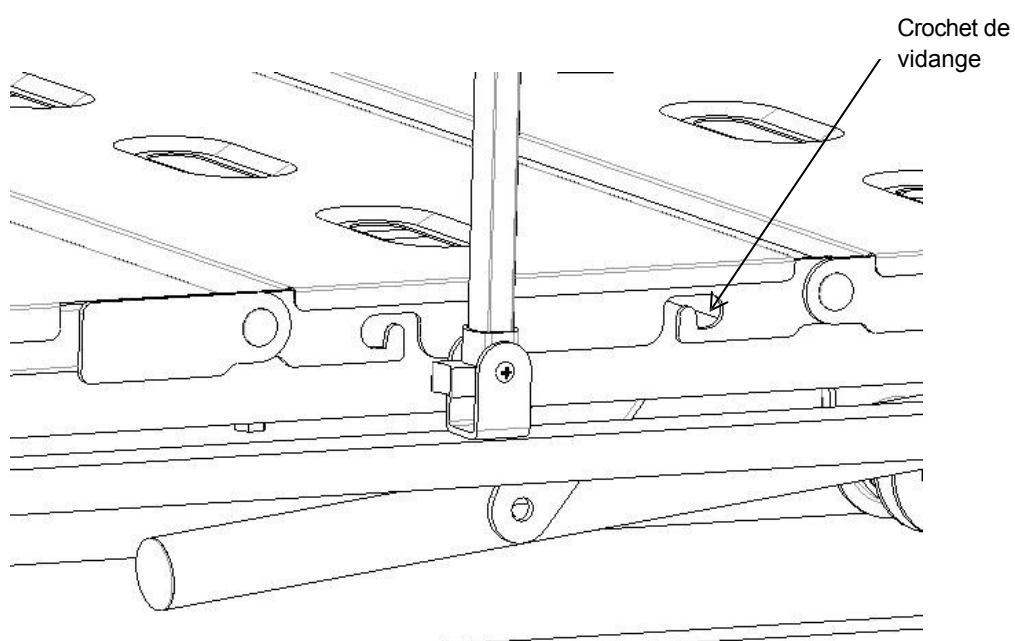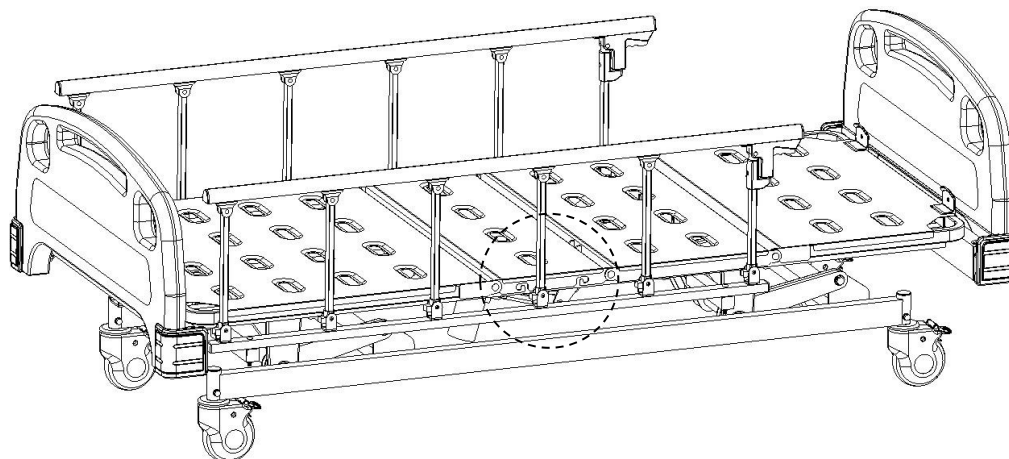


2.4 Mode d'emploi du pied à perfusion

Réglage de la hauteur du pied à perfusion :


1. Desserrez délicatement le manchon extérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, insérez le tube intérieur du pied à perfusion dans le manchon extérieur, puis réglez la longueur de la tige d'extension vers le haut ou vers le bas.

2. Réglez la longueur souhaitée, puis serrez délicatement le manchon extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. La charge maximale de chaque crochet est de 2 kg, pour un total de 8 kg.


(Réglage de la hauteur : 890 à 1540 mm)

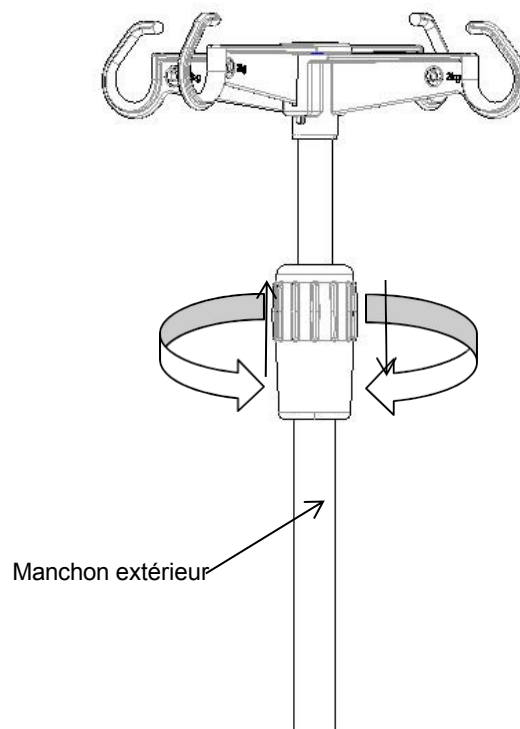


2.5 Utilisation des manivelles

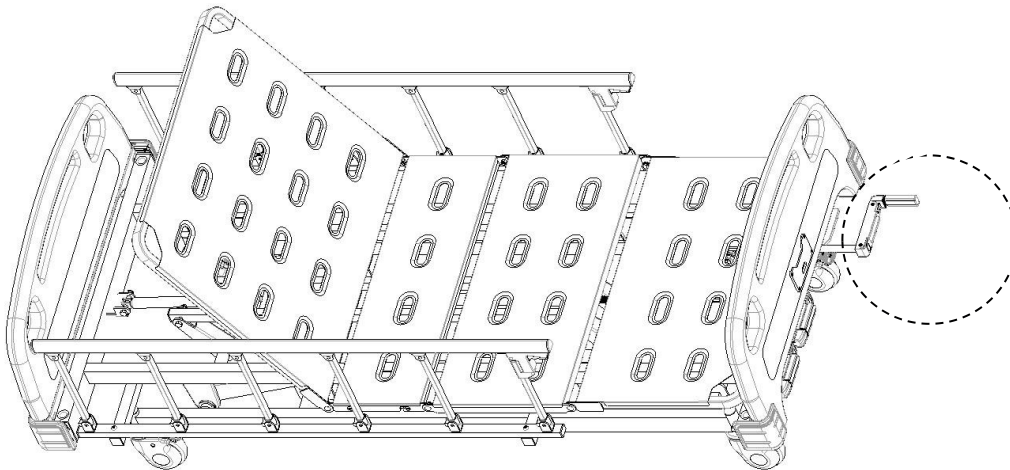

Montée et descente : tirez la manivelle manuelle et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le dossier, puis dans le sens inverse pour l'abaisser.

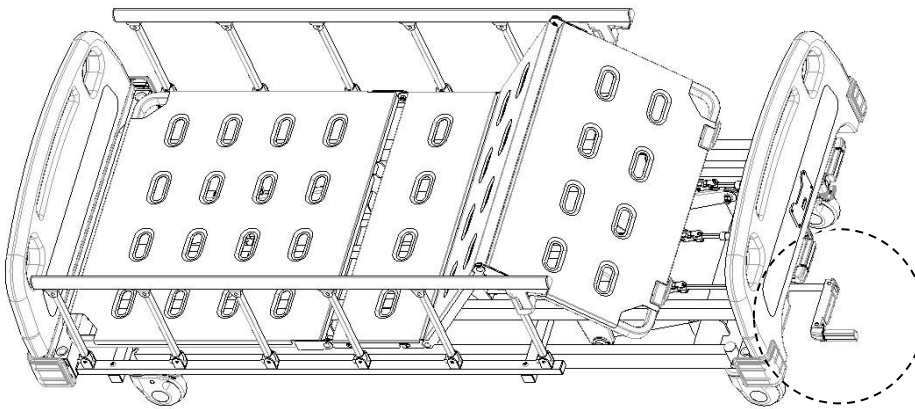



Relevage et abaissement des pieds : tirez la manivelle manuelle et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relever le pied, puis dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

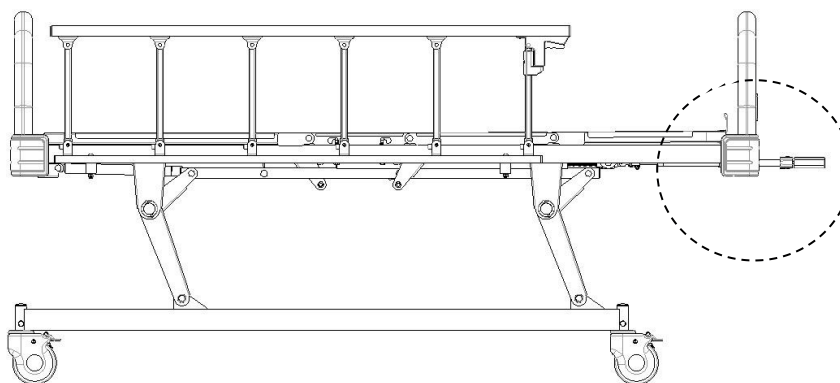

Levage du lit entier : tirez le levier à bascule central et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour lever le lit entier, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser le lit entier.

3. Remplacement des pièces de rechange et entretien

Utilisez deux clés Allen de 17 pouces  pour dévisser le nœud télescopique du levier, retirez le boulon et remplacez le levier. Une fois le remplacement terminé, installez les boulons dans dans l'ordre indiqué sur l'illustration, puis serrez le nœud à l'aide de la clé.

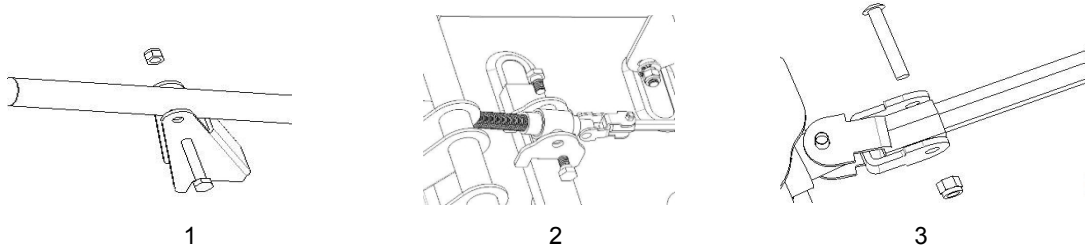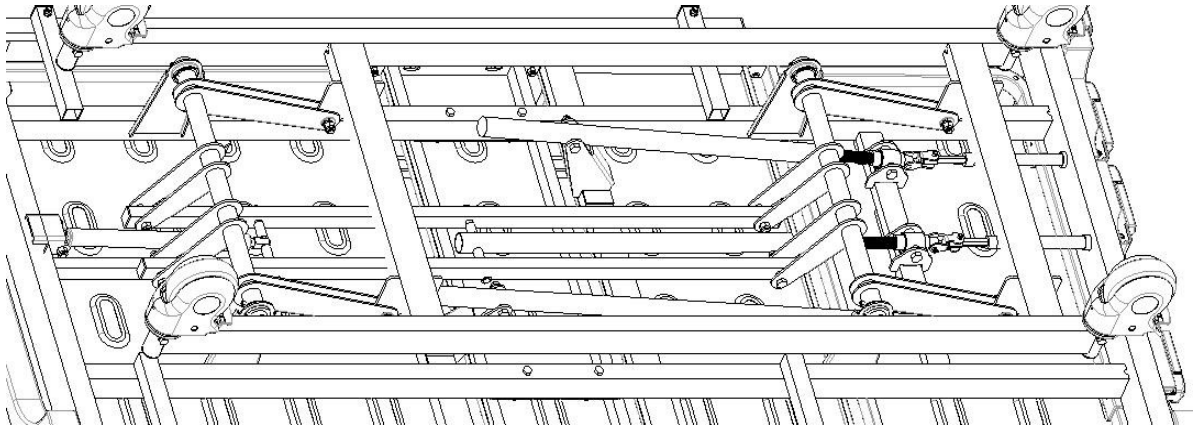


4. Exclusion des défauts

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes d'exclusion
Difficulté à déplacer l'ensemble du lit	1. La roulette est bloquée sans que le frein ait été desserré 2. La roulette est endommagée	1. Desserrez le frein 2. Remplacer la roulette
La barrière de sécurité se desserre facilement	La rampe de sécurité n'est pas bien fixée	Relevez la rampe de sécurité et relâchez la main après avoir entendu un « clic »
Bruit fort lorsque le sommier monte et descend	Les pièces mobiles sont rouillées et la lubrification est insuffisante	Ajoutez une quantité appropriée d'huile lubrifiante au niveau des articulations des pièces mobiles
Une partie du lit ne fonctionne pas	Défaillance du balancier télescopique	Remplacez le balancier télescopique

5. Entretien du lit

1. Afin d'utiliser le lit en toute sécurité, des contrôles de sécurité doivent être effectués régulièrement. Effectuez une inspection complète tous les six mois afin de vous assurer qu'aucun élément de connexion n'est desserré et que le mécanisme de montée et de descente du lit fonctionne normalement.
2. Au niveau des articulations des pièces du lit qui bougent fréquemment, ajoutez une quantité appropriée d'huile lubrifiante lors de l'inspection quotidienne. Si vous constatez une usure importante, remplacez immédiatement la pièce pour garantir la sécurité, puis ajoutez de l'huile lubrifiante comme indiqué.

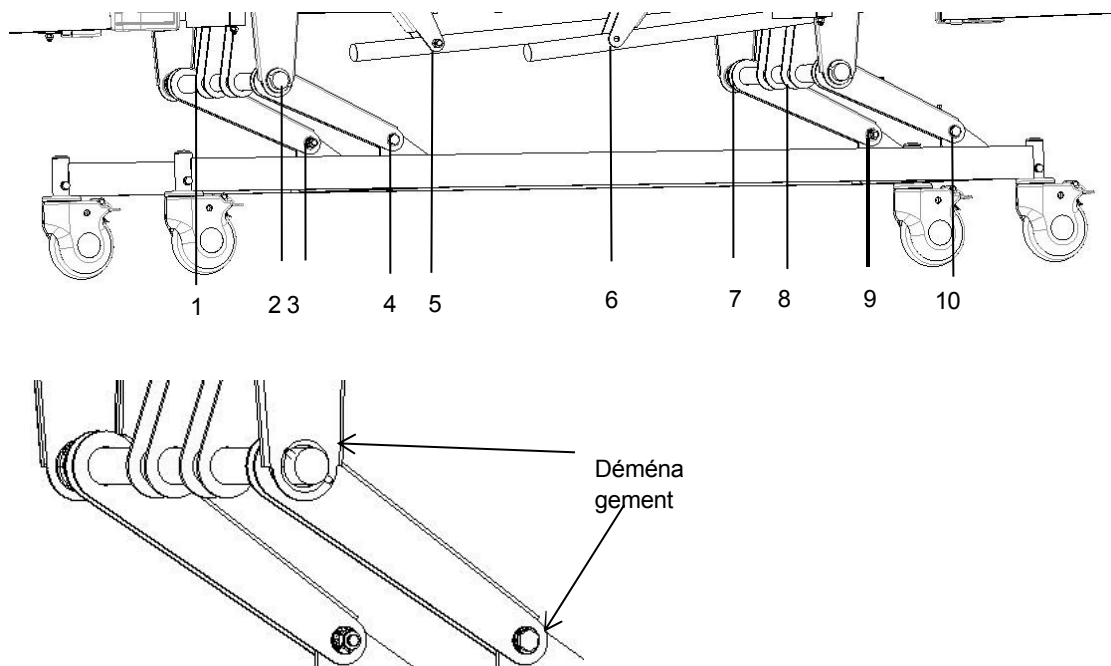

3. Évitez de heurter le lit et de rayer le revêtement du lit avec des objets pointus.
4. Évitez d'inhalier l'humidité dans le lit et le matelas, car cela pourrait provoquer de la rouille, des bruits anormaux et la prolifération de bactéries. Si de l'eau adhère, essuyez-la immédiatement.
5. Lorsque le cadre du lit vieillit et atteint une certaine durée d'utilisation, les parties métalliques du lit et les parties en plastique de la tête ou du pied de lit, ainsi que les barrières de sécurité peuvent être recyclées.

6. Nettoyage du lit

1. Lors du nettoyage, veuillez essorer le chiffon imbibé d'un détergent neutre dilué dans de l'eau, puis essuyez la surface. Essorez ensuite le chiffon imbibé d'eau pour éliminer les résidus de détergent, puis séchez avec un chiffon sec.
2. N'utilisez pas de substances volatiles (diluant, agent volatil, essence, etc.), qui pourraient provoquer des réactions chimiques et endommager le lit.
3. Lorsque vous utilisez un désinfectant pour nettoyer, veillez à le diluer selon la concentration indiquée avant utilisation. Selon la composition du désinfectant, il peut corroder les pièces métalliques, les pièces en résine, etc., provoquant des phénomènes indésirables tels que la décoloration et la déformation. Par conséquent, la teneur en désinfectant est recommandée comme suit :

0,05 ~ 0,2 % désinfectant à base de chlorure d'ammonium

0,05 ~ 0,2 % désinfectant chlorophénylique 0,05 %

solution de diclofénac éthane 0,05 ~ 0,2 %

désinfectant à base d'hypochlorite de sodium

N'utilisez pas de stérilisateurs à fumée, d'autoclaves et ne nettoyez pas la tête et le pied du lit avec du méthyl (phénol).

tête et le pied du lit. Cela pourrait provoquer de la corrosion, une décoloration et une détérioration.

Remarque : lors du nettoyage du lit ou du changement des draps, veuillez faire attention aux coins, aux bords et aux vis du cadre afin d'éviter les rayures.

7. Nettoyage du matelas et entretien de l'

1. Lors de l'utilisation, évitez de rayer le tissu avec des outils ou des couteaux à angles vifs, couvrez-le avec des draps ou des tampons de nettoyage et nettoyez-le fréquemment pour le protéger du dessèchement.
2. Nettoyez régulièrement le matelas à l'aide d'un aspirateur. La housse du matelas peut être lavée à 100 °C .
3. Exposez souvent le matelas pour garder un sommeil frais et confortable, mais veillez à ne pas l'exposer trop longtemps.
4. Si le tissu est accidentellement taché, veuillez vous reporter aux méthodes de nettoyage recommandées dans les instructions, n'utilisez pas de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le tissu.
5. Si du chewing-gum ou d'autres substances collantes se retrouvent accidentellement sur le tissu, ne les essuyez pas de force. Utilisez un sac de glace pour les durcir, puis retirez-les délicatement.
6. Si vous constatez que le fil est lâche en raison de l'usure, ne le tirez pas à la main, mais coupez-le à l'aide de ciseaux.

* Si votre commande ne comprend pas de matelas, veuillez vous référer à la configuration du contrat.

8. Détection et entretien des roulettes


1. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter tout choc ou surcharge, qui pourraient les endommager.
2. Graissez régulièrement les roulettes ou les roues, et la fréquence d'ajout doit être déterminée en fonction des conditions d'utilisation réelles. En général, la graisse lubrifiante est ajoutée tous les six mois.
3. Après avoir nettoyé les roulettes, veillez à ajouter de la graisse. Le choix de la graisse lubrifiante doit être basé sur l'environnement d'utilisation réel, les environnements à températures élevées ou basses, et la graisse lubrifiante correspondante doit être sélectionnée.
4. Il est interdit de freiner brusquement les roulettes, car cela pourrait endommager le système de freinage.
5. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par inspection visuelle. Des fils de filature et d'autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue. Retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et réutilisées.
6. Pour déterminer si la roulette doit être remplacée en fonction de son temps d'utilisation et de son état d'usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des contre-écrous pour vous aider dans cette opération.
7. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement que les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un lit d'hôpital équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le lit et de vérifier si l'un des freins de chaque roulette fonctionne correctement. Si le frein ne fonctionne pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.
8. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, l'efficacité des freins des roulettes doit être testée à nouveau.

9. Entretien des barrières de sécurité

1. Veuillez vérifier que les rails latéraux sont correctement installés afin d'empêcher le patient allongé de glisser et de rouler vers le bas.
2. Vérifiez toujours les vis de l'ensemble du garde-corps et du fil métallique afin d'éviter qu'ils ne se desserrent et ne tombent.
3. Veuillez utiliser correctement les pièces en plastique rouge de l'interrupteur de la barrière de sécurité et ne pas forcer pour éviter d'endommager la barrière.

10. Liste des pièces de rechange

N	Nom	Modèle	Image	Spécifications
1	A900/PP/Pied de tête et de pied	S0FJBT010019		Distance entre les crochets : 910*55 mm
2	Rail latéral en alliage d'aluminium	BKLLGH105931		Côté gauche
3	Rail latéral en alliage d'aluminium	BKLLGH105932		Côté droit
4	Poteau IV	S0FJSY010003		Φ16-19/blanc cassé
5	Roulette de 5 pouces	LGPLU101TS014		φ24
6	Jeu de roulettes carrées	GPSSL101TS297		50*50 mm
7	Manivelle télescopique arrière	LGPSG10101002		950-150 mm
8	Manivelle télescopique pour pied	LGPSG10101001		650-95 mm

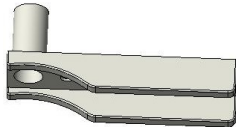9	Manivelle télescopique en hauteur	LGPSG10101003		600-200 mm
10	Ressort pneumatique	LGPQT101TS010		27-250-620-1200N
11	Manivelle télescopique	GPSL1012524S		Blanc cassé/250*220 mm
12	Base de poignée à manivelle	GPSL1012525S		Blanc cassé/p2142c
13	Carte de visite	GPSL101TS184		/

Remarque : en raison de mises à jour du produit, certaines pièces du produit d'origine peuvent ne plus être disponibles à vie. (La société garantit que les produits vendus peuvent fournir les pièces à remplacer dans les 6 ans suivant la fin de leur production).

11. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du lit manuel est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le lit manuel de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le lit manuel doit être stocké dans les conditions suivantes :
 - a) Température ambiante : +5 °C ~ +40 °C .
 - b) Humidité relative : ≤ 85 %.
 - c) Pression atmosphérique : 70 kPa~ 106 kPa.

Explication des symboles :



Remarque ! Vérifiez le fichier fourni avec le lit



La charge maximale admissible est de 2000 N

12. Service après-vente

1. Veuillez conserver soigneusement les fichiers fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez présenter ces documents lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les plus brefs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et un service de maintenance précis et rapides.
3. Ne démontez pas vous-même les composants internes de ce produit afin d'éviter tout dommage inutile. Si vous constatez que l'utilisation est affectée par des problèmes de qualité, veuillez contacter notre service après-vente ou notre revendeur agréé.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELL: A3k / REF.: 319-SKCD1

CAMA DE HOSPITAL MANUAL / MANUAL HOSPITAL BED / LIT D' HOPITAL /

LETTO OSPEDALIERO / CAMA DE HOSPITAL / KRANKENHAUSBETT



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Nr. 35
Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City,
Jiangsu-Provinz, China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Niederlande



Quirumed S.L.U. CIF B97267405C/
Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia (Spanien)



LOT: