

Silla de transfusión de lujo

SKE004-1

**Manual del
usuario**



Imagen solo para referencia

1. Introducción al manual

Este manual forma parte del artículo al que hace referencia. Lea atentamente las instrucciones, ya que contienen información importante sobre la SEGURIDAD DURANTE EL USO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO. Las descripciones e imágenes contenidas en la publicación no son vinculantes; nos reservamos el derecho a modificar cualquier información con fines de mejora sin obligación de actualizar este manual. Los gráficos e imágenes contenidos en este manual son solo ejemplos y pueden sufrir mejoras en los productos.

2. Ámbito de aplicación

Se utiliza principalmente en hospitales, residencias de ancianos y asistencia domiciliaria.

3. Características

- Tamaño: 710*800*102 mm
- Estructura de acero con recubrimiento en polvo.
- Asiento y respaldo de espuma de PU.
- Brazales de madera pintada



4. Advertencias y precauciones

- ⚠ NO PERMITA QUE LOS NIÑOS PEQUEÑOS SE SUBA A LA CAMA NI SE ACERQUEN A ELLA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO.
- ⚠ NO PERMITA QUE NIÑOS PEQUEÑOS MANIPULEN ESTE DISPOSITIVO.
- ⚠ CUANDO SE UTILIZAN LAS FUNCIONES HI-LO, RODILLA, TRENDELENBERG, REVERSE TRENDELENBURGO O HACIA ATRÁS DE LA CAMA, ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA PERSONA INMOVILIZADA EN LA CAMA ESTÁ BIEN POSICIONADA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA CAMA. NO DEJE QUE NINGUNA EXTREMIDAD SOBRESALGA POR LOS LADOS O ENTRE LAS BARANDILLAS DE LA CAMA AL REALIZAR CUALQUIERA DE ESTAS FUNCIONES.
- ⚠ NO UTILICE BARANDILLAS LATERALES NO AUTORIZADAS.
- ⚠ LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN APLICADAS A LA CAMA INDICAN LOS PELIGROS O PRÁCTICAS INSEGURAS QUE PODRÍAN PROVOCAR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES.
- ⚠ CUANDO SE UTILICE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN NASAL O CON MÁSCARA, EL TUBO DE OXÍGENO O AIRE

DEBEN DISPONERSE Y FIJARSE CORRECTAMENTE PARA ASEGURAR QUE NO SE ENMARAÑEN NI SE ROMPAN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA CAMA.

⚠ ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO, ASEGÚRESE DE QUE LOS REMACHES DEL MARCO DE LA CAMA ESTÁN BIEN FIJADOS EN LOS GANCHOS DE LOS EXTREMOS DE LA CAMA: DE LO CONTRARIO, PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES O DAÑOS.

⚠ MANTENGA TODAS LAS PARTES MÓVILES LIBRES DE OBSTRUCCIONES (POR EJEMPLO, MANTAS/SÁBANAS, MANTAS/ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS, TUBOS, CABLEADO Y OTROS TIPOS DE PRODUCTOS).

5. Mantenimiento

5.1 Mantener limpio de forma rutinaria (incluida la desinfección).

5.2 Compruebe si hay alguna pieza suelta o que no funcione como de costumbre.

6. Almacenamiento

Guarde esta camilla de exploración hospitalaria en un lugar protegido de la humedad y la corrosión.

7. Transporte

7.1 Transportar con medios de transporte habituales: barco, avión, tren, camión.

7.2 La cama de hospital se puede manipular manualmente.

7.3 No la tire ni la deje caer durante el transporte.



.....Porque nos importa