

**Cadeira de transfusão de
luxo**

SKE004-1

**Manual do
utilizador**



Imagem apenas para referência

1. Introdução ao manual

Este manual é uma parte do artigo a que se refere. Leia atentamente as instruções, uma vez que estas fornecem informações importantes sobre SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO. As descrições e imagens contidas na publicação não são vinculativas; temos o direito de modificar qualquer informação para fins de melhoramento, sem qualquer obrigação de atualizar este manual. Os gráficos e imagens contidos neste manual são apenas exemplos e podem ser melhorados em relação aos produtos.

2. Âmbito de aplicação

É utilizado principalmente em hospitais, lares de idosos e cuidados domiciliários.

3. Características

- Tamanho: 710*800*102mm
- Estrutura em aço revestido a pó.
- Assento e encosto em espuma PU
- Braço em madeira pintada



4. Aviso e precaução

- ⚠ NÃO PERMITIR QUE CRIANÇAS PEQUENAS ESTEJAM EM CIMA OU PERTO DA CAMA DURANTE O FUNCIONAMENTO.
- ⚠ NÃO PERMITIR QUE ESTE APARELHO SEJA UTILIZADO POR CRIANÇAS PEQUENAS.
- ⚠ AO ACCIONAR A FUNÇÃO HI-LO, JOELHO, TRENDLENBERG, TRENDLENBERG INVERTIDO TRENDLENBERG OU A FUNÇÃO DE DORSO DA CAMA, CERTIFICAR-SE SEMPRE DE QUE O INDIVÍDUO CONFINADO À CAMA ESTÁ CORRECTAMENTE POSICIONADO DENTRO DOS LIMITES DA CAMA. NÃO DEIXAR QUE NENHUMA EXTREMIDADE SOBRESSAIA SOBRE O LADO OU ENTRE AS GRADES DA CAMA AO EXECUTAR QUALQUER FUNÇÃO.
- ⚠ NÃO UTILIZAR GRADES LATERAIS NÃO AUTORIZADAS.
- ⚠ AS ETIQUETAS DE AVISO/PRECAUÇÃO APLICADAS À CAMA DESCREVEM OS PERIGOS OU PRÁTICAS INSEGURAS QUE PODEM RESULTAR EM FERIMENTOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.
- ⚠ QUANDO UTILIZAR EQUIPAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIPO NASAL OU MASCARADO, A TUBAGEM DE OXIGÉNIO OU DE AR

DEVE SER CORRECTAMENTE ENCAMINHADA E FIXADA PARA GARANTIR QUE A TUBAGEM NÃO FICA EMARANHADA E ACABA POR SER CORTADA DURANTE O FUNCIONAMENTO NORMAL DA CAMA.

⚠ ANTES DE UTILIZAR A CAMA, CERTIFIQUE-SE DE QUE OS REBITES DA ESTRUTURA DA CAMA ESTÃO CORRECTAMENTE ENCAIXADOS NOS GANCHOS DAS EXTREMIDADES DA CAMA: CASO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER FERIMENTOS OU DANOS.

⚠ MANTER TODAS AS PARTES MÓVEIS LIVRES DE OBSTRUÇÕES (OU SEJA, COBERTORES/COBERTORES, COBERTORES/ALMOFADAS DE AQUECIMENTO, TUBOS, CABOS E OUTROS TIPOS DE PRODUTOS)

5. Manutenção

5.1 Manter limpo como habitualmente (Incl. desinfetar).

5.2 Verificar se alguma peça está solta ou não está a funcionar como habitualmente.

6. Armazenamento


Guardar esta marquesa para exames hospitalares num local à prova de humidade e sem corrosão

7. Transporte

7.1 Pode ser transportada por meios de transporte comuns: navio, avião, comboio, camião.

7.2 A cama de hospital pode ser manuseada manualmente.

7.3 Não pode ser atirada ou deixada cair durante o transbordo.

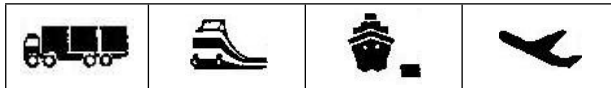

.....Porque nos preocupamos