



Usuario manual

SKH099

Carro de tratamiento



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE STOCK: 870098

Contenido

Manual de introducción	2
1. Guía de instalación.....	3
1.1 Lista de accesorios estándar	3
1.2 Instalación de ruedas	4
2. Utilizar el método.....	5
2.1 Método de uso de las ruedas	6
3. Exclusión de fallos.....	7
4. Carro de tratamiento-mantenimiento	7
5. Embalaje, transporte, almacenamiento	8
6. Servicio postventa	8

Manual de introducción

Nota:

Por favor, lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalar y utilizar. Exigimos a todos los usuarios que conozcan el manual de usuario y todas las precauciones.

Este manual es aplicable al carro de tratamiento SKH099. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de comprobación de mantenimiento.

Los gráficos de este manual son sólo para referencia del usuario. En el uso real, por favor refiérase al objeto real.



- ▶ Este manual de usuario incluye la descripción, instrucciones, mantenimiento y parámetros técnicos del producto.
- ▶ Cualquier duda, póngase en contacto con el centro de servicio postventa o el distribuidor.
- ▶ Cualquier persona que utilice o maneje este producto debe leerlo y cumplirlo.
- ▶ Salvo en algunas situaciones imprevistas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

1. Guía de instalación

1.1 Lista de accesorios estándar


Después de abrir la caja de embalaje, compruebe si las siguientes piezas están completas en la caja de embalaje:

Tabla a:

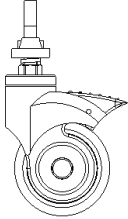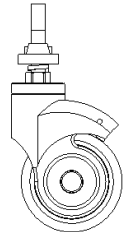
NO.	Nombre	Fotografía	Especificación	CANT	Unidad
1	Cuerpo principal		L620*A460*Al840mm Nivel superior con solapas en tres lados, altura de la solapa 4 cm	1	pc
2	Rueda con freno		Rueda giratoria de 3 pulgadas con freno	2	piezas
3	Rueda sin freno		Ruedas de 3 pulgadas sin freno	2	piezas

1.2 Ruedas instalación


Coloque una almohadilla protectora y ponga el cuerpo del carro de tratamiento boca abajo;
Retire las ruedas, primero afloje la rueda hasta la posición adecuada, luego insértela en el tubo y apriétela con una llave hexagonal interior.

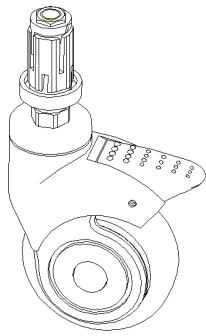


1

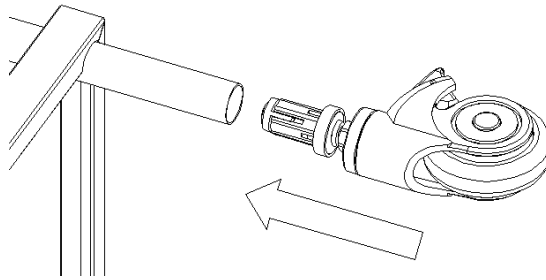

2

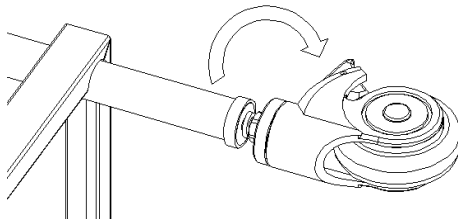

3

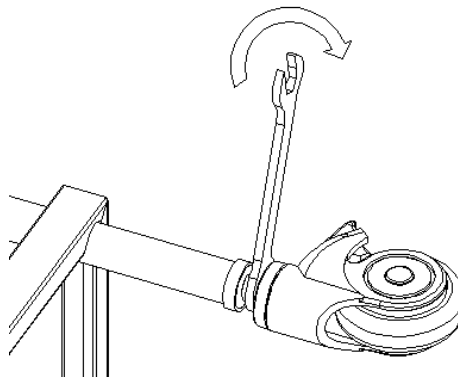

4

2. Método de uso




1-Cuerpo principal 2-Casters


Tamaño del carro de tratamiento	Longitud	mm	620
	Anchura		460
	La altura del carro sobre el suelo		840
Peso	Carga de trabajo segura	KG	100
Peso neto		KG	13
Peso bruto		KG	12

2.1 Método de uso de las ruedas giratorias

2.1.1 Bloqueo de la rueda giratoria: Después de empujar el carro hasta la posición deseada, pulse el botón y bloquee la rueda giratoria cuando oiga un "clic", como se muestra en la figura siguiente.

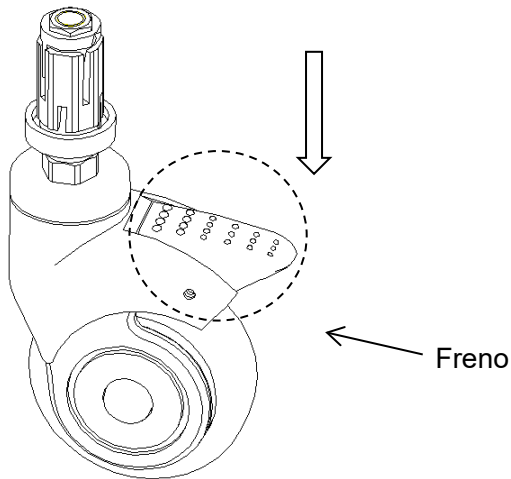

2.1.2 Desbloquee la rueda giratoria: Levante el botón con el pie y desbloquee la rueda giratoria cuando oiga un "cli c k".

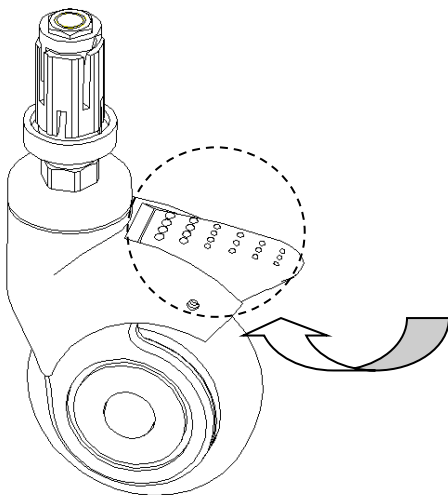

3. Exclusión de fallos

Fallos comunes	Razones probables	Métodos de exclusión
Dificultad para mover todo el carro	1. La rueda se bloquea sin soltar el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno 2. Vuelva a colocar la rueda

4. Carro de tratamiento-mantenimiento

1. Para utilizar el carro de tratamiento de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas en el carro de tratamiento. Se recomienda revisarlo cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no están sueltas y todas las operaciones son normales.
2. Cuando el bastidor del carro de tratamiento envejece y alcanza un determinado tiempo de servicio, la parte metálica del carro de tratamiento y las piezas de plástico del bastidor de acero inoxidable de la pila pueden reciclarse.
3. Evite arañar el panel con aparatos o cuchillos afilados durante su uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
4. Si el panel se mancha accidentalmente, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar el carro de tratamiento, ya que provocarían la oxidación de la superficie de acero inoxidable.
5. Compruebe periódicamente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas que puedan dañarlas.
6. Está prohibido forzar las ruedas para que frenen al frenar, ya que se dañaría el sistema de frenos.
7. El desgaste de la superficie de rodadura de la rueda puede detectarse mediante inspección visual. Algunos hilos de rosca y otras acumulaciones pueden estar enrollados alrededor de la rueda, retire los tornillos y tuercas de la rueda, limpie los restos y compruebe si el rodamiento de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.
8. A juzgar por el tiempo de uso y el desgaste, puede sustituir las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes están bien colocados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o contratueras para ayudarle en este proceso.
9. En el caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar periódicamente si los frenos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de un carro de tratamiento equipado con varias ruedas con freno, sólo se puede bloquear una rueda con freno a la vez, lo que le permitirá intentar empujar el carro de tratamiento y

comprobar también si uno de los frenos de cada rueda funciona bien. Si el funcionamiento del freno falla debido al desgaste o daño de las ruedas, sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a probar el sistema de frenado.

10. Si el mecanismo del sistema de freno de la rueda está dañado y es necesario reparar o sustituir el freno, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa o con el distribuidor autorizado que proporciona nuestra empresa. Cada vez que se sustituyan los frenos, se debe volver a comprobar el rendimiento de frenado de las ruedas.

5. Embalaje, transporte, almacenamiento

1. El embalaje del carro de tratamiento se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite las prisas, las vibraciones violentas y protéjase de la luz solar y la lluvia durante el transporte del carro de tratamiento.
3. El carro de tratamiento debe guardarse:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humedad relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Presión atmosférica: $500\text{hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Servicio postventa

1. Por favor, guarde bien los archivos que vienen con la máquina y las facturas de este producto, y tiene que presentar estos archivos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si hay algún problema en el proceso de uso, por favor póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo, para que nuestra empresa pueda proporcionarle soporte técnico y servicios de mantenimiento precisos y rápidos de manera oportuna.
3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o daña debido a la correcta instalación y uso según las especificaciones, el producto disfrutará de un año de garantía gratuita y servicio de mantenimiento de por vida con el "certificado" o factura.
4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKH099 | REF.: 319-SKH099

**CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA 3 FUNCIONES Y BARANDILLAS DE SECCION /ELECTRIC HOSPITAL BED
3 FUNCTIONS AND SECTION RAILS/LIT D'HOPITAL ELECTRIQUE 3 FUNCTIONS ET
RAMBARDES/LETTO DA OSPEDALE ELETTRICO 3 FUNZIONI E SPONDE/ CAMA DE HOSPITAL
HOSPITAL ELETRICA 3 FUNCOES E CORRIMAOS DE SECCAO/ ELEKTRISCHES KRANKENHAUSBETT MIT
3 FUNKTIONEN UND SEITENGELANDER**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
Valencia(Spain)

LOT:HW25xxx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com