



Manual de usuario

SKH103-1 **Carro para instrumentos**



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ACCIONES: 870098

Contenido

Introducción manual	2
1. Guía de instalación	3
1.1 Lista de accesorios estándar	3
1.2 Instalación de las ruedas	4
2. Método	5
2.1 Método de uso	6
3. Exclusión de averías.....	7
4. Mantenimiento del carro para instrumentos.....	7
5. Embalaje, transporte y almacenamiento.....	8
6. Servicio posventa	8

Introducción manual

Nota:

Lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalar y utilizar el producto. Todos los usuarios deben conocer el manual de usuario y todas las precauciones.



- ▶ Este manual es aplicable al carro para instrumentos SKH103-1. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de revisión para el mantenimiento.
- ▶ Los gráficos de este manual son solo para referencia del usuario. En el uso real, consulte el objeto real.
- ▶ Este manual de usuario incluye la descripción, las instrucciones, el mantenimiento y los parámetros técnicos del producto.
- ▶ Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el centro de servicio posventa o con el distribuidor.
- ▶ Cualquier persona que utilice o maneje este producto debe leerlo y cumplirlo.
- ▶ Salvo en situaciones imprevistas, los usuarios deben familiarizarse con el uso y las precauciones.

1. Guía de instalación

1.1 Lista de accesorios estándar

Después de abrir la caja de embalaje, compruebe que las siguientes piezas se encuentran completas en la caja:


Tabla a:

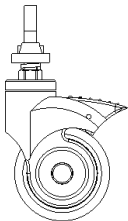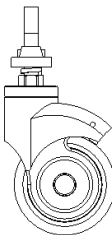N.	Nombre	Imagen	Especificaciones	Cantidad	Unidad
1	Cuerpo principal		620 mm (largo) x 480 mm (ancho) x 960 mm (alto)	1	pcs
2	Ruedas con freno		Ruedas de 5 pulgadas con freno	2	pcs
3	Ruedas sin freno		Ruedas de 5 pulgadas sin freno	2	pcs



1.2 Ruedas para instalación e

Coloque una almohadilla protectora y ponga el carro del instrumento boca abajo;


Retire las ruedas giratorias, primero aflojándolas hasta la posición adecuada, luego insértelas en el tubo y apriételas con una llave hexagonal interna.

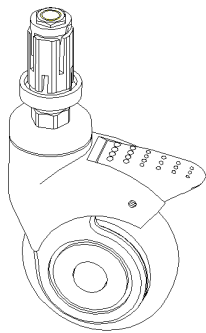


1

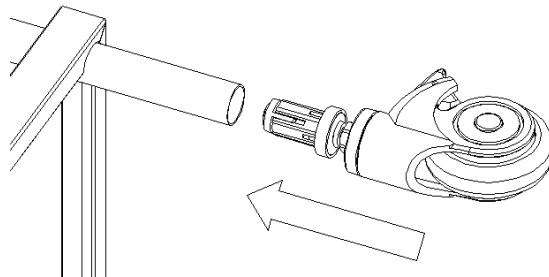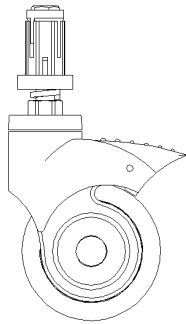

2

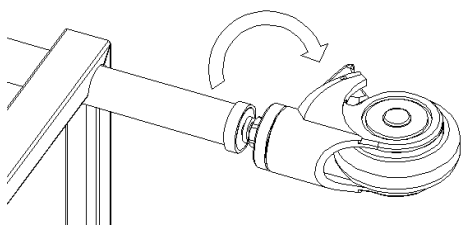

3

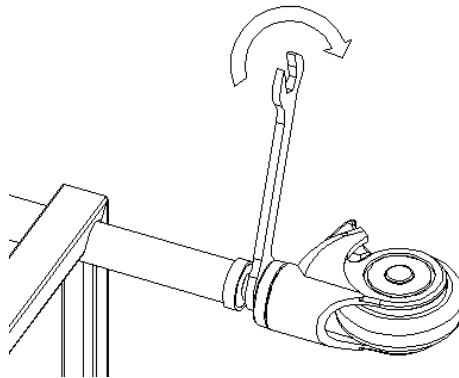

4

2. Método de uso




1-Cuerpo principal 2 ruedas


Tamaño del carro para instrumentos	Longitud	mm	620
	Ancho		480
	Altura del carro sobre el suelo		96
Peso	Carga de trabajo segura	KG	100

2.1 Método de uso de las ruedas

2.1.1 Bloquear la rueda: Después de empujar el carro hasta la posición deseada, pulse el botón y bloquee la rueda cuando oiga un «clic», tal y como se muestra en la figura siguiente.

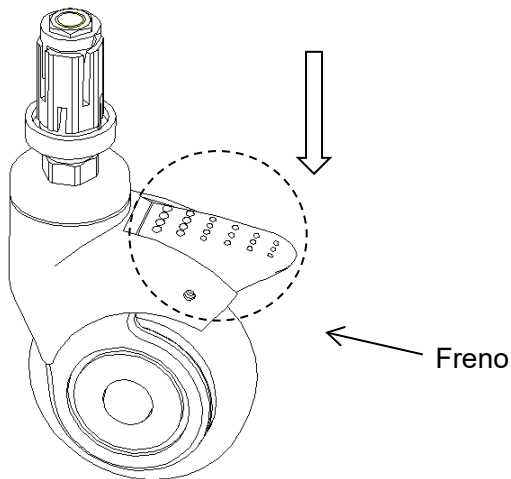

2.1.2 Desbloqueo de la rueda: Levante el botón con el pie y desbloquee la rueda cuando oiga un «clic».

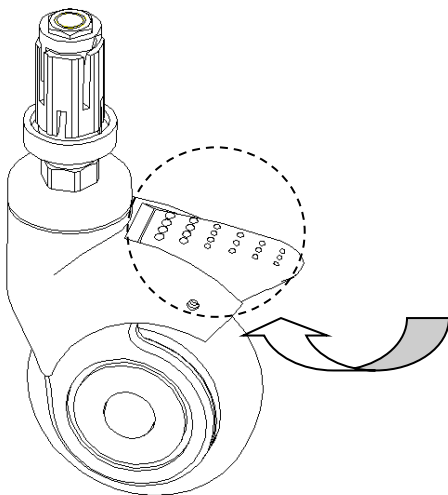

3. Exclusión de averías

Averías comunes	Causas probables	Métodos de exclusión
Dificultad para mover todo el carro	1. La rueda está bloqueada sin soltar el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno 2. Sustituya la rueda

4. Mantenimiento del carro para instrumentos

1. Para utilizar el carro de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad con regularidad. Realice una inspección exhaustiva cada seis meses para asegurarse de que no hay piezas sueltas en las conexiones y que todo funciona correctamente.

2. Cuando el carro de instrumentos alcance su vida útil máxima, las piezas metálicas y plásticas de la cuna se pueden reciclar.

3. Evite golpear la cuna y rayar el tubo con objetos afilados.

4. Si la estructura presenta manchas, se recomienda limpiarla con agua, sin utilizar productos químicos alcalinos o corrosivos, para evitar la oxidación de la superficie de acero inoxidable.

5. Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, que podrían dañarlas.

6. Está prohibido forzar las ruedas para frenar, ya que esto podría dañar el sistema de frenos.

7. El desgaste de la superficie del neumático de la rueda se puede detectar mediante una inspección visual. Es posible que haya hilos enredados y otras acumulaciones alrededor de la rueda; retire los pernos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el cojinete de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.

8. A juzgar por el desgaste, se decidirá si se sustituye la rueda completa. Después de sustituir o instalar la rueda, asegúrese de que el perno y la tuerca del eje estén bien conectados. Si es posible, utilice una arandela de seguridad o una tuerca de seguridad.

9. En el caso de las ruedas con freno, es necesario comprobar periódicamente que los frenos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de un carro para instrumentos equipado con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez para intentar empujar el carro y comprobar si el rendimiento del freno de cada rueda es bueno. Si la función de los frenos de las ruedas falla debido al desgaste o a daños en las ruedas, sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a comprobar el sistema de frenos.

10. Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda está dañado y es necesario reparar o sustituir el freno, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa o con un

distribuidor autorizado por nuestra empresa. Cada vez que se sustituyan los frenos, es necesario volver a comprobar el funcionamiento de los frenos de las ruedas.

5. Embalaje, transporte y almacenamiento

1. El embalaje del carro para instrumentos se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite las salidas precipitadas, las vibraciones violentas y la exposición a la luz solar y la lluvia durante el transporte del carro para instrumentos.
3. El carro para instrumentos debe almacenarse:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humedad relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Presión atmosférica: $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Servicio posventa

1. Conserve los archivos que acompañan a la máquina y las facturas de este producto en un lugar adecuado, ya que deberá presentarlos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si surge algún problema durante el uso, póngase en contacto con nuestra empresa a la mayor brevedad posible para que podamos proporcionarle un servicio de asistencia técnica y mantenimiento preciso y rápido.
3. No desmonte el dispositivo interno de este producto por su cuenta para evitar daños innecesarios. Si observa que el uso se ve afectado por problemas de calidad, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa o con nuestro distribuidor autorizado.
4. A partir de la fecha de compra, si el producto está realmente dañado o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa lo reparará sin coste alguno para los usuarios.
5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO: SKH103-1 | REF.: 319-SKH103-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

N.º 35, Lehong Road, Modern Agriculture
Parque de demostración, ciudad de Zhangjiagang,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unidad 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Países Bajos



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia (España)

**LOTE:
HW25xxx**



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE STOCK: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com