



Manuel d'utilisation

SKH103-1 **Chariot pour instruments**



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSAIRE : 870098

Contenu

Présentation du manuel.....	2
1. Guide d'installation	3
1.1 Liste des accessoires standard	3
1.2 Installation des roulettes.....	4
2. Mode	5
2.1 Mode d'emploi des roulettes.....	6
3. Exclusion des défauts.....	7
4. Entretien du chariot à instruments.....	7
5. Emballage, transport, stockage	8
6. Service après-vente	8

Introduction manuelle

Remarque :

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre strictement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de prendre connaissance du manuel d'utilisation et de toutes les précautions.



- ▶ Ce manuel s'applique au chariot pour instruments SKH103-1. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle pour l'entretien.
- ▶ Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Lors de l'utilisation, veuillez vous référer à l'objet réel.
- ▶ Ce manuel d'utilisation comprend la description, les instructions, l'entretien et les paramètres techniques du produit.
- ▶ Pour toute question, veuillez contacter le service après-vente ou le distributeur.
- ▶ Toute personne utilisant ou exploitant ce produit doit le lire et le respecter.
- ▶ Sauf en cas de situations imprévues, les utilisateurs doivent se familiariser avec l'utilisation et les précautions d'emploi.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard

Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier que les pièces suivantes sont bien présentes dans le carton :


Tableau a :

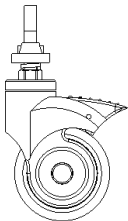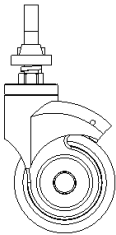N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Corps principal		L620 x l480 x H960 mm	1	pièce
2	Roulettes avec frein		Roulette de 5 pouces avec frein	2	pièces
3	Roue sans frein		Roulette 5 pouces sans frein	2	pièces



1.2 Installation des roulettes

Placez un coussin de protection et retournez le chariot à instruments ;


Retirez les roulettes, commencez par les desserrer jusqu'à la position appropriée, puis insérez-les dans le tube et serrez-les à l'aide d'une clé Allen.

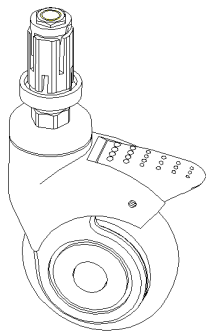


1

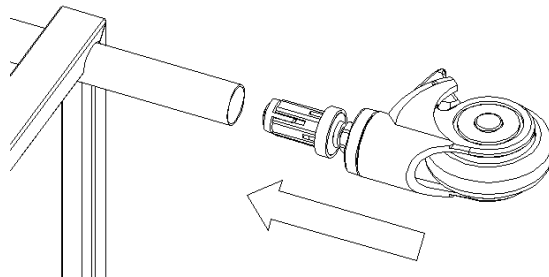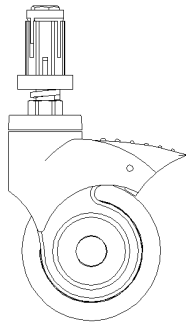

2

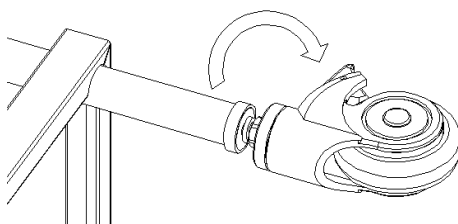

3

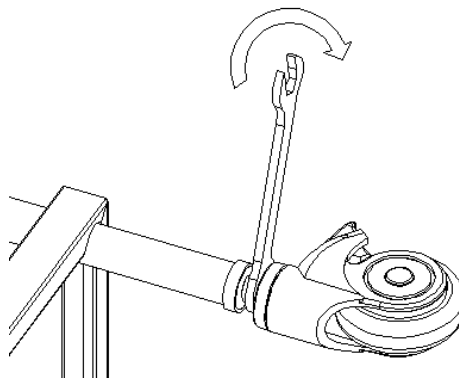

4

2. Méthode d'utilisation




1-Corps principal 2 roulettes


Dimensions du chariot pour instruments	Longueur	mm	620
	Largeur		480
	Hauteur du chariot au-dessus du sol		960
Poids	Charge utile	KG	100

2.1 Mode d'emploi des roulettes

2.1.1 Verrouillage des roulettes : après avoir poussé le chariot à la position souhaitée, appuyez sur le bouton et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic », comme indiqué sur la figure ci-dessous.

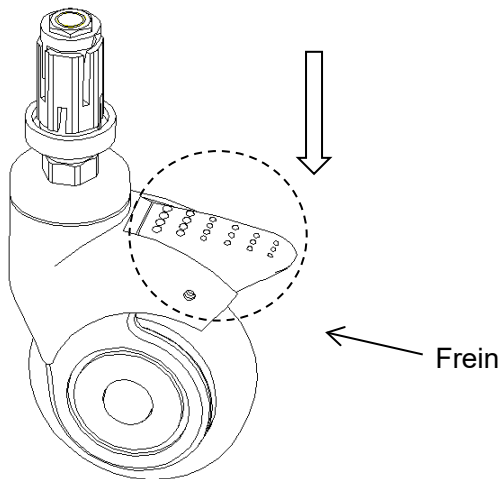

2.1.2 Déverrouillage de la roulette : soulevez le bouton avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un « cli k ».

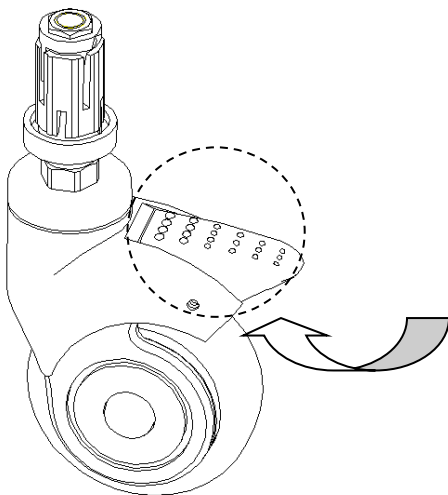

3. Exclusion des défauts

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes d'exclusion
Difficulté à déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein ait été desserré 2. La roulette est endommagée	1. Desserrez le frein 2. Remplacer la roulette

4. Entretien du chariot à instruments

1. Afin d'utiliser le chariot en toute sécurité, des contrôles de sécurité doivent être effectués régulièrement. Effectuez une inspection complète tous les six mois afin de vous assurer qu'il n'y a pas de jeu dans les pièces de connexion et que le chariot fonctionne normalement.
2. Lorsque le chariot à instruments atteint sa durée de vie maximale, les pièces métalliques et plastiques du berceau peuvent être recyclées.
3. Évitez de heurter le berceau et de rayer le tube avec des objets pointus.
4. Si la structure présente des taches, nous vous recommandons de la nettoyer à l'eau, sans utiliser de produits alcalins ou corrosifs, afin d'éviter la formation de rouille sur la surface en acier inoxydable.
5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter tout choc ou surcharge, qui pourraient les endommager.
6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, ce qui pourrait endommager le système de freinage.
7. L'usure de la surface des pneus peut être détectée par inspection visuelle. Des fils et autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue. Retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et réutilisées.
8. Déterminez si la roulette doit être remplacée dans son ensemble en fonction de son état d'usure. Après avoir remplacé ou installé la roue, assurez-vous que le boulon et l'écrou de l'axe sont bien fixés. Si possible, utilisez une rondelle de blocage ou un écrou de blocage.
9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des freins. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un chariot à instruments équipé de plusieurs roulettes à frein, un seul frein peut être bloqué à la fois afin d'essayer de pousser le chariot pour vérifier si les freins de chaque roulette fonctionnent correctement. Si les freins des roulettes ne fonctionnent pas en raison de l'usure ou de

l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, il est nécessaire de tester à nouveau l'efficacité des freins des roulettes.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot à instruments est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le chariot à instruments de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le chariot à instruments doit être stocké :
 - a) Température ambiante : $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidité relative : $\leq 95\%$.
 - c) Pression atmosphérique : $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Service après-vente

1. Veuillez conserver soigneusement les documents fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez présenter ces documents lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les plus brefs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et un service de maintenance précis et rapides.
3. Ne démontez pas vous-même les composants internes de ce produit afin d'éviter tout dommage inutile. Si vous constatez que le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'un problème de qualité, veuillez contacter notre service après-vente ou notre revendeur agréé.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société réparera gratuitement le produit pour les utilisateurs.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODÈLE : SKH103-1 | RÉF. : 319-SKH103-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parc de démonstration, Zhangjiagang City,

Province du Jiangsu, Chine



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unité 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Pays-Bas



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,

46980, Valence (Espagne)

LOT :
HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE DE STOCK : 870098



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com