



Manuel d'utilisation

SKR-AT670 Peinture couleur Chariot d'anesthésie

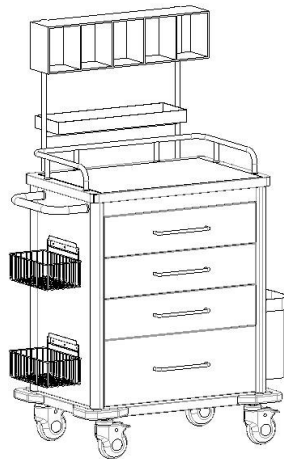






Image à titre indicatif uniquement

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard

Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier que les pièces suivantes sont bien présentes dans le carton :

Tableau a :

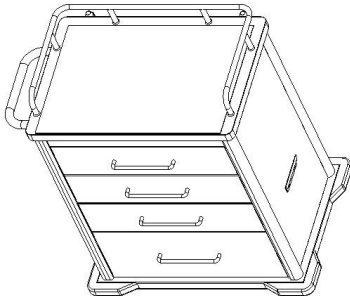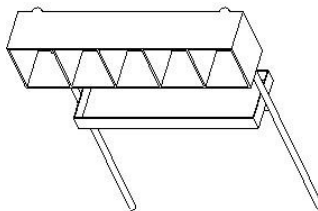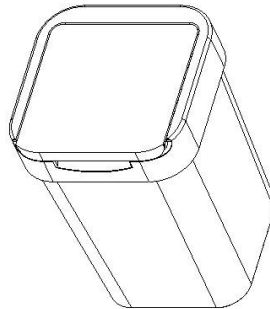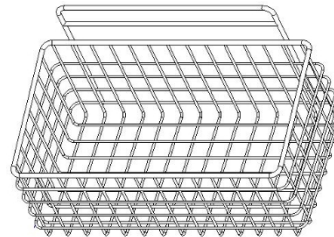N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Corps principal		L670 x l450 x H880 mm	1	pièce
2	Boîte d'anesthésie		Longueur 600 mm/Total 5 grilles	1	pc
3	Poubelle (avec couvercle)		L180 x l180 x H265 mm	1	pc
4	Panier en fil métallique		L180 x l180 x H265 mm	2	pièces

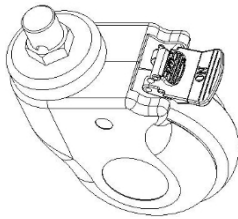
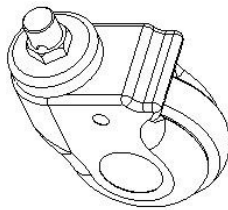
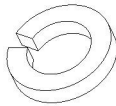
5	Roulettes avec frein		Roue pivotante de 4 pouces avec frein	2	pièces
6	Roue sans frein		Roulettes 4 pouces sans frein	2	pcs
7	Vis	/	Se reporter au tableau a.1	1	ensemble




Tableau a.1

N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Rondelle élastique		$\Phi 12 * \Phi 19,72 * H3,54$ mm	4	pièces


1.2 Installation des roulettes

Placez un coussin de protection et retournez le chariot ;

Retirez la rondelle élastique $\Phi 12$ du paquet de vis, puis retirez les roulettes et insérez-les dans le tube. Serrez-les dans le sens horaire à l'aide d'une clé Allen.

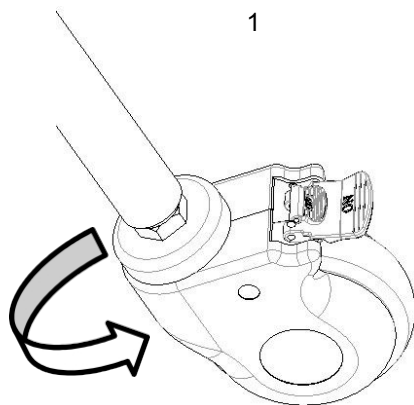
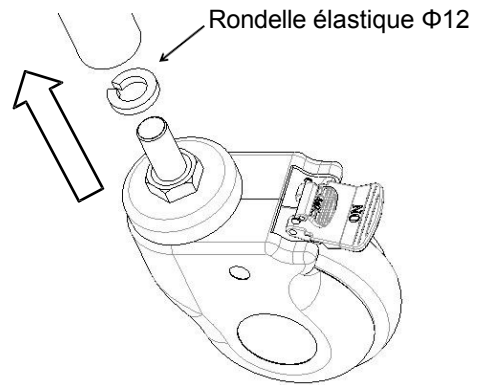
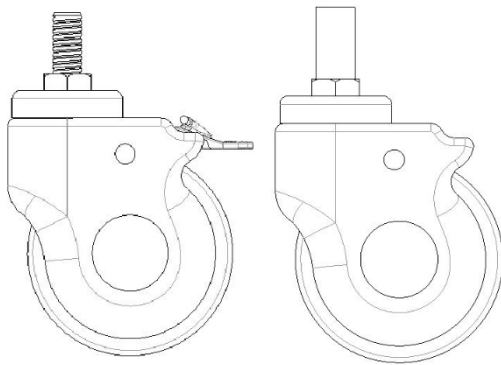


3



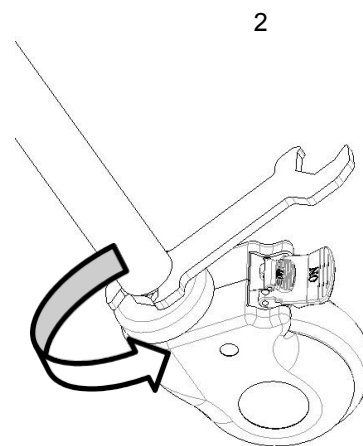


4


1.3 Installation du panier en filet

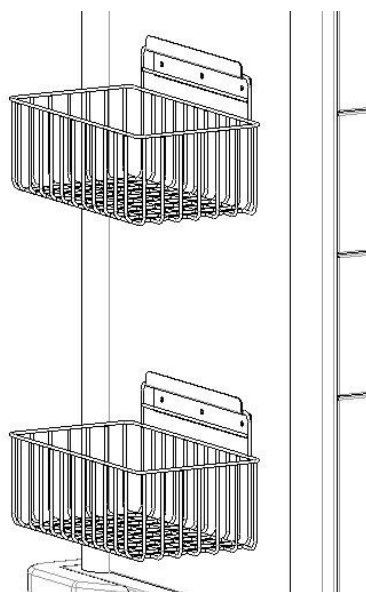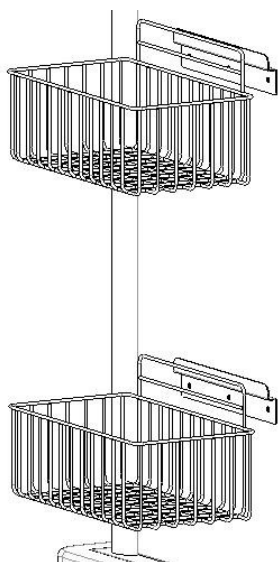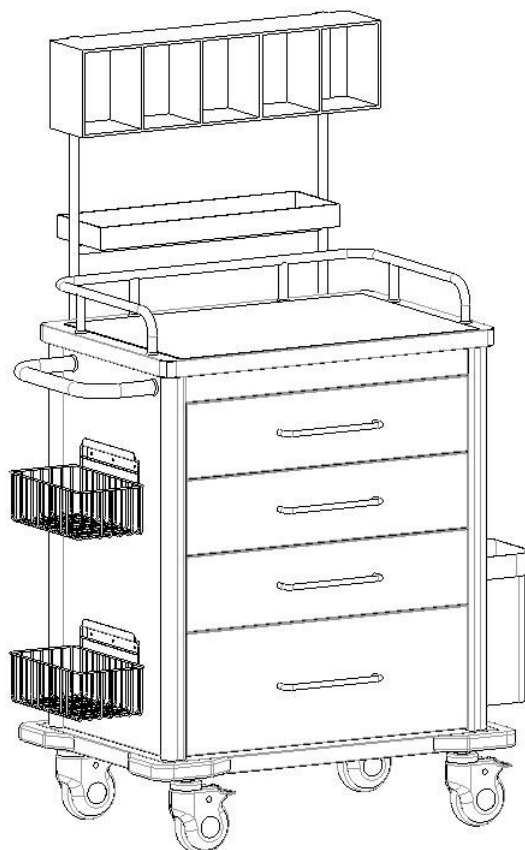

1.4 Installation de la poubelle

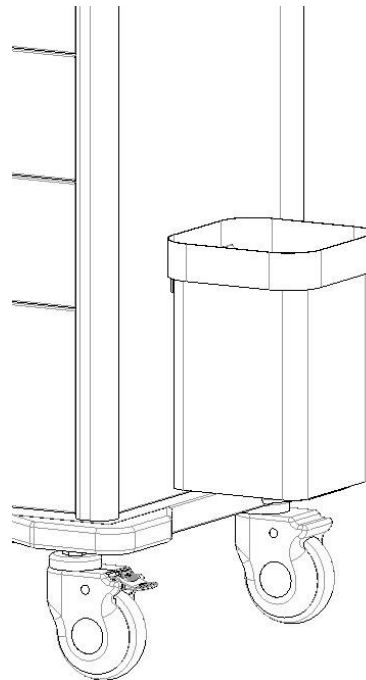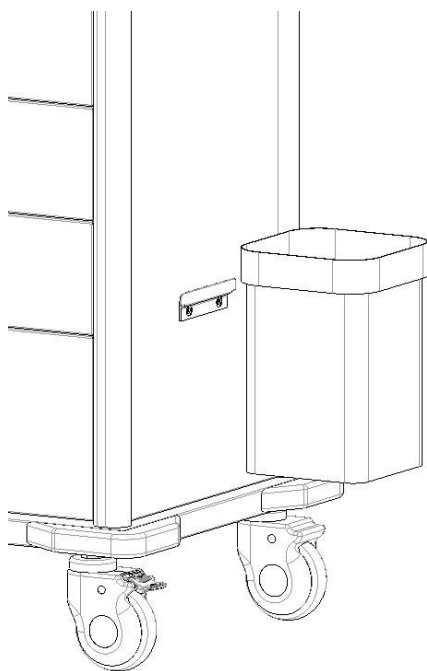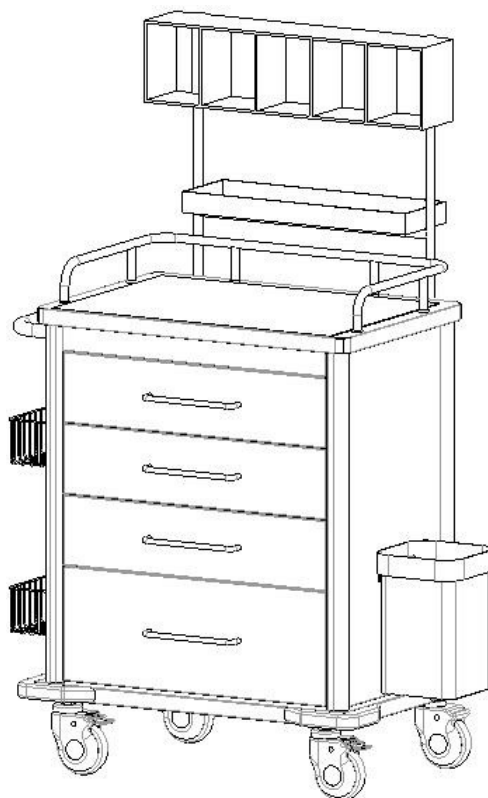

1. Mode d'emploi

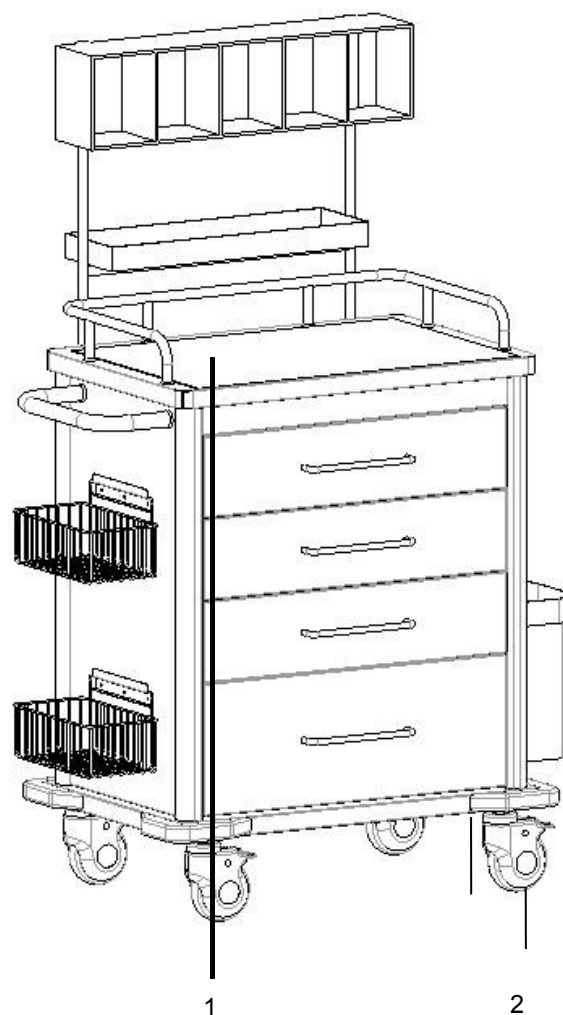


Chariot d'anesthésie peint en 1 couleur 2 roulettes


Dimensions du chariot	Longueur	mm	670
	Largeur		45
	Hauteur du chariot au-dessus du sol		96
Poids	Charge de travail sécurisée	kg	50

2.1 Mode d'utilisation des roulettes

Verrouiller la roulette : après avoir poussé le chariot d'anesthésie à l'emplacement souhaité, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic », comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

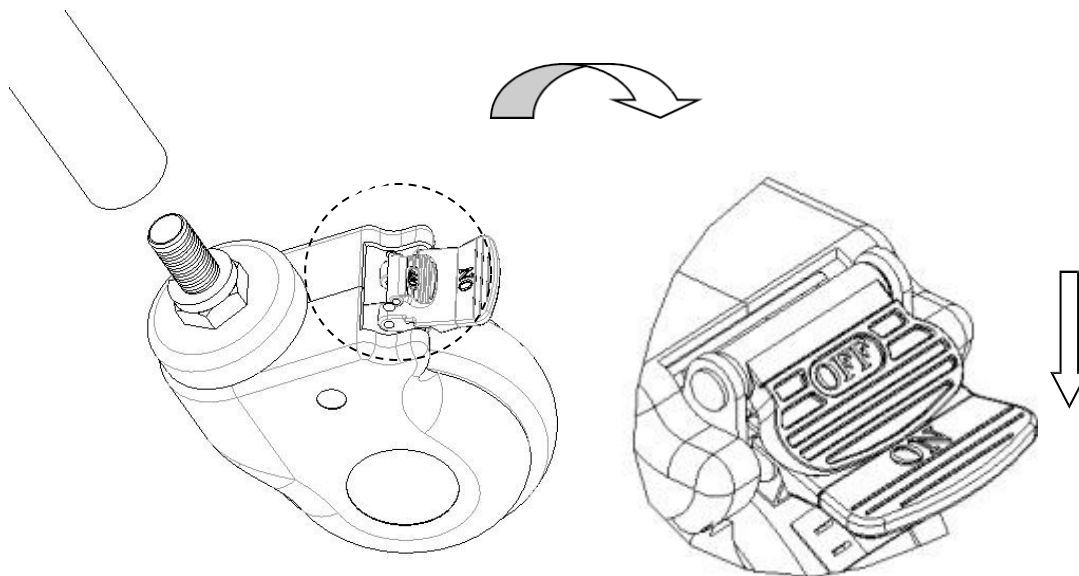

Déverrouillage des roulettes : appuyez avec le pied sur le bouton OFF et déverrouillez les roulettes lorsque vous entendez un « clic ».

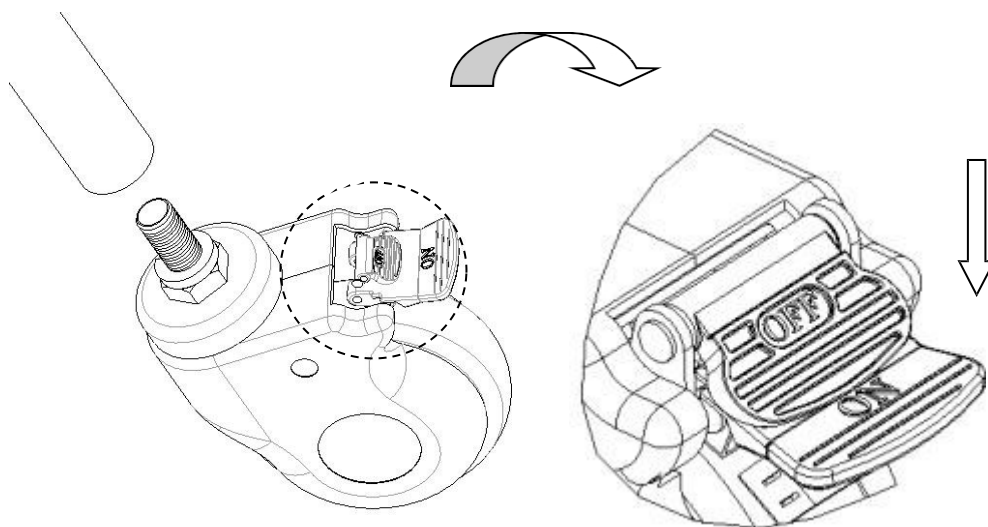

3. Dépannage

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes de dépannage
Difficulté à déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein ait été desserré 2. La roulette est endommagée	1. Desserrez le frein, vérifiez 2.1 2. Remplacer la roulette, vérifier 1.2

4. Entretien

1. Afin d'utiliser le chariot d'anesthésie en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer régulièrement des contrôles de sécurité sur celui-ci. Il est recommandé de le vérifier tous les six mois afin de s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations fonctionnent normalement.

2. Lorsque le châssis du chariot d'anesthésie vieillit et atteint une certaine durée d'utilisation, les pièces métalliques et les pièces en plastique du chariot d'anesthésie peuvent être recyclées.

3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angles vifs ou des couteaux pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour le garder propre et sec.

4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot d'anesthésie, car cela pourrait provoquer la rouille de la surface en acier inoxydable.

5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter tout choc ou surcharge, qui pourraient les endommager.

6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, car cela pourrait endommager le système de freinage.

7. L'usure de la surface des pneus peut être détectée par un contrôle visuel. Des fils de filature et autres accumulations peuvent s'enrouler autour des roues. Retirez les boulons et les écrous des roues, nettoyez les débris et vérifiez si les roulements sont endommagés. Si les pièces ne sont pas endommagées, vous pouvez les remonter et les réutiliser.

8. Pour déterminer si la roulette doit être remplacée en fonction de son temps d'utilisation et de son état d'usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et fixés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des contre-écrous pour vous aider dans cette opération.

9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement que les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un chariot d'anesthésie équipé de plusieurs roulettes à frein, un seul frein peut être bloqué à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le chariot d'anesthésie et de vérifier si l'un des freins de chaque roulette fonctionne correctement. Si le frein ne fonctionne pas en raison de l'usure ou d'un dommage des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, l'efficacité des freins des roulettes doit être testée à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le chariot de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le chariot doit être stocké :
 - a) Température ambiante : -40 °C ~ +70 °C .
 - b) Humidité relative : ≤ 95 %.
 - c) Pression atmosphérique : 500 hPa~ 1060 hPa.

6. Service après-vente

1. Veuillez conserver les fichiers fournis avec la machine et les factures de ce produit, et vous devrez présenter ces fichiers lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les plus brefs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et un service de maintenance précis et rapides.
3. À compter de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé en raison d'une installation et d'une utilisation correctes conformément aux spécifications, il bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service de maintenance à vie avec le « certificat » ou la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-AT670 | REF.: 319-SKR-AT670

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO
SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

