



Manual do utilizador

SKR-AT670

Pintado a cores

Carrinho de anestesia

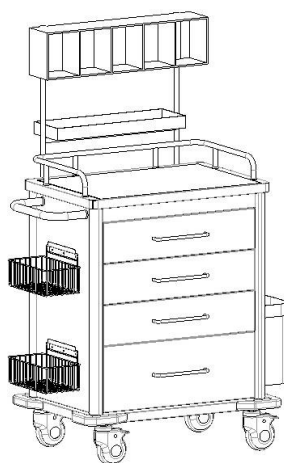






Imagem apenas para referência

1. Guia de instalação

1.1 Lista de acessórios padrão

Após abrir a caixa de embalagem, verifique se as seguintes peças estão completas na caixa:

Tabela a:

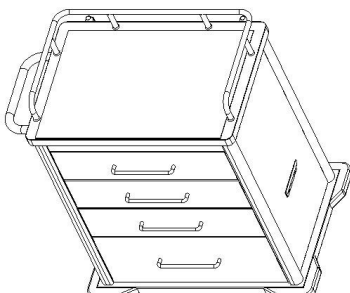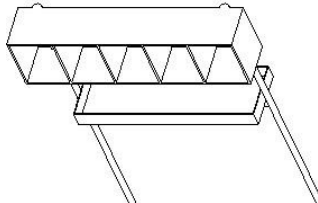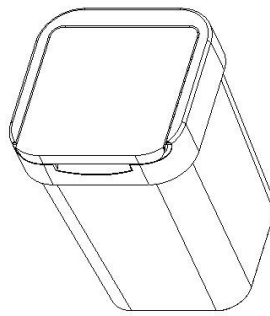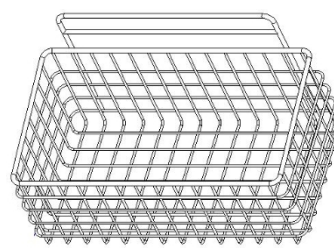N.	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Corpo principal		L670*W450*H880mm	1	pc
2	Caixa de anestesia		Comprimento 600 mm/Total 5 grades	1	pc
3	Caixote do lixo (com tampa)		C180*L180*A265 mm	1	pc
4	Cesto de malha		L180*W180*H265mm	2	unidades

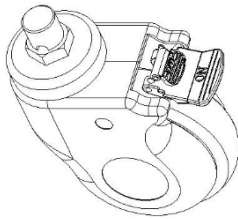
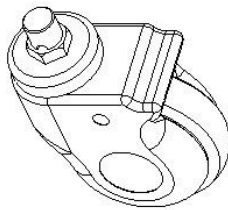
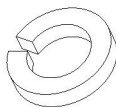
5	Rodízio com travão		Rodízio de 4 polegadas com travão	2	pcs
6	Rodízio sem travão		Rodízio de 4 polegadas sem travão	2	pcs
7	Parafuso	/	Consulte a Tabela a.1	1	conjunto




Tabela a.1

N.	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Arruela de pressão		$\Phi 12 * \Phi 19,72 * H3,54$ mm	4	unidades


1.2 Instalação dos rodízios

Coloque uma almofada protetora e vire o corpo do carrinho de cabeça para baixo;

Retire a arruela de mola $\Phi 12$ da embalagem dos parafusos, retire os rodízios, insira-os no tubo e aperte no sentido horário com uma chave hexagonal interna.

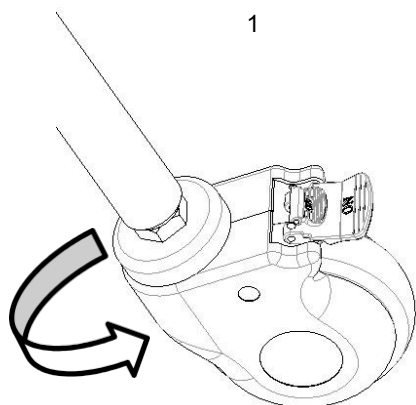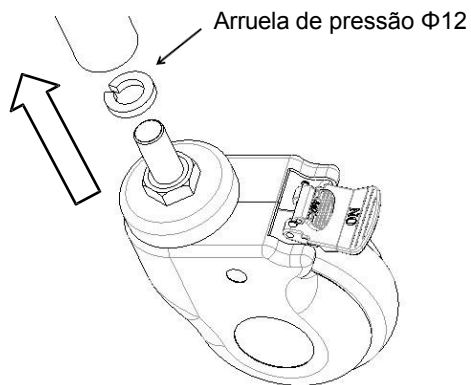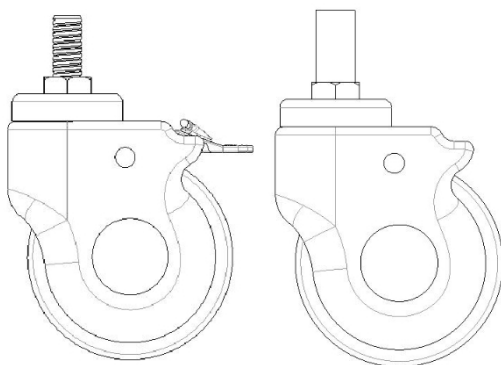

1


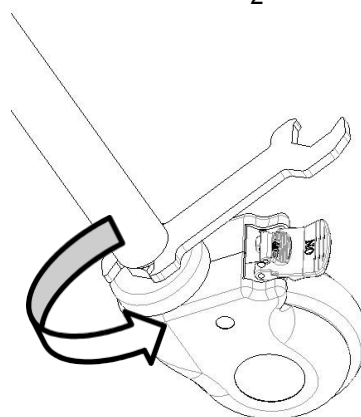


2




3

4


1.3 Instalação de cesto de malha

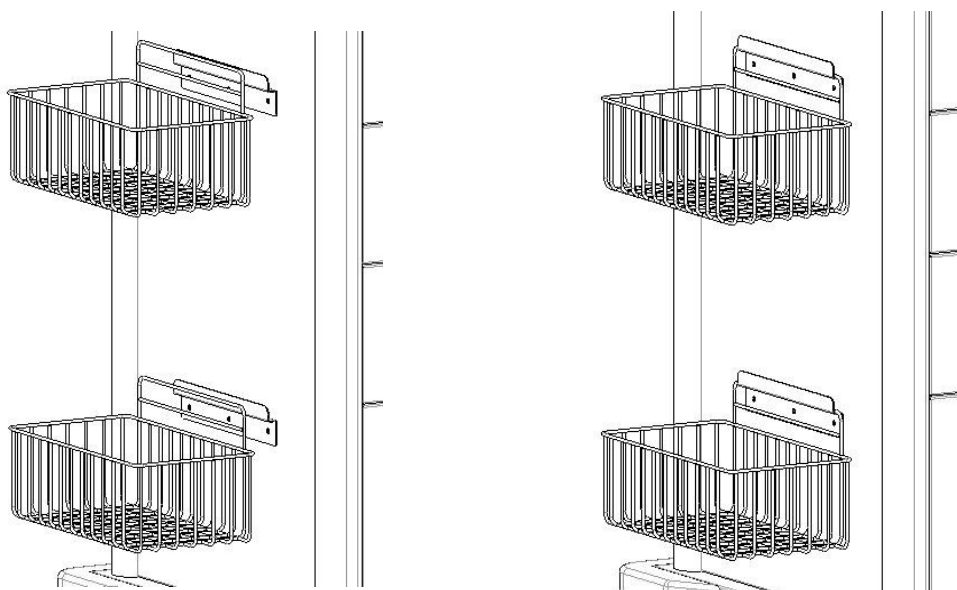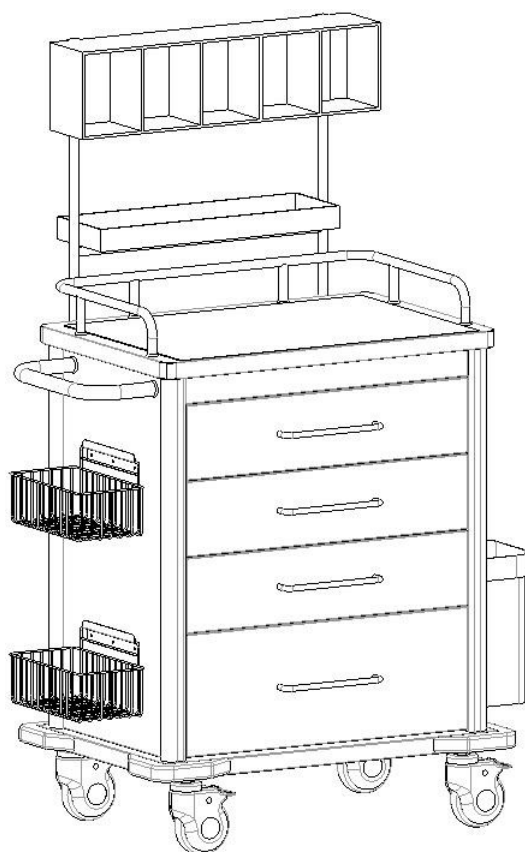

1.4 Instalação do caixote do lixo

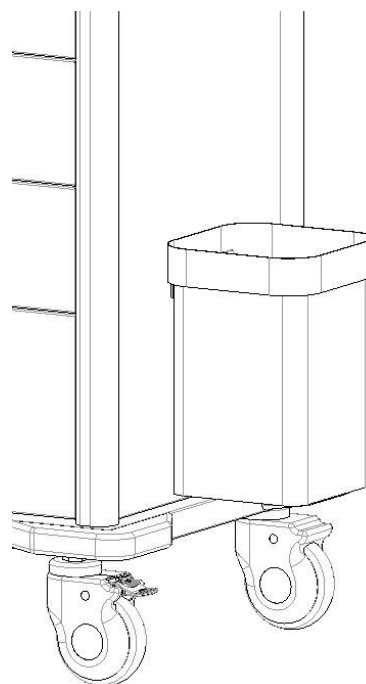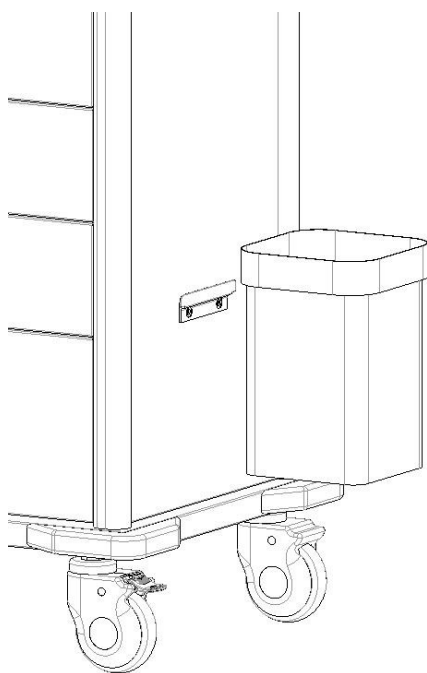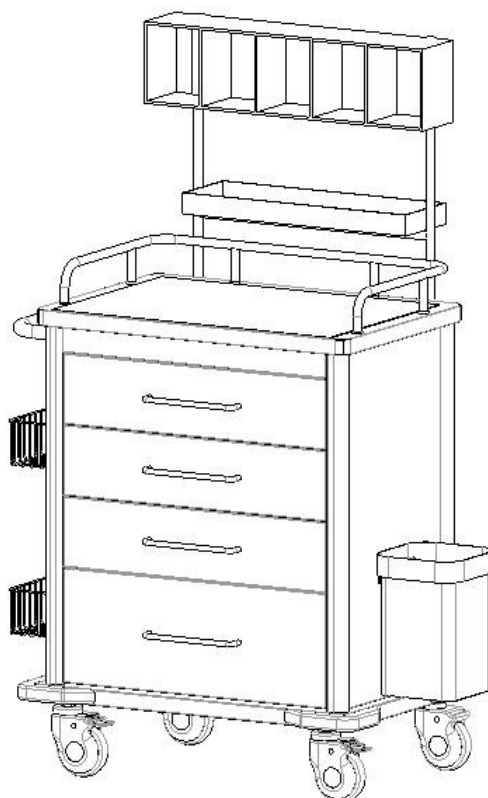

1. Método de utilização

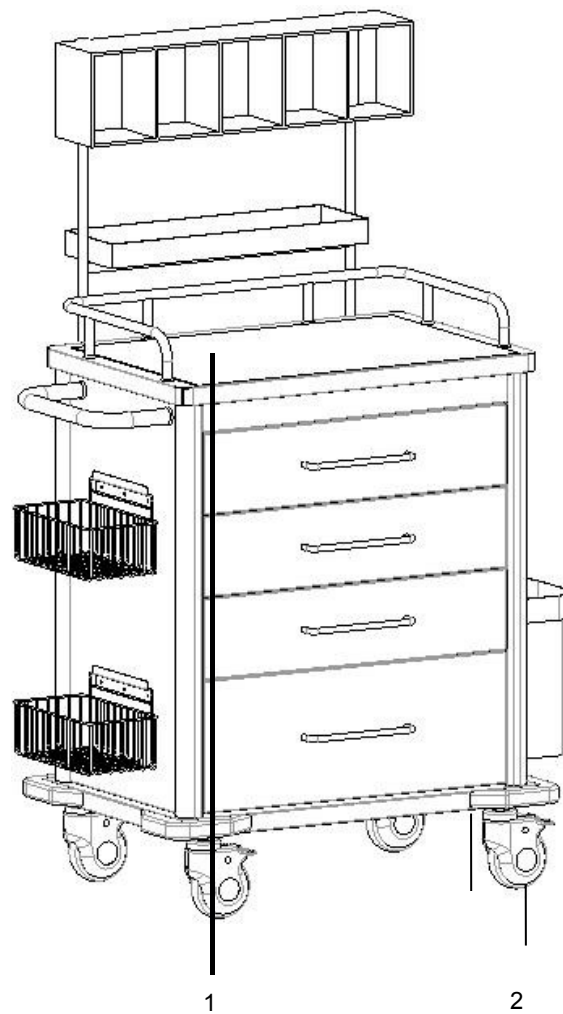


Carrinho de anestesia pintado em 1 cor 2 rodízios


Dimensões do carrinho	Comprimento	mm	67
	Largura		45
	A altura do carrinho acima do solo		960
Peso	Carga de trabalho segura	Kg	50

2.1 Método de utilização dos rodízios

Travar o rodízio: Após empurrar o carrinho de anestesia para a posição desejada, pressione o botão ON com o pé e trave o rodízio quando ouvir um "clique", conforme mostrado na figura abaixo.

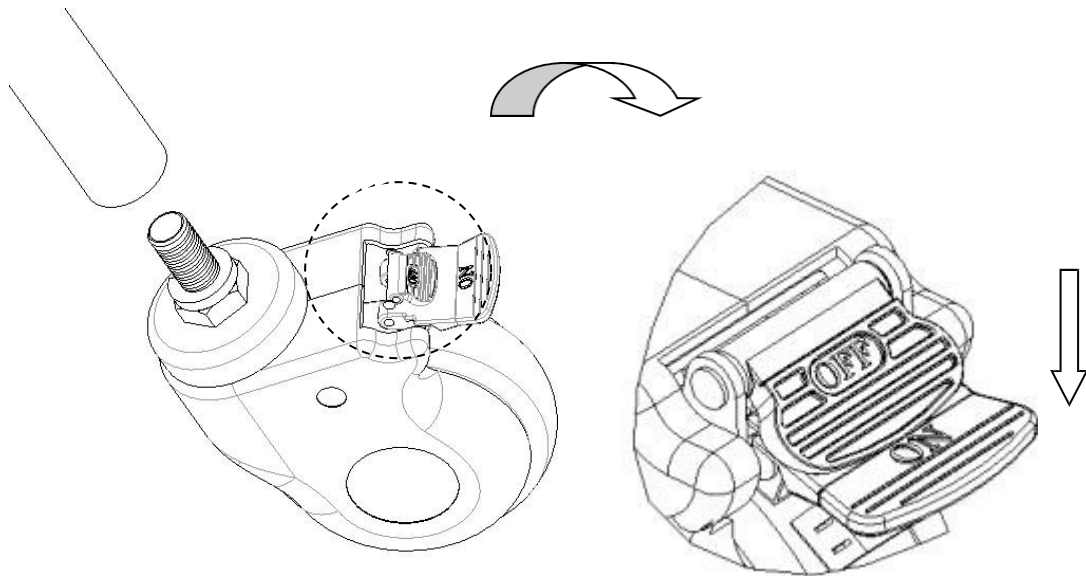

Desbloquear o rodízio: Pressione o botão OFF com o pé e desbloqueie o rodízio quando ouvir um "clique".

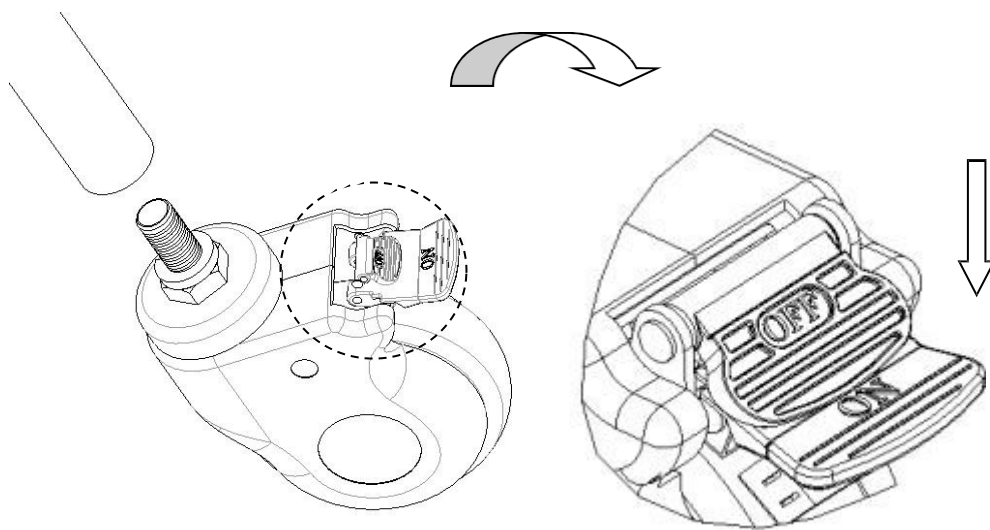

3. Exclusão de falhas

Falhas comuns	Razões prováveis	Métodos de exclusão
Dificuldade em mover todo o carrinho	1. O rodízio está bloqueado sem soltar o travão 2. O rodízio está danificado	1. Solte o travão, verifique 2.1 2. Substitua o rodízio, verifique 1.2

4. Manutenção

1. Para utilizar o carrinho de anestesia com segurança, é necessário realizar inspeções de segurança regulares no carrinho de anestesia. Recomenda-se verificá-lo a cada seis meses para garantir que as conexões não estejam soltas e que todas as operações estejam normais.

2. Quando a estrutura do carrinho de anestesia envelhecer e atingir um determinado tempo de manutenção, as peças metálicas e plásticas da estrutura do carrinho de anestesia podem ser recicladas.

3. Evite riscar o painel com aparelhos de ângulo agudo ou facas durante a utilização e limpe-o frequentemente para mantê-lo limpo e seco.

4. Se o painel for acidentalmente manchado, é recomendável limpá-lo. Não utilize produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar o carrinho de anestesia, pois isso fará com que a superfície de aço inoxidável enferruje.

5. Verifique regularmente os rodízios para evitar batidas ou sobrecargas, o que causará danos aos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a frenagem, pois isso causará danos ao sistema de freio.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detectado por inspeção visual. Alguns fios de tecido e outros acúmulos podem estar enrolados na roda, remova os parafusos e porcas da roda, limpe os detritos e verifique se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser remontadas e utilizadas.

8. Para avaliar se o rodízio deve ser substituído de acordo com o tempo de uso e o desgaste, pode substituir as rodas e certificar-se de que os parafusos e porcas dos eixos estão bem apertados e conectados. Se possível, use arruelas de pressão ou contraporcas para ajudar nesse processo.

9. Para os rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização. Para um carrinho de anestesia equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez, o que lhe permitirá tentar empurrar o carrinho de anestesia e verificar se o desempenho de um dos travões de cada rodízio está bom. Se a função do travão falhar devido ao desgaste ou danos nas rodas, substitua imediatamente as rodas e teste novamente o sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travagem do rodízio estiver danificado e o travão precisar de ser reparado ou substituído, contacte o nosso departamento de assistência pós-venda ou um revendedor autorizado pela nossa empresa. Sempre que os travões forem substituídos, o desempenho dos rodízios deve ser testado novamente.

5. Embalagem, transporte, armazenamento

1. A embalagem do carrinho é feita de acordo com o contrato ou a norma do produto.
2. Evite sair com pressa, vibrações violentas e proteja do sol e da chuva durante o transporte do carrinho.
3. O carrinho deve ser armazenado:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidade relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressão atmosférica: $500 \text{ hPa} \sim 1060 \text{ hPa}$.

6. Serviço pós-venda

1. Guarde os ficheiros que acompanham a máquina e as faturas deste produto de forma adequada, pois terá de os apresentar quando a empresa realizar a garantia e a manutenção do produto.
2. Se houver algum problema durante a utilização, contacte a nossa empresa atempadamente, para que possamos prestar-lhe um serviço de assistência técnica e manutenção preciso e rápido.
3. A partir da data de venda, se o produto estiver quebrado ou danificado devido à instalação e uso corretos de acordo com as especificações, o produto terá garantia gratuita de um ano e serviço de manutenção vitalícia com o "certificado" ou fatura.
4. A partir da data de compra, se estiver realmente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade dentro de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores uma reparação gratuita do produto.
5. Assistência técnica vitalícia do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-AT670 | REF.: 319-SKR-AT670

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO
SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

