



Manuel de l'utilisateur

SKR-CT601 Chariot à médicaments



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

CODE DE STOCK : 870098

1. Installation des roulettes

Alignez le boulon de la roue avec le trou de montage au bas du chariot et insérez la roue. Insérez la vis dans le trou de montage et serrez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.



1




2




3

2. Méthode d'utilisation des roulettes

Verrouillez la roulette : Après avoir poussé le chariot d'anesthésie dans la position souhaitée, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un "clac", comme indiqué dans la figure ci-dessous.

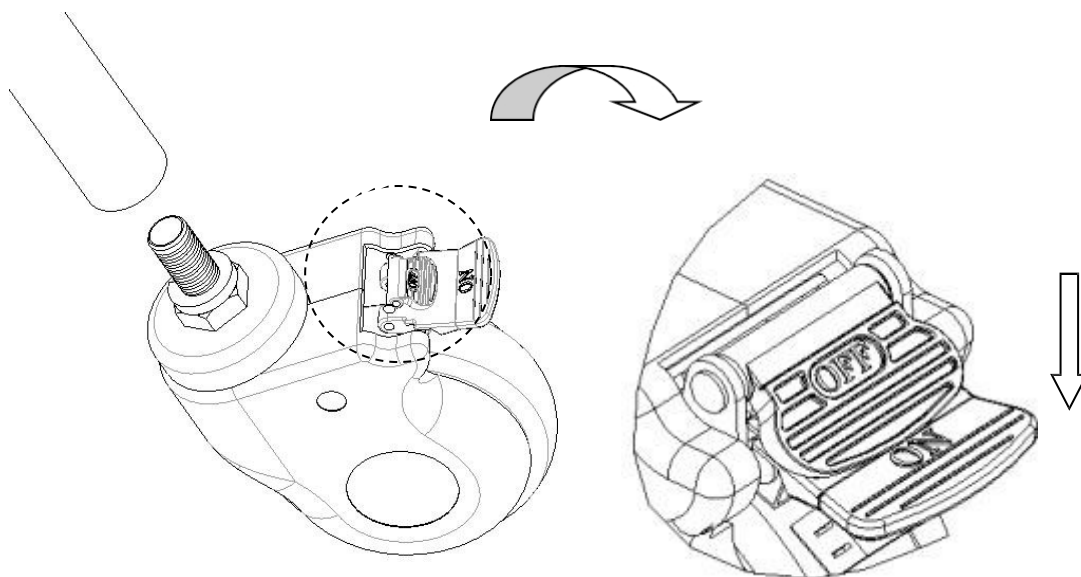

Déverrouillez la roulette : Appuyez sur le bouton OFF avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un "clac".

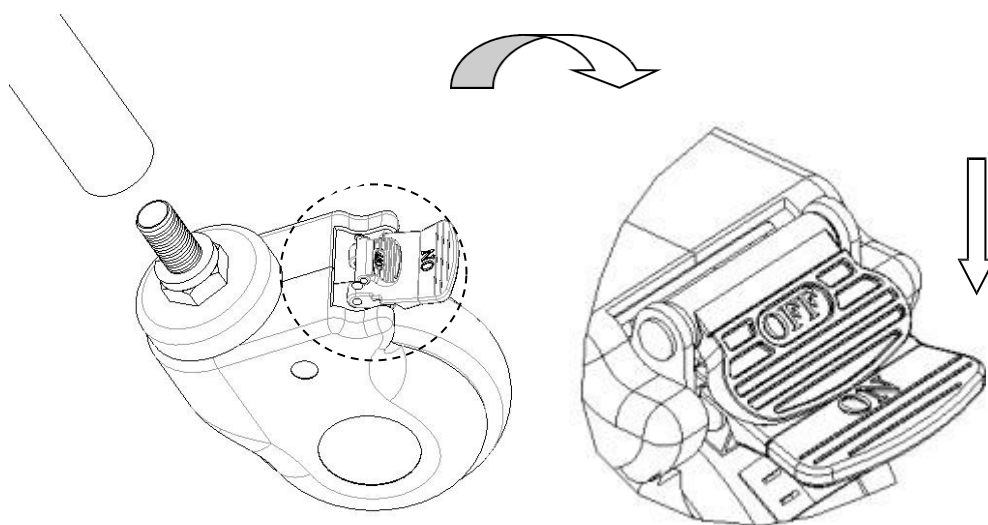

3.Exclusion des défauts

Défaillances courantes	Raisons probables	Méthodes d'exclusion
Difficile de déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein ne soit desserré. 2. Le lanceur est endommagé	1. Desserrer le frein, vérifier 2.1 2. Remplacer la roulette, vérifier 1.2

4. Maintenance

1. Afin d'utiliser le chariot d'anesthésie en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer des contrôles de sécurité réguliers sur le chariot d'anesthésie. Il est recommandé de le vérifier tous les six mois pour s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations sont normales.

2. Lorsque le châssis du chariot d'anesthésie vieillit et qu'il atteint une certaine durée de vie, les parties métalliques et plastiques du châssis du chariot d'anesthésie peuvent être recyclées.

3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angle vif ou des couteaux pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour qu'il reste propre et sec.

4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot d'anesthésie, car la surface en acier inoxydable rouillerait.

5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter les chocs ou les surcharges, qui endommageraient les roulettes.

6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, ce qui endommagerait le système de freinage.

7. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par une inspection visuelle. Certains fils et d'autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue. Retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et utilisées.

8. En fonction de la durée d'utilisation et de l'usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des écrous de blocage pour vous aider dans cette opération.

9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des freins. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Dans le cas d'un chariot d'anesthésie équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le chariot d'anesthésie et de vérifier si l'un des freins de chaque roulette fonctionne correctement. Si le frein ne fonctionne pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou le revendeur agréé fourni par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Éviter les sorties brusques, les vibrations violentes, le soleil et la pluie pendant le transport du chariot.
3. Le chariot doit être rangé :
 - a) Température ambiante : +5 °C~ +40 .°C
 - b) Humidité relative : ≤ 85%.
 - c) Pression atmosphérique : 70 kPa~ 106 kPa.

6. Service après-vente

1. Veuillez conserver correctement les dossiers qui accompagnent la machine et les factures de ce produit, et vous devez présenter ces dossiers lorsque l'entreprise effectue la garantie et l'entretien du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société à temps, afin qu'elle puisse vous fournir une assistance technique et des services de maintenance précis et rapides.
3. À partir de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé en raison d'une installation et d'une utilisation correctes conformément aux spécifications, le produit bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service d'entretien à vie avec le "certificat" ou la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, l'entreprise fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie assuré par le fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SKR-CT601 | REF.: 319-SKR-CT601

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia (Spain)

LOT:

