



Manual e d'uso

SKR-CT670-1

Trattamento verniciato a colori Carrello



Immagine solo a scopo illustrativo

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE AZIONARIO: 870098

Contenuto

Introduzione manuale.....	2
1. Guida all'installazione.....	3
1.1 Elenco degli accessori standard	3
1.2 Installazione delle rotelle	5
2. Modalità d'uso.....	6
2.1 Metodo di utilizzo delle rotelle	7
2.2 Metodo di utilizzo dei secchi.....	8
3. Esclusione dei guasti	9
4. Manutenzione	9
5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio	10
6. Servizio post-vendita	10

Introduzione manuale

Nota:

Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso. Tutti gli utenti devono conoscere il manuale d'uso e tutte le precauzioni.

► Il presente manuale è applicabile al carrello per trattamenti verniciato a colori SKR-CT670-1. Contiene le modalità di installazione, le istruzioni operative e i punti di controllo per la manutenzione.

► Le immagini presenti in questo manuale sono solo a titolo di riferimento per gli utenti. Nell'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.

► Il presente manuale utente include la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.

► Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.

► Chiunque utilizzi o utilizzi questo prodotto è tenuto a leggerlo e rispettarlo.

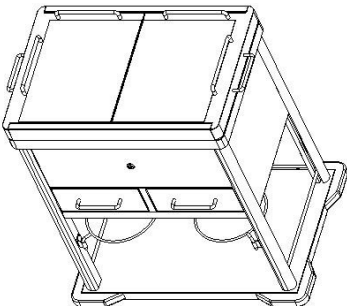
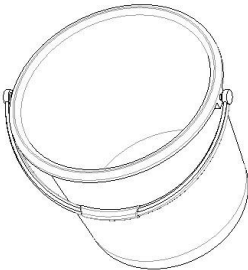
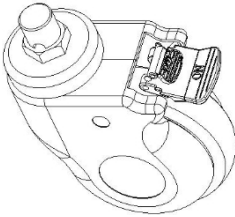
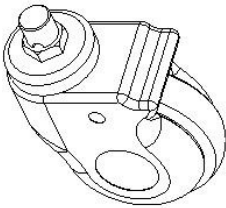
► Salvo alcune situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a familiarizzarsi con l'uso e le precauzioni.

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard

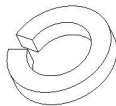
Dopo aver aperto la confezione, verificare che tutti i componenti elencati di seguito siano presenti:

Tabella a:

N.	Nome	Immagine	Specifiche	Q.TÀ	Unità
1	Corpo principale		L670*P450*H920 mm	1	pz
2	Secchio		φ233*205 mm	2	pz
3	Ruota con freno		Ruota da 4 pollici con freno	2	pz
4	Ruota senza freno		Ruota da 4 pollici senza freno	2	pz


4	Vite	/	Fare riferimento alla tabella a.1	1	set
---	------	---	-----------------------------------	---	-----

Tabella a.1

N.	Nome	Immagine	Specifiche	Q.TÀ	Unità
1	Rondella elastica		$\Phi 12^* \Phi 19,72^* H3,54$ mm	4	pz

1.2 Installazione delle rotelle

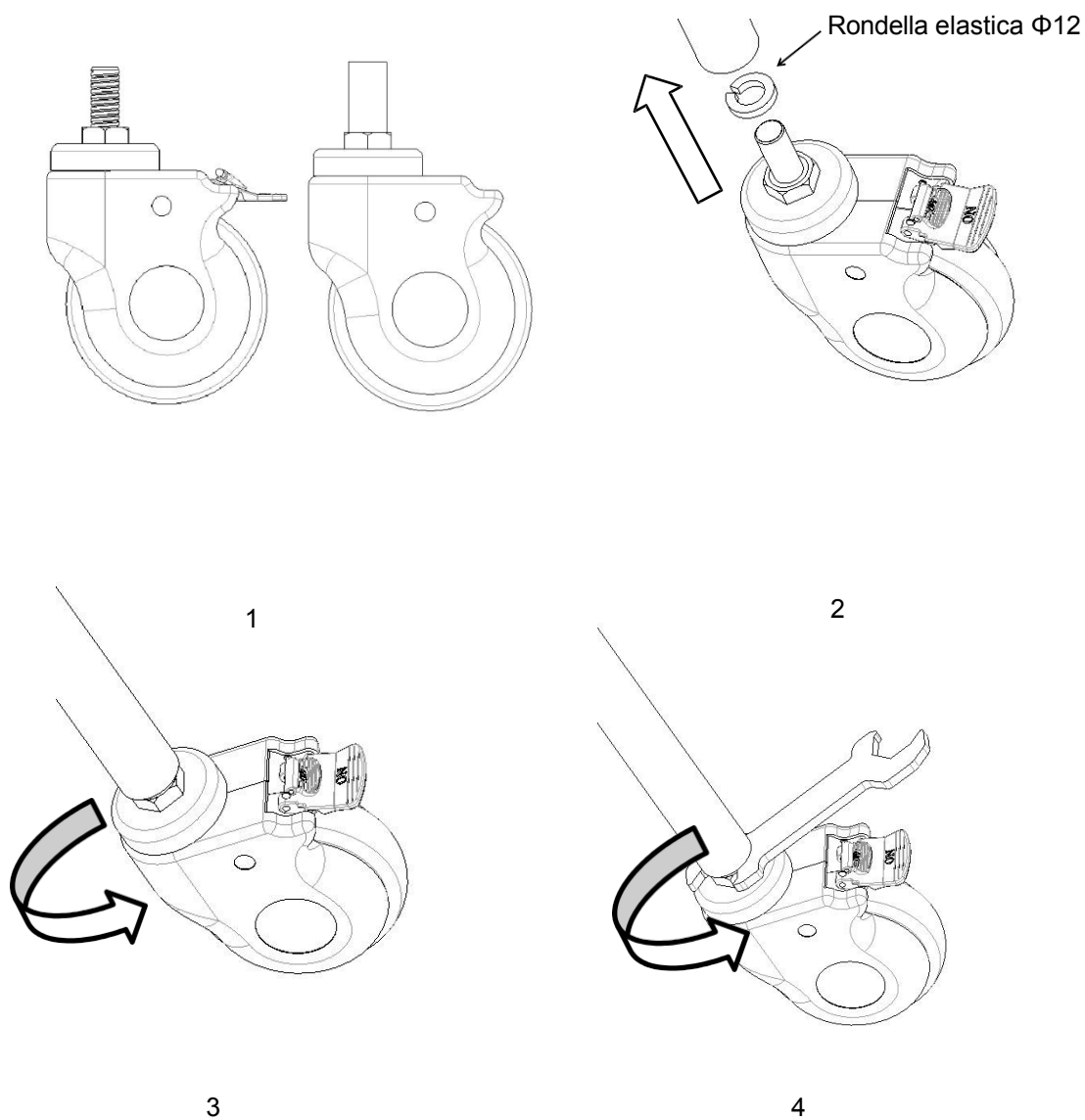Posizionare un cuscinetto protettivo e capovolgere il corpo del carrello;
Estraete la rondella elastica $\Phi 12$ dalla confezione delle viti, estraete le rotelle, quindi inseritele nel tubo e serrate in senso orario con una chiave esagonale interna.



2. Utilizza il metodo " "




Carrello di trattamento verniciato in tinta unita 2-Rotelle


Dimensioni carrello	Lunghezza	mm	670
	Larghezza		450
	L'altezza del carrello dal suolo		950
Peso	Carico di lavoro sicuro	Kg	50

2.1 Modalità d'uso delle rotelle dell'

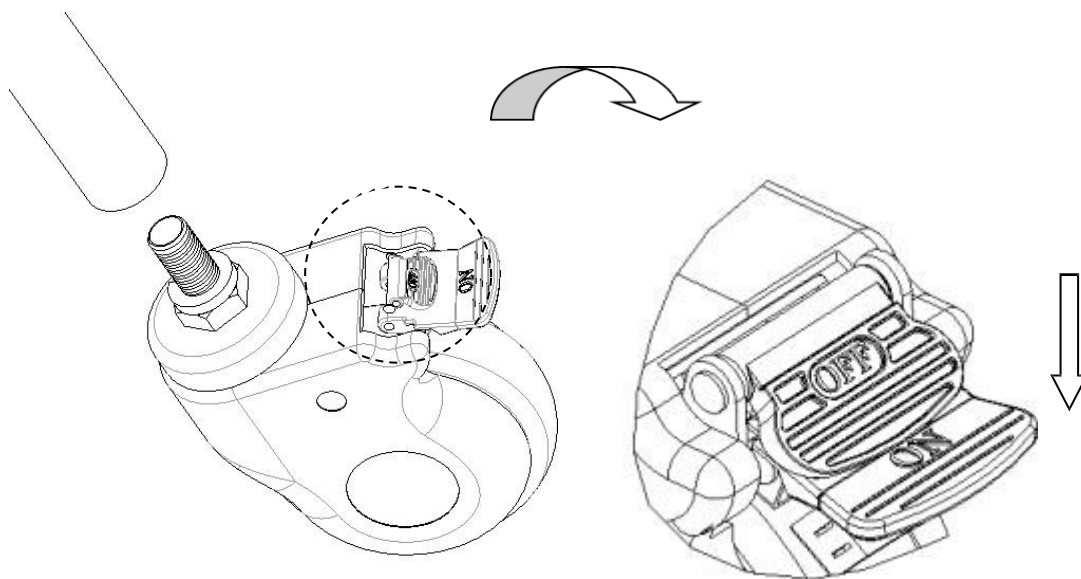Bloccare la rotella: dopo aver spinto il carrello di trattamento nella posizione desiderata, premere il pulsante ON con il piede e bloccare la rotella quando si sente un "clic", come mostrato nella figura sottostante.



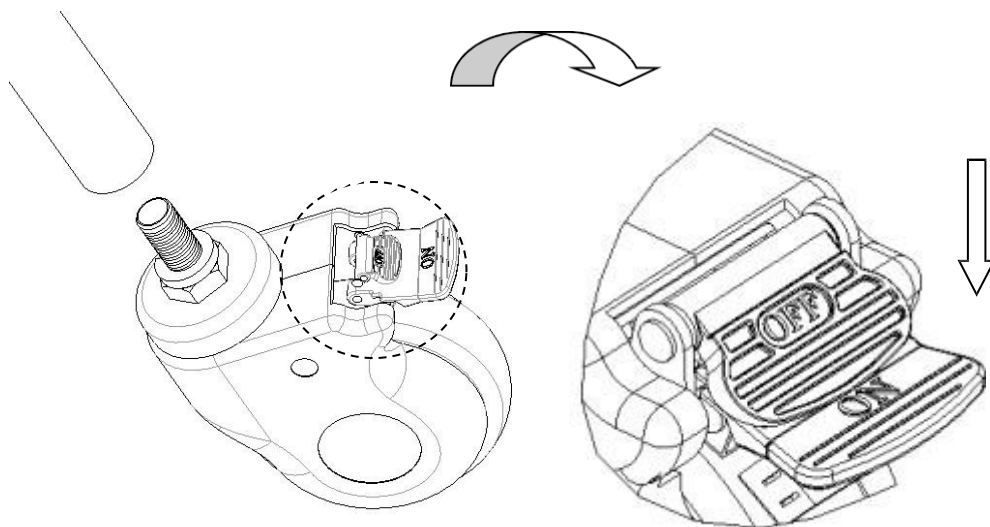Sbloccare la rotella: premere il pulsante OFF con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "clic".



2.1 Metodo di utilizzo dei secchi

Girare il cerchio e inserire i secchi.



3. Esclusione dei guasti

Guasti comuni	Probabili cause	Metodi di esclusione
Difficoltà nel muovere l'intero carrello	1. La rotella è bloccata senza rilasciare il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno, controllare 2.1 2. Sostituire la rotella, controllare 1.2

4. Manutenzione

1. Per utilizzare il carrello di trattamento in modo sicuro, è necessario eseguire regolari ispezioni di sicurezza sul carrello stesso. Si consiglia di controllarlo ogni sei mesi per assicurarsi che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.

2. Quando il telaio del carrello per trattamenti invecchia e raggiunge un certo tempo di manutenzione, le parti metalliche e plastiche del telaio possono essere riciclate.

3. Evitare di graffiare il pannello con utensili affilati o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.

4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il carrello di trattamento, poiché potrebbero causare la ruggine della superficie in acciaio inossidabile.

5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.

6. È vietato forzare le rotelle durante la frenata, poiché ciò potrebbe danneggiare il sistema frenante.

7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata mediante ispezione visiva. Alcuni fili di filo ritorto e altri accumuli potrebbero avvolgersi attorno alla ruota; rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e verificare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, è possibile rimontarle e utilizzarle.

8. Per valutare se la rotella deve essere sostituita in base al tempo di utilizzo e all'usura, è possibile sostituire le ruote e assicurarsi che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzare rondelle di sicurezza o dadi di bloccaggio per facilitare questa operazione.

9. Per le rotelle dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Per un carrello di trattamento dotato di più rotelle con freno, è possibile bloccare solo una rotella alla volta, il che consente di provare a spingere il carrello di trattamento e verificare che il funzionamento del freno di ciascuna rotella sia corretto. Se il freno non funziona a causa dell'usura o del danneggiamento delle ruote,

sostituire immediatamente le ruote e quindi riprovare il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio post-vendita o un rivenditore autorizzato dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, è necessario testare nuovamente le prestazioni frenanti delle rotelle.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio e

1. L'imballaggio del carrello viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Durante il trasporto del carrello, evitare urti, vibrazioni violente ed esporlo alla luce solare e alla pioggia.
3. Il carrello deve essere conservato:
 - a) Temperatura ambiente: da -40 °C a +70 °C.
 - b) Umidità relativa: ≤ 95%.
 - c) Pressione atmosferica: 500 hPa ~ 1060 hPa.

6. Servizio post-vendita

1. Conservare accuratamente i documenti forniti con la macchina e le fatture relative al prodotto, poiché saranno necessari per richiedere l'assistenza in garanzia e la manutenzione del prodotto.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, contattare tempestivamente la nostra azienda, in modo che possa fornire un'assistenza tecnica accurata e rapida e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. A partire dalla data di vendita, se il prodotto è rotto o danneggiato a causa di un'installazione e un utilizzo corretti secondo le specifiche, il prodotto godrà di un anno di garanzia gratuita e di un servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.
4. A partire dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Assistenza a vita dal produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELLO: SKRCT670-1 | RIF.: 319-SKRCT670-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd No.
35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration
Park, Zhangjiagang City,
Provincia di Jiangsu, Cina



SUNGO Europe B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Unità 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, Paesi
Bassi



Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,
46980, Paterna, Valencia (Spagna)



LOTTO: HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE AZIONARIO: 870098



N. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com