



Manual do utilizado r

SKR-CT670-1

Tratamento com pintura colorida
Carrinho



Imagem apenas para referência

Índice

Introdução manual	2
1. Guia de instalação	3
1.1 Lista de acessórios padrão	3
1.2 Instalação dos rodízios	5
2. Método de utilização	6
2.1 Método de utilização dos rodízios	7
2.2 Método de utilização dos baldes	8
3. Exclusão de falhas	9
4. Manutenção	9
5. Embalagem, transporte, armazenamento	10
6. Serviço pós-venda	10

Introdução manual

Nota:

Leia atentamente este manual e siga rigorosamente as etapas antes de instalar e utilizar. Exigimos que todos os utilizadores tenham conhecimento do manual do utilizador e de todas as precauções.





- ▶ Este manual é aplicável ao carrinho de tratamento pintado a cores SKR-CT670-1. Ele contém o método de instalação, instruções de operação e pontos de verificação de manutenção.
- ▶ Os gráficos neste manual são apenas para referência dos utilizadores. Na utilização real, consulte o objeto real.
- ▶ Este manual do utilizador inclui a descrição, instruções, manutenção e parâmetros técnicos do produto.
- ▶ Em caso de dúvidas, entre em contacto com o centro de assistência pós-venda ou distribuidor.
- ▶ Qualquer pessoa que utilize ou opere este produto deve ler e cumprir as instruções.
- ▶ Exceto em algumas situações inesperadas, os utilizadores devem estar familiarizados com o uso e as precauções.

1. Guia de instalação

1.1 Lista de acessórios padrão


Após abrir a caixa de embalagem, verifique se as seguintes peças estão completas na caixa de embalagem:

Tabela a:

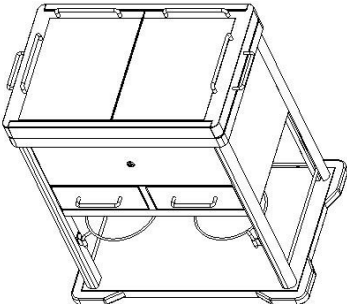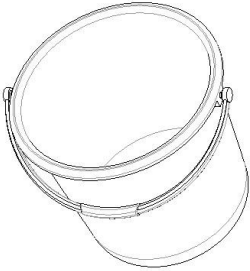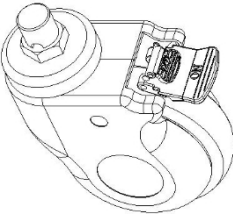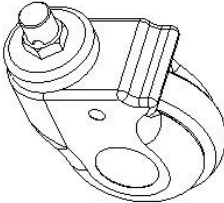N.º	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Corpo principal		C 670 x L 450 x A 920 mm	1	pc
2	Balde		φ233*205 mm	2	pcs
3	Rodízio com travão		Rodízio de 4 polegadas com travão	2	unidades
4	Rodízio sem travão		Rodízio de 4 polegadas sem travão	2	unidades

4	Parafuso	/	Consulte a Tabela a.1	1	conjunto
---	----------	---	-----------------------	---	----------




Tabela a.1

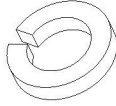N.º	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Arruela de pressão		$\Phi 12^* \Phi 19,72^* H3,54$ mm	4	unidades


1.2 Instalação dos rodízios

Coloque uma almofada protetora e vire o corpo do carrinho de cabeça para baixo;

Retire a anilha elástica $\Phi 12$ da embalagem dos parafusos, retire os rodízios, insira-os no tubo e aperte-os no sentido horário com uma chave hexagonal interna.

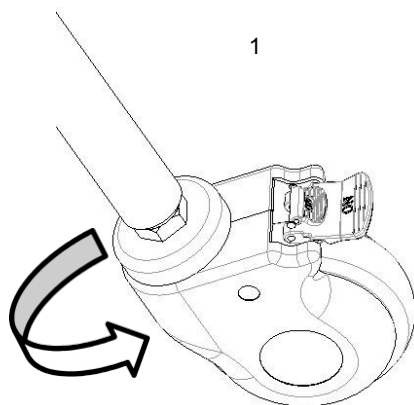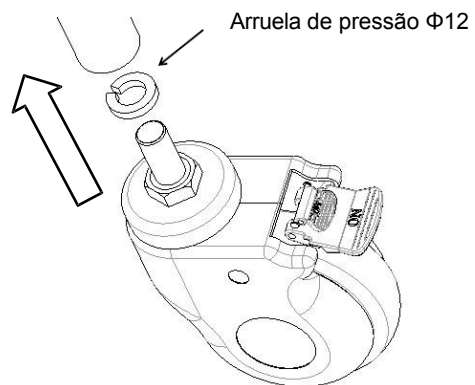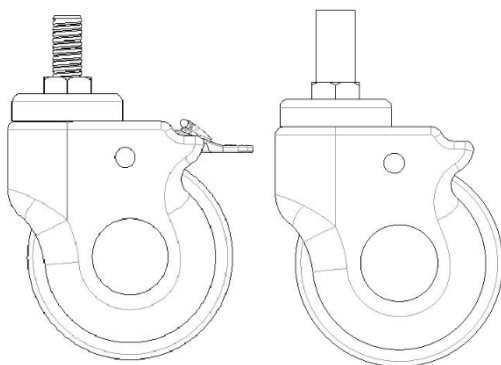

1

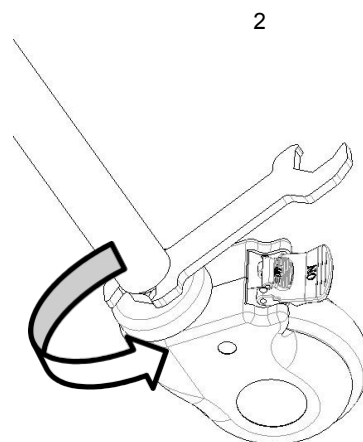

2

3

4

2. Utilizar o método




Carrinho de tratamento pintado com uma cor 2-Rodízios


Tamanho do carrinho	Comprimento	mm	670
	Largura		450
	A altura do carrinho acima do solo		950
Peso	Carga de trabalho segura	Kg	50

2.1 Método de utilização dos rodízios e es

Trave o rodizio: após empurrar o carrinho de tratamento para a posição desejada, pressione o botão ON com o pé e trave o rodizio quando ouvir um «clique», conforme mostrado na figura abaixo.

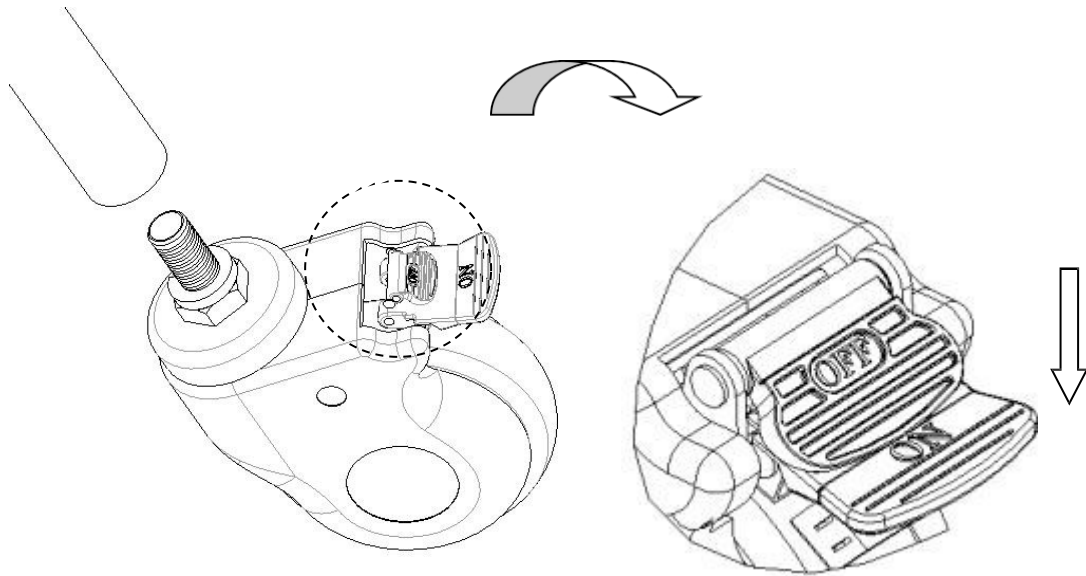


Desbloqueie o rodizio: Pressione o botão OFF com o pé e desbloqueie o rodizio quando ouvir um «clique».

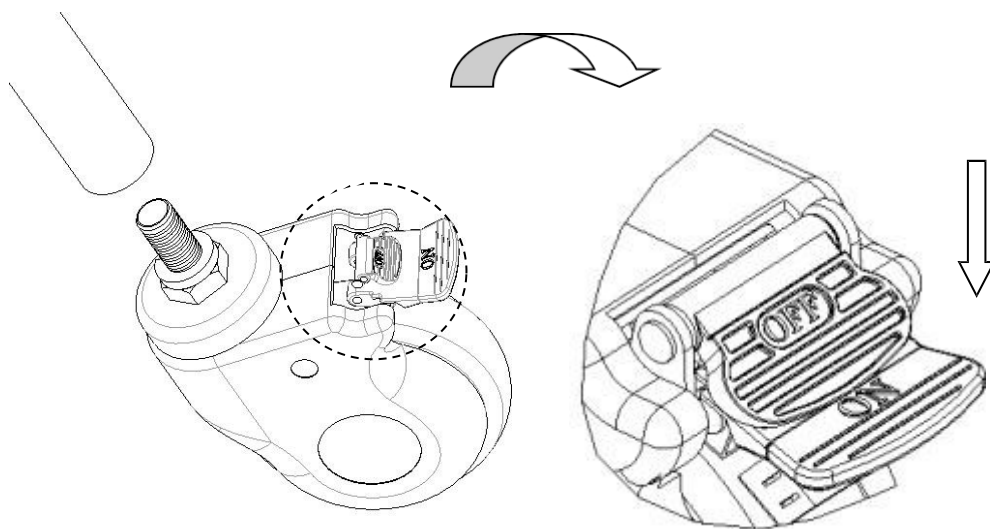

2.1 Método de utilização dos baldes

Gire o aro da quilha e coloque os baldes.

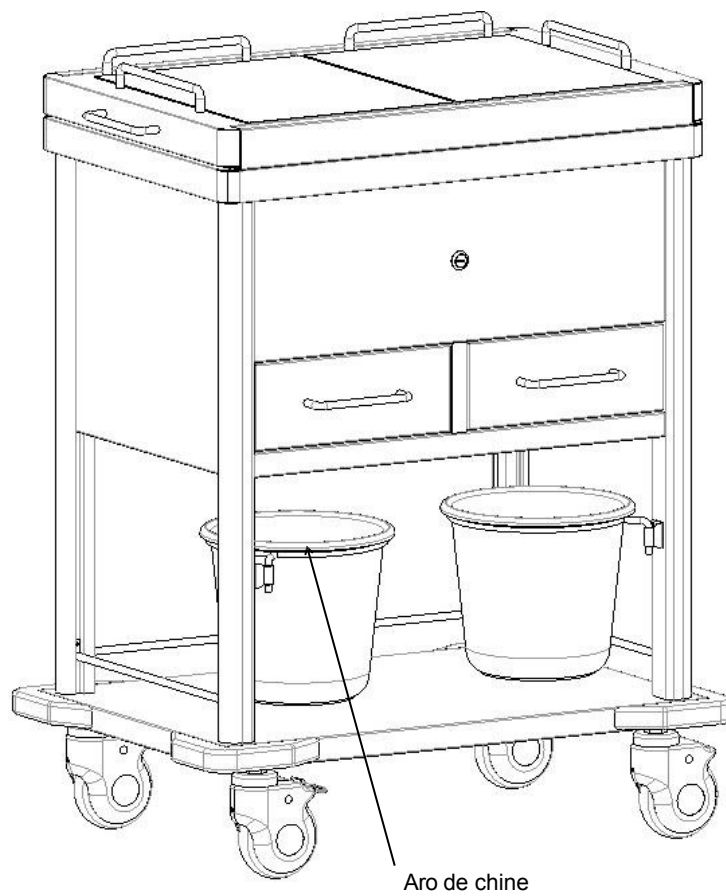

3. Falhas Exclusão d

Falhas comuns	Razões prováveis	Métodos de exclusão
Dificuldade em mover todo o carrinho	1. O rodízio está bloqueado sem soltar o travão 2. O rodízio está danificado	1. Solte o travão, verifique 2.1 2. Substitua o rodízio, verifique 1.2

4. Manutenção

1. Para utilizar o carrinho de tratamento com segurança, é necessário realizar inspeções de segurança regulares no carrinho de tratamento. Recomenda-se verificar a cada seis meses para garantir que as conexões não estejam soltas e que todas as operações estejam normais.

2. Quando a estrutura do carrinho de tratamento envelhece e atinge um determinado tempo de manutenção, as peças metálicas e plásticas da estrutura do carrinho de tratamento podem ser recicladas.

3. Evite riscar o painel com aparelhos de ângulo agudo ou facas durante o uso e limpe-o frequentemente para mantê-lo limpo e seco.

4. Se o painel for acidentalmente manchado, recomenda-se limpá-lo. Não utilize produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar o carrinho de tratamento, pois isso causará ferrugem na superfície de aço inoxidável.

5. Verifique regularmente os rodízios para evitar batidas ou sobrecargas, o que causará danos aos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a frenagem, pois isso causará danos ao sistema de freios.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detectado por inspeção visual. Alguns fios de tecido e outros acúmulos podem estar enrolados na roda. Remova os parafusos e porcas da roda, limpe os detritos e verifique se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser remontadas e utilizadas.

8. Para avaliar se o rodízio deve ser substituído de acordo com o tempo de uso e o desgaste, pode substituir as rodas e certificar-se de que os parafusos e porcas dos eixos estão bem apertados e conectados. Se possível, use arruelas de pressão ou contraporcas para ajudar nesse processo.

9. Para os rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização. Para um carrinho de tratamento equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez, o que lhe permitirá tentar empurrar o carrinho de tratamento e verificar se o desempenho do travão de cada rodízio está bom. Se a função do travão falhar devido ao desgaste ou danos nas rodas,

substitua imediatamente as rodas e volte a testar o sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travagem do rodízio estiver danificado e for necessário reparar ou substituir o travão, contacte o nosso departamento de assistência pós-venda ou um revendedor autorizado pela nossa empresa. Sempre que os travões forem substituídos, o desempenho dos travões dos rodízios deve ser testado novamente.

5. Embalagem, transporte e armazenamento

1. A embalagem do carrinho é feita de acordo com o contrato ou a norma do produto.
2. Evite pressas, vibrações violentas e proteja do sol e da chuva durante o transporte do carrinho.
3. O carrinho deve ser armazenado:
 - a) Temperatura ambiente: -40 °C ~ +70 °C.
 - b) Humidade relativa: ≤ 95%.
 - c) Pressão atmosférica: 500 hPa ~ 1060 hPa.

6. Serviço pós-venda

1. Guarde devidamente os documentos que acompanham o equipamento e as faturas deste produto, pois terá de os apresentar quando a empresa realizar a garantia e a manutenção do produto.
2. Se houver algum problema durante a utilização, contacte a nossa empresa atempadamente, para que possamos fornecer-lhe assistência técnica e serviços de manutenção precisos e rápidos em tempo útil.
3. A partir da data de venda, se o produto estiver avariado ou danificado devido à instalação e utilização corretas de acordo com as especificações, o produto terá um ano de garantia gratuita e serviço de manutenção vitalício com o «certificado» ou fatura.
4. A partir da data de compra, se estiver realmente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade dentro de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores uma reparação gratuita do produto.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO: SKRCT670-1 | REF.: 319-SKRCT670-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO /
MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd No. 35 Lehong
Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang
City,
Província de Jiangsu, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unidade 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, Países
Baixos



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,
46980, Paterna, Valência (Espanha)



LOTE: HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE AÇÕES: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com