



Manuel d'utilisa tion

SKR-ET085 Chariot d'urgence



Image à titre indicatif uniquement

1. Installation des roulettes

Alignez le boulon de la roue avec le trou de fixation situé sous le chariot, puis insérez la roue. Insérez la vis dans le trou de fixation et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.



1




2




3

2. Mode d'emploi des roulettes

Verrouillage de la roulette : après avoir poussé le chariot d'anesthésie à la position souhaitée, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic », comme illustré sur la figure ci-dessous.

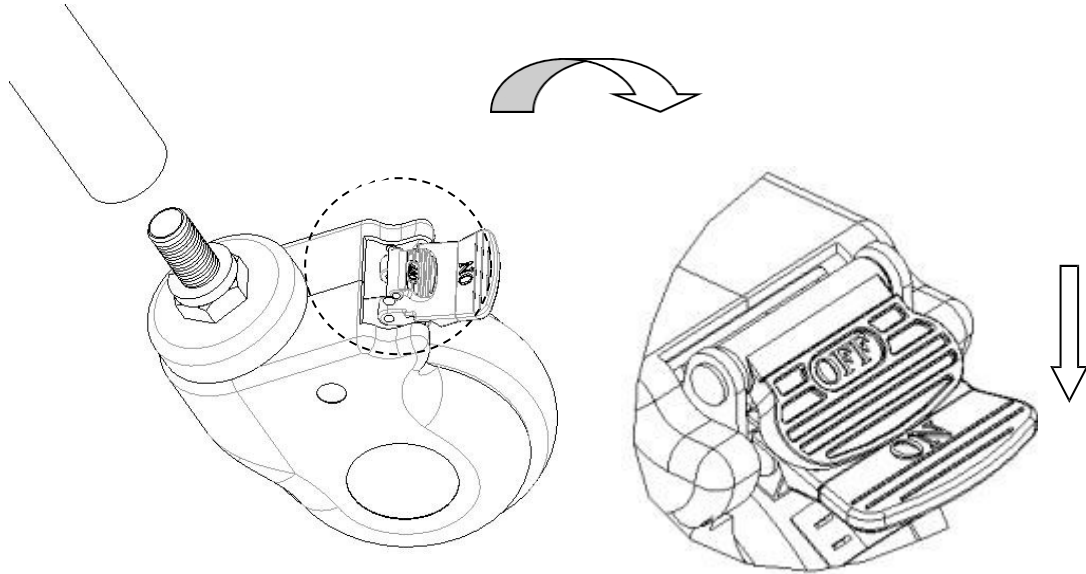

Déverrouillage de la roulette : appuyez sur le bouton OFF avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic ».

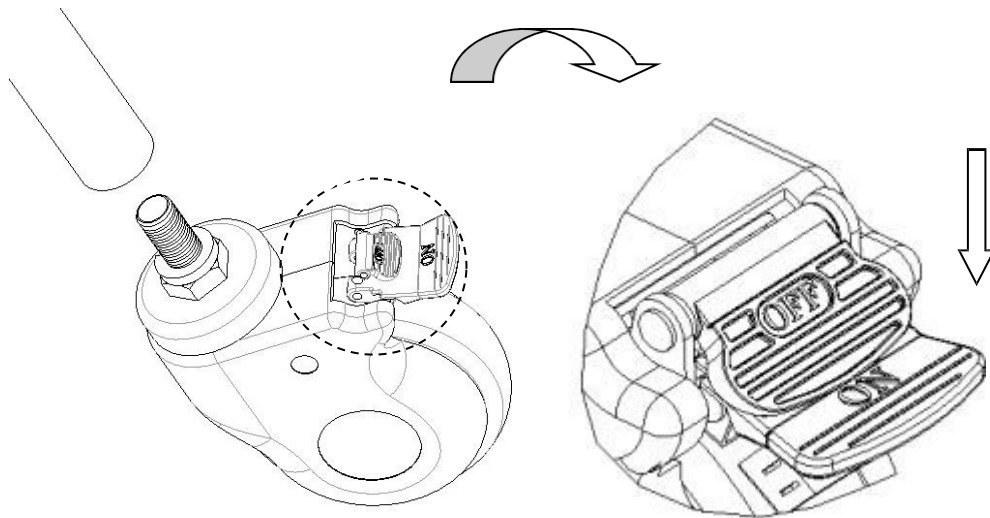

3. Dépannage

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes de dépannage
Difficile de déplacer le chariot dans son ensemble	1. La roulette est bloquée sans que le frein soit desserré 2. La roulette est endommagée	1. Desserrez le frein, vérifiez 2.1 2. Remplacer la roulette, voir 1.2

4. Entretien

1. Afin d'utiliser le chariot d'anesthésie en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer des contrôles de sécurité réguliers sur le chariot d'anesthésie. Il est recommandé de le vérifier tous les six mois pour s'assurer que les raccords ne sont pas desserrés et que toutes les fonctions sont normales.

2. Lorsque le châssis du chariot d'anesthésie est usé et qu'il atteint une certaine durée de service, les parties métalliques et les pièces en plastique du châssis peuvent être recyclées.

3. Évitez de rayer le panneau avec des objets pointus ou des couteaux pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour le garder propre et sec.

4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot d'anesthésie, car cela provoquerait la rouille de la surface en acier inoxydable.

5. Vérifiez régulièrement les roulettes pour éviter tout choc ou surcharge, ce qui pourrait les endommager.

6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, ce qui endommagerait le système de freinage.

7. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par un contrôle visuel. Des fils de filature et d'autres débris peuvent s'être enroulés autour de la roue ; retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, vous pouvez les remonter et les réutiliser.

8. Pour déterminer si la roulette doit être remplacée en fonction de son temps d'utilisation et de son usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien serrés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des écrous de blocage pour vous aider dans ce processus.

9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement si les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un chariot d'anesthésie équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le chariot d'anesthésie et de vérifier si le freinage de chaque roulette est efficace. Si le freinage ne fonctionne pas correctement en raison de l'usure ou d'un endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. À chaque remplacement des freins, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot est effectué conformément au contrat ou à la norme applicable au produit.
2. Évitez les chocs, les vibrations violentes et protégez le chariot du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le chariot doit être stocké :
 - a) Température ambiante : +5 °C à +40 °C.
 - b) Humidité relative : ≤ 85 %.
 - c) Pression atmosphérique : 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Service après-vente

1. Veuillez conserver soigneusement les documents fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez présenter ces documents lorsque la société effectuera des interventions de garantie et de maintenance sur le produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société sans tarder afin que nous puissions vous fournir rapidement une assistance technique et des services de maintenance adaptés.
3. À compter de la date d'achat, si le produit est cassé ou endommagé alors qu'il a été correctement installé et utilisé conformément aux spécifications, il bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service de maintenance à vie sur présentation du « certificat » ou de la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société assurera gratuitement la réparation du produit pour les utilisateurs.
5. Service à vie assuré par le fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-ET085 | REF.: 319-SKR-ET085

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO
SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIFB97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:





Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSIER : 870098



N° 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com