



Manual e d'uso

SKR-ET085 Carrello di emergenza

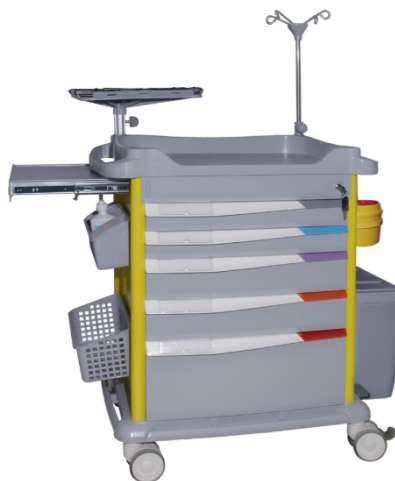


Immagine solo a scopo illustrativo

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE MAGAZZINO: 870098

1. Installazione delle rotelle

Allineare il bullone della ruota con il foro di montaggio sul fondo del carrello e inserire la ruota. Inserire la vite nel foro di montaggio e serrarla in senso orario.



1




2




3

2. Modalità d'uso delle rotelle

Bloccaggio delle rotelle: dopo aver spinto il carrello per anestesia nella posizione desiderata, premere il pulsante ON con il piede e bloccare la rotella quando si sente un “clic”, come mostrato nella figura sottostante.

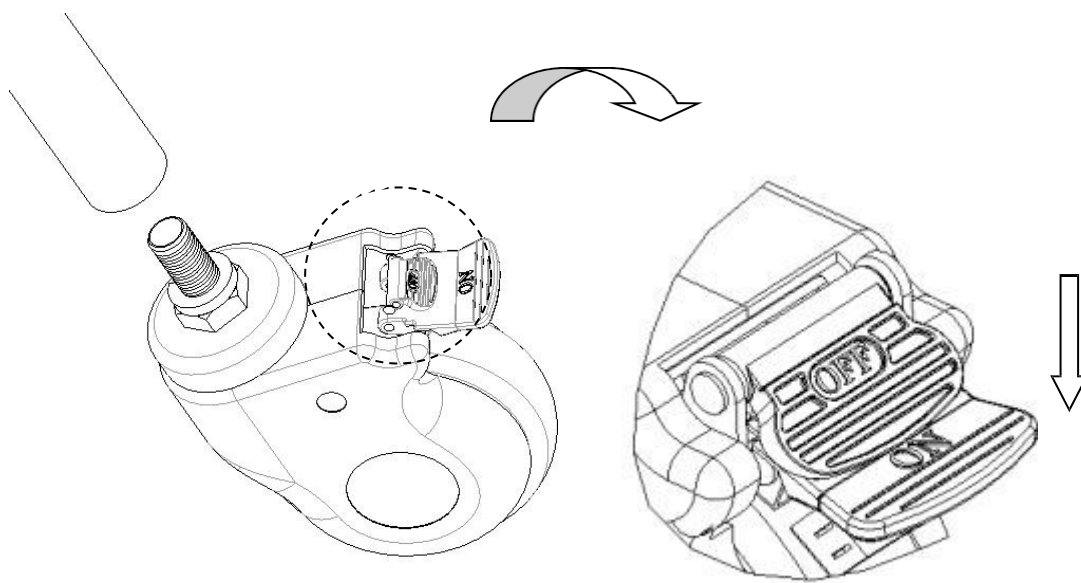

Sbloccare la rotella: premere il pulsante OFF con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un “clic”.

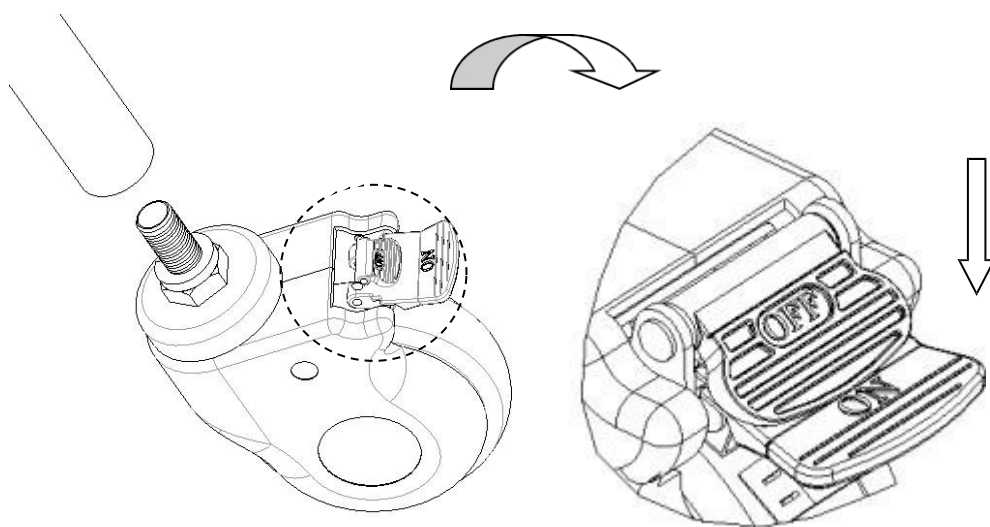

3. Risoluzione dei guasti

Guasti comuni	Probabili cause	Metodi di esclusione
È difficile spostare l'intero carrello	1. La rotella è bloccata senza che il freno sia stato rilasciato 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno, controllare 2.1 2. Sostituire la rotella, controllare 1.2

4. Manutenzione

1. Per utilizzare il carrello per anestesia in modo sicuro, è necessario eseguire ispezioni di sicurezza regolari sul carrello stesso. Si raccomanda di controllarlo ogni sei mesi per assicurarsi che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.

2. Quando il telaio del carrello per anestesia si usura e raggiunge un certo periodo di utilizzo, le parti metalliche e quelle in plastica del telaio possono essere riciclate.

3. Evitare di graffiare il pannello con utensili o coltelli affilati durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.

4. Se il pannello si macchia accidentalmente, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il carrello per anestesia, poiché ciò causerebbe la ruggine della superficie in acciaio inossidabile.

5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi, che potrebbero danneggiarle.

6. È vietato forzare le rotelle per frenare, poiché ciò causerebbe danni al sistema frenante.

7. L'usura della superficie dello pneumatico della ruota può essere rilevata tramite un'ispezione visiva. È possibile che alcuni filamenti di filo e altri detriti si siano avvolti attorno alla ruota; in tal caso, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e verificare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non presentano danni, è possibile rimontarle e riutilizzarle.

8. Valutando se la rotella deve essere sostituita in base al tempo di utilizzo e all'usura, è possibile sostituire le ruote e assicurarsi che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzare rondelle di sicurezza o dadi di bloccaggio per facilitare questa operazione.

9. Per le rotelle dotate di freni, è necessario verificare regolarmente se i freni funzionano correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Per un carrello per anestesia dotato di più ruote con freno, è possibile bloccare solo una ruota alla volta, il che consentirà di provare a spingere il carrello per anestesia e verificare se la prestazione di frenata di ciascuna ruota è buona. Se il funzionamento del freno non è corretto a causa dell'usura o di danni alle ruote, sostituire immediatamente le ruote e quindi testare nuovamente il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio post-vendita o un rivenditore autorizzato dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, è necessario verificare nuovamente il funzionamento dei freni delle rotelle.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello viene effettuato in conformità al contratto o alle norme relative al prodotto.
2. Durante il trasporto del carrello, evitare urti, vibrazioni violente ed esporre il prodotto alla luce solare e alla pioggia.
3. Il carrello deve essere conservato:
 - a) Temperatura ambiente: da +5 °C a +40 °C.
 - b) Umidità relativa: ≤ 85%.
 - c) Pressione atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Servizio post-vendita

1. Si prega di conservare accuratamente la documentazione fornita con la macchina e le fatture relative a questo prodotto; sarà necessario presentare tali documenti quando l'azienda effettuerà interventi in garanzia e di manutenzione sul prodotto.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, vi preghiamo di contattare tempestivamente la nostra azienda, in modo che possiamo fornirvi tempestivamente un'assistenza tecnica accurata e rapida e servizi di manutenzione.
3. A partire dalla data di vendita, se il prodotto si rompe o si danneggia nonostante sia stato installato e utilizzato correttamente secondo le specifiche, il prodotto godrà di un anno di garanzia gratuita e di un servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.
4. A partire dalla data di acquisto, se entro un anno il prodotto risulta effettivamente danneggiato o non funziona correttamente a causa di problemi di qualità, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Assistenza a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-ET085 | REF.: 319-SKR-ET085

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO
SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIFB97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:





Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE AZIONARIO: 870098



N. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com