



Manuel d'utilisation

SKR-MT606 Chariot à médicaments



Image à titre indicatif
uniquement

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSIER : 870098

1. Installation des roulettes

Alignez le boulon de la roue avec le trou de fixation situé au bas du chariot et insérez la roue. Insérez la vis dans le trou de fixation et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.



1




2




3

2. Mode d'emploi des roulettes

Verrouillez la roulette : après avoir poussé le chariot d'anesthésie à l'emplacement souhaité, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic », comme indiqué sur la figure ci-dessous.

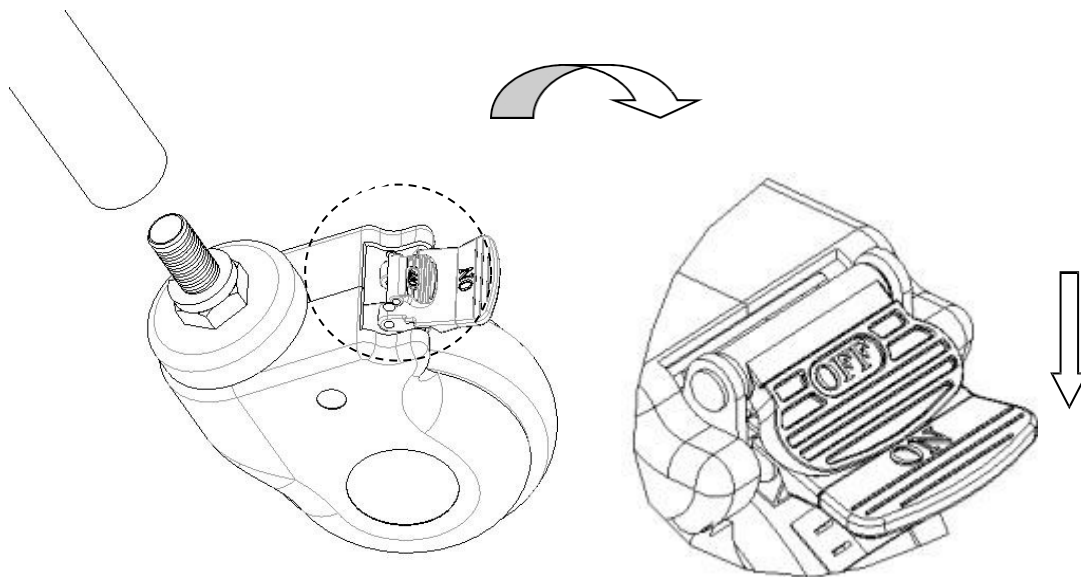

Déverrouillez la roulette : appuyez sur le bouton OFF avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic ».

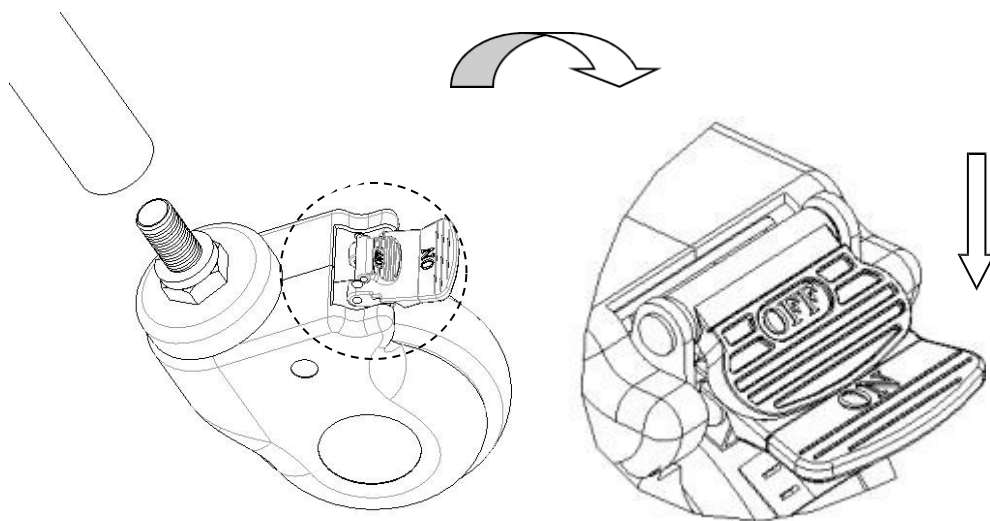

3.Élimination des défauts

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes d'exclusion
Difficulté à déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein soit desserré 2. La roulette est endommagée	1. Relâchez le frein, vérifiez 2.1 2. Remplacer la roulette, vérifier 1.2

4. Entretien

1.Afin d'utiliser le chariot d'anesthésie en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer régulièrement des contrôles de sécurité sur celui-ci. Il est recommandé de le vérifier tous les six mois afin de s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations sont normales.

2.Lorsque le châssis du chariot d'anesthésie vieillit et atteint une certaine durée de service, les parties métalliques et plastiques du châssis peuvent être recyclées.

3.Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angles vifs ou des couteaux pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour le garder propre et sec.

4.Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot d'anesthésie, car cela provoquerait la rouille de la surface en acier inoxydable.

5.Vérifiez régulièrement les roulettes pour éviter tout choc ou surcharge, qui pourraient les endommager.

6.Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, ce qui endommagerait le système de freinage.

7.L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par inspection visuelle. Des fils de filature et d'autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue. Retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et utilisées.

8.Pour déterminer si la roulette doit être remplacée en fonction de son temps d'utilisation et de son usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des contre-écrous pour vous aider dans ce processus.

9.Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement si les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un chariot d'anesthésie équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être verrouillée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le chariot d'anesthésie et de vérifier si le freinage de chaque roulette est efficace. Si le frein ne fonctionne pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le chariot de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le chariot doit être stocké dans les conditions suivantes :
 - a) Température ambiante : +5 °C à +40 °C.
 - b) Humidité relative : ≤ 85 %.
 - c) Pression atmosphérique : 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Service après-vente

1. Veuillez conserver soigneusement les documents fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez présenter ces documents lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les meilleurs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et des services de maintenance précis et rapides en temps opportun.
3. À compter de la date d'achat, si le produit est cassé ou endommagé alors qu'il a été correctement installé et utilisé conformément aux spécifications, il bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service de maintenance à vie sur présentation du « certificat » ou de la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-MT606 | REF.: 319-SKR-MT606

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

