



Manuale d'uso

SKR-CT625-1 Carrello medico



Immagine di riferimento

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098

1. Installazione delle rotelle

Allineare il bullone della ruota al foro di montaggio sul fondo del carrello e inserire la ruota. Inserire la vite nel foro di montaggio e serrarla in senso orario.



1




2




3

2. Metodo di utilizzo delle rotelle

Bloccare la rotella: Dopo aver spinto il carrello per anestesia nella posizione desiderata, premere il pulsante ON con il piede e bloccare la rotella quando si sente un "clic", come mostrato nella figura seguente.

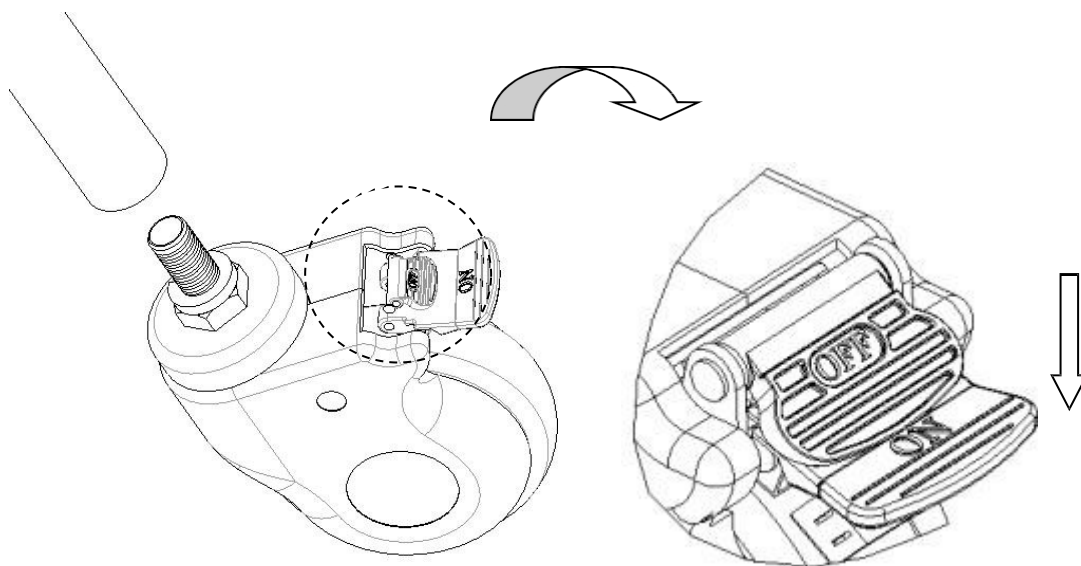

Sbloccare la ruota: Premere il pulsante OFF con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "clic".

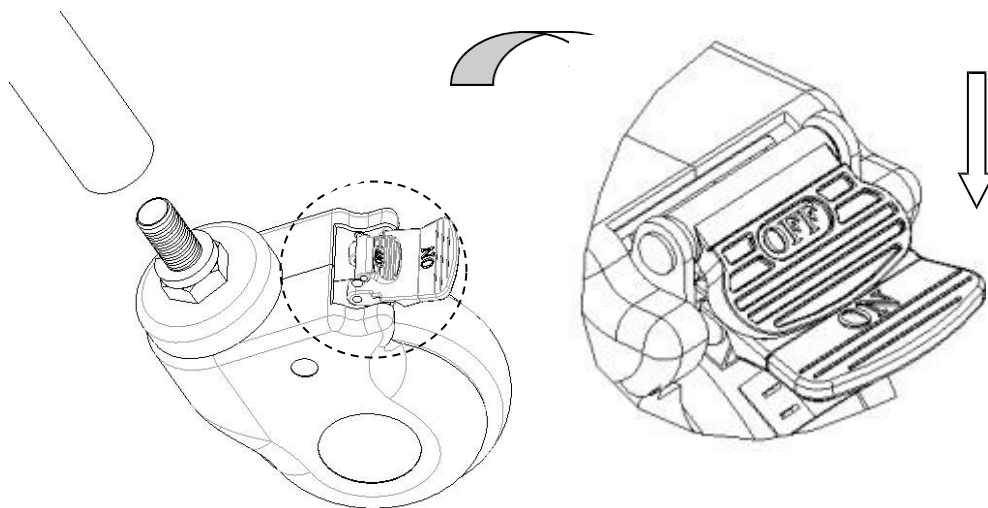

3. Esclusione dei guasti

Fallimenti comuni	Probabili ragioni	Metodi di esclusione
Difficile spostare l'intero carrello	1. La ruota dentata è bloccata senza rilasciare il freno 2. Il caster è danneggiato	1. Rilasciare il freno, controllare 2.1 2. Sostituire la rotella, controllare 1.2

4. Manutenzione

1. Per utilizzare il carrello per anestesia in modo sicuro, è necessario eseguire regolari ispezioni di sicurezza sul carrello per anestesia. Si raccomanda di controllarlo ogni sei mesi per verificare che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.

2. Quando il telaio del carrello per anestesia invecchia e raggiunge un certo tempo di manutenzione, la parte metallica del carrello per anestesia e le parti in plastica del telaio del carrello per anestesia possono essere riciclate.

3. Evitare di graffiare il pannello con apparecchi o coltelli ad angolo vivo durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.

4. Se il pannello è accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per la pulizia del carrello per anestesia, che causerebbero la formazione di ruggine sulla superficie in acciaio inox.

5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.

6. È vietato forzare le rotelle in fase di frenata, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'impianto frenante.

7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata con un'ispezione visiva. Alcuni fili filati e altri accumuli possono essere avvolti intorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.

8. Se la ruota è stata sostituita in base al tempo di utilizzo e all'usura, è possibile sostituire le ruote e assicurarsi che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzate rondelle o controdadi per aiutarvi in questa operazione.

9. Per le ruote dotate di freni, è necessario controllare regolarmente se i freni funzionano correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Nel caso di un carrello per anestesia dotato di più rotelle con freno, è possibile bloccare solo una rotella con freno alla volta, il che consente di provare a spingere il carrello per anestesia e di verificare se le prestazioni dei freni di ciascuna rotella sono buone. Se il funzionamento del freno non funziona a causa dell'usura o di danni alle ruote, sostituire immediatamente le ruote e quindi testare nuovamente il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della ruota è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore autorizzato fornito dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, le prestazioni dei freni delle ruote devono essere nuovamente testate.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello viene eseguito in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Durante il trasporto del carrello, evitare di sottoporlo a vibrazioni violente e di esporlo alla luce del sole e alla pioggia.
3. Il carrello deve essere riposto:
 - a) Temperatura ambiente: +5°C ~ +40°C.
 - b) Umidità relativa: ≤ 85%.
 - c) Pressione atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Servizio post-vendita

1. Si prega di conservare correttamente i file forniti con la macchina e le fatture di questo prodotto, che devono essere presentati quando l'azienda esegue la garanzia e la manutenzione del prodotto.
2. In caso di problemi durante il processo di utilizzo, si prega di contattare la nostra azienda in tempo, in modo che la nostra azienda possa fornire un supporto tecnico accurato e veloce e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. A partire dalla data di vendita, se il prodotto è rotto o danneggiato a causa della corretta installazione e dell'uso secondo le specifiche, il prodotto godrà di una garanzia gratuita di un anno e di un servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.
4. Dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Servizio a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SKR-CT625-1 | REF.: 319-SKR-CT625-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia(Spain)



LOT:

