



Manuel d'utilisation

SKR-CT750-1 Chariot médical



Image à titre indicatif uniquement

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE DE STOCK : 870098

1. Installation des roulettes

Alignez le boulon de la roue avec le trou de fixation situé au bas du chariot, puis insérez la roue. Insérez la vis dans le trou de fixation et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.



1




2




3

2. Mode d'emploi des roulettes

Verrouillage des roulettes : après avoir poussé le chariot d'anesthésie à la position souhaitée, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic », comme indiqué sur la figure ci-dessous.

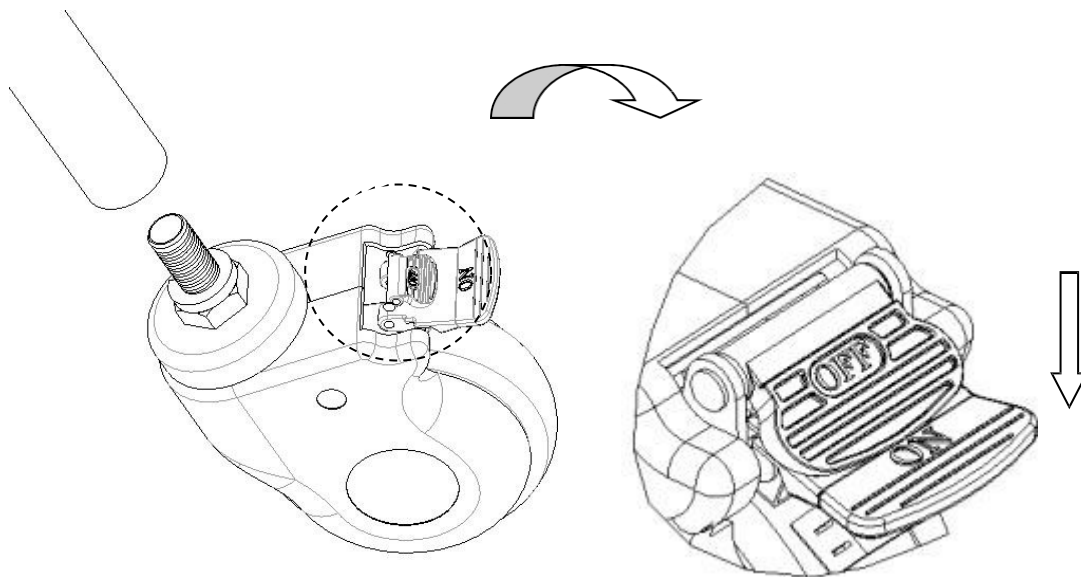

Déverrouillage de la roulette : appuyez sur le bouton OFF avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic ».

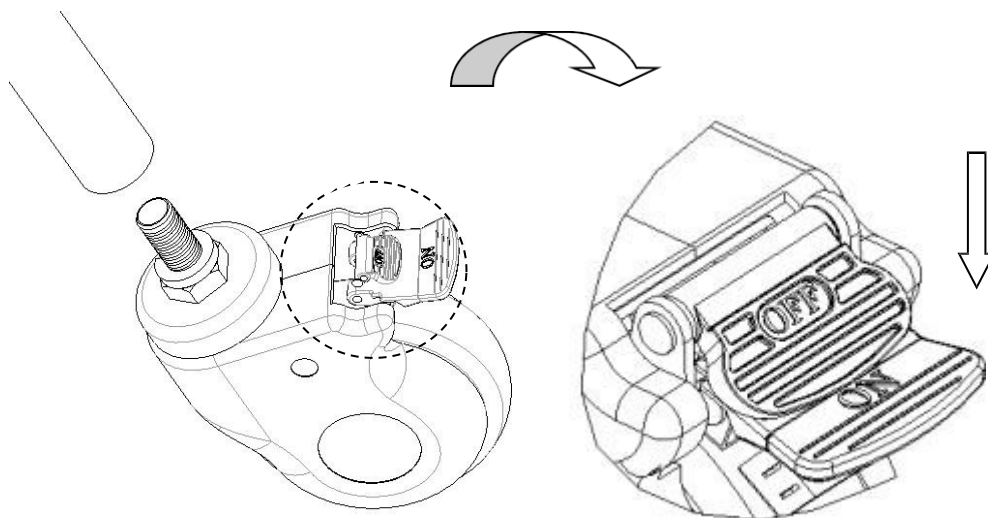

3. Dépannage

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes d'exclusion
Difficulté à déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein ait été desserré 2. La roulette est endommagée	1. Desserrez le frein, vérifiez 2.1 2. Remplacer la roulette, vérifiez 1.2

4. Entretien

1. Afin d'utiliser le chariot d'anesthésie en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer régulièrement des contrôles de sécurité sur celui-ci. Il est recommandé de le vérifier tous les six mois afin de s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations fonctionnent normalement.

2. Lorsque le châssis du chariot d'anesthésie vieillit et atteint une certaine durée d'utilisation, les pièces métalliques et les pièces en plastique du chariot d'anesthésie peuvent être recyclées.

3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils ou des couteaux à angles vifs pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour le garder propre et sec.

4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot d'anesthésie, car cela pourrait provoquer la rouille de la surface en acier inoxydable.

5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter tout choc ou surcharge, qui pourraient les endommager.

6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, car cela pourrait endommager le système de freinage.

7. L'usure de la surface des pneus peut être détectée par un contrôle visuel. Des fils et autres accumulations peuvent s'enrouler autour des roues. Retirez les boulons et les écrous des roues, nettoyez les débris et vérifiez si les roulements sont endommagés. Si les pièces ne sont pas endommagées, vous pouvez les remonter et les réutiliser.

8. Pour déterminer si la roulette doit être remplacée en fonction de son temps d'utilisation et de son état d'usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des axes sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des écrous de blocage pour vous aider dans cette opération.

9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement que les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un chariot d'anesthésie équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le chariot d'anesthésie. Vérifiez également

Vérifiez si le freinage de chaque roulette est efficace. Si le frein ne fonctionne pas correctement en raison de l'usure ou d'un dommage sur les roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le chariot de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le chariot doit être stocké :
 - a) Température ambiante : +5 °C ~ +40 °C .
 - b) Humidité relative : ≤ 85 %.
 - c) Pression atmosphérique : 70 kPa~ 106 kPa.

6. Service après-vente

1. Veuillez conserver soigneusement les fichiers fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez présenter ces documents lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les plus brefs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et un service de maintenance précis et rapides.
3. À compter de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé en raison d'une installation et d'une utilisation correctes conformément aux spécifications, il bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service de maintenance à vie avec le « certificat » ou la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-CT750-1 | REF.: 319-SKRCT750-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CI B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com