



Manuale utente

SKR-CT750-1 Carrello medico



immagine solo a scopo illustrativo

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE ARTICOLO: 870098

1. Installazione delle rotelle

Allineare il bullone della ruota con il foro di montaggio sul fondo del carrello e inserire la ruota. Inserire la vite nel foro di montaggio e serrare la vite in senso orario.



1




2




3

2. Modalità d'uso delle ruote

Bloccare la rotella: dopo aver spinto il carrello per anestesia nella posizione desiderata, premere il pulsante ON con il piede e bloccare la rotella quando si sente un "clic", come mostrato nella figura sottostante.

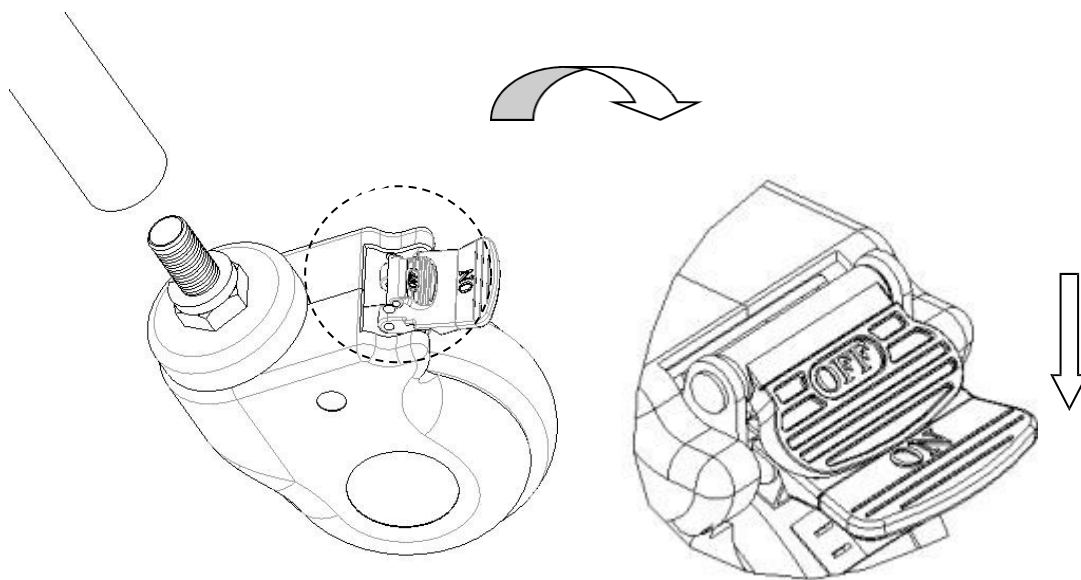

Sbloccare la rotella: premere il pulsante OFF con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "clic".

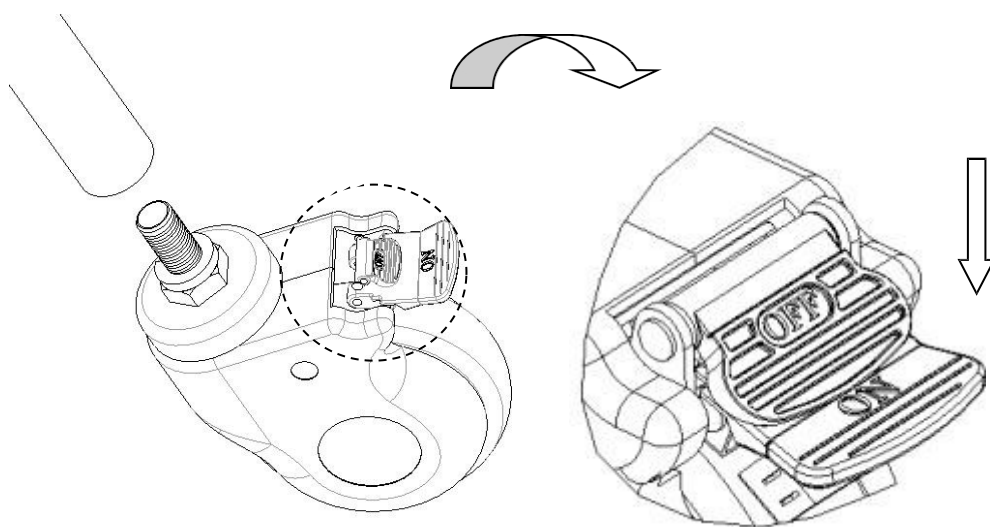

3. Esclusione dei guasti

Guasti comuni	Probabili cause	Metodi di esclusione
Difficoltà nel muovere l'intero carrello	1. La rotella è bloccata senza aver rilasciato il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno, controllare 2.1 2. Sostituire la rotella, controllare 1.2

4. Manutenzione

1. Per utilizzare il carrello per anestesia in modo sicuro, è necessario eseguire regolari controlli di sicurezza sul carrello stesso. Si consiglia di controllarlo ogni sei mesi per assicurarsi che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.

2. Quando il telaio del carrello per anestesia è usurato e raggiunge un determinato periodo di manutenzione, è possibile riciclare le parti metalliche e quelle in plastica del telaio.

3. Evitare di graffiare il pannello con oggetti appuntiti o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.

4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il carrello per anestesia, poiché potrebbero causare la ruggine della superficie in acciaio inossidabile.

5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi, che potrebbero danneggiarle.

6. È vietato forzare le ruote durante la frenata, poiché ciò potrebbe danneggiare il sistema frenante.

7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata mediante ispezione visiva. Alcuni fili di filo ritorto e altri accumuli possono avvolgersi attorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.

8. Per valutare se la rotella deve essere sostituita in base al tempo di utilizzo e all'usura, è possibile sostituire le ruote e assicurarsi che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzare rondelle di bloccaggio o dadi di bloccaggio per facilitare questa operazione.

9. Per le rotelle dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Per un carrello per anestesia dotato di più rotelle con freno, è possibile bloccare solo una rotella alla volta, il che consente di provare a spingere il carrello per anestesia e controllare anche

Verificare che il funzionamento dei freni di ciascuna rotella sia corretto. Se il funzionamento dei freni non è corretto a causa dell'usura o del danneggiamento delle ruote, sostituire immediatamente le ruote e quindi ripetere il test del sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio post-vendita o un rivenditore autorizzato dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, è necessario verificare nuovamente il funzionamento dei freni delle rotelle.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Evitare di trasportare il carrello in modo affrettato, sottoponendolo a vibrazioni violente, ed evitare l'esposizione alla luce solare e alla pioggia durante il trasporto.
3. Il carrello deve essere conservato:
 - a) Temperatura ambiente: +5 °C ~ +40 °C .
 - b) Umidità relativa: ≤ 85%.
 - c) Pressione atmosferica: 70 kPa~ 106 kPa.

6. Assistenza post-vendita

1. Conservare accuratamente i documenti forniti con la macchina e le fatture relative al prodotto, che dovranno essere presentati alla nostra azienda in caso di intervento in garanzia o di manutenzione del prodotto.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, contattare tempestivamente la nostra azienda, in modo che possa fornire un'assistenza tecnica e un servizio di manutenzione accurati e rapidi.
3. A partire dalla data di vendita, se il prodotto è rotto o danneggiato a causa di un'installazione e un utilizzo corretti secondo le specifiche, il prodotto godrà di un anno di garanzia gratuita e di un servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.
4. A partire dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Assistenza a vita dal produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD




MODEL:SKR-CT750-1 | REF.: 319-SKRCT750-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China

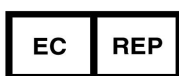

SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CI B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com